

Etac manuelle rullestoler

Instruksjon for gjenbruk

 **etac**[®]

75666.19 2026-06-24

CE



Gjenbruk

Etacs rullestoler kan gjenbrukes gjennom hele levetiden.

Se gjeldende levetid i bruksanvisningen for den aktuelle rullestolen på www.etac.com.

Rengjøring

- Rengjør chassiset med en av følgende metoder:
 - Et ikke-slipende rengjøringsmiddel med en pH-verdi mellom 5 og 9
 - 70 % alkoholbasert overflatedesinfeksjonsmiddel med rengjørings-effekt (tensid)
 - Klorbasert produkt med et innhold tilsvarende 1000 ppm (kan forårsake misfarging)
- Skyll og tørk.
- Rengjør hjulene for hår og avleiringer osv.
 - Rullestolens chassis og fastmonterte trekk samt tilbehør uten tekstiltrekk kan vaskes i maskin eller vaskekabinett. Avtakbare tekstiler, f.eks. ryggtrekk, samt tilbehør med tekstiltrekk vaskes i henhold til separate instruksjoner.
 - Anbefales vasket ved 65 °C i opptil 10 minutter.
 - Varmedesinfeksjon tilsvarende A0-verdi 60 er mulig ved vask ved:
 1. 70 °C i 10 minutter
 2. 75 °C i 3 minutter
 3. 80 °C i 1 minutt

Anodiserte overflater kan bli påvirket.

- Ved vask i kabinettedesinfektor:
 - Rullestoler med kryssramme skal foldes sammen og stå på alle fire hjulene.
 - Stoler med fast ramme skal stå på alle fire hjulene med ryggchassiset oppfelt.
 - Benstøtten skal demonteres (kan imidlertid vaskes sammen med stolen).
 - Batteripakke, kontrollboks og aktuator (Etac Prio med el tilt) skal demonteres.
 - Ikke spyl med høytrykksvasker direkte på lagre (fig. 1).
 - Ikke spyl med høytrykksspyler på trekket fra nært hold.
 - Ikke bruk høytrykksspyler på elektriske komponenter (Etac Prio med el tilt).
 - Elektriske komponenter (Etac Prio med el tilt) kan rengjøres med børste og vann. Maks. temp. 20 °C. Interne kabler må være tilkoblet. Trekk aktuatoren tilbake til innerste posisjon slik at stempelstangen ikke avfettes. Sterke løsemidler eller alkaliske væsker må ikke brukes.
 - Fjern pålimte merker og lapper. Etacs merking skal imidlertid beholdes.
 - Tekstiler skal vaskes i henhold til separat merking på tekstilet. Skum skal vaskes i henhold til merkingen på skummet. Hvis det ikke finnes noen merking, skal delen ikke vaskes, men skiftes ut ved behov.

Tørking

- Rullestolens chassis og fastmonterte trekk samt tilbehør uten tekstiltrekk kan tørkes i vaskekabinett ved:
 1. 70 °C i opptil 10 min.
 2. 80 °C i opptil 2 min.
 3. 85 °C i opptil 30 sek.
- Tekstiler som ikke kan tørkes i tørketrommel, kan tørkes i tørkeskap ved 50 °C i opptil 10 min.
- Rullestolen skal stå på alle fire hjul i utfelt stilling under tørking (fig. 2). Etac Prio vipres bakover (fig. 3).

Sjekk for ødelagte og slitte deler

Deler som er skjeve, deformerte eller har sprekker eller rustskader, må skiftes ut.

Deler som er slitte og har nedsatt funksjon bør skiftes ut.

Mindre lakkskader kan repareres med reparasjonslakk.

Etac anbefaler at det kun brukes originaldeler. Etacs originaldeler er testet sammen med produktet for tiltenkt bruk og har gjennomgått foreskrevne testmetoder.

Soner med høy belastning skal sjekkes nøye:

- Ryggfeste (fig. 4).
- Kryssdel på rullestoler med kryssramme (fig. 5).

Kontroll og justering av funksjoner

Kontroller og juster slik at følgende fungerer i henhold til tiltenkt bruk:

Alle justeringer og innstillinger skal utføres i henhold til rullestolens håndbok, som blant annet inneholder rullestolens feilsøkings skjema, som kan være til hjelp ved identifisering av eventuelle feil og tiltak. Den nyeste dokumentasjonen finnes på www.etac.com.

Kontroller:

- at sammenfelling og tiltfunksjoner som kryssfelling eller setevin- kel/ryggvinkel fungerer uhindret. På Etac Prio skal gass-/låsesylind- deren for rygg og setevinkel kontrolleres. Låsing og frigjøring skal fungere, kan stilles inn med justeringsskruen.
- benstøtte: Eventuell låsefunksjon skal låse korrekt. Kontroller også at benstøtten kan felles ned og svinges.
- bakhjul: Lufttrykket i dekkene og at quick release-låsen låser riktig.
- svinghjul: Skal rotere uhindret uten at lagrene setter seg fast (fig. 6).
- forgaffel: Skal rotere uhindret uten at lagrene setter seg fast (fig. 7).
- at holken på kjørehåndtaket sitter fast (fig. 8).
- låsefunksjonen i festet til kjørehåndtaket og at festet er helt og uten sprekker. (fig. 9).
- brukerbremse/ledsagerbremse: Bremsfunksjon og låsefunksjon.
- tippesikring: Høyde, låse- felle- dreiefunksjon, slitasje/skarpe kanter.
- at rullestolen kjører rett. Hvis rullestolen trekker skjevt, må høyden og vinkelen på svinghjulfestet justeres, og hjullagrene og lufttryk- ket må kontrolleres. På Xact kan ikke svinghjulfestet justeres. Hvis stolen trekker skjevt, må hjullagrene og lufttrykket i svinghjulene kontrolleres.
- at skruer og muttere er strammet. På rullestoler med gass-/ låsesylinder må også disse festene kontrolleres.
- at drivringene og eikebeskytterne ikke har grader eller skarpe kanter.
- Sørg for at bruksanvisningen og alle Etacs etiketter følger med ved utlevering til ny bruker.
- Vær oppmerksom på at produktets levetid er begrenset (se bruks- anvisningen). Dette er spesielt viktig ved utlevering til brukere som kan forventes å bruke produktet over lengre tid.

Instruksjoner for kassering av utrangerte rullestoler

Etac anbefaler at utrangerte rullestoler kasseres i samråd med kommunen og/eller et lokalt gjenvinningsselskap. De kan levere egnede beholdere for materialene som rullestolen inneholder. Ved fragmentering bør brennbare materialer som trekk fjernes før hele produktet leveres til et fragmenteringsanlegg.



