

Kombinera/Kaskad



Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

Tvätt och rengöringsinstruktioner återfinns på produkten alternativt i manualen.

Rengöringsinstruktioner:

Produkterna skall rengöras med konventionella rengöringsmedel utan slipmedel. De skall rengöras regelbundet. Produkterna kan rengöras maskinellt i 85° i maximalt 3 minuter och även torkas maskinellt i 70° i 10 min. Vid rengöring i diskabinett skall produkten vara fixerad och placeras upprätt.

Underhåll/kontroll:

Produkterna bör ses över regelbundet, minst 1 gång per år. Man bör kontrollera att produktens delar är hela och funktionsdugliga.

Vid rekonditionering bör följande kontrolleras:

1. Att doppskor är i dugligt skick.

Doppskorna skall vara mjuka, hela och funktionsdugliga för att produkten ska stå stadigt och säkert mot underlaget. Dessa detaljer är säkerhetsdetaljer så kontrollen bör vara noggrann och vid tveksamheter skall detaljer bytas.

2. Att stativet inte blivit skevt eller utsatts för åverkan.

Kontrollera att benen står symmetriskt mot golvet och inte blivit skeva.

3. Att plastdetaljer inte har sprickbildningar.

Kontrollera att alla plastdetaljer är intakta.

4. Att teleskopbenens clips fungerar på avsett sätt

Kontrollera att clipsen är hela och att de snäpper ordentligt kring röret.

5. Att den ställbara foten är hel och har avsedd funktion.

Kontrollera att foten till det ställbara benet inte har sprickbildningar.

Kontrollera att den går att skruva för att justera höjden.

78239F

2016-02-12

Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com