


Clean Hrb

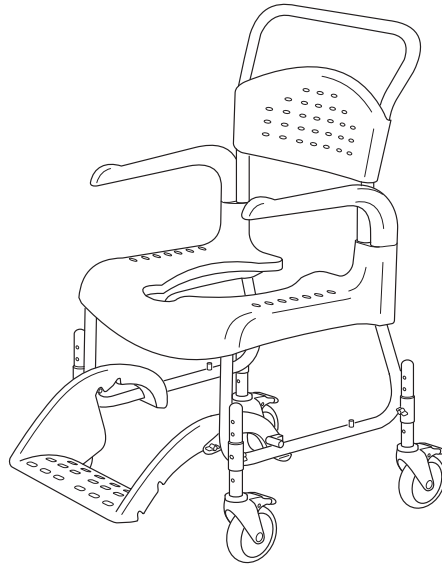

Reservdelar kan beställas enligt separat reservdelslista för Clean HRB. Tvätt- och rengöringsinstruktioner av produkten återfinns på produkten alternativt i produktkatalogen. Vid rengöring av chassit i diskabinett skall produkten stå fixerad och placeras upprätt med låsta hjul. Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

Kontrollera och justera enligt följande:

- 1) **Att justeringen för höjd och fotstöd går lätt.**
Om funktionen ej är tillfredsställande:
 - Att tapp och vingmutter för fotstöden går lätt.
 - Att skruv/vingmutter för höjjustering går lätt.
- 2) **Att hjulen fungerar på avsett vis.**
 - Att låsfunktionen fungerar
 - Att hjulen låser tillfredsställande. Hjulen skall inte kunna rulla i låst läge.
 - Att stolen rullar tillfredsställande.
- 3) **Att produkten är hopsatt på ett riktigt sätt.**
 - Att produkten och eventuella tillbehör är monterade på ett riktigt sätt enligt monteringsanvisning
 - Att alla skruvar är åtdragna.
- 4) **Att löstagbara detaljer är i dugligt skick och är Etac:s originalprodukter.**
 - Att armstöden går att ta av.
 - Att armstöden går att låsa i användarläge.
 - Att fotplattan kan skjutas in under stolen.
- 5) **Att armstödsfästena är hela.**
Belasta armstöden med handkraft på olika sätt för att se om armstöd och fästena är hela.
Gör sedan en funktionskontroll.

Vit förbättringsfärg finns att köpa från Etac för att bättra på små lackskador.

Art nr 84005052

78382C

2016-02-12

Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com