

R82 Flamingo High-low

Rekonditioneringsanvisning

2019-11-26



Detalj	Kontroll	Åtgärd
Hjul	Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast i underredet. Kontrollera att sprickor inte finns samt att hjulen är i dugligt skick.	Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som är defekta.
Dynor	Att dynor inte har skador och är i dugligt skick.	Byt vid behov ut dynor.
Bromsar	Kontrollera att bromsarna är väl rengjorda och fungerar med avsedd effekt.	Rengör bromsar från hår och ev. tvålrester. Byt vid behov ut hjul med broms.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar fungerar normalt och att de är korrekt monterade.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar. Olja de svängbara delarna. Vi rekommenderar att du använder ett professionellt system för smörjning, t.ex. Veidec Dry Lube.
Rengöring		Produkten kan desinficeras med en 70 % isopropanollösning. Vi rekommenderar att man använder en trasa som doppats i varmt vatten med mildt rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att torka bort skräp och smuts. Låt torka före desinficering.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Reparera eller byt ut eventuella skadade eller utslitna delar. Se till att alla fästen sitter där de ska och har monterats på rätt sätt. Kontrollera att inga fästen och spännen är utslitna.
Vid tvätt och tork i diskabinett		Denna produkt kan tvättas i • 60°C i 10 minuter • 85°C i 3 minuter med ett mildt tvättmedel i en tvättmaskin avsedd för medicintekniska produkter. Använd maskinens torkningsfunktion för att torka produkten. Rengör tillbehör separat.

Färgkod: Vit= RAL 9010

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.