

Tumble Forms 2

Användar– och Skötselinstruktion

etac®

2017-04-07



Innehåll

1. Inledning	3
2. Användar- och Skötselinstruktioner	3
3. Lukt från nya dynor	3
4. Variationer i utseende	3
5. Ventilationshål	3
6. Använd inte i vatten	4
7. Utomhusbruk	4
8. Rengöring	4

1. Inledning

Grattis!

Du har precis köpt en av dagens mest revolutionerande produkter, avsedd för personer med särskilda behov. Tumble Forms kombinerar innovativ och tilltalande design med teknikintensiv tillverkning för hög hållbarhet. Dessutom ger Tumble Forms unika sömlösa yta det ultimata fuktskyddet.

Läs igenom användar- och skötselinstruktioner före användning, så kan du njuta maximalt av Tumble Forms.

2. Användar- och Skötselinstruktioner

Tumble Forms produkter med moduler och anpassningsbara positioneringshjälpmedel har utvecklats speciellt för terapeuter och lärare som arbetar med att möta behov hos personer med neurologiska funktionshinder. De kombinerar terapeutisk design med hållbarhet och färg för att hjälpa till att lösa problemen med positionering och underhåll av enskilda med särskilda behov.

Tillverkas av mjuka, flexibla men tuffa material, modulenheterna har exceptionell motståndskraft mot revor och nötning. Vid normal skötsel och underhåll kommer Tumble Forms fungera i många år.

3. Lukt från nya dynor

Restlukter från tillverkningsprocessen kan dröja sig kvar i skummet och i cellstrukturen. Detta kommer att försvinna efter några dagars användning, då frisk luft ersätter luften inuti när kudden trycks ihop vid användning.

4. Variationer i utseende

Det kan förekomma små skillnader i utseendet på den skyddande ytan, detta på grund av den unika handgjorda tillverkningsprocessen av Tumble Forms. Vad som kan verka vara små kratrar är inget fel, utan beror på variationer i de atmosfäriska förhållandena under tillverkningsprocessen. Detta påverkar på inget sätt hållbarheten eller fuktmotståndet på produkten.

5. Ventilationshål

Varje Tumble Forms har åtminstone ett ventilationshål. Detta har värme stansats genom ytskiktet och är nödvändigt för att lufttrycket i skummet ska utjämnas med atmosfärstrycket. Eftersom temperaturförändringar och därmed atmosfäriska tryckförändringar kan uppstå under transport, bibehåller dessa ventiler den rätta formen och elasticiteten hos din Tumble Forms.

6. Använd inte i vatten

Tumble Forms är inte vatten leksaker. De är utformade för att ta in och ut luft, som en kudde. Vatten kommer naturligtvis också att sugas upp (som i en svamp) genom ventilationshålet om dynorna sänks ner i vatten.

7. Utomhusbruk

Tumble Forms är avsedda att användas inomhus. Men om den används utomhus, bör försiktighet iaktas för att inte låta den bli blöt. Om produkten av misstag absorberar vatten genom ventilationshålen kan man få den torr genom att trycka och pressa den. Eventuell kvarvarande fukt försvinner efter några dagar genom utbyte av torr luft genom ventilationshålen

8. Rengöring

Tumble Forms yta kan rengöras med vanliga hushålls rengöringsmedel eller flytande allrengöringsmedel. Märkning med spritpenna eller kulspetspenna kan inte tas bort. Men icke-permanent bläck, vax, krita, olja, fett och smuts kan skrubbas och torkas av med en ren fuktig trasa. (Blöt inte produkten – den kommer att vattenfyllas).