

Rekonditionering – Rengöring



2021-02-11



Kontrollera regelbundet produkten, helst inför varje användningstillfälle.
Reparera aldrig själv en produkt. En defekt produkt får inte användas.



Rhombo-Fill

Små rombiska polyuretanstavar med mycket hög elasticitet.



Rhombo-Med

Elastiska bolsterpärlor samt små rombiska polyuretanstavar med mycket hög elasticitet.

Positioneringskuddar

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Tvätta i max 95°C Torktumla i max 70°C.

Använd inte sköljmedel och klorin.



Använd ej sköljmedel

Hygienöverdrag

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Tvätta i max 95°C Torktumla i max 70°C.

Använd inte sköljmedel och klorin.

Hygienöverdrag



Använd ej sköljmedel

Bomull/finjersey överdrag

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Tvätta i max 95°C Torktumla i max 70°C.

Använd inte sköljmedel och klorin.



Använd ej sköljmedel

Förväntad livslängd

Produkten har en förväntad livslängd på 1–5 år vid normal användning. Livslängden på produkten varierar beroende på användningsfrekvens, material, belastning samt hur ofta den tvättas.

Vid tvätt i högsta temperatur sker en snabbare förslitning av materialet.