

Detalj	Kontroll	Åtgärd
Allmän kontroll	Kontrollera och justera följande enligt avsedd användning: <ul style="list-style-type: none">- Stötdämpning.- Produktens muttrar och bultar är åtdragna.- Kontrollera beslag och spännen med avseende på tecken på slitage.- Inspektera enheten och alla dess tillbehör och byt ut slitna delar före användning.- Kontrollera att länkhjulen fungerar och är säkrade.- Kontrollera att fotstöden sitter fast ordentligt.- Alla etiketter på enheten är hela.	Reparera eller byt ut skadade eller utslitna delar.
Underhåll	Rekommendation före varje användningstillfälle	Torka bort eventuella rester och smuts från produkten med en trasa fuktad med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel/tvål utan klorin och låt torka före användning. Utför en visuell kontroll med avseende på skadade eller slitna delar.
Rengöring		Huvudenhets Denna produkt kan tvättas i 60 °C med ett mildt rengöringsmedel i 10 minuter i en tvättmaskin avsedd för medicintekniska produkter. Använd maskinens torkfunktion för att torka enheten. Demontera alla tillbehör och tvätta dem separat. Luta/rotera produkten efter tvätt för att vatten lättare ska dränera från produktens insida. Tyg och överdrag Överdraget kan tvättas i 60 °C med ett mildt tvättmedel i tvättmaskin. Separera skumdelen från överdraget före tvätt. Skumdelar Skumdelarna bör inte tvättas.
Handtvätt		Enheten och dess tillbehör kan även rengöras för hand. Använd varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel/tvål utan klorin och låt alla delar torka före användning.
Desinfektion		Enheten kan desinficeras med en 70 procentig IPA lösning. Vi rekommenderar att du torkar bort eventuella rester och smuts från enheten med en trasa med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel/tvål utan klorin och låter den torka innan du desinficerar den.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.

