



Detalj	Kontroll / Åtgärd
Rörliga delar	Vårdaren ska vid behov kontrollera och olja in de svängbara delarna – använd en smörjande olja.
Hjul	Vid behov ska du med en torr trasa torka bort smuts från hjulen. Använd inga rengöringsmedel som innehåller klorin.
Chassi	Cricket bör ses över regelbundet och kontrolleras så att inte sprickor uppstått eller att skruvförband gått upp. Det är viktigt för vagnens hållbarhet att hålla chassit rent.
Klädsel	Cricketets sittdyna är avtagbar och kan tvättas i max 60 °C (R82 rekommenderar att klädseln tvättas i 40°). Sittdynan droptorkas. Vi rekommenderar att du rengör sittdynan regelbundet med en fuktig trasa.
Lås	Kontrollera regelbundet att låsen klickar på plats och att hålen inte fylls med olja eller smuts.
Tillbehör	Alla ändringar eller monteringar av tillbehör som inte finns beskrivna i manual/ monteringsanvisning måste utföras av en behörig reparatör. Västar och bälten måste monteras enligt de anvisningar som tillhör produkterna.
Rengöring	Denna produkt kan tvättas i 15-20 minuter vid 60 ° i tvättmaskiner som är avsedda för att tvätta medicintekniska produkter, med ett mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel utan klor. Utrustningen måste demonteras så mycket som möjligt innan tvätt så att alla delar är helt rena. De olika komponenterna i chassit måste torkas noggrant för att avlägsna lösa partiklar innan tvätt. Det är viktigt att låta din utrustning torka ordentligt innan du använder den.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning. För mer utförlig information om underhåll och rekonditionering se manualen.

Etac rekommenderar att endast originaldelar från R82 används.