

Rekonditionering – Rengöring

immedia
bv Etac

2023-04-17

Produkten bör kontrolleras regelbundet, helst varje gång den ska användas och särskilt efter tvätt. Kontrollera att sömmar och tyg inte är skadade.



Försök aldrig att reparera en produkt själv.
Använd aldrig en defekt produkt.

Positioneringskudde LeanOnMe

Tvättinstruktioner:

Tvätt rekommenderas före användning.

Ta bort innerkudden före tvätt.

Använd inte sköljmedel.

Låt inte torka för länge.

Låt inte droptorka.

Skaka noggrant efter torkning.

Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel
med pH-värde 5–9 eller med 70 % tvättspirit.



Kilkudde Wedge

Tvättinstruktioner:

Ta bort skum före tvätt.

Använd inte sköljmedel.

Produkten kan rengöras med rengöringsmedel utan lösningsmedel
med pH-värde 5–9 eller med 70 % tvättspirit.

