

Rekonditioneringsanvisning

2023-08-16

Detalj	Kontroll	Åtgärd
Hjul	Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast i underredet. Kontrollera att sprickor inte finns samt att hjulen är i dugligt skick	Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som är defekta. Rengör axlar och hjulhus från ev. damm eller smuts.
Bromsar	Kontrollera att bromsarna är väl rengjorda och fungerar med avsedd effekt.	Rengör bromsar från ev. damm eller smuts.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Klädslar och överdrag	Inspektion av tyg och kontroll av sömmar.	Tvätta överdrag i 40° maskintvätt, eller tvättprogram med maxtemperatur 60° i maximalt 10 minuter. Låt klädseln lufttorka plant. Torktumlas ej.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.
Rengöring		Rengör produkten med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel. Produkten kan spritavtorkas och rengöras i 60° vatten. Använd ej klorrengöringsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel! OBS: Etiketter behöver täckas innan användning av rengöringsmedel eller rengöringssprit.
Vid tvätt och tork i tvättkabinett		Vid tvätt och tork i diskabinett, ta bort dynor och armstöd. Vid rengöring av chassit i diskabinett skall produkten stå fixerad och placeras upprätt. Tvättprogram max 60° i 10 minuter.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från Ki Mobility används.