

Rekonditionering – Rengöring

immedia
by Etac

2024-02-29

Kontrollera regelbundet produkten, helst inför varje användningstillfälle.
Reparera aldrig själv en produkt. En defekt produkt får inte användas.

Glidbräda och Glidskiva

Torkas av med tvålatten eller desinfektionsmedel




Glidmatta och Glidmadrass

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Torkas av med sprit eller tvättas i max. 80°C.

Använd inte sköljmedel och klorin – det förstör glidförmågan.

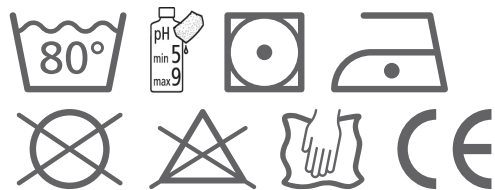


Förflyttningsbår

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Torkas av med sprit eller tvättas i max. 80°C.

Ta bort plattan innan rengöring.

Använd inte sköljmedel och klorin – det förstör glidförmågan.

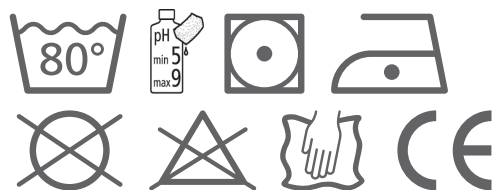


Vårdbälte och repstege

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Tvätta i max 80°C eller autoklaveras vid 80°C.

Kan också desinficeras med LT-CIN (Isopropylalkohol 72%).

Använd inte sköljmedel och klorin.

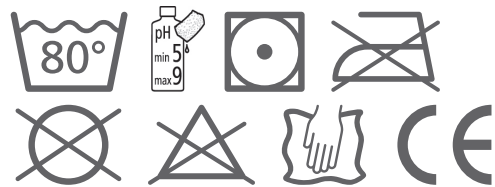


Glidlakan och Vändlakan

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Tvätta i max 80°C Torktumla i max 70°C.

Strykning förbättrar glidförmågan. Använd inte sköljmedel och klorin.

Undvik torktumling för optimal livslängd av lakanets material.

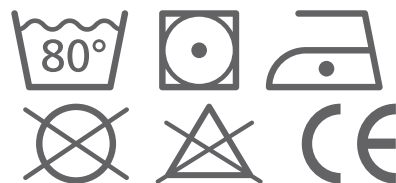

Vridplatta sits

Kontrollera att sömmar och tyg inte har skadats.

Kan torkas av med tvålatten eller desinfektionsmedel.

Använd inte sköljmedel.



Vridplatta golv

Torkas av med tvålatten eller desinfektionsmedel.

