

Detalj	Kontroll	Åtgärd
Hjul	Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast i underredet. Kontrollera att sprickor inte finns samt att hjulen är i dugligt skick. Kontrollera att hjulen rör sig fritt	Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som är defekta.
Bromsar	Kontrollera att bromsarna är väl rengjorda och fungerar med avsedd effekt.	Rengör bromsar från ev. damm eller smuts.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Överdrag till dynor	Inspektion av tyg och kontroll av sömmar.	Tvätta överdraget i max. 60 °C maskintvätt med ett mildt tvättmedel.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.
Rengöring		Tvätta produkten i 15-20 minuter i max. 60°C maskintvätt, avsedd för medicintekniska produkter. Använd ett mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel utan klor. Demontera produkten innan tvätt så att alla delar blir helt rena. Torka de olika komponenterna i chassit noggrant för att avlägsna lösa partiklar innan tvätt. OBS! Låt produkten torka ordentligt efter tvätt innan användning.
Desinfektion		Desinficera produkten (utan tillbehör) med en 70% isopropanollösning. Använd en trasa som doppats i varmt vatten med mildt rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att torka bort skräp och smuts. Låt torka före desinficering.
Vid tvätt och tork i diskabinett		Vid tvätt och tork i diskabinett, ta bort dynor och armstöd. Vid rengöring av chassit i diskabinett skall produkten stå fixerad och placeras upprätt.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.

