

Rekonditionering – Rengöring

molift[®]
by Etac

2025-08-05

Gäller alla Molift mobila lyftar:

Smart 150, Mover 180, Mover 205, Mover 300, Partner 255

Rengöring och desinfektion

Rengör regelbundet.



Rengör ytorna med fuktig trasa och lämpligt pH-neutralt rengöringsmedel.

Använd inte lösningsmedel eller starka vätskor eftersom det skada lyftens ytor.

För desinfektion vid behov: använd isopropylalkohol.

Undvik slipande rengöringsmedel.

Ta bort hår och mattlugg från hjulen och kontrollera att de kan rulla fritt.

Använd isopropylalkohol för att ta bort fett och smuts på kontakten och handkontrollen.

Kontrollera nödstopps- och nödsänkningfunktionen efter rengöring.

Lyften får inte sköljas i rinnande vatten.

För mer utförlig information om underhåll och rekonditionering se manualen.