

Rekonditioneringsanvisning

2026-02-20



Detalj	Kontroll	Åtgärd
Massiva hjul	Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast i underredet. Kontrollera att sprickor inte finns samt att hjulen är i dugligt skick.	Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som är defekta.
Bromsar	Kontrollera att bromsarna är väl rengjorda och fungerar med avsedd effekt.	Rengör bromsar från ev. damm eller smuts.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Rengöring		<p>Denna produkt kan tvättas i 60°C med ett mildt rengöringsmedel i 10 minuter i en tvättmaskin avsedd för medicintekniska produkter. Använd maskinens torkfunktion för att torka enheten. Demontera alla tillbehör och tvätta dem separat.</p> <p>Luta/rotera produkten efter tvätt för att vatten lättare ska dränera från produktens insida. Enheten och dess tillbehör kan även rengöras för hand. Använd varmt vatten och ett mildt rengörings-medel/tvål utan klorin och låt alla delar torka före användning.</p> <p>Före tvätt: Ställdonet ska dras tillbaka till minsta slaglängd för att avfettning av kolvstången ska undvikas. Ta bort alla tillbehör, koppla ur alla kablar och se till att ta bort strömenheten. Rengör inte strömenheten med högtryckstvätt eller ångtvätt.</p>
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.
Gaskolv/Ställdon	Gör funktionsprov/ladda batteriet och gör sedan funktionsprov.	Byt vid behov batteri. Vid funktionsbrist byt gaskolv/ställdon.
Överdrag till dynor	Inspektion av tyg och kontroll av sömmar.	Överdragen kan tvättas i 60°C med ett mildt tvättmedel i tvättmaskin. Se individuella skötselråd för specifika instruktioner angående resterande tyg och klädselar. Separeraskumgummit och överdraget före tvätt.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varjeobjekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning. R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Originalreservdelar från R82 skall alltid användas.