



Detalj	Kontroll	Åtgärd
Hjul	Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast i underredet. Kontrollera att sprickor inte finns samt att hjulen är i dugligt skick	Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som är defekta.
Bromsar	Kontrollera att bromsarna är väl rengjorda och fungerar med avsedd effekt.	Rengör bromsar från ev. damm eller smuts.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Rengöring		Rengör produkten med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel. Produkten klarar att spritavtorkas att rengöras i 60° vatten. Använd ej klorrengöringsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel! Obs! Etiketter behöver täckas innan användning av rengöringsmedel eller rengöringssprit.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.
Vid tvätt och tork i diskabinett		Vid rengöring av chassit i diskabinett skall produkten stå fixerad och placeras upprätt.

Färgkoder: Gul (stl 1) = RAL 1032, Röd (stl 2) = RAL 3003, Blå (stl 3) = RAL 5013, Anthrazit grå (stl 4) = RAL 7016

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

**Produkten bör kontrolleras regelbundet. Vi rekommenderar ett intervall på var 6:e månad.**

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

**Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.**