

Rekonditioneringsanvisning

2025-05-19



Detalj	Kontroll	Åtgärd
Massiva hjul	Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast. Kontrollera att sprickor inte finns samt att hjulen är i dugligt skick.	Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som är defekta.
Bromsar	Kontrollera släpbromsens funktion.	Rengör bromsar från ev. damm eller smuts.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Rengöring		Rengör produkten med vanligt förekommande rengöringsmedel utan slipmedel. Produkten klarar att spritavtorkas att rengöras i 60° vatten. Textilier och överdrag kan maskintvättas i 60°. (R82 rekommenderar tvätt vid 40°) Använd ej klorrengöringsmedel eller andra aggressiva rengöringsmedel! Obs! Etiketter behöver täckas innan användning av rengöringsmedel eller rengöringssprit.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.
Vid tvätt och tork i diskabinett		Vid rengöring av chassit i diskabinett skall produkten stå fixerad och placeras upprätt. Kan tvättas i 15-20 minuter i 60 gr i tvättmaskin avsedd för medicintekniska produkter med ett mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel utan klor. Torkas i 70° i 10 min.

Färger

Stl 0 = vit (RAL 9010) stl 1 = gul (RAL 1021), stl 2 = orange (RAL 2004), stl 2 = svart pärlmor (RAL 9005), stl 3 = grå metallic (RAL 7016)

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

Produkten bör kontrolleras regelbundet. Vi rekommenderar ett intervall på var 6:e månad.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.