



Detalj	Kontroll	Åtgärd
Massiva hjul	Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast i underredet. Kontrollera att sprickor inte finns samt att hjulen är i dugligt skick	Efterdra skruvar vid behov. Byt vid behov ut hjul som är defekta.
Dynor	Att dynor inte har skador och är i dugligt skick.	Byt vid behov ut dynor.
Bromsar	Kontrollera att bromsarna är väl rengjorda och fungerar med avsedd effekt.	Rengör bromsar från hår och ev. tvålrester. Byt vid behov ut hjul med broms.
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Rengöring		Produkten kan desinficeras med en 70 % isopropanollösning. Vi rekommenderar att man använder en trasa som doppats i varmt vatten med mildt rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att torka bort skräp och smuts. Låt torka före desinficering.
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.
Vid tvätt och tork i diskabinett		Denna produkt kan tvättas i <ul style="list-style-type: none">• 60°C i 10 minuter• 85°C i 3 minuter med ett mildt tvättmedel i en tvättmaskin avsedd för medicintekniska produkter. Använd maskinens torkningsfunktion för att torka produkten. Rengör tillbehör separat.

Färgkod: Vit= RAL 9010

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Etac rekommenderar att endast originalreservdelar från R82 används.