

Levensduur Autostoel Stingray Swing-out

De verwachte levensduur van de autostoel is minimaal vijf jaar. De werkelijke levensduur kan variëren afhankelijk van hoe vaak en hoe intensief het product wordt gebruikt, maar bedraagt maximaal 8 jaar.

De levensduur van het hulpmiddel bedraagt maximaal 8 jaar als het op de beoogde manier en in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de handleiding voor revisie bij hergebruik en de onderhoudsvoorschriften in de handleiding wordt gebruikt. De werkelijke levensduur kan variëren, afhankelijk van hoe vaak en hoe intensief het hulpmiddel wordt gebruikt. Als het hulpmiddel wordt gebruikt tot de door Etac gespecificeerde maximale levensduur, is de eigenaar van het hulpmiddel verplicht de functionaliteit van het hulpmiddel in overeenstemming met de handleiding en de voorschriften voor revisie bij hergebruik te garanderen. Wanneer de eigenaar hier niet voor kan zorgen dan mag het hulpmiddel niet meer (her-)gebruikt worden.

Junior | Vervoer NL

- Na een ongeval kan dit autostoeltje beschadigd zijn, al is dit niet altijd waarneembaar. Laat dit controleren en vervang eventueel het autostoeltje (frame, zitunit en Easyfit-bevestigingssysteem of Evo-spangordel).

Uit: handleiding Stingray Swing-out



In geval van een ongeval waarbij de airbags zijn geactiveerd, adviseren wij dringend de autostoel niet meer te gebruiken. De gebruiker dient een dergelijk ongeval te melden bij de eigenaar van het hulpmiddel en de eigenaar dient het hulpmiddel af te voeren.

Tussentijdse controle van de autostoel behelst een check en navenant onderhoud, op basis van de volgende vragen:

- Draait de stoel en schuift de slede nog soepel en goed?
- Zit er speling in de autostoel?
- Is de gordelgeleiding verbogen?
- Zijn er andere onderdelen verbogen?
- Is de hoofdsteun verbogen?

Bij twijfel adviseren we Etac een controle te laten uitvoeren.