

Levensduur Autostoel Stingray i-Light

De verwachte levensduur van de autostoel is minimaal vijf jaar. De uiteindelijke gebruiksduur kan variëren afhankelijk van de frequentie en intensiteit van het gebruik. De technische levensduur van het product bedraagt **maximaal acht jaar**.

Hoewel de Stingray i-Light autostoel geen officiële houdbaarheidsdatum heeft, volgen we grotendeels het algemene advies van The European Nursery Products Confederation. Dit advies zien wij als verstandige richtlijnen. De gebruiksduur gaat in vanaf het moment dat de autostoel voor het eerst wordt gebruikt.

Het advies van The European Nursery Products Confederation luidt dat autostoeltjes zoals de Stingray i-Light **bij voorkeur niet langer dan zeven jaar gebruikt mogen worden** vanwege:

- **Slijtage en externe invloeden**, zoals eten en drinken en UV-inwerking, die de veilige werking van de gekeurde veiligheidsonderdelen in de loop van de tijd negatief kunnen beïnvloeden.

Als het hulpmiddel wordt gebruikt tot de door Etac gespecificeerde maximale levensduur, is de eigenaar van het hulpmiddel verplicht de functionaliteit van het hulpmiddel in overeenstemming met de handleiding en de voorschriften voor revisie bij hergebruik te garanderen. Wanneer de eigenaar hier niet voor kan zorgen dan mag het hulpmiddel niet meer (her-)gebruikt worden.

In geval van een ongeval waarbij de airbags zijn geactiveerd, adviseren wij dringend de autostoel niet meer te gebruiken. De gebruiker dient een dergelijk ongeval te melden bij de eigenaar van het hulpmiddel en de eigenaar dient het hulpmiddel af te voeren.

Tussentijdse controle van de autostoel behelst een check en navenant onderhoud, op basis van de volgende vragen:

- Draait de stoel en schuift de slede nog soepel en goed?
- Zit er speling in de autostoel?
- Is de gordelgeleiding verbogen?
- Zijn er andere onderdelen verbogen?
- Is de hoofdsteun verbogen?

Bij twijfel adviseren we Etac een controle te laten uitvoeren.