

Golvunderrede Floor frame – Tiltalternativ och vinklar

Underredet har 5 alternativ för positionering av benen när de korta benen är monterade - både för de främre benen och de bakre benen. Underredet kan justeras till en mängd olika tiltvinklar.

Bakre tiltvinklingen minskar effekten av tyngdkraften och kan därför vara till hjälp för att minska trötthet och spara energi så att barnet får mer energi till att delta i roliga aktiviteter. Den bakre tiltvinklingen minskar även trycket under stussens beniga områden och förbättrar komforten, hållningen och funktionen.

Den främre tiltvinkeln i kombination med sitsens ryggvinkling kan under kortare perioder användas för funktionella aktiviteter, då den underlättar aktivering av bålstrukturen och förbättrar bålkontrollen.



Främre ben

Bakre ben

Vinkel underrede

Främre ben	Bakre ben	Vinkel underrede
1	1	0°
1	2	5°
1	3	12°
1	4	19°
1	5	25°
2	1	-5°
2	2	0°
2	3	6°
2	4	13°
2	5	17°
3	1	-12°
3	2	-6°
3	3	0°
3	4	7°
3	5	8°
4	1	-9°
4	2	-13°
4	3	-7°
4	4	0°
4	5	-2°
5	1	-25°
5	2	-17°
5	3	-8°
5	4	2°
5	5	0°