

# Förskrivarguide Immedia SatinSheet


En guide till att välja rätt glidlakan utifrån patientens förmågor och behov.

Immedia SatinSheet finns i tre delar:


- Glidlakan 2Direction
- Draglakan DrawSheet 2Direction
- Draglakan 4Direction (måste alltid kombineras med ett 2Direction glidlakan)

1) Börja med att välja glidlakan SatinSheet 2Direction utifrån patientens behov och funktioner.


- Är patienten självständig?  
Kan patienten medverka?  
Är patienten helt i behov av hjälp?
- Madrassens bredd  
avgör vilken bredd på satin som ska väljas, en rekommendation är minst 10 cm stoppkant per sida.

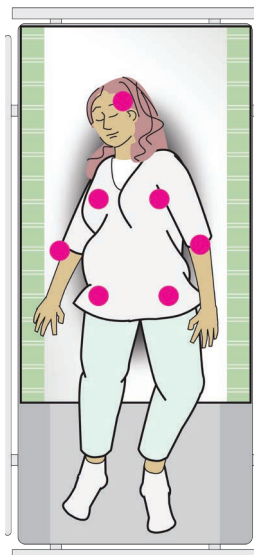


2) Komplettera med draglakan DrawSheet 2Direction om patienten behöver hjälp av vårdare för att assistera vid positionering i **sidled**.

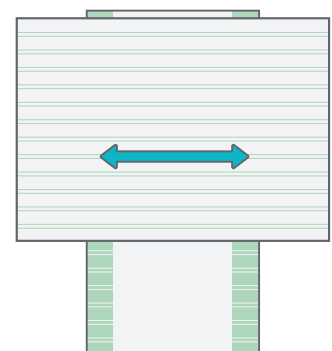

3) Komplettera med draglakan 4Direction om patienten är mindre rörlig och behöver hjälp vid positionering i alla riktningar, finns även med inkontinensskydd.

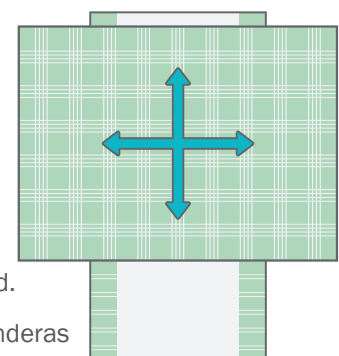


OBS: Grind rekommenderas vid användning av draglakan 4Direction.

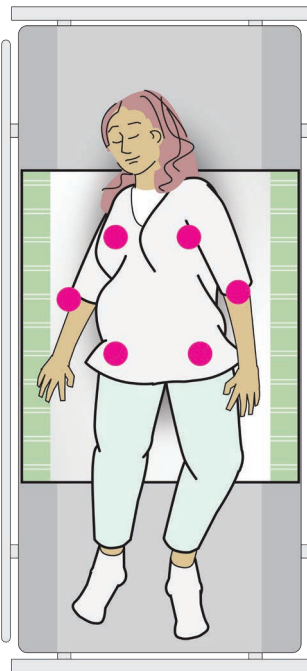

### Mini:

Är avsedd för patienter som kan vända sig själva i sängen.


Förutom i traditionell modell finns även Mini Corner som är ett lakan med en överdel och en nederdel av tyg och med resår i hörnen. Lämpligt vid användning av förebyggande- och behandlande madrass.

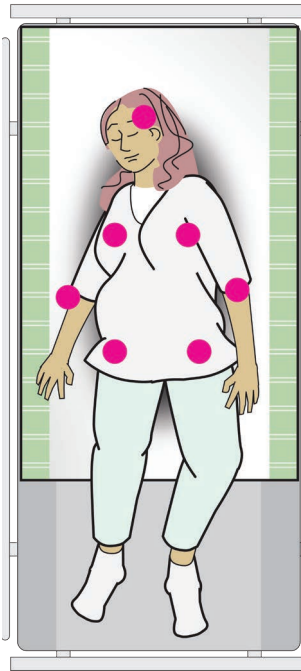

### Midi:

Är avsedd för patienter med nedsatt rörlighet men som kan böja benen och är i behov av assistans för vissa förflyttningar.

Förutom i traditionell modell finns även Midi Corner som är ett lakan med en nederdel av tyg och med resår i hörnen. Lämpligt vid användning av förebyggande- och behandlande madrass.

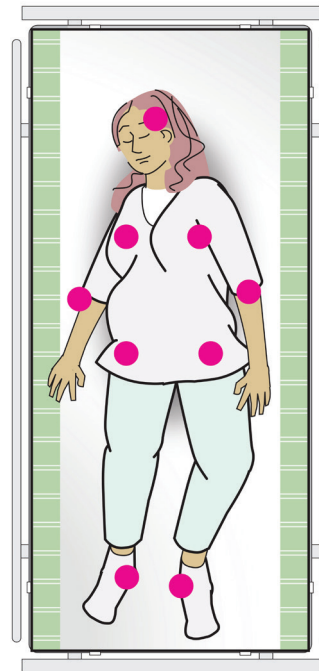


### Maxi:

Är avsedd för patienter som är mer orörliga och även behöver hjälp med att flytta ben/fötter.

#### Följande modeller finns:

- **Maxi lakan traditionell modell.**
- **Maxi Corner:** med resår i hörnen. Lämpligt vid användning av förebyggande- och behandlande madrass.
- **Maxi Elastic Fit:** formsytt med öppning i hörnen för växeltrycksmadrass och med full glidyta vid fotdelen.
- **Maxi Fit:** formsytt med dragsko och med full glidyta vid fotdelen.


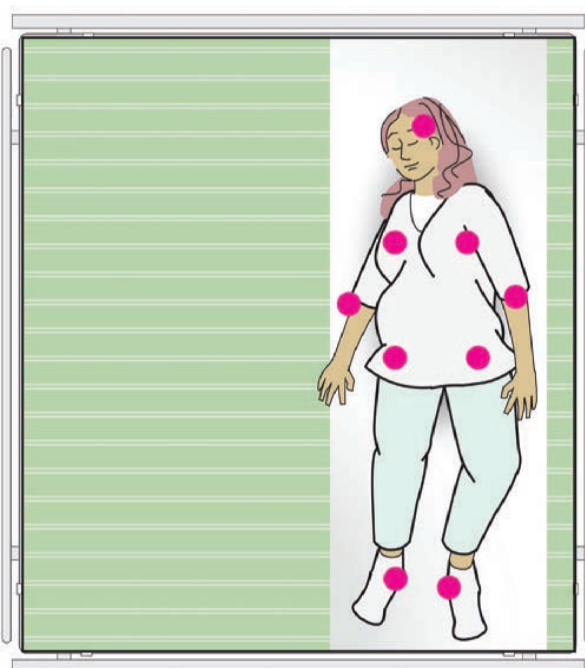


### 2D Double:

för dubbelsäng eller bredare sängar. Glidytan är placerad på en sängsida.

De röda punkterna på kroppen motsvarar kroppens tryckpunkter

| Artikelnr                                | Benämning                      | Mått lakan<br>B x L cm          | Mått<br>glidyta cm | Rekommenderas för<br>madrass<br>bredd cm | Välj |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------|
| <b>2D Glidlakan – Mini</b>               |                                |                                 |                    |                                          |      |
| IM4133S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Mini   | 195 x 105                       | 60 x 105           | 80-90                                    |      |
| IM4108S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Mini   | 195 x 105                       | 70 x 105           | 90-100                                   |      |
| IM4175S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Mini   | 230 x 105                       | 85 x 105           | Min 105                                  |      |
| IM4178S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Mini   | 230 x 105                       | 96 x 105           | Min 120                                  |      |
| IM4126S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Mini   | Corner resår i hörnen 85 x 200  | 65 x 105           | 85-90                                    |      |
| <b>2D Glidlakan – Midi</b>               |                                |                                 |                    |                                          |      |
| IM4119S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Midi   | 200 x 140                       | 60 x 140           | 80-90                                    |      |
| IM4113S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Midi   | 200 x 140                       | 70 x 140           | 90-100                                   |      |
| IM4176S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Midi   | 230 x 140                       | 85 x 140           | Min 105                                  |      |
| IM4179S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Midi   | 230 x 140                       | 96 x 140           | Min 120                                  |      |
| IM4157S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Midi   | Corner resår i hörnen 85 x 200  | 65 x 140           | 85-90                                    |      |
| IM4158S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Midi   | Corner resår i hörnen 105 x 200 | 80 x 140           | 105-110                                  |      |
| IM4187S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Midi   | Corner resår i hörnen 120 x 200 | 90 x 140           | 120                                      |      |
| <b>2D Glidlakan – Maxi</b>               |                                |                                 |                    |                                          |      |
| IM4181S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | 200 x 200                       | 60 x 200           | 80-90                                    |      |
| IM4114S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | 200 x 200                       | 70 x 200           | 90-100                                   |      |
| IM4177S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | 230 x 200                       | 85 x 200           | Min 105                                  |      |
| IM4180S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | 230 x 200                       | 96 x 200           | Min 120                                  |      |
| <b>2D Glidlakan – Maxi Fit</b>           |                                |                                 |                    |                                          |      |
| IM4112S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | Fit formsytt 90 x 200           | 70/90 x 200        | 90-100                                   |      |
| IM4142S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | Elastic fit formsytt 90 x 200   | 70/90 x 200        | 90-100                                   |      |
| <b>2D Glidlakan – Maxi Corner</b>        |                                |                                 |                    |                                          |      |
| IM4107S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | Corner resår i hörnen 85 x 200  | 65 x 200           | 80-90                                    |      |
| IM4147S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | Corner resår i hörnen 105 x 200 | 80 x 200           | 105-110                                  |      |
| IM4137S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Maxi   | Corner resår i hörnen 120 x 200 | 90 x 200           | 120                                      |      |
| <b>2D Glidlakan – Double</b>             |                                |                                 |                    |                                          |      |
| IM4122S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D Double | 280 x 200                       | 60 x 200           | 160-200                                  |      |
| <b>2D Glidlakan - För roterande säng</b> |                                |                                 |                    |                                          |      |
| IM4167S                                  | Glidlakan SatinSheet 2D        | Corner resår i hörnen 90 x 173  | 67 x 173           | 90                                       |      |

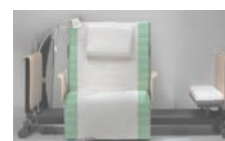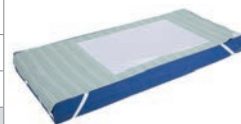

| Artikelnr                                     | Benämning                                                                     | Mått lakan<br>B x L cm | Mått<br>glidyta<br>cm | Används<br>tillsammans<br>med            | Välj |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------|
| <b>Drawsheet – Mini</b>                       |                                                                               |                        |                       |                                          |      |
| IM4116S                                       | Draglakan SatinSheet 2D Mini                                                  | 200 x 100              |                       | Glidlakan 2D<br>Mini, (Midi<br>och Maxi) |      |
| <b>Drawsheet – Midi</b>                       |                                                                               |                        |                       |                                          |      |
| IM4118S                                       | Draglakan SatinSheet 2D Midi                                                  | 200 x 140              |                       | Glidlakan<br>2D Midi och<br>Maxi         |      |
| <b>4Direction – Midi</b>                      |                                                                               |                        |                       |                                          |      |
| IM4115S                                       | Draglakan SatinSheet 4D Midi                                                  | 200 x 140              | 147 x 140             | Glidlakan<br>2D Midi och<br>Maxi         |      |
| IM4115SH                                      | Draglakan SatinSheet 4D Midi<br>med handtag för lyft                          | 200 x 140              | 147 x 140             | Glidlakan<br>2D Midi och<br>Maxi         |      |
| <b>4Direction – Maxi</b>                      |                                                                               |                        |                       |                                          |      |
| IM4121S                                       | Draglakan SatinSheet 4D Maxi                                                  | 200 x 200              | 147 x 200             | Glidlakan 2D<br>Maxi                     |      |
| IM4121SH                                      | Draglakan SatinSheet 4D Maxi<br>med handtag för lyft                          | 200 x 200              | 147 x 200             | Glidlakan 2D<br>Maxi                     |      |
| IM4131SH                                      | Draglakan SatinSheet 4D Maxi<br>Wide med handtag för lyft                     | 300 x 200              | 200 x 200             | Glidlakan 2D<br>Maxi                     |      |
| <b>4Direction med inkontinensskydd – Mini</b> |                                                                               |                        |                       |                                          |      |
| IM4110S                                       | Draglakan SatinSheet 4D Mini<br>med inkontinensskydd                          | 185 x 90               | 85 x 90               | Glidlakan 2D<br>(Mini), <b>Midi</b>      |      |
| IM4110SH                                      | Draglakan SatinSheet 4D Mini<br>med inkontinensskydd. Med<br>handtag för lyft | 185 x 90               | 85 x 90               | Glidlakan 2D<br>(Mini), <b>Midi</b>      |      |
| <b>4Direction med inkontinensskydd – Midi</b> |                                                                               |                        |                       |                                          |      |
| IM4140S                                       | Draglakan SatinSheet 4D Midi<br>med inkontinensskydd                          | 220 x 140              | 120 x 140             | Glidlakan<br>2D Midi och<br>Maxi         |      |
| IM4140SH                                      | Draglakan SatinSheet 4D Midi<br>med inkontinensskydd. Med<br>handtag för lyft | 220 x 140              | 120 x 140             | Glidlakan<br>2D Midi och<br>Maxi         |      |
| <b>Örngott</b>                                |                                                                               |                        |                       |                                          |      |
| IM4117S                                       | Örngott                                                                       | 70 x 60                |                       |                                          |      |

