

Förskrivarguide Immedia SatinSheet


En guide till att välja rätt glidlakan utifrån patientens förmågor och behov.

Immedia SatinSheet finns i tre delar:


- Glidlakan 2Direction
- Draglakan DrawSheet 2Direction
- Draglakan 4Direction (måste alltid kombineras med ett 2Direction glidlakan)

1) Börja med att välja glidlakan SatinSheet 2Direction utifrån patientens behov och funktioner.


- Är patienten självständig?
Kan patienten medverka?
Är patienten helt i behov av hjälp?
- Madrassens bredd
avgör vilken bredd på satin som ska väljas, en rekommendation är minst 10 cm stoppkant per sida.

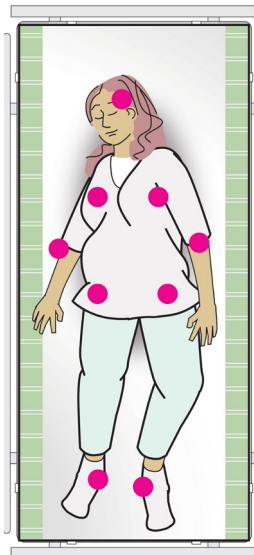


2) Komplettera med draglakan DrawSheet 2Direction om patienten behöver hjälp av vårdare för att assistera vid positionering i **sidled**.

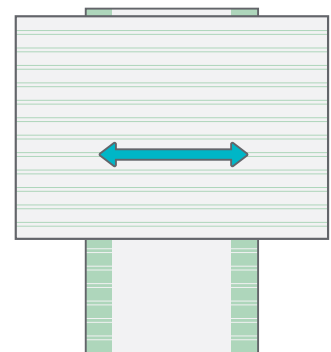

3) Komplettera med draglakan 4Direction om patienten är mindre rörlig och behöver hjälp vid positionering i alla riktningar, finns även med inkontinensskydd.

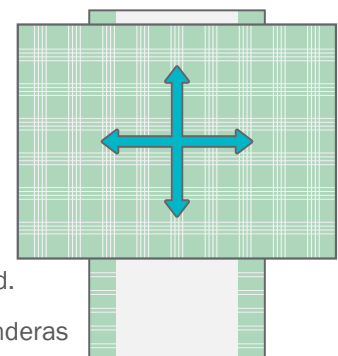


OBS: Grind rekommenderas vid användning av draglakan 4Direction.

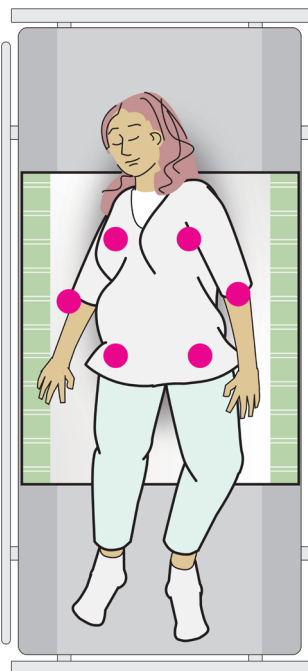**Mini:**


Är avsedd för patienter som kan vända sig själva i sängen.

Förutom i traditionell modell finns även Mini Corner som är ett lakan med en överdel och en nederdel av tyg och med resår i hörnen. Lämpligt vid användning av förebyggande- och behandlande madrass.

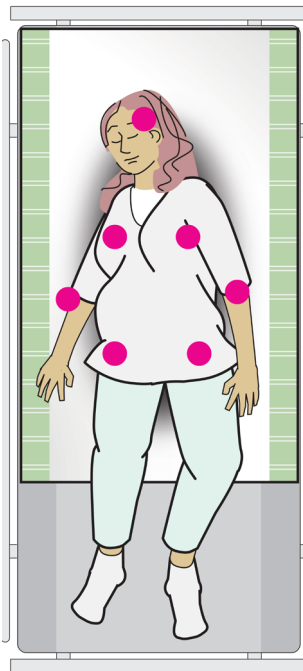**Midi:**

Är avsedd för patienter med nedsatt rörlighet men som kan böja benen och är i behov av assistans för vissa förflyttningar.


Förutom i traditionell modell finns även Midi Corner som är ett lakan med en nederdel av tyg och med resår i hörnen. Lämpligt vid användning av förebyggande- och behandlande madrass.

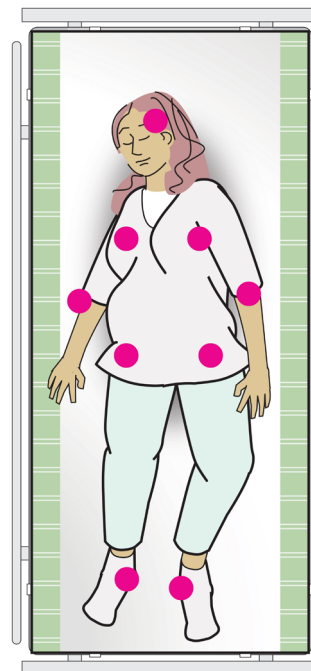**Maxi:**

Är avsedd för patienter som är mer orörliga och även behöver hjälp med att flytta ben/fötter.

Följande modeller finns:



- **Maxi lakan traditionell modell.**
- **Maxi Corner:** med resår i hörnen. Lämpligt vid användning av förebyggande- och behandlande madrass.
- **Maxi Elastic Fit:** formsytt med öppning i hörnen för växeltrycksmadrass och med full glidyta vid fotdelen.
- **Maxi Fit:** formsytt med dragsko och med full glidyta vid fotdelen.

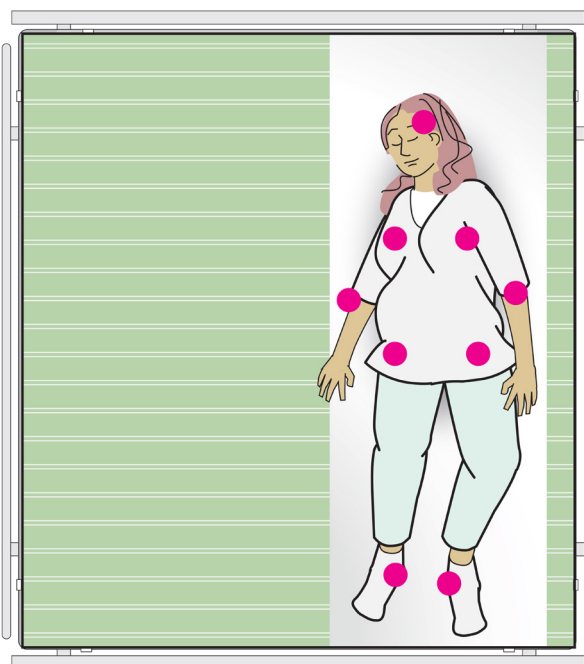**2D Double:**

för dubbelsäng eller bredare sängar. Glidytan är placerad på en sängsida.

De röda punkterna på kroppen motsvarar kroppens tryckpunkter

Artikelnr	Benämning	Mått lakan B x L cm	Mått glidyta cm	Rekommen- deras för madrass bredd cm	Välj
2D Glidlakan – Mini					
IM4133S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	195 x 105	60 x 105	80-90	
IM4108S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	195 x 105	70 x 105	90-100	
IM4175S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	230 x 105	85 x 105	Min 105	
IM4178S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	230 x 105	96 x 105	Min 120	
IM4126S	Glidlakan SatinSheet 2D Mini	Corner resår i hörnen 85 x 200	65 x 105	85-90	
2D Glidlakan – Midi					
IM4119S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	200 x 140	60 x 140	80-90	
IM4113S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	200 x 140	70 x 140	90-100	
IM4176S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	230 x 140	85 x 140	Min 105	
IM4179S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	230 x 140	96 x 140	Min 120	
IM4157S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	Corner resår i hörnen 85 x 200	65 x 140	85-90	
IM4158S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	Corner resår i hörnen 105 x 200	80 x 140	105-110	
IM4187S	Glidlakan SatinSheet 2D Midi	Corner resår i hörnen 120 x 200	90 x 140	120	
2D Glidlakan – Maxi					
IM4181S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	200 x 200	60 x 200	80-90	
IM4114S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	200 x 200	70 x 200	90-100	
IM4177S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	230 x 200	85 x 200	Min 105	
IM4180S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	230 x 200	96 x 200	Min 120	
2D Glidlakan – Maxi Fit					
IM4112S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	Fit formsytt med dragsko 90 x 200	70/90 x 200	90-100	
IM4142S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	Elastic fit formsytt 90 x 200	70/90 x 200	90-100	
2D Glidlakan – Maxi Corner					
IM4107S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	Corner resår i hörnen 85 x 200	65 x 200	80-90	
IM4147S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	Corner resår i hörnen 105 x 200	80 x 200	105-110	
IM4137S	Glidlakan SatinSheet 2D Maxi	Corner resår i hörnen 120 x 200	90 x 200	120	
2D Glidlakan – Double					
IM4122S	Glidlakan SatinSheet 2D Double	280 x 200	60 x 200	160-200	
2D Glidlakan - För roterande säng					
IM4167S	Glidlakan SatinSheet 2D	Corner resår i hörnen 90 x 173	67 x 173	90	

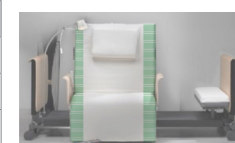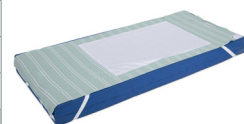

Artikelnr	Benämning	Mått lakan B x L cm	Mått glidyta cm	Används tillsammans med	Välj
2Direction Drawsheet – Mini					
IM4116S	Draglakan SatinSheet 2D Mini	200 x 100		Glidlakan 2D Mini, (Midi och Maxi)	
2Direction Drawsheet – Midi					
IM4118S	Draglakan SatinSheet 2D Midi	200 x 140		Glidlakan 2D Midi och Maxi	
2Direction Drawsheet med inkontinensskydd – Midi					
IM4193S	Inkontinensdraglakan In2S 2D	200 x 140		Glidlakan 2D Midi och Maxi	
4Direction – Midi					
IM4115S	Draglakan SatinSheet 4D Midi	200 x 140	147 x 140	Glidlakan 2D Midi och Maxi	
IM4115SH	Draglakan SatinSheet 4D Midi med handtag för lyft	200 x 140	147 x 140	Glidlakan 2D Midi och Maxi	
4Direction – Maxi					
IM4121S	Draglakan SatinSheet 4D Maxi	200 x 200	147 x 200	Glidlakan 2D Maxi	
IM4121SH	Draglakan SatinSheet 4D Maxi med handtag för lyft	200 x 200	147 x 200	Glidlakan 2D Maxi	
IM4131SH	Draglakan SatinSheet 4D Maxi Wide med handtag för lyft	300 x 200	200 x 200	Glidlakan 2D Maxi	
4Direction med inkontinensskydd – Mini					
IM4110S	Draglakan SatinSheet 4D Mini med inkontinensskydd	185 x 90	85 x 90	Glidlakan 2D (Mini), Midi	
IM4110SH	Draglakan SatinSheet 4D Mini med inkontinensskydd. Med handtag för lyft	185 x 90	85 x 90	Glidlakan 2D (Mini), Midi	
4Direction med inkontinensskydd – Midi					
IM4140S	Draglakan SatinSheet 4D Midi med inkontinensskydd	220 x 140	120 x 140	Glidlakan 2D Midi och Maxi	
IM4140SH	Draglakan SatinSheet 4D Midi med inkontinensskydd. Med handtag för lyft	220 x 140	120 x 140	Glidlakan 2D Midi och Maxi	
Örngott					
IM4117S	Örngott	70 x 60			

