

Ausgabe 2 2017

Das Produkt sollte regelmäßig überprüft werden, möglichst bei jeder Verwendung und vor allem nach dem Waschen oder der Reinigung. Verwenden Sie niemals ein defektes Produkt.

3B Board, E-Board, Butterfly, Dolphin, 2Move, PediTurn Hart, NonSlip Matte, CloverFoot



4WayGlide, TwinSheet4Glide, MultiGlide, TurningMattress, TransferMattress, GlideCushions, OneWayGlide, Swan, HandyTrans, Nylon Covers, SlingOn, WiseMover, MiniBoard, MultiGlide Glove, Rescue, BedString, OneManSling, Sling, HandyGrip



SupportBelt, SmartMove, Wedge



SatinSheet, In2Sheet



EasyTurn, AutoTurn, PediTurn Soft



ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE FÜR WASCHANLEITUNGEN



Waschen/Temperatur Celsius



Keine chemische Reinigung



Nicht bleichen



Reinigen Sie das Produkt mit einem lösungsmittelfreien Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5-9 oder mit maximum 70% Desinfektionslösung.



Wäschetrockner
niedrige Temperatur



Abwischen



Bügeln, niedrige Temperatur

REGELMÄSSIGE INSPEKTION:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr manuelles Transfersysteme immer in einem einwandfreien Zustand ist.
- Nach dem Waschen - prüfen Sie immer die Nähte, Griffe und Schnallen.
- Wenn das Produkt Anzeichen für Verschleiß aufweist, muss es sofort aus dem Betrieb genommen werden.

BITTE BEACHTEN SIE:

- Bitte überprüfen Sie, dass an Nähten oder im Stoff keinerlei Schäden vorliegen.
- Bei max. 80°C waschen und wenn möglich bei niedriger Temperatur waschen.
- Vermeiden Sie Wäschetrocknen im Trockner für eine optimale Lebensdauer des Gleitmaterials.
- Verwenden Sie keine Weichspüler oder Bleichmittel.
- Empfohlen vor dem Gebrauch zu waschen.