

Kort bruksanvisning



- Denne korte bruksanvisningen erstatter ikke den komplette bruksanvisningen
- Bruk kun sengen til voksne personer med høyde over 150cm
- Dersom det kan være farlig for pasienten å bruke håndkontrollen, skal denne omgående sperres for bruk (se baksiden)



Sidegrind (begge sider)

Utløserknapp sidegrind

Oppbevaring for dyne og pute.
Betjeningsdel se baksiden.
Maks belastning 15 kg



Sengeforlenger

Utløserknapp (begge sider) for integrert sengeforlenger.

Pedal for brems og retningsperre på hjul

Kjøre
Brems
Kjøreretning



Utløserknapper for fjerning av hode- og fotgavl

Feste for oppreisningsløfter / søsterhjelp eller infusjonsstativ (på begge sider)

Universalskinne (på begge sider) for tilbehør (urinposer m.m) tilleggsutstyr

Utløserarm (på begge sider) for nødsenk av ryggdel


Detalj utløserknapp



Sidegrinder (SG)

Oppfelling/Heving

Trekk opp SG ved hode- og så ved fotenden.

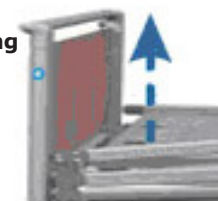


Man skal høre at SG klikker i låst posisjon. Kontroller så at SG er i låst posisjon.



Senking

Løft opp SG. Trykk inn utløserknappen.

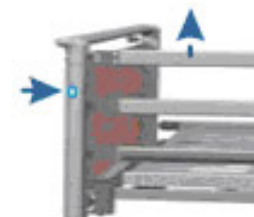

Fell ned SG.



Kort bruksanvisning




Henvisning

- Sengen bør være koblet til strømnettet slik at batteriene for nødfunksjonene lades
- Regulering av sengen med kontrollboks skal kun foretas av fagpersonell
- Sett brukeren inn i håndkontrollens funksjoner



Henvisning

Kontrollboks

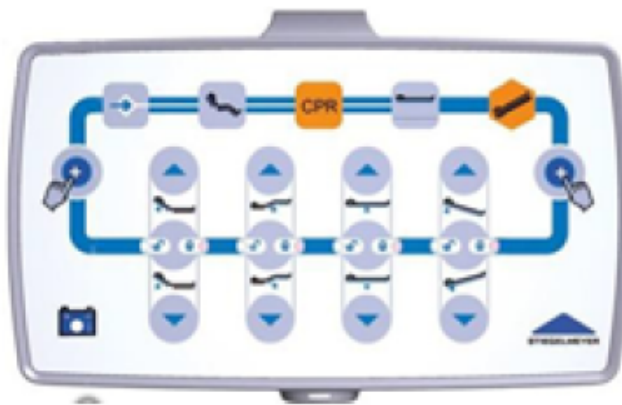


Aktiveringsknapp

Pluss (+) symbolet må alltid trykkes inn for å aktivere funksjonene.

Batteriindikator

Gult lys = Lad batteriet

Pasient kontroll nivå

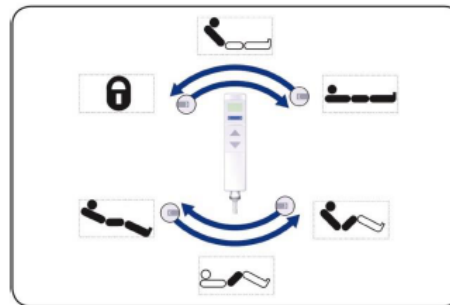

1. Valg av sengefunksjon



1. Når LCD håndkontrollen er satt i pasientkontrollnivå, så trykk på funksjonsvelgeren ③ for å velge den ønskede sengefunksjonen (komfortleie avbildet)




2. Hold inn OPP knappen ④ for å sette sengen i denne posisjonen.



3. Hold inne NED knappen ⑤, for å justere både ryggstøtte og benstøtte (komfortleie) tilbake til normal posisjon.


Funksjoner som er låst er skjult for visning i skjermen for pasienten.

Oversikt LCD håndkontroll

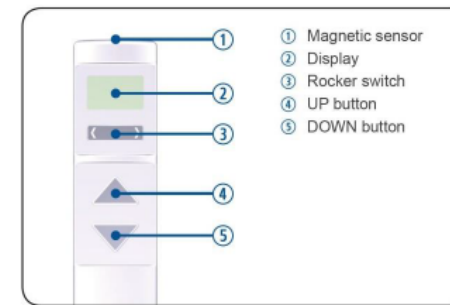


- ① Magnetic sensor
- ② Display
- ③ Rocker switch
- ④ UP button
- ⑤ DOWN button


3. Spesialfunksjoner

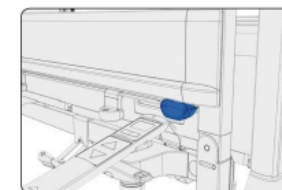

1. Hold magnet sensor ① på LCD håndkontrollen raskt over den oransje magnetiske låsen i fotenden av sengen for å få tilgang til personalnivå på LCD håndkontrollen.

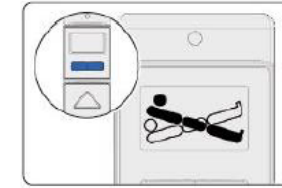

2. Trykk på funksjonsvelgeren ③ for å velge spesialfunksjonen du ønsker å forandre (som f.eks. sjokkleie).

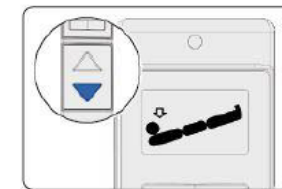

3. Hold inne NED knappen ⑤ til sjokkleie er i ønsket posisjon.

Skjermen går automatisk tilbake til kontrollnivå etter 10 sekunder (ikke nødvendig å trykke på noen knapper) - alternativt kan dette gjøres manuelt ved å bruke magnetsensoren.