


Etac Transit III

Reservdelista

74230.26


2026-01-27

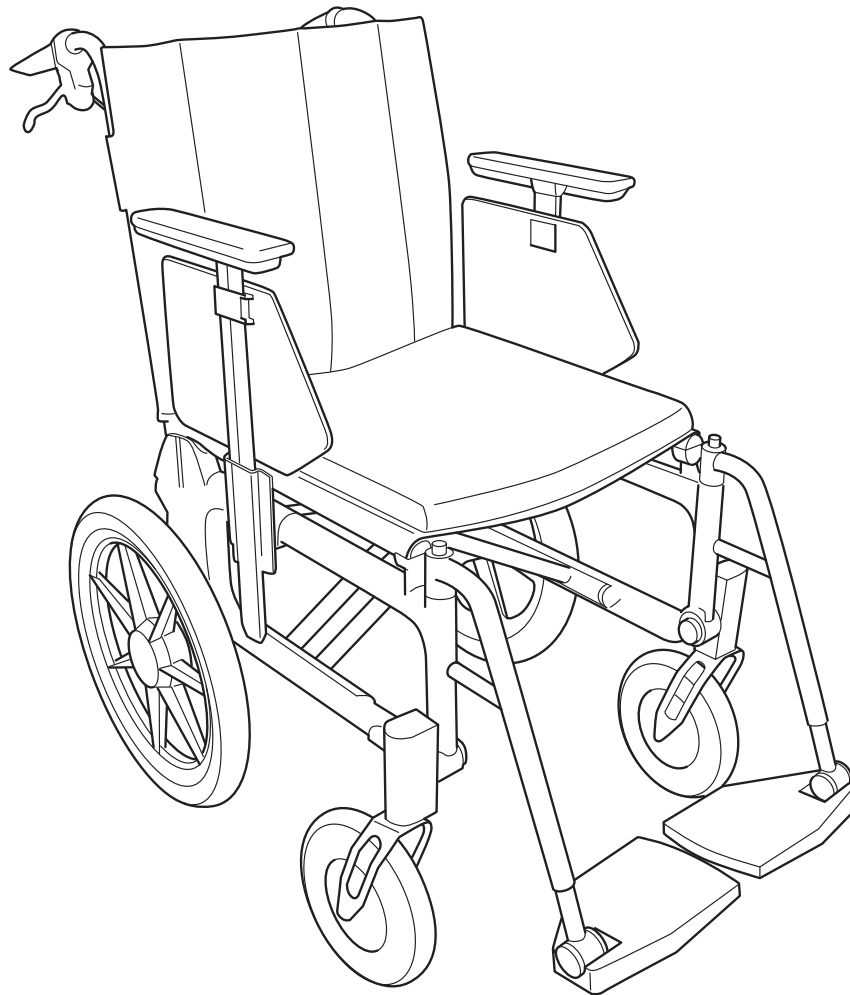

Innehåll


Innehåll	Sidan
Gavel	3
Kryss	4
Ryggrör med fasta körhandtag	5
Ryggrör med hrb körhandtag.....	6
Benstöd	7
Fotstöd	8
Länkhjul 57 mm navbredd	9
Länkhjul 45 mm navbredd	10
Armstöd	11
Sitsklädsel	12
Ryggklädsel	13-14
Ryggöverdrag	15
Vårdarbroms fasta körhandtag.....	16
Vårdarbroms hrb körhandtag	17
Brukarbroms	18
Bord	19
Hemibord	20
Tippskydd	21
Käpphållare	22
Höftbälte	23

Gavel

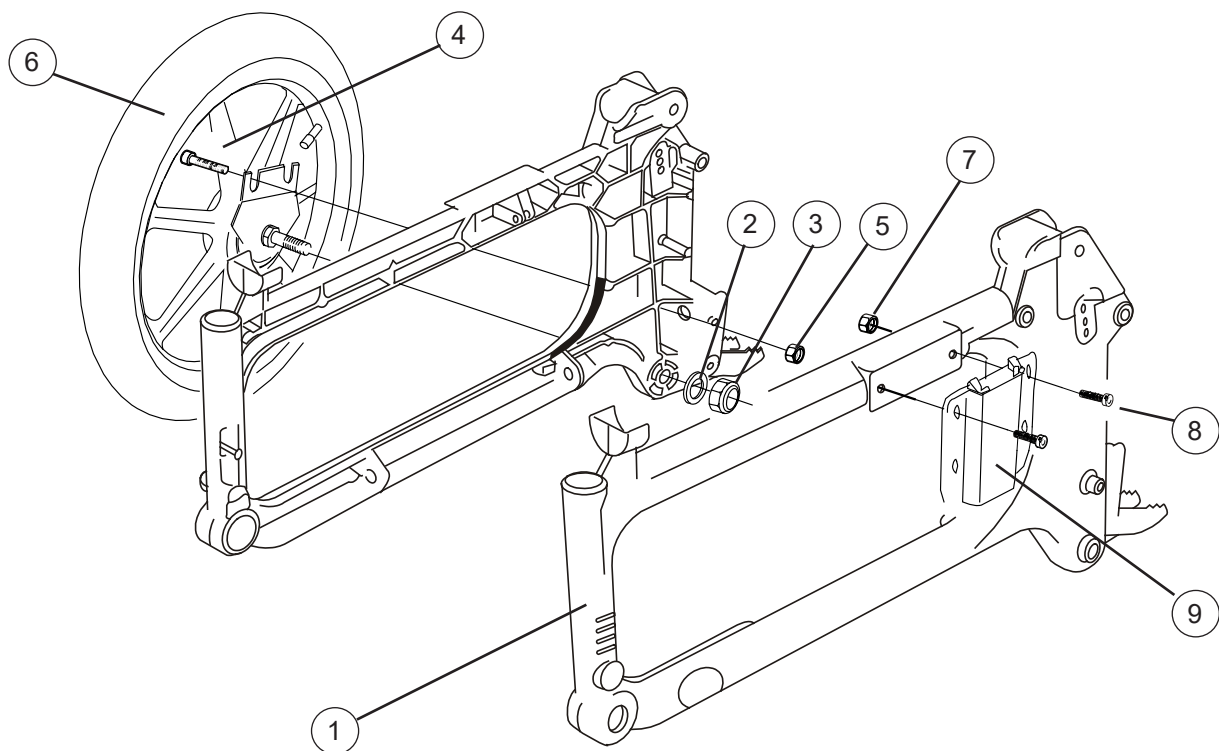


Pos	Benämning	Art nr
1,7-9	Gavel kort höger	
	Gavel kort vänster	
2	Bricka BRB 13,5 fzb	13007
3	Låsmutter M12 fzb	12078
4	Skruv M6x40 MC6S 10.9 fzb	11229
5	Låsmutter M6 fzb nyloc	12017
6	Hjul 16" massivt hö/vä	83386/83387
7	Låsmutter M6 DIN 985-6 svkr	12035
8	Skruv M6x20 MC6C 8.8 svart	11392
9	Armstödsfäste	25535
10	Bättringsfärg	80517-xx

Kryss

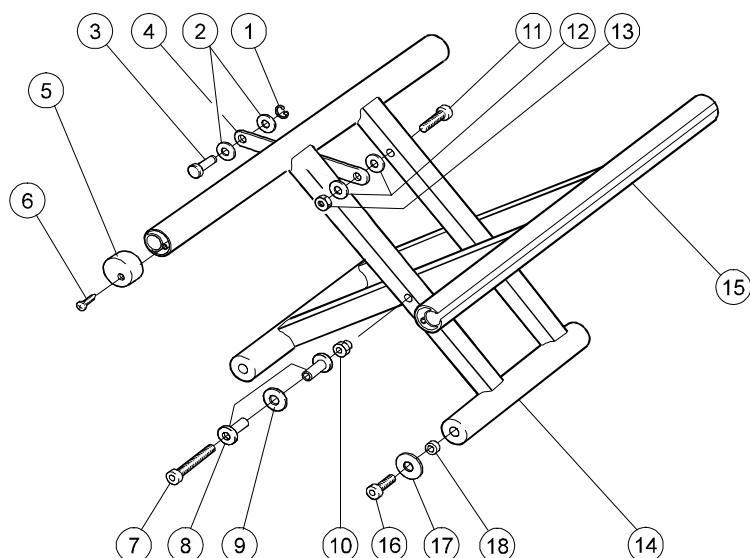


Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Spårryttare RSM 4 rfr	13054	4-15	Kryss kort 35 cm kompl mod 4	27832-01
2	Ledhylsa 5/6/1.5 PA	50285		Kryss kort 40 cm kompl mod 4	27834-01
3	Axel krysspinnne	20507		Kryss kort 45 cm kompl mod 4	27840-01
1-3, 5-6, 16-18	Monteringssats kryssdelspaket	25765		Kryss kort 50 cm kompl mod 4	27842-01
4	Krysspinnne 35 cm	25148	16	Skruv M6x25 svkr esloc 8.8	
	Krysspinnne 40 cm	25150		DIN 912	11636
	Krysspinnne 45 cm	25152	17	Bricka 25x10x1,5 svart	50281
	Krysspinnne 50 cm	25451	18	Kryssled	20322
5	Ändstopp sitsrör	50406			
6	Skruv B8x16RXS svkr	11401			
7	Skruv M6x55 MC6S 12.9 svkr	11351			
8	Kryssdelsbricka	20383			
9	Bricka 6.4x14x1.5 DIN 134 svkr ..	51028			
10	Kupolmutter M6 DIN 956				
	nylonlås svkr	12005			
11	Skruv M5x35 MC6S 12.9 fzb	11290			
12	Ledhylsa 5/6/1.5 PA	50285			
13	Låsmutter M5 DIN 985-6 svkr	12036			

Ryggrör fasta körhandtag

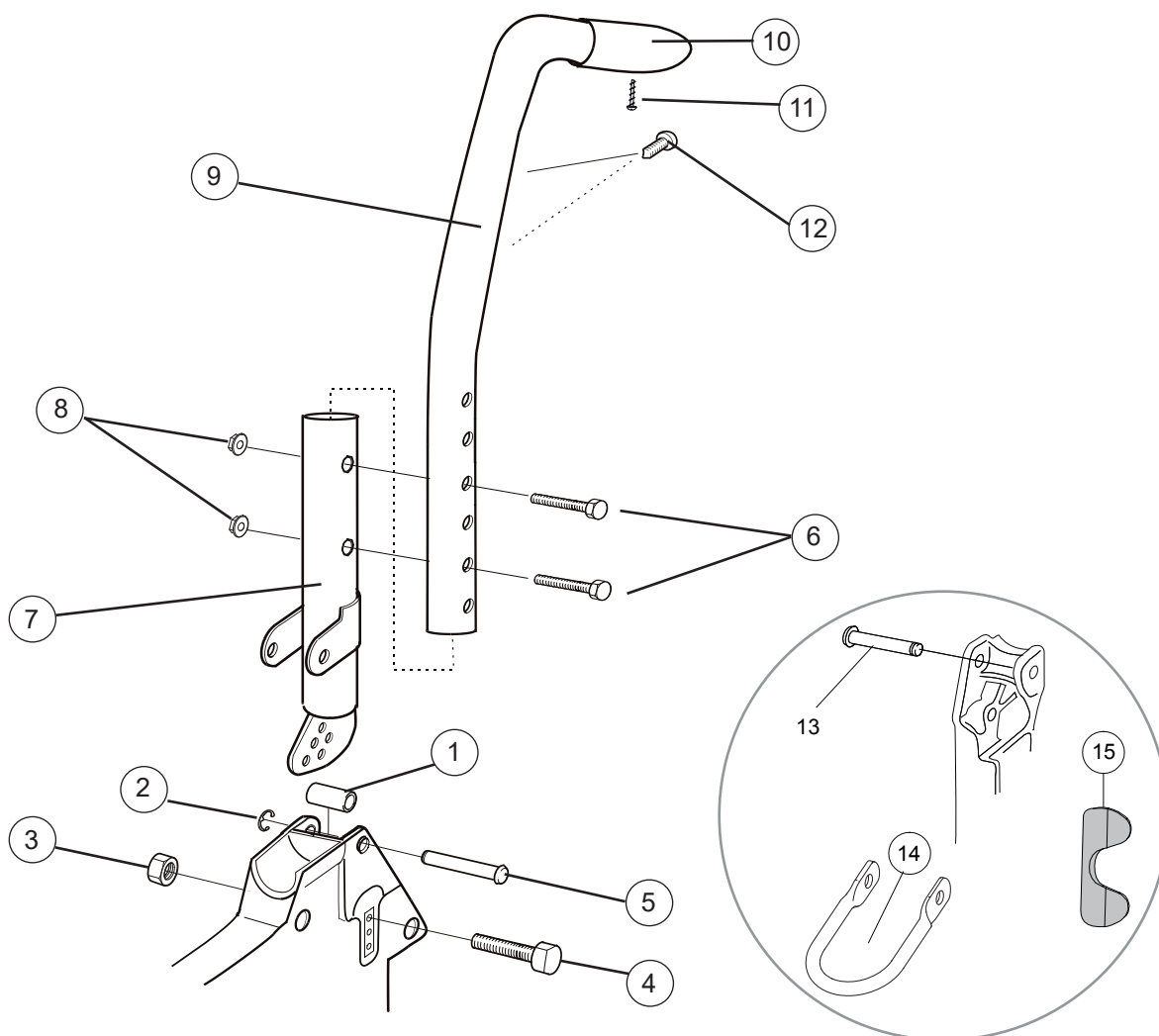


Pos	Benämning	Art nr
1	Ledstöd rygg	20319
2	Spärryttare RSM 6 rfr	13036
3	Låsmutter M6 fzb	12017
4	Skruv M6x18 fzb	11449
5	Axel ryggled	20318
6	Skruv M5x30 M6S FZB	11403
7	Ryggrörsfäste Transit	25722-01
8	Låsmutter M 5 M6MF	12060
9-11	Ryggrör med körhandtag Transit	27344-01
10	Handtagsklädsel std.....	82221
11	Skruv B 8 x 16	11041
12	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208
12-15	Transportfäste kompl.	26910
13	Axel	20416
14	Transportfäste	81980
15	Skydd säkerhetsbälte	50871

Benstöd

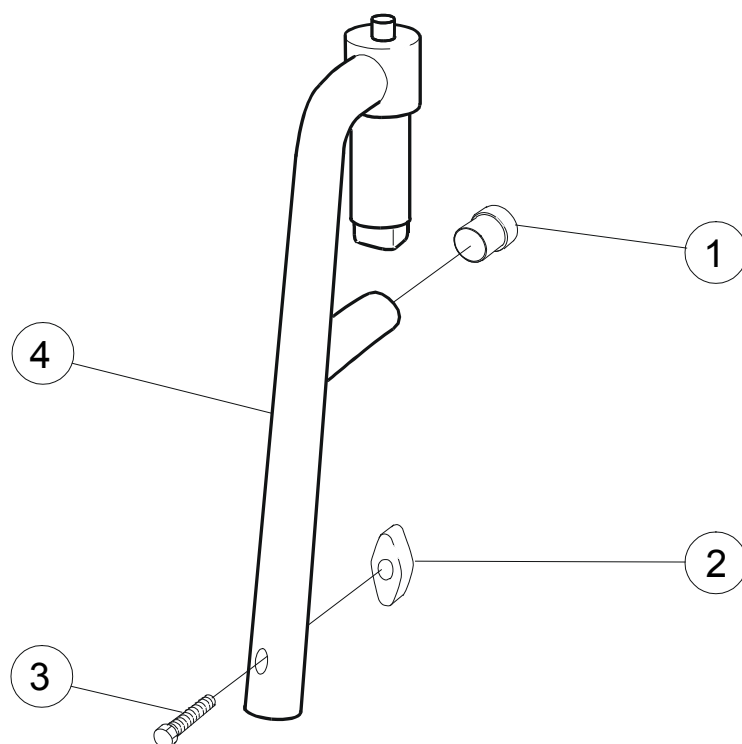


Pos	Benämning	Art nr
1-4	Benstöd vid vinkel lb	25575-01
	Benstöd snäv vinkel kort lb.	25572-01
1	Ändavslutning 16x1 svart	50240
2	Ratt inv M6	80847
3	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb DIN 931	11555

Fotstöd

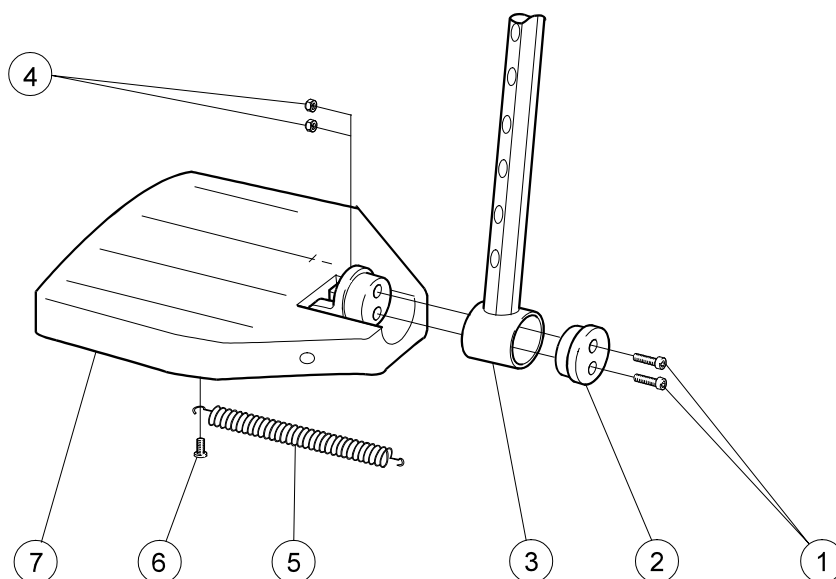


Pos	Benämning	Art nr
1	Skruv M6x25 MC6S 8.8 fzb	11033
2	Fästback fotplatta plast	20324
3	Infästningsrör fotplatta std.....	81997
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017
5	Fjäder fotplatta plast	80619
6	Skruv K40x8 PT-KX PHIL WN 1442 fzb	11344
1-7	Fotplatta std 35 cm hö	25641-1
	Fotplatta std 35 cm vä	25641-2
	Fotplatta std 40 cm hö.....	25643-1
	Fotplatta std 40 cm vä	25643-2
	Fotplatta std 45 cm hö.....	25645-1
	Fotplatta std 45 cm vä	25645-2
	Fotplatta std 50 cm hö.....	25646-1
	Fotplatta std 50 cm vä	25646-2
	(Fotplatta med kort infästningsrör -8 cm)	
	Fotplatta kort 35 cm hö mod 2	25653-1
	Fotplatta kort 35 cm vä mod 2	25653-2
	Fotplatta kort 40 cm hö mod 2	25655-1
	Fotplatta kort 40 cm vä mod 2	25655-2
	Fotplatta kort 45 cm hö mod 2	25657-1
	Fotplatta kort 45 cm vä mod 2	25657-2
	Fotplatta kort 50-60 cm hö mod 2	25658-1
	Fotplatta kort 50-60 cm vä mod 2	25658-2

Länkhjul 57 mm navbredd

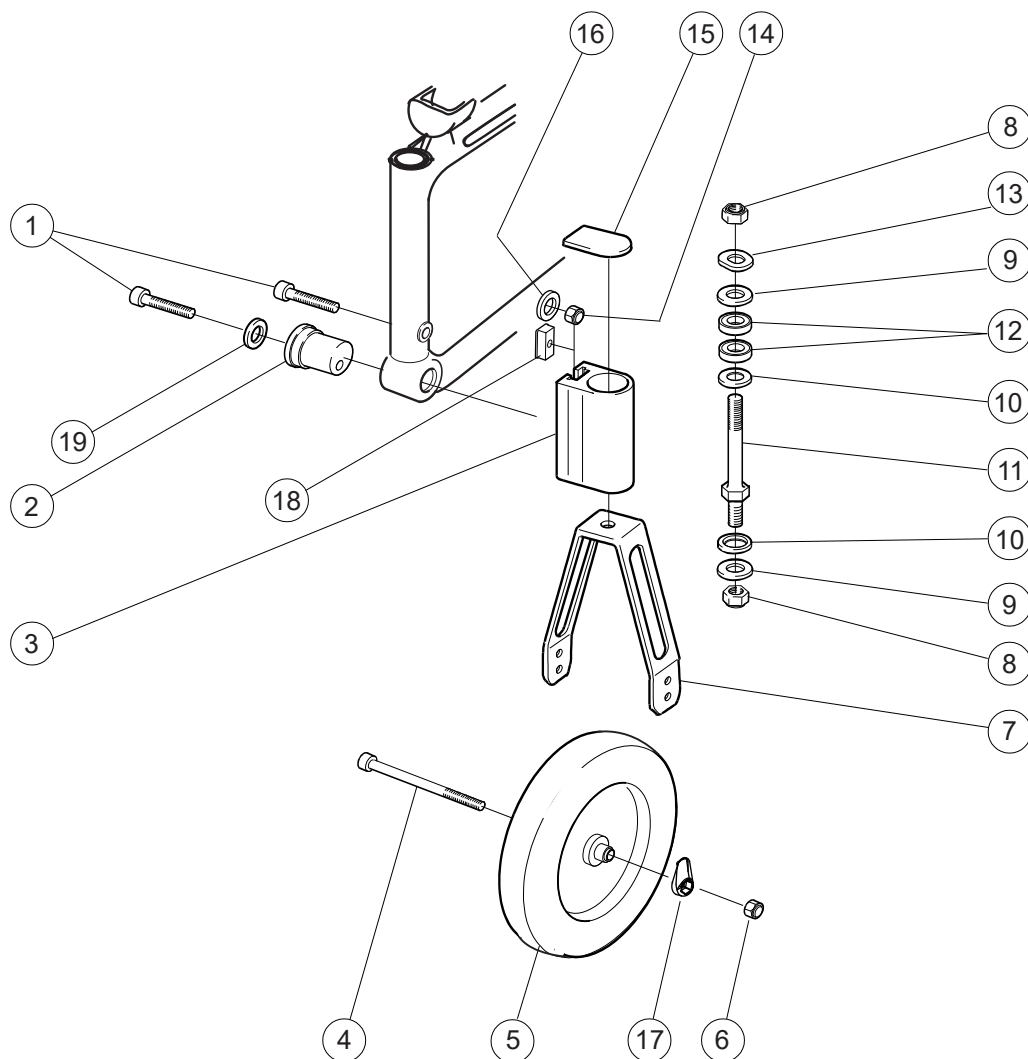


Pos	Benämning	Art nr	Pos	Benämning	Art nr
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 svkr	11305	7	Framgaffel Transit 8x2	25889-01
2	Excenterhylsa vågig.....	81994	8	Låsmutter låg svkr	12077
3,			9	Bricka BRB 13.5 svkr	13031
8-10,	Framgaffelfäste 6063 HIT T6 4104-06.	28147	10	Bricka 12.7x24x2.5 med fas	13032
12-16,	Framgaffelfäste breddat.....	25763	11	Axel framgaffel stål	83128
18			12	Kullager EE4 2RS	80244
4-6+17	Länkhjul 8 200x50 massivt mjukt	27868	13	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040
	Länkhjul 7 175x45 massivt mjukt.....	27867	14	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051
4	Skruv M6x75 MC6S 12.9 svkr	11338	15	Lock framgaffelfäste	50224
5	Länkhjul		16	Bricka BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001
6	Låsmutter M6 DIN 985-6 svkr	12035	17	Skydd hjulaxel	51284
7-11	Framgaffel Transit 8x2.....	27874	17	Skydd hjulaxel (50st)	27954
			18	Spårnutter	82922
			19	Bricka	13092

Länkhjul 45 mm navbredd

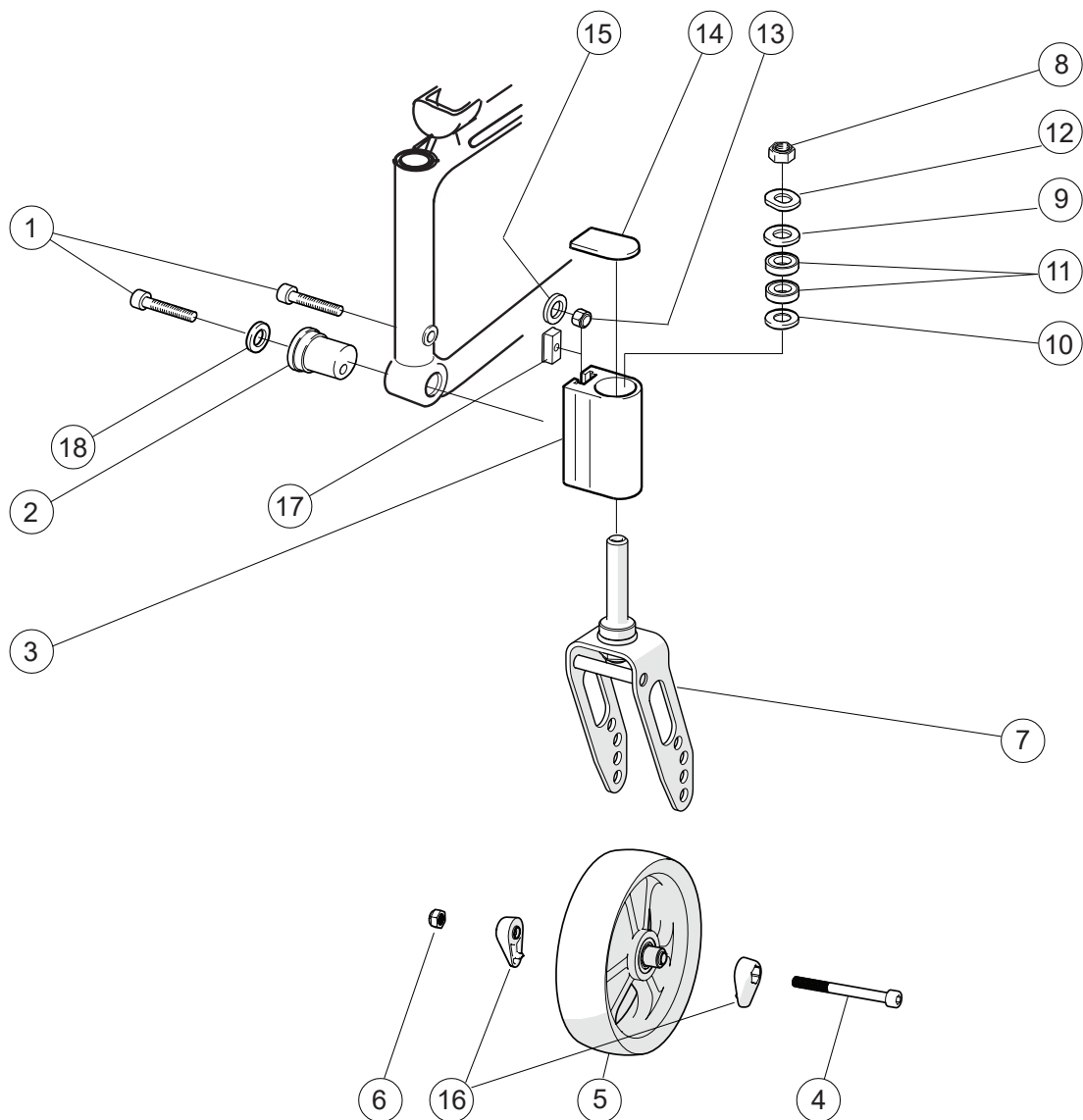


Pos	Benämning	Art nr	Pos	Benämning	Art nr
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 svkr	11305	10	Bricka 12.7x24x2.5 med fas	13032
2	Excenterhylsa vågig	81994	11	Kullager EE4 2RS	80244
3	Framgaffelfäste 6063 HIT T6 4104-06. Framgaffelfäste breddat	80606 80899	12	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040
5-6+16	Länkhjul 8" 200x38 kpl	28526	13	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051
	Länkhjul 7 175x34 kpl	24045	14	Lock framgaffelfäste	51220
4	Skruv M6x 60 MC6S Zn8/P4 sv 12,9 ...	11408	15	Bricka BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001
5	Länkhjul		16	Skydd hjulaxel	51284
6	Låsmutter M6 DIN 985-6 svkr	12035	16	Skydd hjulaxel (50st)	28966
7	Framgaffel stål M m axel	28969	17	Spårnutter	82922
8	Låsmutter låg svkr	12077	18	Bricka	13092
9	Bricka BRB 13.5 svkr	13031			

Armstöd

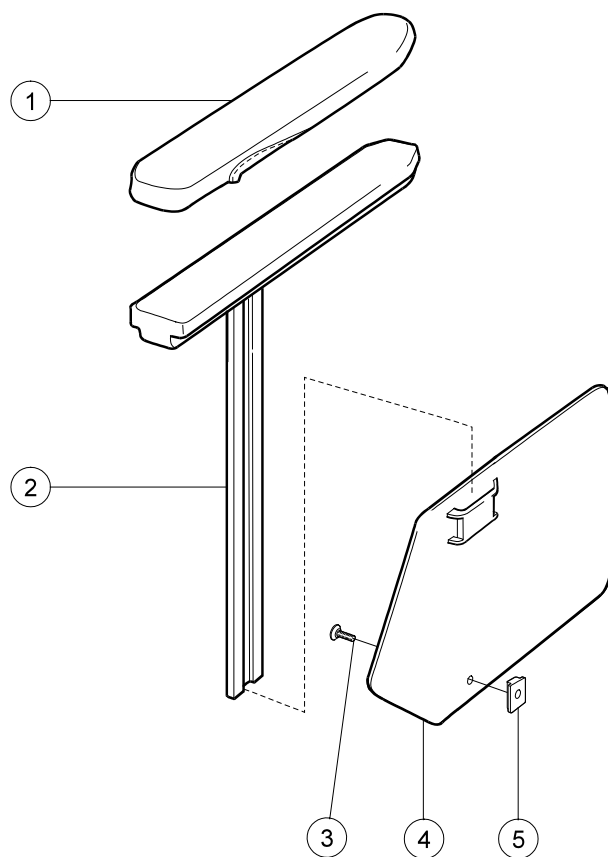

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Armstödsdyna polstrad kort mörkgrå	62282-60
	Armstödsdyna polstrad lång mörkgrå	62283-60
	Armstödsdyna gel kort kompl	26240-60
	Armstödsdyna gel lång kompl	26241-60
	Armstödsdyna polstrad kort Dartex	62282-63
	Armstödsdyna polstrad lång Dartex	62283-63
	Armstödsdyna gel kort kompl Dartex	26240-63
	Armstödsdyna gel lång kompl Dartex	26241-63
2-5	Armstöd Cross kort hö L 25 cm	25172-1
	Armstöd Cross kort vä L 25 cm	25172-2
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-1
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-2
3	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237
4	Skyddskiva nylon hö	50316
	Skyddskiva nylon vä	50317
5	Stopplack armstöd 6005 T6 SS 4107-06	80661


Sitsklädsel

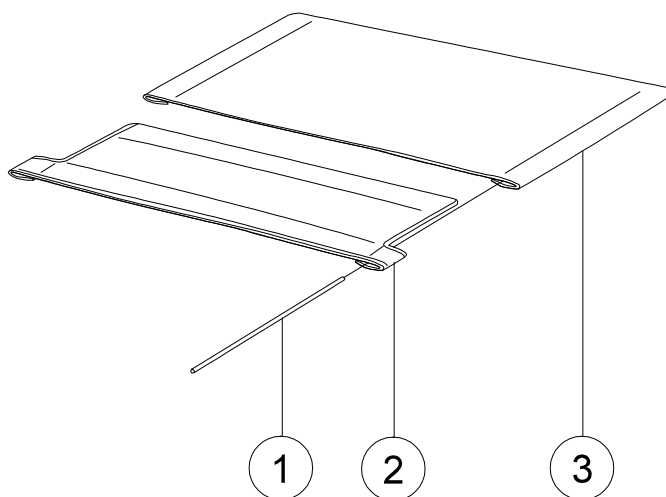

Pos	Benämning	Art nr
1	Markispinne L381 sitsklädsel kort	80617
2	Klädsel sits kort 35 cm svart	62718-60
	Klädsel sits kort 40 cm svart	62720-60
	Klädsel sits kort 45 cm svart	62722-60
	Klädsel sits kort 50 cm svart	62979-60


Ryggklädsel

Fast

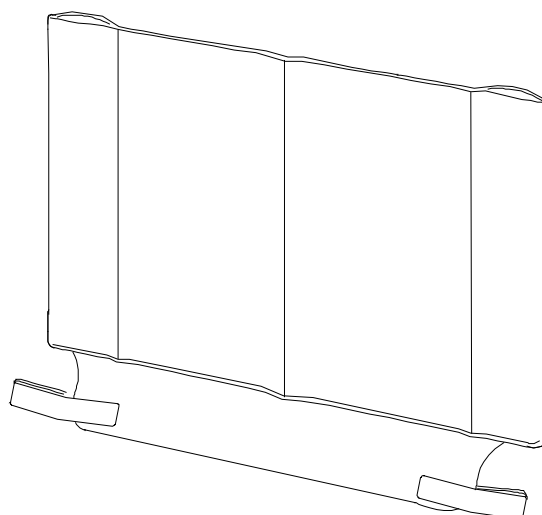

Pos	Benämning	Art nr
1	Klädsel rygg Twin fast hrb	62381-70
	Klädsel rygg Twin fast hrb	62382-70
	Klädsel rygg Twin fast hrb	62383-70
	Klädsel rygg Twin fast hrb	62384-70

Ryggklädsel

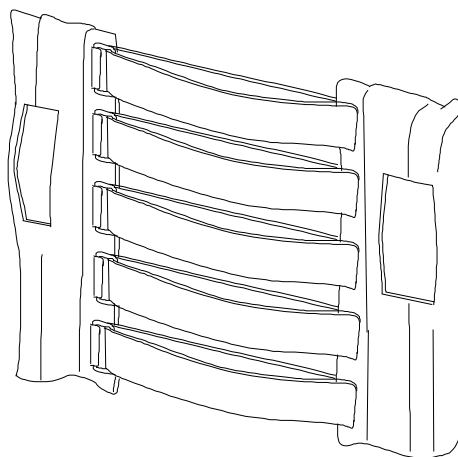


Benämning

Art Nr

Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb 35/37.5 cm hane kardborre.....	63323-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb 40/42.5 cm hane kardborre.....	63324-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb 45/47.5 cm hane kardborre.....	63325-60
Klädsel rygg M100/Tr/Tw rb 50/52.5 cm hane kardborre.....	63326-60

Ryggöverdrag

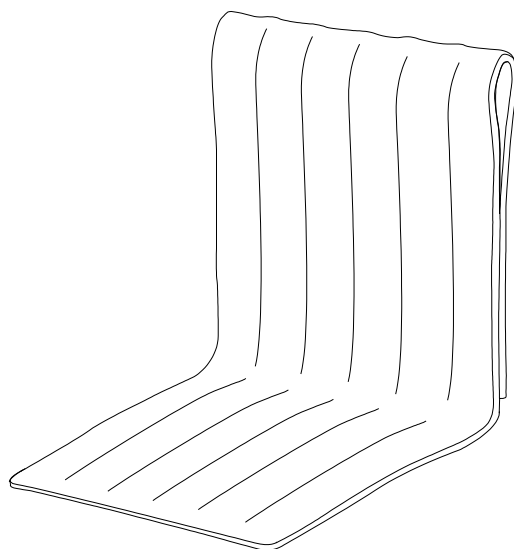


Benämning

Art Nr


Överdrag rygg 35 cm mörkgrå	62135-60
Överdrag rygg 40 cm mörkgrå	62136-60
Överdrag rygg 45 cm mörkgrå	62137-60
Överdrag rygg 50 cm mörkgrå	62305-60

Vårdarbroms fasta körhandtag

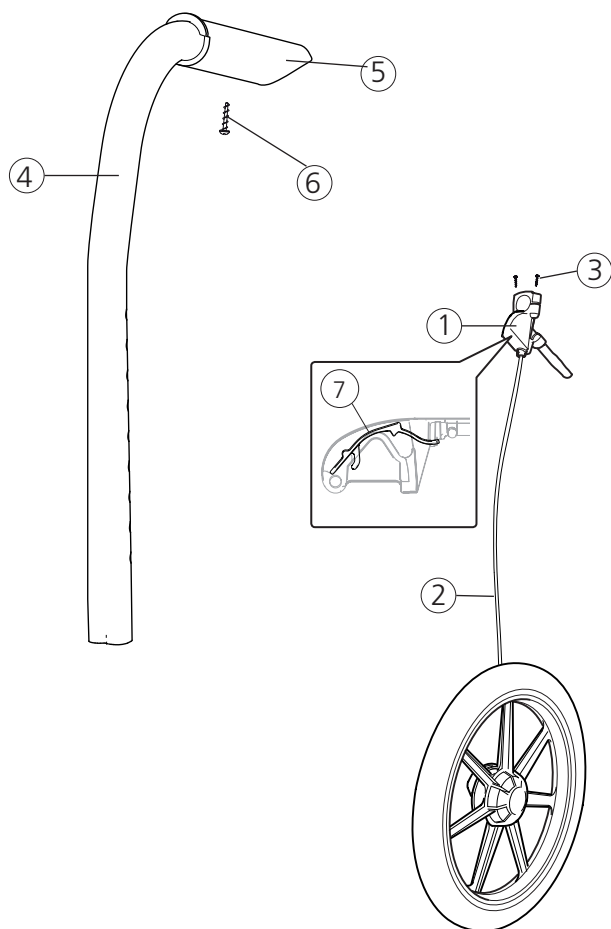


Pos	Benämning	Art nr
1-3	Bromspaket Transit	26001
1	Bromshandtag vårdarbroms 100 mm	82585
2	Vajerpaket vrb Transit	81935
3	Skruv DG 50 x20 WN.....	11504
4-6	Ryggrör med körhandtag handtagsklädsel vb	27345-01
4	Ryggrör med körhandtag Transit	27343-01
5	Handtagsklädsel vårdarbroms	82004
6	Skruv B 8 x 16	12060
7	Vajerlås bromshandtag 100 mm 10 pack	82854

Vårdarbroms hrb körhandtag

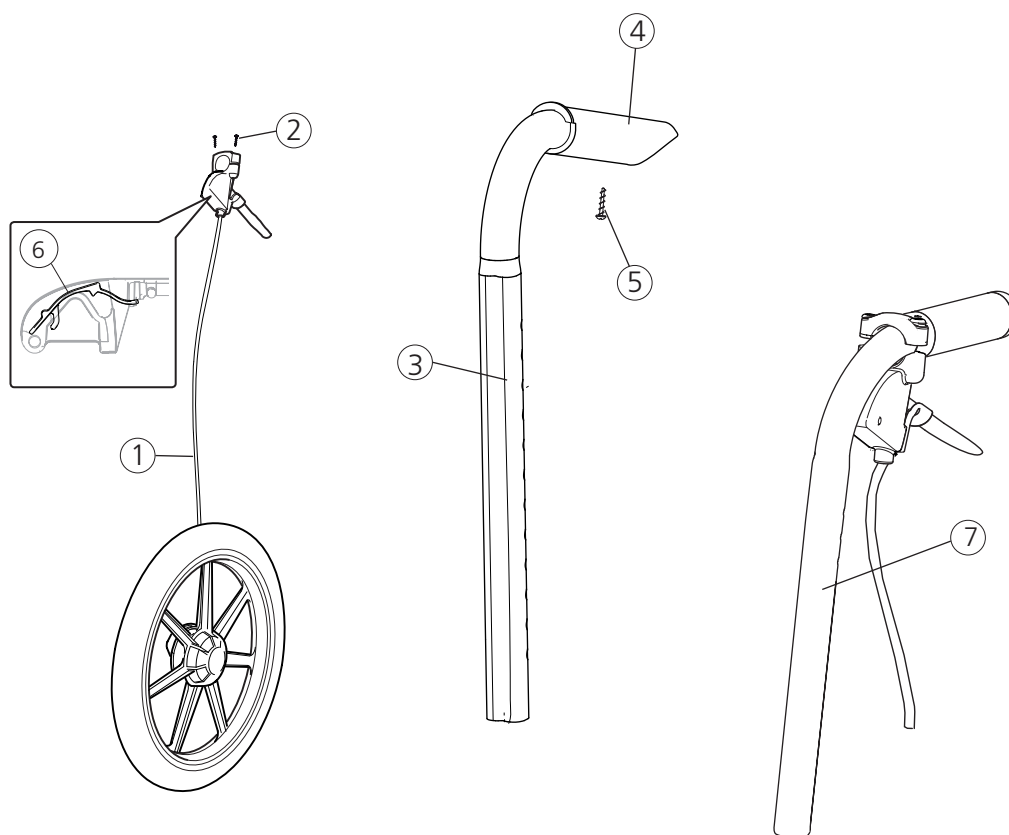


Pos	Benämning	Art nr
1	Vajerpaket vrb Transit för hrb körhandtag	81805
2	Skruv DG 50 x20 WN.....	11504
3-5	Ryggrör med körhandtag handtagsklädsel vb	27345-01
3	Körhandtag hrb inkl snäplås	27298
4	Handtagsklädsel vårdarbroms 75 mm	82004
5	Skruv B 8 x 16	12060
6	Vajerlås bromshandtag 100 mm 10 pack	82854
7	Körhandtag hrb Cross VB 100 mm grepp inkl vajerpaket	27625-01

Brukarbroms

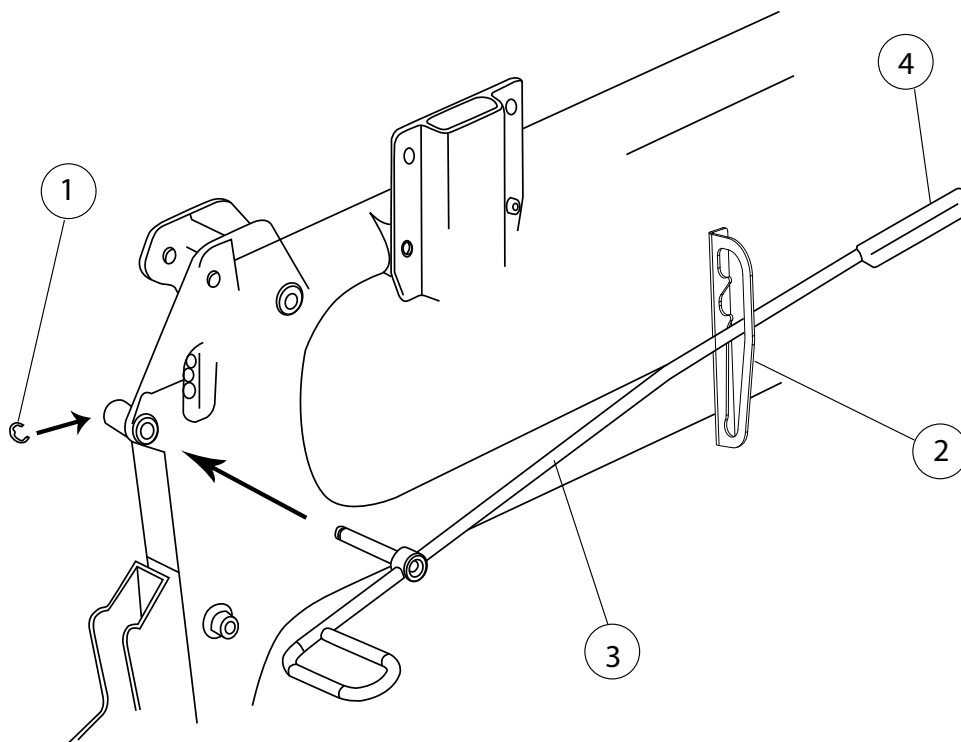


Pos	Benämning	Art nr
1-4	Brukarbroms Transit 16" kompl sats hö	25970-1
	Brukarbroms Transit 16" kompl sats vä	25970-2
1	Spårryttare RSM 6 rfr	13036
2	Jalusiplåt brukarbroms Transit hö	80914
	Jalusiplåt brukarbroms Transit vä	80915
3	Bromsarm brukarbroms Transit	80919
4	Handtag broms svart	50188

Bord

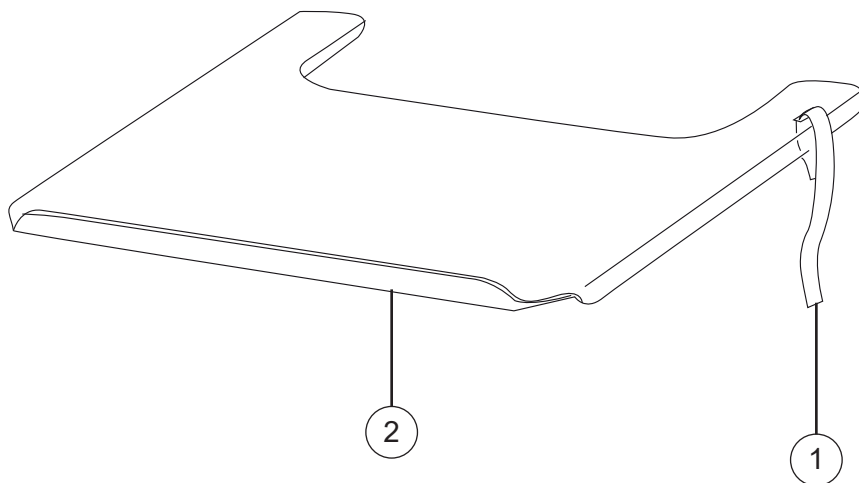


Pos	Benämning	Art nr
1	Fixeringsband bord 27.5-50 cm	62103
1-2	Bord 45 cm för stol 35 cm kompl	24417
	Bord 50 cm för stol 40 cm kompl	24418
	Bord 55 cm för stol 45 cm kompl	24419
	Bord 60 cm för stol 50 cm kompl	24601

Hemibord

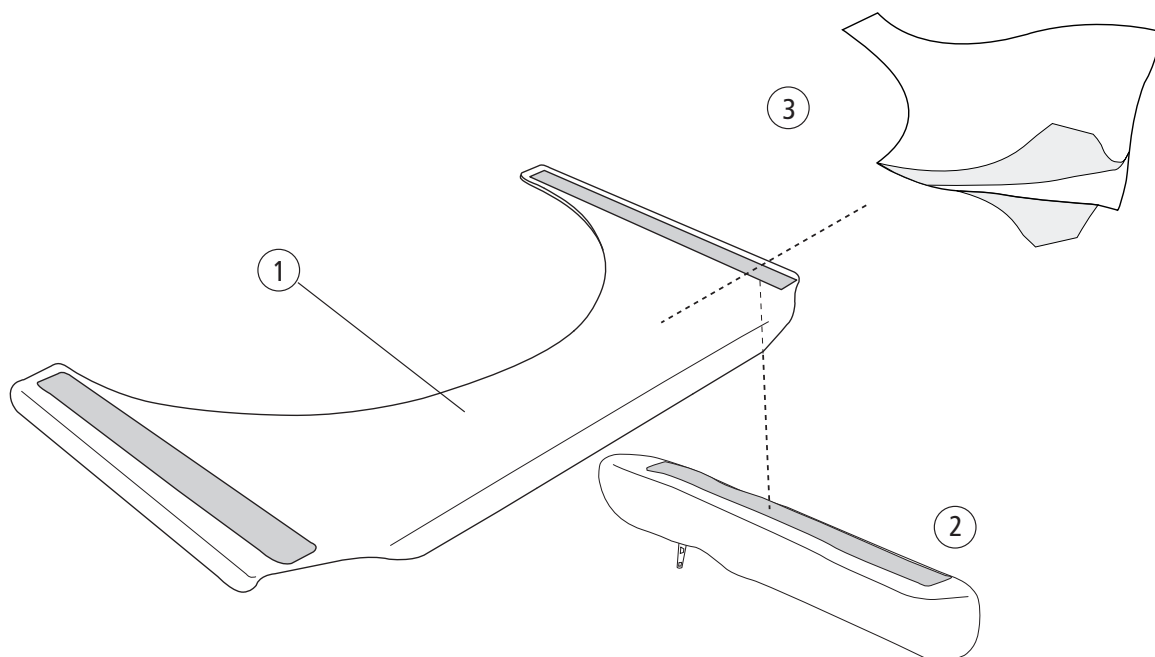


Pos	Benämning	Art nr
2	Armstödsdyna kort hemibord	81631
	Armstödsdyna lång hemibord	81632
3	Halkskydd hemibord 35-40 cm	81633
	Halkskydd hemibord 42,5-50	81634
1-2	Hemibord 45 cm för stol 35 cm kort armstödsdyna kompl	26556
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm kort armstödsdyna kompl	26558
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm kort armstödsdyna kompl	26560
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm kort armstödsdyna kompl	26562
	Hemibord 45 cm för stol 35 cm lång armstödsdyna kompl	26563
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm lång armstödsdyna kompl	26565
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm lång armstödsdyna kompl	26567
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm lång armstödsdyna kompl	26569

Tippskydd

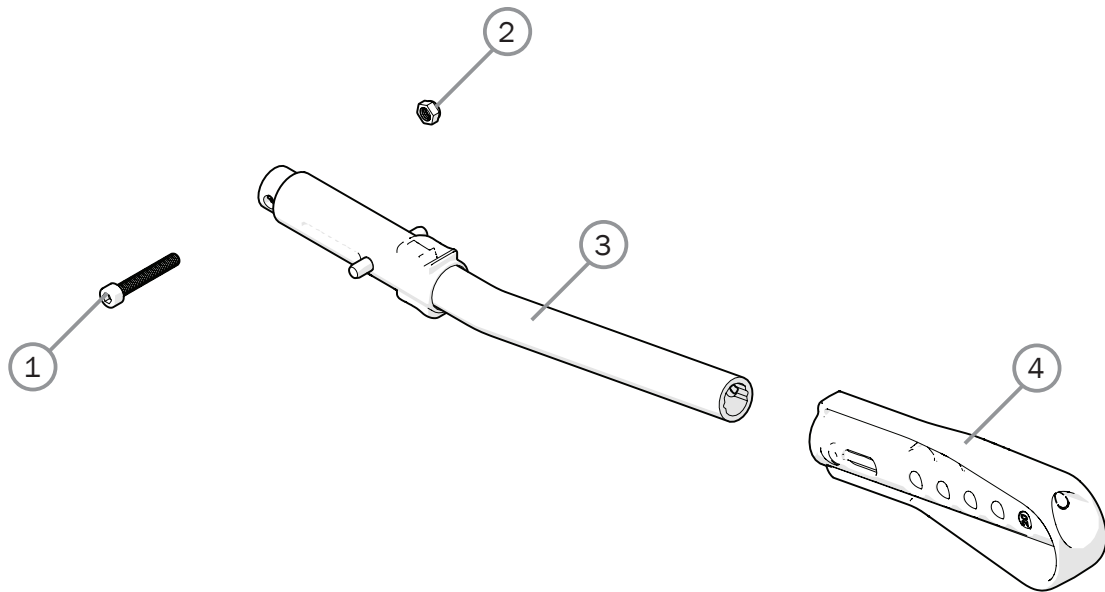


Pos	Benämning	Art nr
1-4	Tippskydd multi Transit III Cross 2 Next cc 66 kpl	28458
1	Tippskyddsror teleskop multi.....	51201
2	Tippskydd multi cc 66	
3	Skruv M6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229
4	Låsmutter M6	12017

Käpphållare Universal

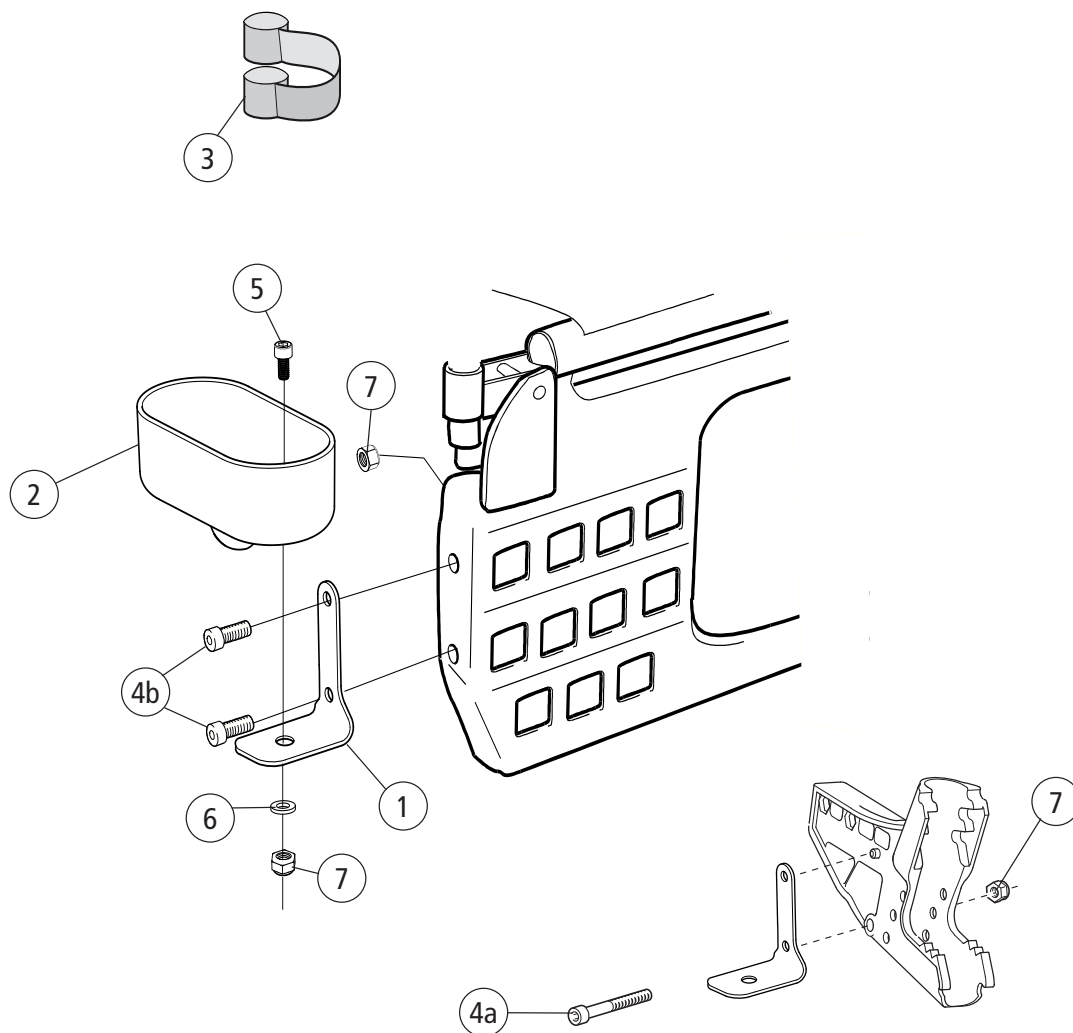

Pos	Benämning	Art nr
1-7	Käpphållare universal.....	27327
1	Fästplåt käpphållare.....	82390
2	Käpphållare M100.....	50866
3	Resårband Cross svart.....	80621
4a	Skruv M6 x 40 MC6S 10,9 fzb.....	11229
4b	Skruv M6 x 20 MC6S.....	11392
5	Skruv M6 x 12 MC6S 8,8 fzb.....	11577
6	Bricka 6,4 x 14 x 1,5.....	13058
7	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb.....	12017

Höftbälte

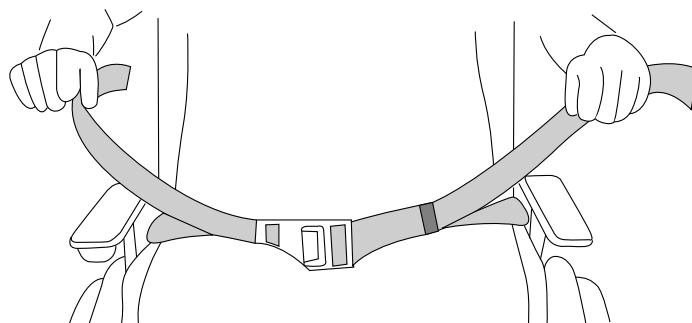

Pos	Benämning	Art nr
1	Höftbälte Cross/Twin kompl	25668