


DUSJVOGN GK PRIMUS 2000 ELEKTRISK

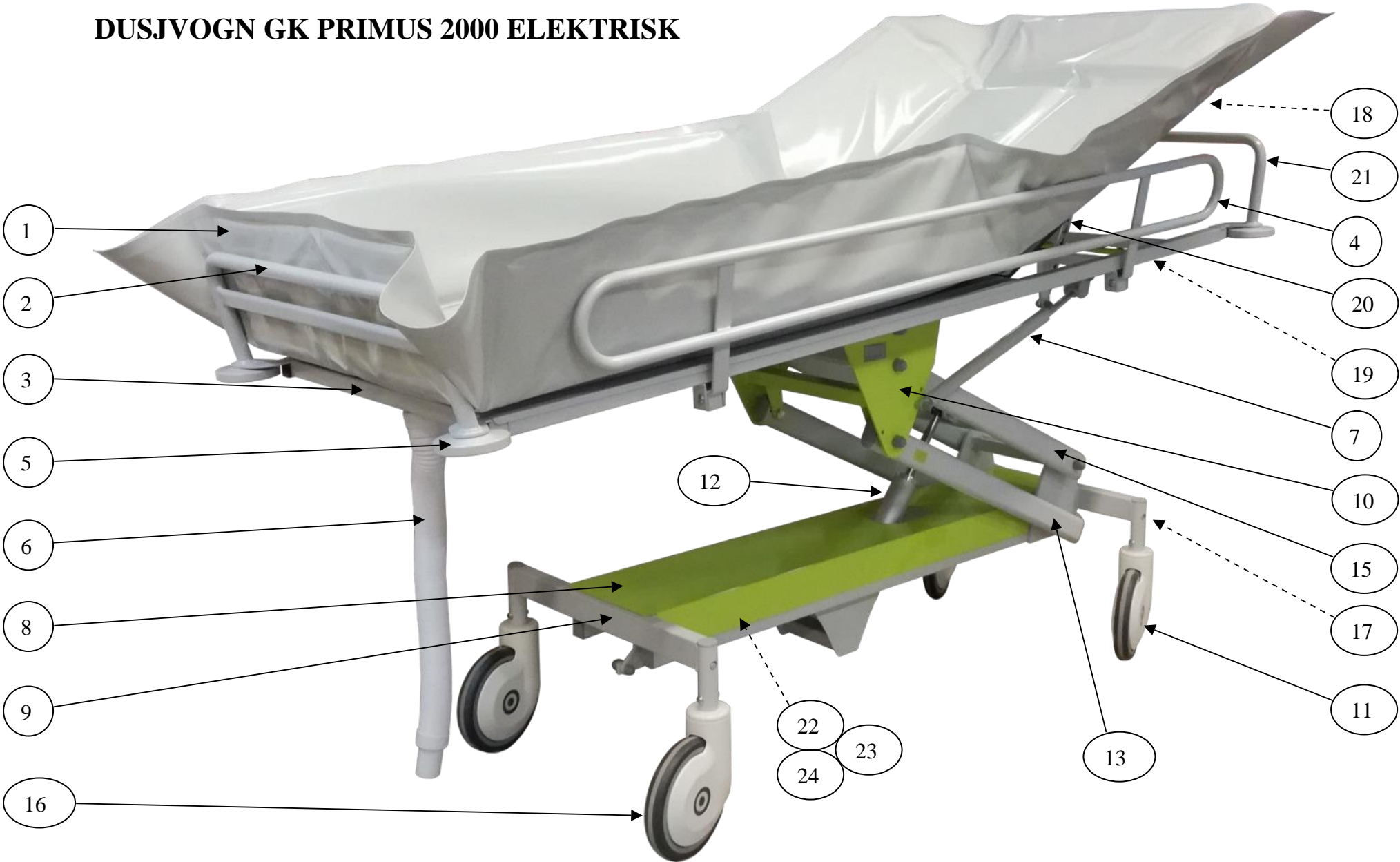

Nøkkel: —————> Synlige elementer - - - - -> Skjulte elementer

Reservedelsliste GK PRIMUS 2000 elektrisk

No.	Art. No.	Beskrivelse
1	GK730008	Madrass GK Primus 2000
2	GK730009	Side støtte kort – fot ende
3	GK730012	Ligge flate
4	GK730014	Side støtte lang
5	GK730005	Avviserhjul (4 stk)
6	GK730010	Avløpsslange inkl. sluk og gummi propp
7	GK730015	Gassfjær
8	GK730016	Understell beskytter plate
9	GK730017	Understell
10	GK730018	Holder for liggeplate
11	GK730006	Hjul med retningssperre ø200 mm
12	GK730004	Løftemotor 24V
13	GK730019	Nedre løftearm system
15	GK730020	Øvre løftearm system
16	GK730021	Hjul ø200 mm
17	GK730022	Sentral brems system
18	GK730023	Rygg del
19	GK730024	Utløserpak for trendelenburg (sjokkleie)
20	GK730025	Rastomat for ryggdel
21	GK730011	Side støtte kort – hode del
22	GK2700-70	Batteri pakke
23	GK522300	Elektronikk boks 24V
24	GK214002	Håndkontroll
27	GK522500	Lader for veggmontering
29	GK730003	Hodestøtte pute GK Primus