


Etac Twin

Etac Twin VB

Reservdelslista

74144H 2014-09-04

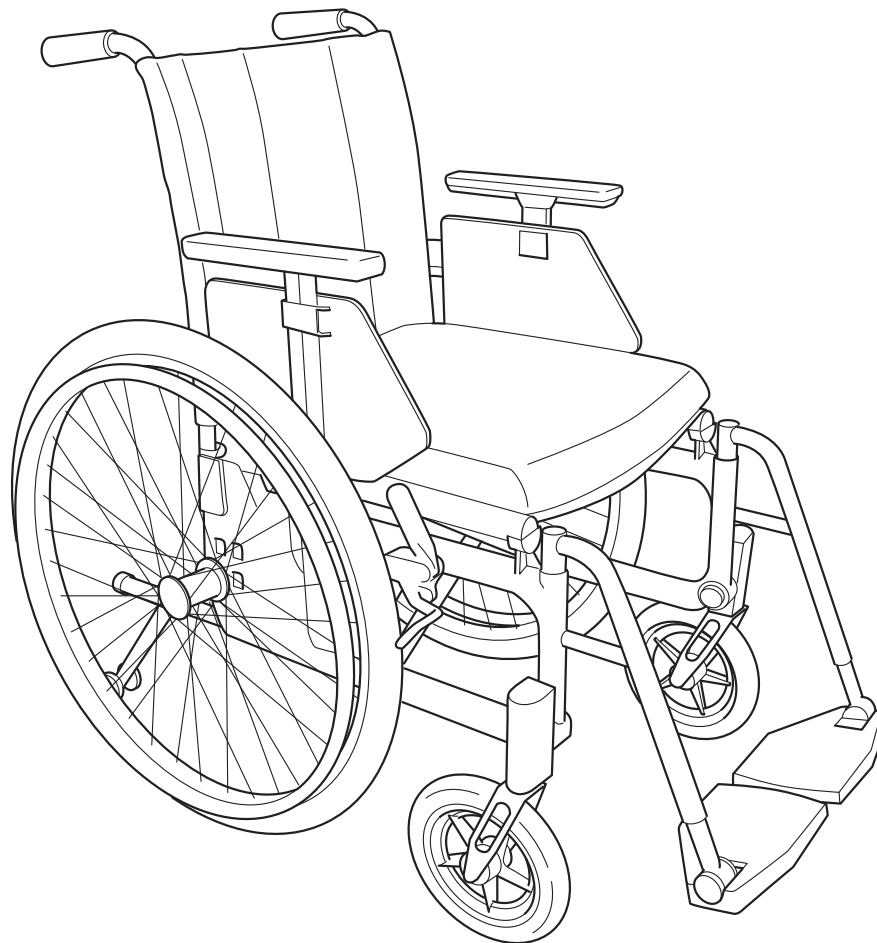

Innehåll

Innehåll	Sidan
Gavel	3
Kryss	4
Ryggrör Twin	5
Ryggrör med reglerbara körhandtag	6
Ryggrör vinklad rygg	7
Benstöd	8
Fotstöd	9
Broms	10
Drivhjul kompletta	11
Drivhjul utan slang och däck	12
Däck och slang	13
Drivring	14
Länkhjul	15
Sitsklädsel	16
Ryggklädsel	17
Vårdarbroms	18
Bord	19
Hemibord	20
Tippskydd	21-22
Tramprör	23
Ekerskydd/Höftbälte	24
Käpphållare	25


Färgkoder rammar:

30=blå struktur, 34=plommon struktur

Klädselar:

70=svart tygklädsel


Gavel

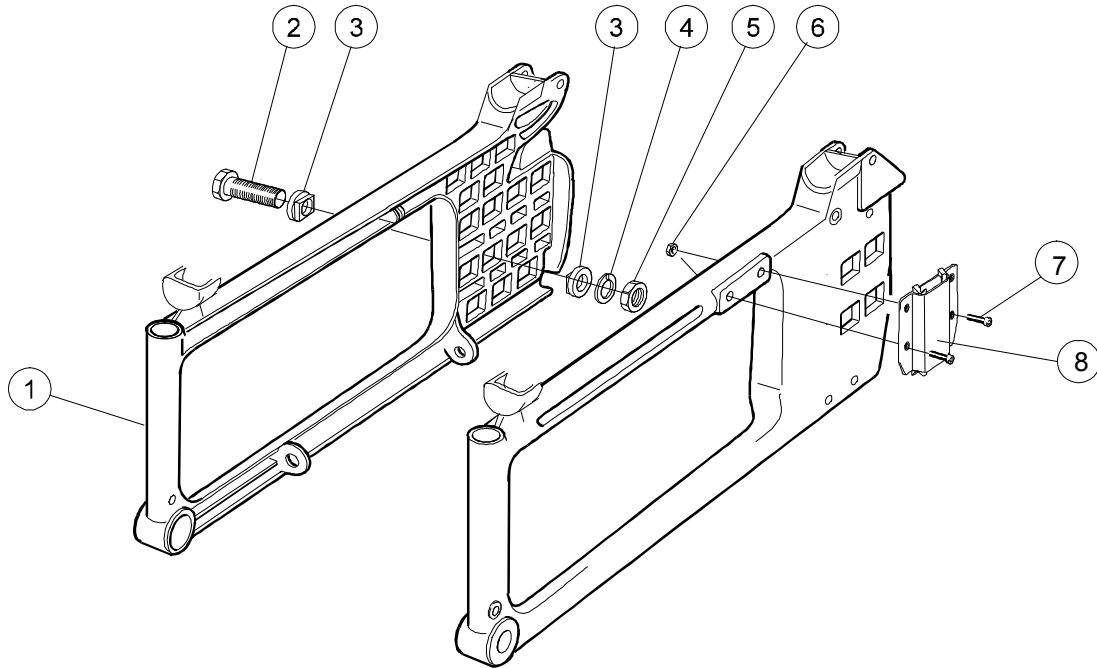

xx=Ange färgkod, se sidan 2


Pos	Benämning	Art nr
1, 6-8	Gavel kort höger	25618-xx-1
	Gavel kort vänster	25618-xx-2
2	Navhylsa delgångad	20079
3	Camberbricka 2°	80594
4	Bricka FBB M16 fzb	13039
5	Mutter 5/8" UL6M UNF fzb	12016
6	Låsmutter M6 DIN 985-6 svkr	12035
7	Skruv M6x20 MC6S 8.8 svart	11392
8	Armstödsfäste	25535

Kryss

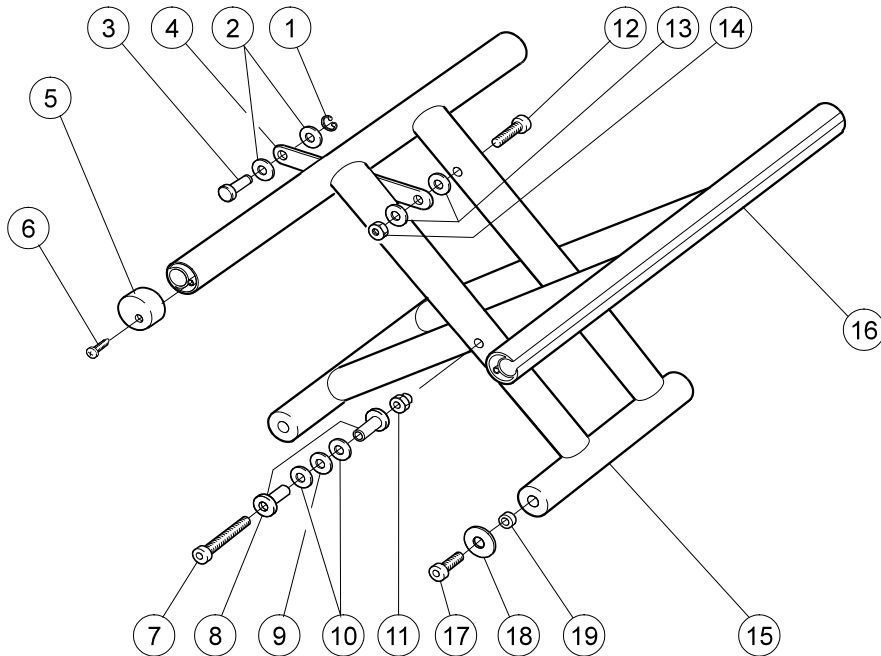


Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Spårryttare RSM 4 rfr	13054	13	Ledhylsa 5/6/1.5 PA	50285
2	Ledhylsa 5/6/1.5 PA	50285	14	Låsmutter M5 DIN 985-6 svkr	12036
3	Axel krysspinn	20332	15		
1-3, 5-6, 17-19	Monteringssats kryssdelspaket	25765	4-16	Kryss kort 35 cm kompl mod 4	27832-01
4	Krysspinn 35 cm	25148		Kryss kort 40 cm kompl mod 4	27834-01
	Krysspinn 40 cm	25150		Kryss kort 45 cm kompl mod 4	27840-01
	Krysspinn 45 cm	25152		Kryss kort 50 cm kompl mod 4	27842-01
	Krysspinn 50 cm	25451	17	Skruv M6x25 svkr esloc 8.8	
5	Ändstopp sitsrör	50406		DIN 912	11636
6	Skruv B8x16RXS svkr	11401	18	Bricka 25x10x1,5 svart	50281
7	Skruv M6x55 MC6S 12.9 svkr	11351	19	Kryssled	20322
8	Kryssdelsbricka	20383			
9	Bricka 6.4x14x1.5 DIN 134 svkr ..	13058			
10	Bricka skiffy Dy12.5 Di6.4 t1.0	50277			
11	Kupolmutter M6				
	DIN 956 nylonlås svkr	12005			
12	Skruv M5x35 MC6S 12.9 fzb	11290			

Ryggrör Twin

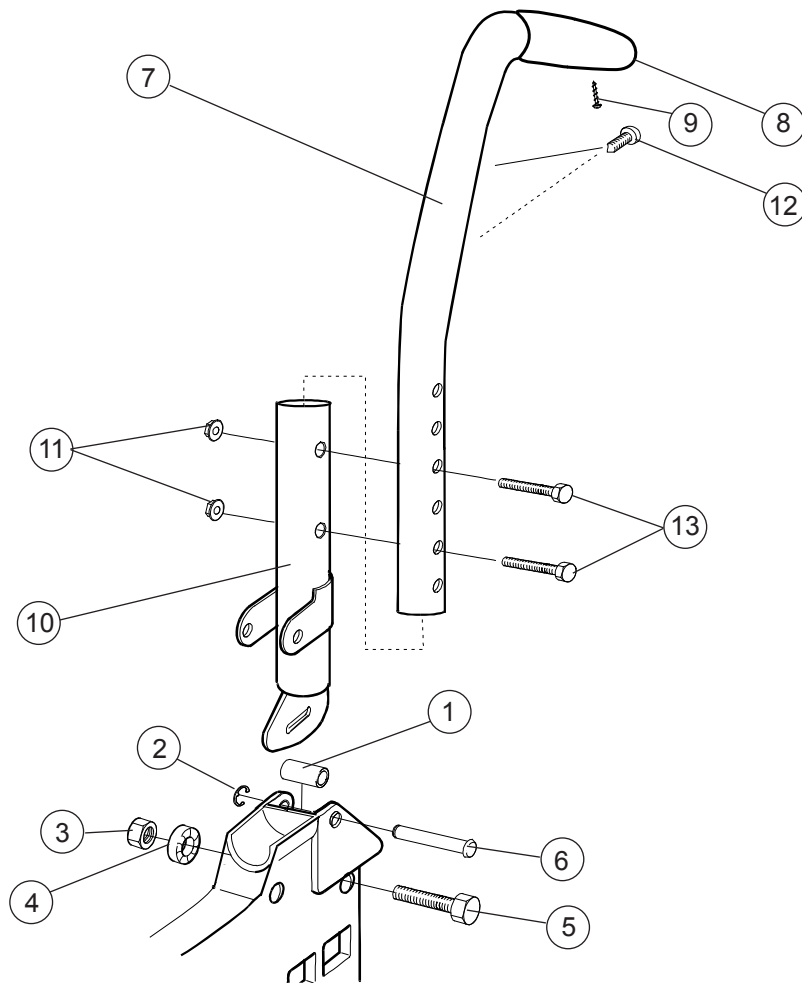


Pos	Benämning	Art nr
1	Ledstöd rygg	20319
2	Spårryttare RSM 6 rfr	13036
3	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051
4	Distans 20/8.5/9.5 rygg	20320
5	Skruv M8x1x30 10.9 Dy960/961 svart	11363
6	Axel ryggled	20318
7	Ryggrör med körhandtag	27343-01
8	Handtagsklädsel	82221
9	Skruv B 8 x 16	11041
10	Ryggrörsfäste Twin	25632-01
11	Låsmutter M5 M6MF nylonlås fzb	12060
12	Skruv M5x12 K6S 10.9 FZB	11208
13	Skruv M5x30 M6S FZB	11403

Ryggrör med reglerbara körhandtag

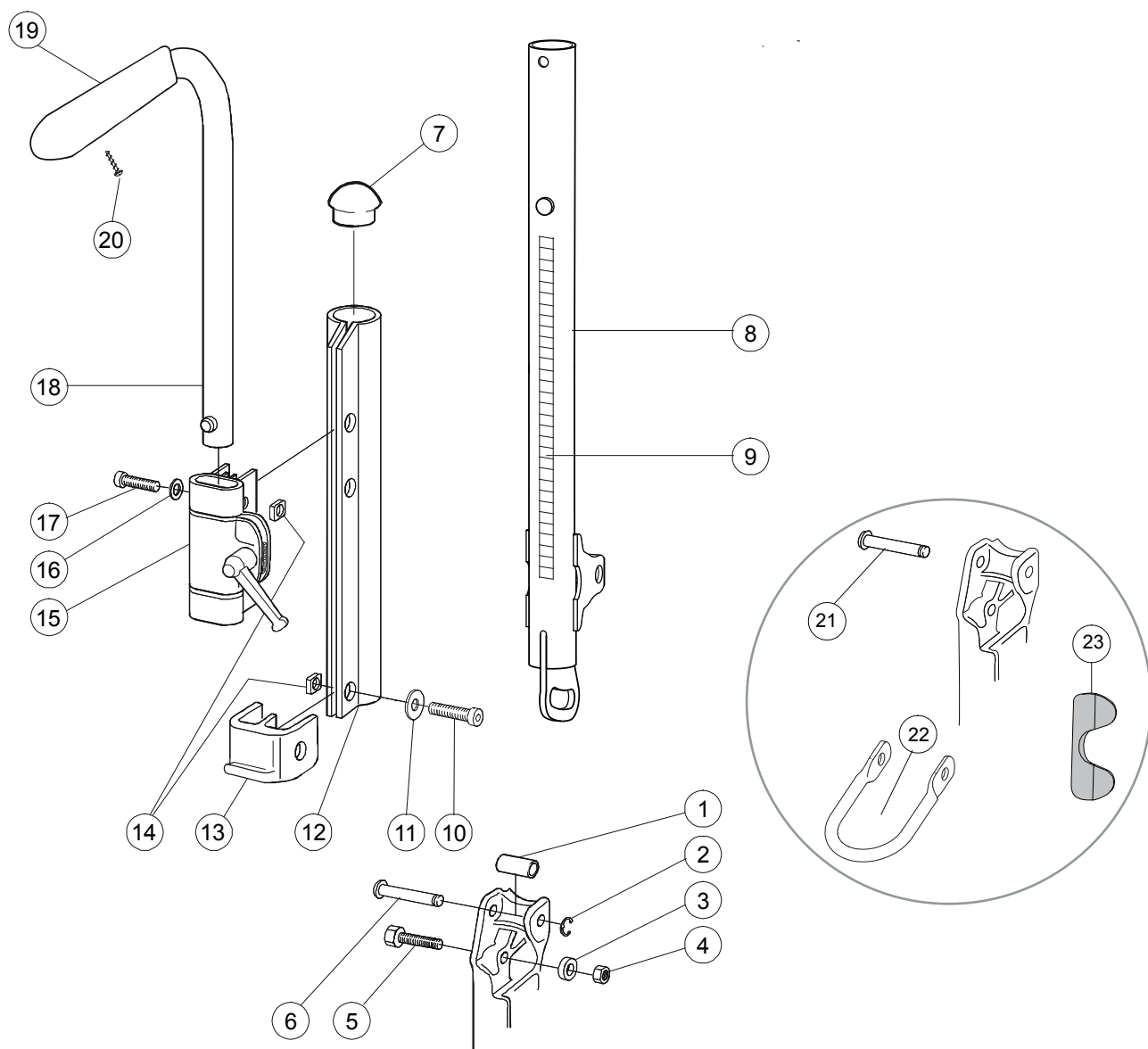



Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Ledstöd rygg	20319	14	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
2	Spårryttare RSM 6 rfr	13036	7-14	Ryggrör förmonterad hö	25609-01-1
3	Distans 20/8.5/9.5	20320		Ryggrör förmonterad vä	25609-01-2
4	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	15	Fäste körhandtag kompl	25676
5	Skruv M8x1x30 10.9 Dy960/961..	11363	16	Bricka BRB M6 svkr	13030
6	Axel ryggled	20318	17	Skruv M6x30 MC6S 8.8 svkr esl...	11398
7	Ändpropp 25-21/23 R12.5 vit	50248	18-20	Körhandtag hrb	27338-01
8	Ryggrör svart	25593-01	18	Körhandtag hrb	27298
9	Etikett höjjustering	71851	19	Handtagsklädsel M100	82221
10	Skruv M 6x 22 MC6S 8.8 fzb	11012	20	Skruv B 8x16 RTS fzb st 4.2	11041
11	Bricka BRB 6.4x10x1.5 fzb	13080	21-23	Transportfäste kompl.	26910
12	Ryggskena 6063A-T6	80851	21	Axel	20416
13	Täckkåpa hö	50405	22	Transportfäste.....	81980
	Täckkåpa vä	50407	23	Skydd säkerhetsbälte	50871

Vinklad rygg Cross

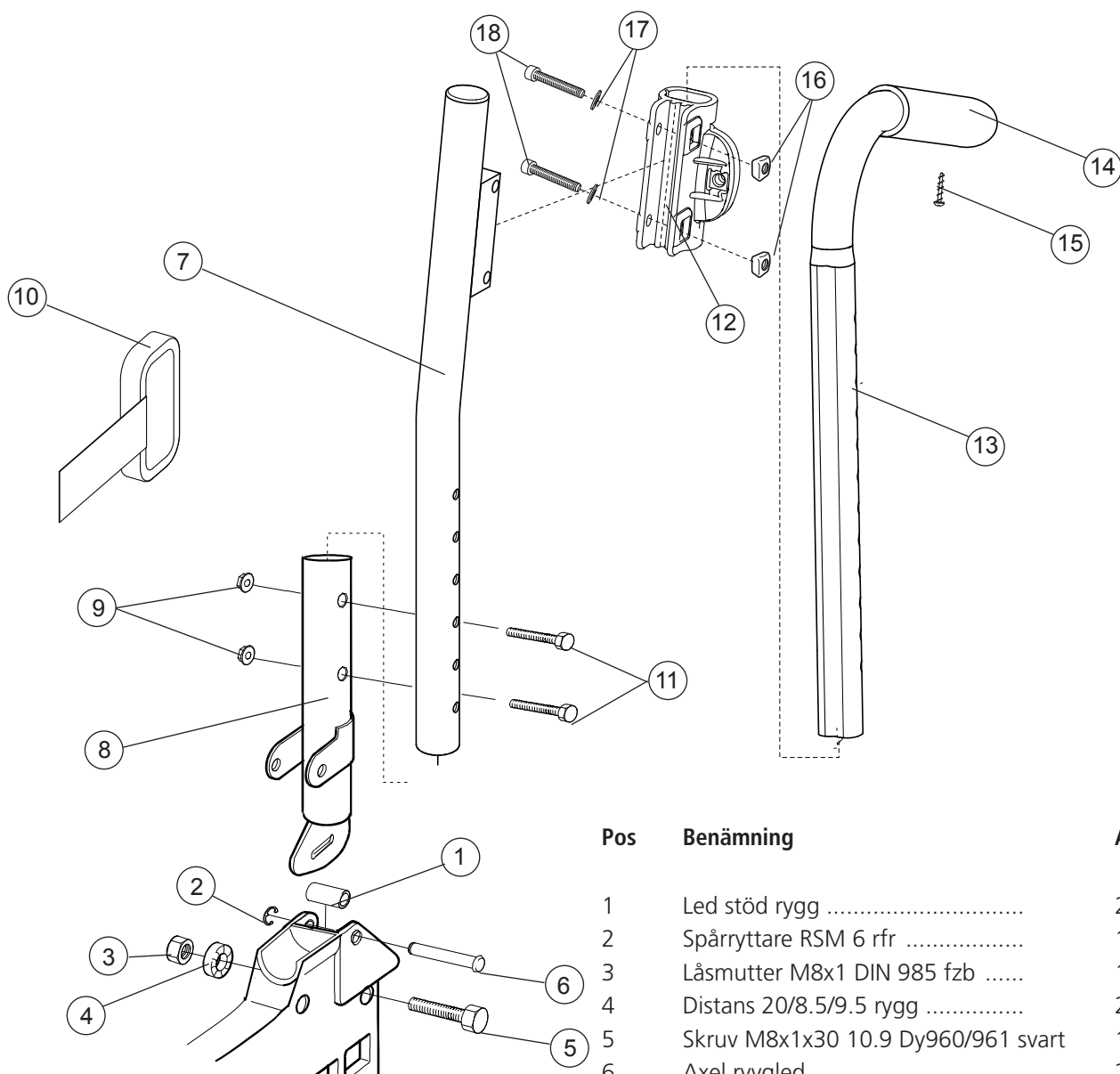


Pos	Benämning	Art nr
1	Led stöd rygg	20319
2	Spårryttare RSM 6 rfr	13036
3	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051
4	Distans 20/8.5/9.5 rygg	20320
5	Skruv M8x1x30 10.9 Dy960/961 svart	11363
6	Axel ryggled	20318
7	Fäströr körhandtag hrb Cross	26570-01
8	Ryggrörsfäste Twin	25632-01
9	Låsmutter M5 M6MF nylonlås fzb	12060
10	Skydd vinklad rygg Cross	81668
11	Skruv M5x30 M6S FZB	11403
12	Fäste körhandtag Cross	25676
13-15	Körhandtag hrb	27338-01
13	Körhandtag hrb	27298
14	Handtagsklädsel	82221
15	Skruv B 8 x 16	11041
16	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
17	Bricka BRB M 6 svkr	13030
18	Skruv M 6x 30 MC6S	11398

Benstöd

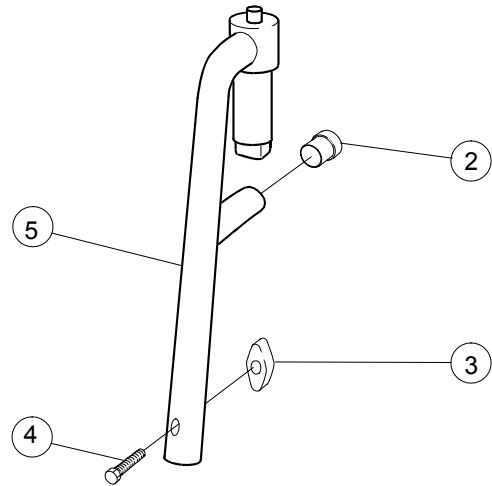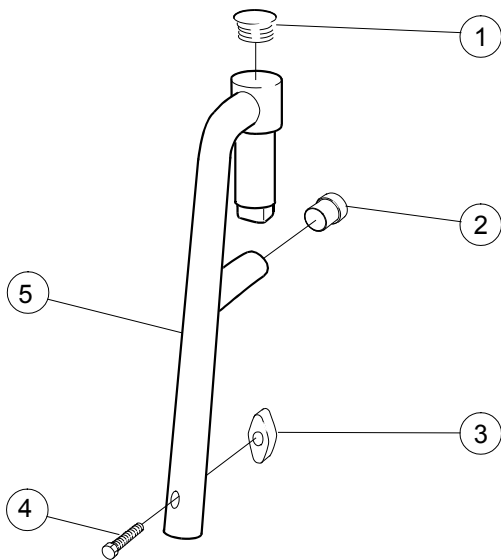


Pos	Benämning	Art nr
1	Ändavslutning SFL 20 sv	50287
2	Ändavslutning 16x1 svart.....	50240
3	Ratt inv M6.....	80847
4	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb DIN 931	11555
1-5	Benstöd vid vinkel.....	25574-01
2-5	Benstöd vid vinkel lb.....	25575-01

Fotstöd

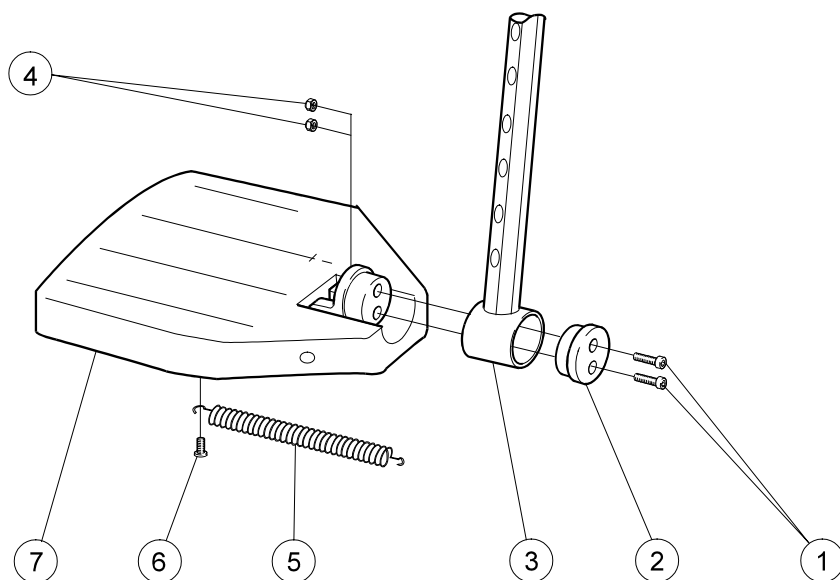

Pos	Benämning	Art nr
1	Skruv M6x25 MC6S 8.8 fzb	11033
2	Låsblock fotplatta	20324
3	Infästningsrör fotplatta vjb mod 2	81997
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017
5	Fjäder fotplatta plast	80619
6	Skruv K40x8 PT-KX PHIL WN 1442 fzb	11344
1-7	Fotplatta std 35 cm hö mod 2	25641-1
	Fotplatta std 35 cm vä mod 2	25641-2
	Fotplatta std 40 cm hö mod 2	25643-1
	Fotplatta std 40 cm vä mod 2	25643-2
	Fotplatta std 45 cm hö mod 2	25645-1
	Fotplatta std 45 cm vä mod 2	25645-2
	Fotplatta std 50 cm hö mod 2	25646-1
	Fotplatta std 50 cm vä mod 2	25646-2

Broms

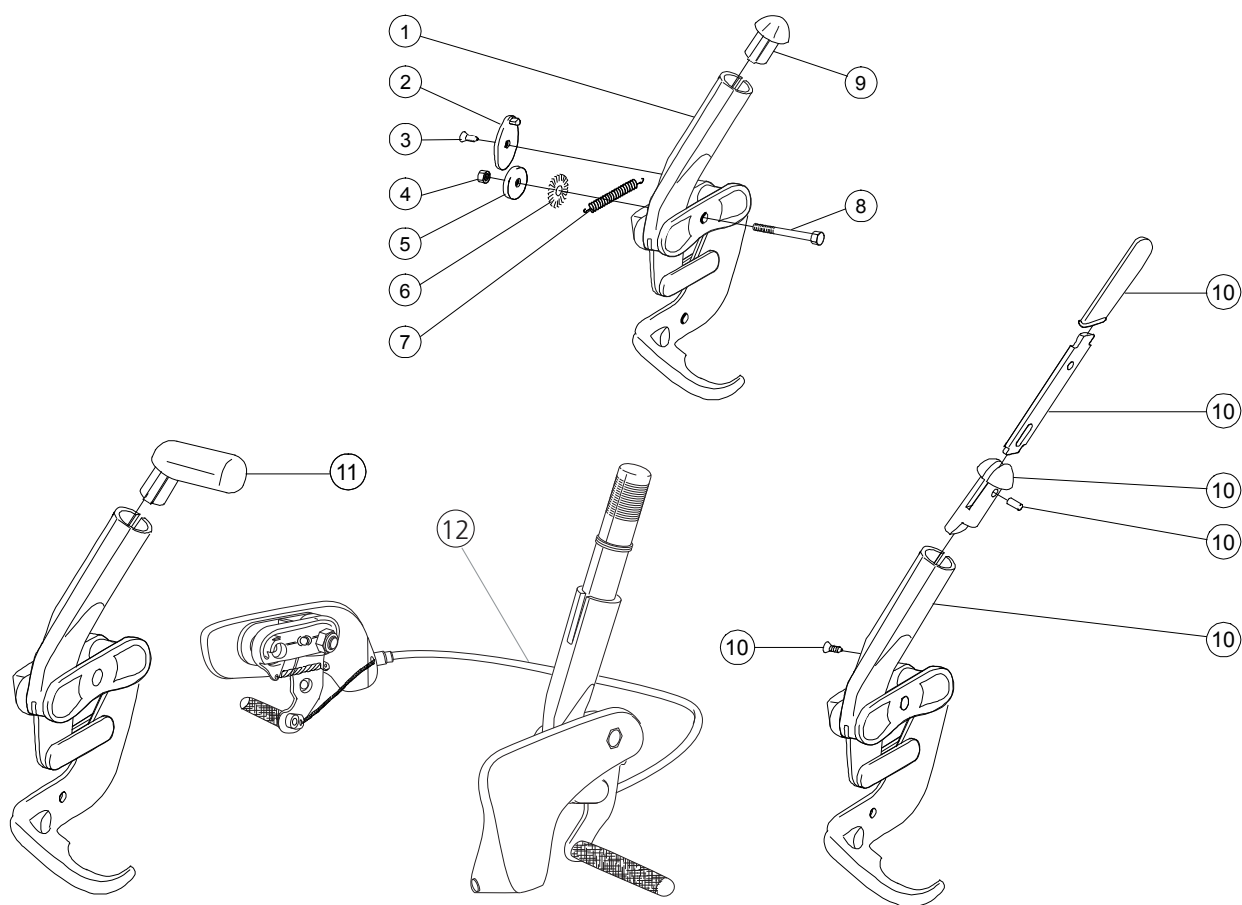

Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1-9	Broms hö	25718-1	8	Skruv M6x50 M6S 8.8 svkr DIN 931	11406
	Broms vä	25718-2	9	Ändavslutning broms mod ny	50368
2	Stoppdetalj mod ny	50373	10	Bromsspaksförlängare kompl	25515
3	Skruv B6 3.5x9.5 FXS svkr	11384	1-8,10	Broms med förlängt handtag hö .	25719-1
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017		Broms med förlängt handtag vä ..	25719-2
5	Bricka 6.4x22x4 TBR SB fzb	13062		Broms Cross förl handt fast hö.....	26827-1
6	Låsbricka M6 DD fzb DIN 6798-D	13059		Broms Cross förl handt fast vä	26827-2
7	Fjäder broms	80796	11	Bromshandtag vinklat kompl sats	25537
			1-8,11	Broms med vinklat handtag hö ...	25720-1
				Broms med vinklat handtag vä	25720-2
			12	Enhandsbroms hö.....	27178-1
				Enhandsbroms vä	27178-2

Drivhjul kompletta

22" och 24" drivhjul Fasta nav med drivring

Benämning	Art nr
Drivhjul 22" fast nav massivt drivring alu.....	25714
Drivhjul 22" fast nav massivt drivring alu.....	25715
Drivhjul 24" fast nav massivt drivring alu.....	25479
Drivhjul 24" fast nav massivt drivring alu.....	25713

22" och 24" drivhjul Fasta nav utan drivring

Benämning	Art nr
Drivhjul 22" massivt fast nav utan drivring	25488
Drivhjul 24" massivt fast nav utan drivring	25480

22" och 24" Quick release med drivring


Benämning	Art nr
Drivhjul 22" lågtryck drivring alu.....	25698
Drivhjul 22" lågtryck drivring rfr.....	25089
Drivhjul 22" massivt drivring alu.....	25716
Drivhjul 22" massivt drivring rfr.....	25514
Drivhjul 24" lågtryck drivring alu.....	25437
Drivhjul 24" lågtryck drivring rfr.....	25091
Drivhjul 24" massivt drivring alu.....	25717
Drivhjul 24" massivt drivring rfr.....	25103

22" och 24" Quick release utan drivring

Benämning	Art nr
Drivhjul 22" lågtryck	25085
Drivhjul 22" massivt.....	25487
Drivhjul 24" lågtryck	25022
Drivhjul 24" massivt.....	25106


Drivhjul utan slang och däck

Drivhjul med fast nav

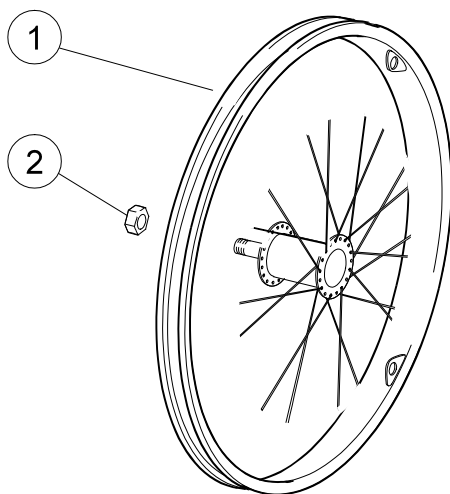


Pos	Benämning	Art nr
1-2	Drivhjul 22" u däck slang drivring/fast nav	25485
	Drivhjul 24" u däck slang drivring/fast nav	25481
2	Mutter 5/8" UL6M UNF fzb	12016

Drivhjul quick release

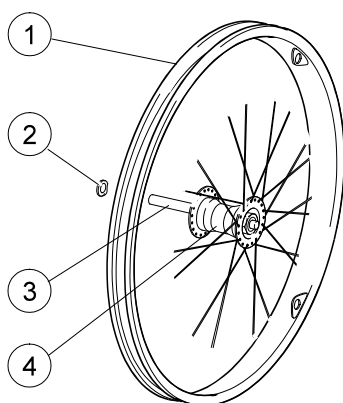

Pos	Benämning	Art nr
1-4	Drivhjul 22" u däck slang drivring	25201
	Drivhjul 24" u däck slang drivring	25202
2	Bricka alunav	20350
3	Axel alunav.....	20349
4	Nav alu.....	80524


Däck och slang

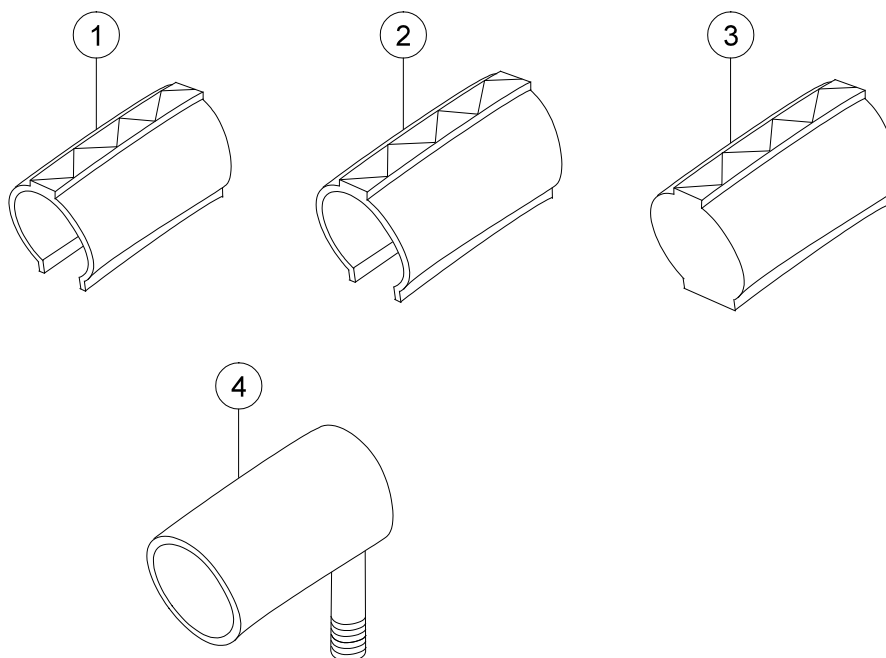

Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Däck 22" x 1" högtryck	81125	4	Slang 22" luft högtryck	80136
	Däck 24" x 1" högtryck	80558		Slang 22" luft lågtryck	80327
2	Däck 22" luft lågtryck	80325		Slang 24" luft lågtryck	80138
	Däck 24" luft lågtryck	80137		Slang 24" 1" högtryck	80560
3	Däck 22" massivt	81384			
	Däck 24" massivt	80768			


Drivring

Aluminium drivring

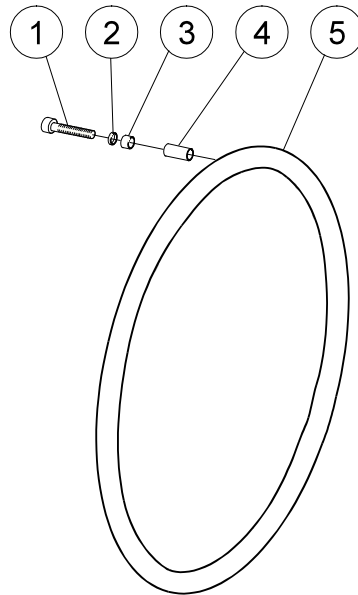


Pos	Benämning	Art nr
1-4	Monteringsats drivring alu	24514
5	Drivring D500 hjul 22" alu	25636
	Drivring D500 hjul 22" rfr	24395
	Drivring D540 hjul 24" alu	25181
	Drivring D540 hjul 24" rfr	24023

Länkhjul

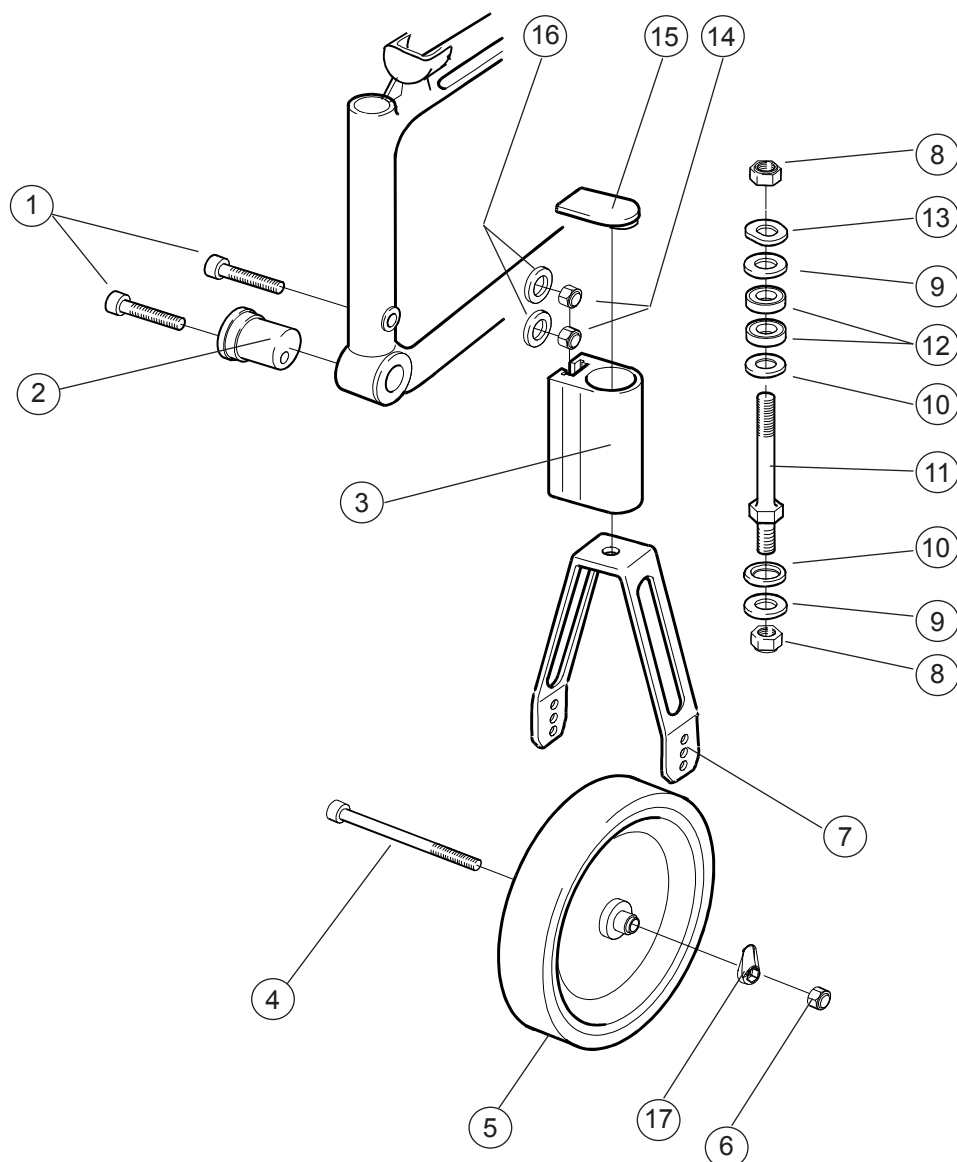

Pos	Benämning	Art nr	Pos	Benämning	Art nr
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 svkr .	11305	9	Bricka BRB 13.5 svkr	13031
2	Excenterhylsa vågig	81994	10	Bricka BRB 13.5 svkr med fas	13032
3	Framgaffelfäste 6063 HIT T6.....	80606	11	Axel framgaffel stål	20243
4	Skruv M6x70 MC6S 12.9 svkr	11349	7-11	Framgaffel kort stålaxel	24677
4-6	Länkhjul 6" halvmassivt kompl	25664	12	Kullager 1/2" EE4 2RS	80244
	Länkhjul 8" halvmassivt kompl	25665	13	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb ...	13040
6	Låsmutter M6 DIN 985-6 svkr	12035	14	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051
7	Framgaffel kort exkl axel	24554-01	15	Lock framgaffelfäste	50224
8	Låsmutter 1/2" UNF låg svkr	12037	16	Bricka BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001
			17	Skydd hjulaxel	50880


Sitsklädsel

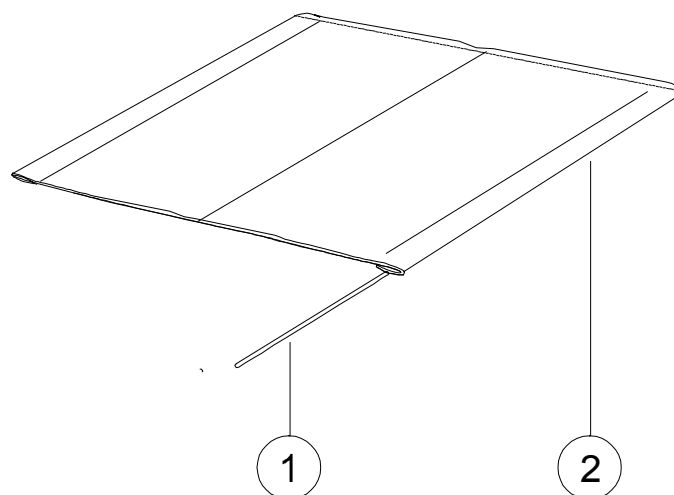


Pos	Benämning	Art nr
1	Markispinne L381 sitsklädsel kort.....	80617
2	Klädsel sits kort 35 cm svart	62360-70
	Klädsel sits kort 40 cm svart	62361-70
	Klädsel sits kort 45 cm svart	62362-70
	Klädsel sits kort 50 cm svart	62363-70

Ryggklädsel


Fast

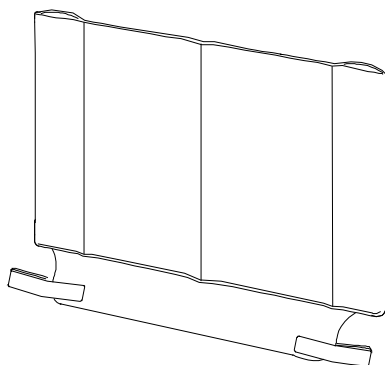

Reglerbar

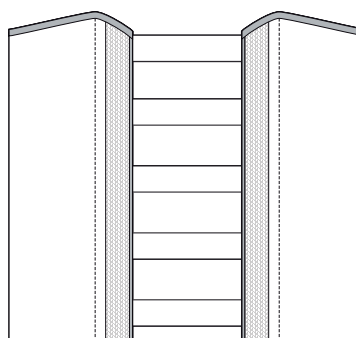

Överdrag

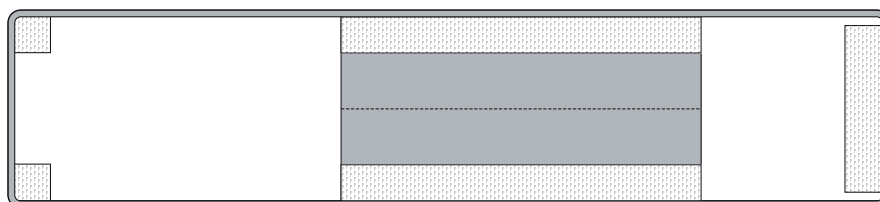

Pos	Benämning	Art nr
1	Klädsel rygg rh fast 35 cm svart	62352-70
	Klädsel rygg rh fast 40 cm svart	62353-70
	Klädsel rygg rh fast 45 cm svart	62354-70
	Klädsel rygg rh fast 50 cm svart	62355-70


Reglerbara

Pos	Benämning	Art nr
1	Klädsel rygg M100/Twin rb rh jb 35/37.5 cm	62364-70
	Klädsel rygg M100/Twin rb rh jb 40/42.5 cm	62365-70
	Klädsel rygg M100/Twin rb rh jb 45/47.5 cm	62366-70
	Klädsel rygg M100/Twin rb rh jb 50 cm	62367-70

Överdrag


Pos	Benämning	Art nr
1	Överdrag rygg Twin 35 cm svart	62368-70
	Överdrag rygg M100/Twin 40 cm svart	62369-70
	Överdrag rygg M100/Twin 42.5/45 cm svart	62370-70
	Överdrag rygg M100/Twin 47.5/50 cm svart	62371-70

Vårdarbroms

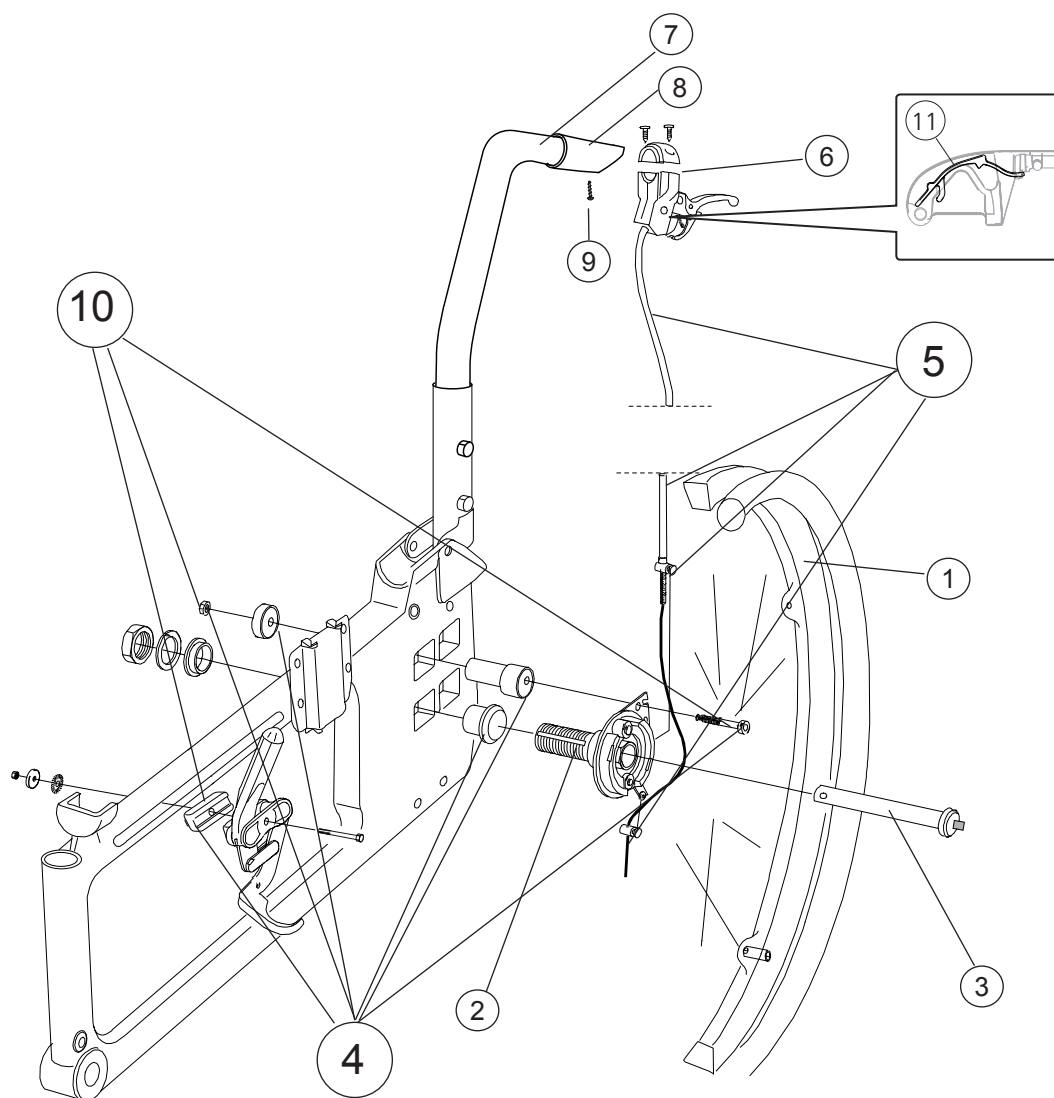


Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Drivhjul vårdarbr 22" luft alu	81342	2	Trumbroms vårdarbromssats hö	81308
	Drivhjul vårdarbr 22" luft rfr	81344		Trumbroms vårdarbromssats vä	81309
	Drivhjul vårdarbr 22" mass/alu	81339	3	Axel vårdarbroms Cross/Twin	81325
	Drivhjul vårdarbr 22" mass/rfr	81341	4	Monteringssats vårdarbr Cr/Tw	81307
	Drivhjul vårdarbr 24" luft alu	81349	5	Vajerpaket	80935
	Drivhjul vårdarbr 24" luft rfr	81351	6	Bromshandtag Cross	80857
	Drivhjul vårdarbr 24" mass/alu	81346	7	Ryggrör med körhandtag Twin.....	27343-01
	Drivhjul vårdarbr 24" mass/rfr	81348	8	Körhandtagsklädsel	82004
			9	Skruv B 8 x 16	11041
			10	Monteringssats adapter broms	27445
			11	Vajerlås bromshandtag 100 mm 10 pack	82854
				Vajerlås bromshandtag 75mm 10 pack .	82855

Bord

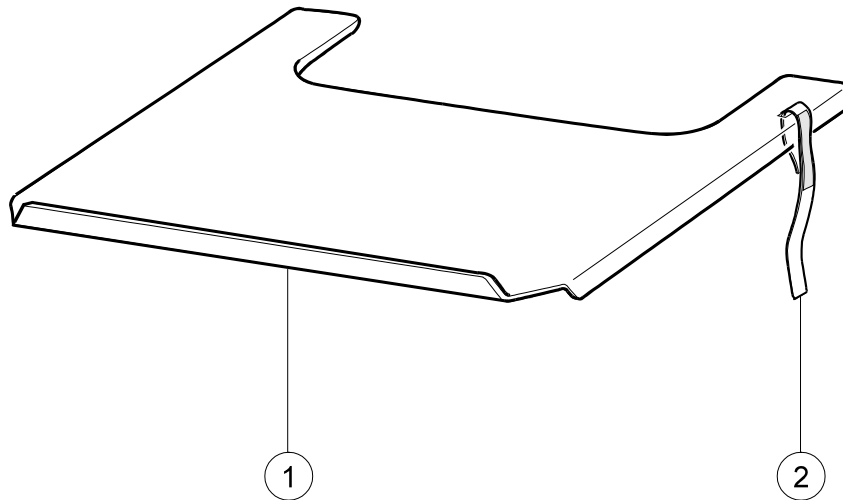


Pos	Benämning	Art nr
1	Fixeringsband bord 27.5-50 cm	62103
1-2	Bord 45 cm för stol 35 cm kompl	24417
	Bord 50 cm för stol 40 cm kompl	24418
	Bord 55 cm för stol 45 cm kompl	24419
	Bord 60 cm för stol 50 cm kompl	24601

Hemibord

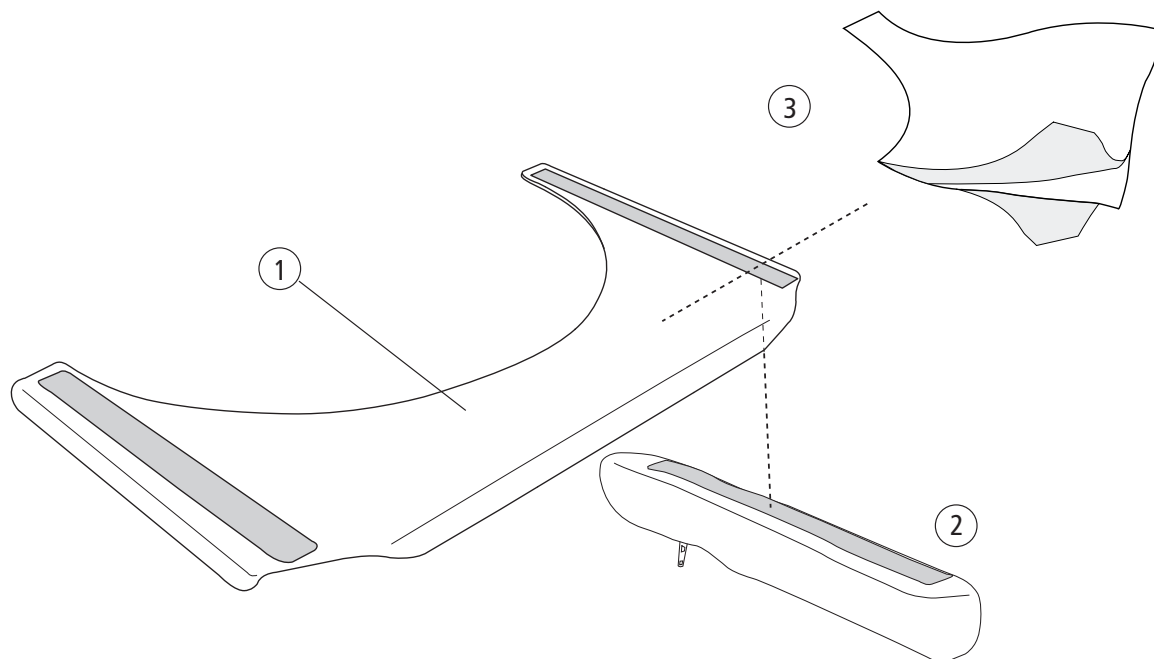


Pos	Benämning	Art nr
2	Armstödsdyna kort hemibord	81631
	Armstödsdyna lång hemibord	81632
3	Halkskydd hemibord 35-40 cm	81633
	Halkskydd hemibord 42,5-50	81634
1-2	Hemibord 45 cm för stol 35 cm kort armstödsdyna kompl	26556
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm kort armstödsdyna kompl	26558
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm kort armstödsdyna kompl	26560
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm kort armstödsdyna kompl	26562
	Hemibord 45 cm för stol 35 cm lång armstödsdyna kompl	26563
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm lång armstödsdyna kompl	26565
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm lång armstödsdyna kompl	26567
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm lång armstödsdyna kompl	26569

Tippskydd

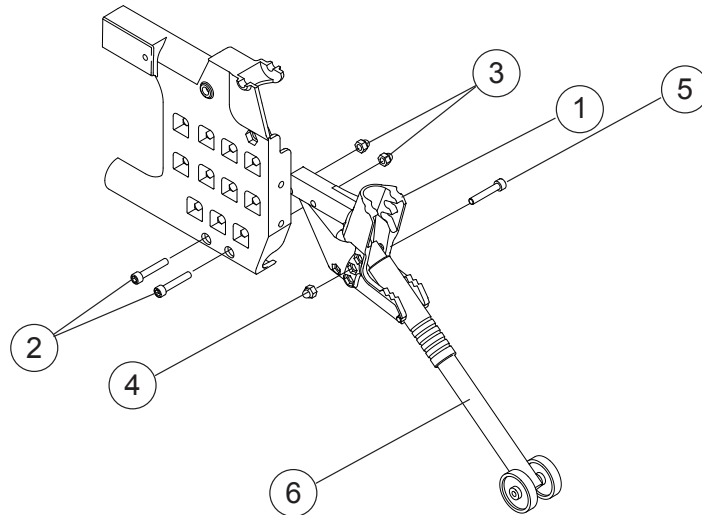


Pos	Benämning	Art nr
1	Tippskyddsfäste Cross/Twin hö	81247
	Tippskyddsfäste Cross/Twin vä	81248
2	Skruv M 6x 35 MC6S	11533
3	Kupolmutter M 6 DIN 986	12005
4	Låsmutter M6	12017
5	Skruv M 6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229
6	Tippskyddsrör	
1-6	Tippskydd Cross 20-22" B och C-rad hö.....	26270-1
	Tippskydd Cross 20-22" B och C-rad vä.....	26270-2
1-6	Tippskydd Cross 24" hö.....	26162-1
	Tippskydd Cross 24" vä.....	26162-2

Tippskydd

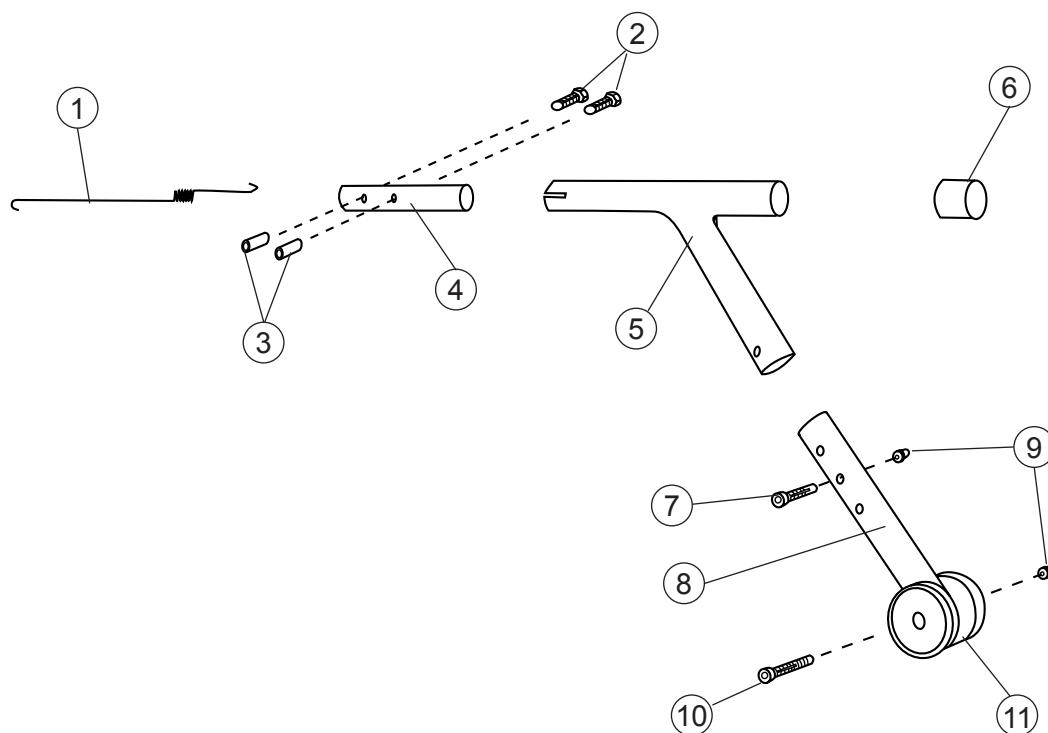


Pos	Benämning	Art nr
1-11	Tippskydd Cross/Twin kompl	25633-01
1	Fjäder t1.75 mm Twin	80864
2	Skruv M 6x 16 MC6S 12.9 svkr esloc	11253
3	Rörbussning D10 M6 L18	15008
4	Fäströr	25635-01
5	Tippskyddsror Twin	25661-01
6	Ändplugg utv d22 svart	50336
7	Skruv M 5x 30 MC6S svkr	11346
8	Förlängningsdel kort	25759-01
9	Låsmutter M 5 kupol svkr	12042
10	Skruv M 5x 50 MC6S 12.9 svkr DIN 912	11373
11	Hjul 40/5.2/12 tippskydd svart 40x09x05 pa6 sv..	80727

Tramprör

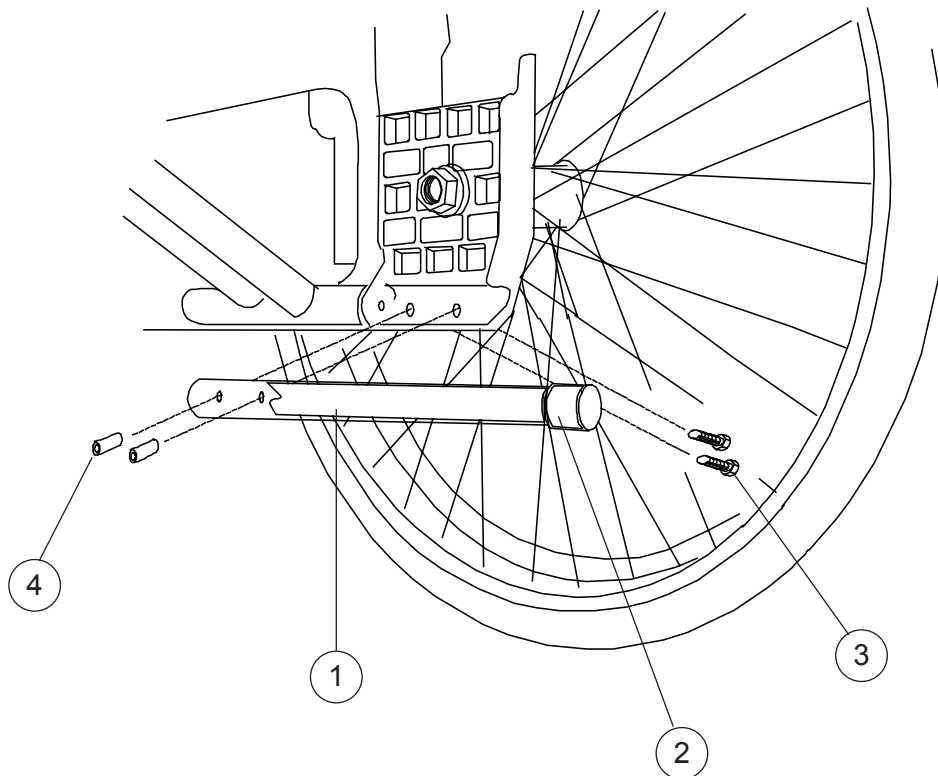


Pos	Benämning	Art nr
1-4	Tramprör Twin komplett	25766
1-2	Tramprör Twin	25634-01
2	Ändavslutning Twin 19 svart	50414
3	Skruv M6x16MC6S 12.9 svkr esloc	11253
4	Rörbussning D10 M6 L18	15008

Ekerskydd/Höftbälte

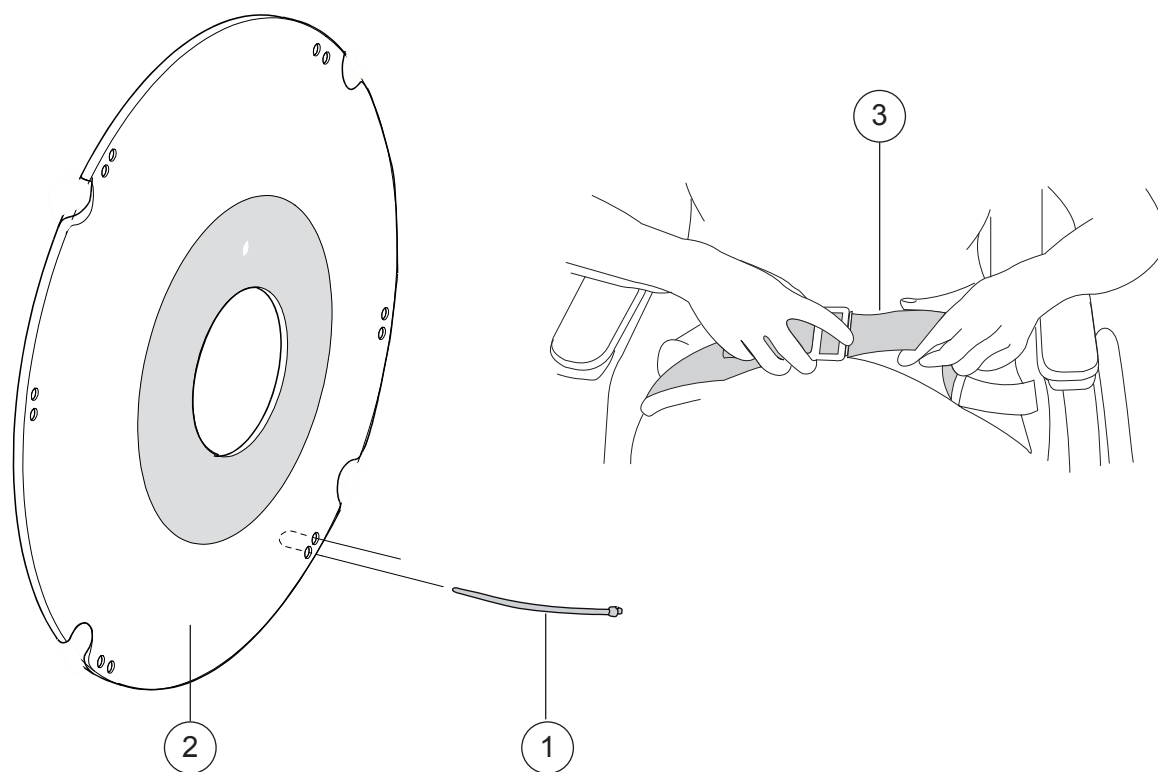

Pos	Benämning	Art nr
1	Monteringsats ekerskydd, 6 st buntband	26276
1-2	Ekerskydd 22" grå tryck	25503-28
	Ekerskydd 22" gult tryck	25503-29
	Ekerskydd 24" grå tryck	25504-28
	Ekerskydd 24" gult tryck	25504-29
3	Höftbälte Cross/Twin kompl	25668

Käpphållare

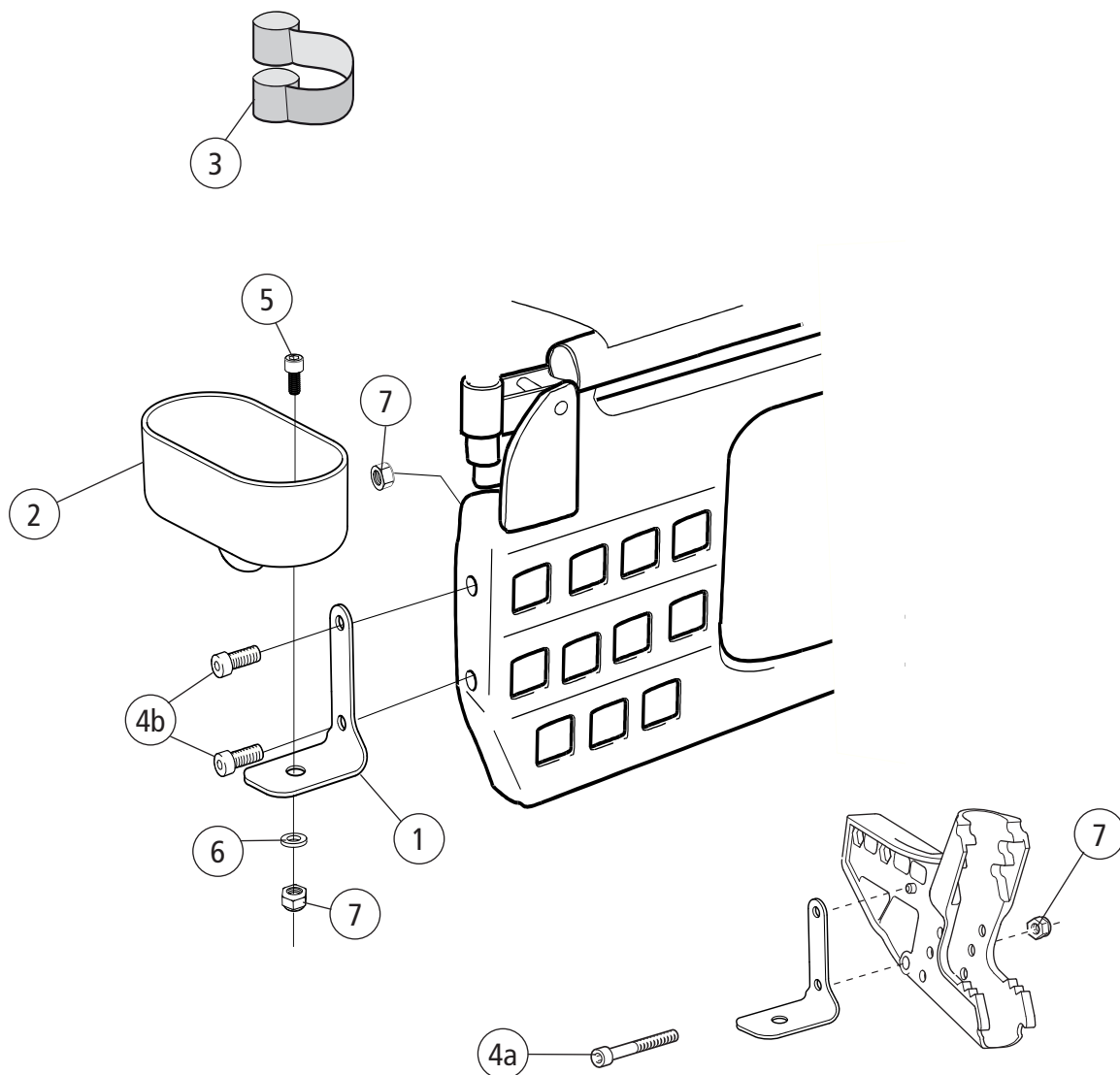

Pos	Benämning	Art nr
1-7	Käpphållare universal.....	27327
1	Fästplåt käpphållare.....	82390
2	Käpphållare M100.....	50866
3	Resårband Cross svart.....	80621
4a	Skruv M6 x 40 MC6S 10,9 fzb.....	11229
4b	Skruv M6 x 20 MC6S.....	11392
5	Skruv M6 x 12 MC6S 8,8 fzb.....	11577
6	Bricka 6,4 x 14 x 1,5.....	13058
7	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb.....	12017

