

Body Armor® Heel Reliever





Hälavlastare



+



DARCO

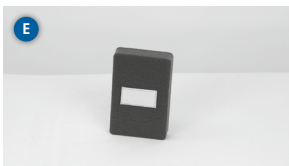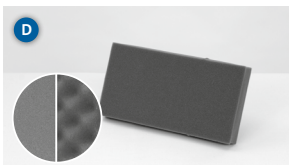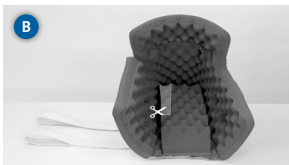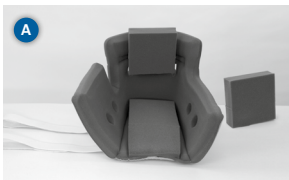

Body Armor® Heel Reliever | Hälavlastare

Body Armor® Heel Reliever hälavlastare är avsedd för att förebygga och behandla trycksår på hälen samt vid diabetesfot respektive trycksår.

- Öppna Body Armor® Heel Reliever hälavlastare. Ta ut den extra skumdynan (bild D). Lägg den extra skumdynan åt sidan för eventuell senare individuell anpassning.
- Placera patientens fot i stödet så att hälen ligger direkt över öppningen. Hälen ska alltid placeras bakom den fasta skumkudden (bild 1 + 2).
- Dra kardborrebanden över skenbenet mot hälen. För banden genom hälen. Fäst banden med kardborreförslutningen (bild 3). Vid mycket smala vader kan du låta sidorna överlappa.
- Kontrollera passformen. Mellan hälöppningen och bädden ska det finnas tillräckligt med plats för ett finger (bild 4). Hälavlastaren ska inte dras åt för löst eller för hårt runt benet. Kardborrebanden ska inte ha något kontakt med huden på benet. Framfotsdynan (bild E) kan (valfritt) placeras som skydd mellan kardborreband och fot (bild 5).
- Bruksanvisning: Besluta efter patient och indikation om en hälavlastare med slät eller veckad yta ska användas (bild 1).

Individuell anpassning:

- > **Droppfot:** Fäst den extra dynan vertikalt bakom fotsulan (bild A).
- > **Malleolär dekubitus (fotledssår):** Klipp bort nopporna på insidan av stödet, runt fotknölen. Vid behov kan du även ta bort en del av den fasta skumdynan (bild B).
- > **Höftrotation:** Fixera positioneringskilen (bild F) på hälavlastaren, beroende på användning.
- > **Bariatrisk ben:** Om hälen vidrör lakanen, lägg den extra skumdynan på den fasta skumdynan för upphöjning.
- > **Akilleseena:** Vid rodnad i detta område ska du klippa till en V-formad öppning i den fasta skumdynan. Om du använder båda skumdynorna, anpassa även den övre skumdynan (bild C).

Trycket på hälen förflyttas till akillessenan och gastrosoleuskomplexet på vaden. Var 6:e till var 8:e timme ska Body Armor® Heel Reliever hälavlastare tas bort och benet och foten undersökas för hudförändringar. Vid hudrodnad (erytem) i området med akillessenan, följ förfarandet ovan. Hos patienter med ödem ska den släta varianten av Body Armor® Heel Reliever användas för att förhindra hudirritationer.

Indikationer

- > Förebygga och behandla trycksår på hälen, vid diabetesfotsår respektive trycksår
- > 14 poäng eller lägre på Bradensskalan
- > Diabetes med neurologiskt, sensoriskt bortfall.
- > Ej palperbar puls vid foten
- > Paraplegi
- > Långvarig immobilitet eller koma

Kontraindikationer:

- > Sår på vaden
- > Spasticitet
- > Kontraktion av fotleden

Tekniska data

Universell användning på höger och vänster sida (vadmokrets 25–54 cm)

Färg: Grå-blå

Material: Hälavlastare:

Yttre skydd: Polyester

Skum: Latexfri polyuretanskum

Kardborreband: Nylon

Framfotsdyna: Polyester, latexfri polyuretanskum

Extra dyna: Latexfri polyuretanskum

Positioneringskil:

Skydd: Polyester

Kil: Etylenvinylacetat sampolymer

Tvättpåse: Polyester

Underhåll: Produkten är underhållsfri

Designegenskaper: Body Armor® Heel Reliever

hälavlastare finns i två versioner: veckad eller slät.

Båda produktvarianterna har ett överdrag av ett slätt tyg som gör det möjligt för benet att "glida" utan att det exponerade områdets position behöver förändras. Korrekt fixering av produkten på patienten sker med tre band som håller framfoten samt underbenet

i en ortograd position. Vid en kraftig rotation av benet över höftleden kan önskad position av benet uppnås med positioneringskilen. Den extra dyna som för vadmrådet och den plantara delen av foten som medföljer leveransen möjliggör en individuell, tryckomfördelande och säker placering av produkten. Body Armor® Heel Reliever hälavlastare kan användas på vänster eller höger sida.

Rengöringsanvisningar

Handtvätt:

- > Använd ett mildt tvättmedel och varmt vatten. Låt torka i rumstemperatur.

Maskintvätt:

- > Stäng kardborrebanden och tvätta i den medföljande tvättpåsen (bild G) eller i ett örngott (60 °C). Låt torka i rumstemperatur.
- > Desinficering efter tvätt: Med antiseptisk spray

Vatten, vanligt rengöringsmedel och desinfektionsmedel kan användas för rengöring. Kardborrebanden ska vara ordentligt stängda under rengöring.

Försiktighet

Beakta alltid bruksanvisningen. Kontakta läkaren vid biverkningar (t.ex. hudsvullnad, tryckområden, blodcirkulationsstörningar osv.). Vid felaktig hantering av produkten kan funktionen och ett optimalt skydd inte längre garanteras. Detta hjälpmedel är avsett för tillfrisknande och ska uteslutande användas enligt anvisning av läkare eller medicinsk personal (respektive efter konsultation). DARCO (Europe) GmbH tar inget ansvar för detta. Använd inte produkten på skadad, irriterad, sårig eller intakt hud. Använd t.ex. förband eller sockor. Detta hjälpmedel är endast avsett att användas på en patient. Det är endast avsett att användas som stöd. Patienten ska inte gå när han/hon använder produkten.

Kassering:



- > Kastas efter användning.
- > Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Produkten kan kasseras i hushållssoporna.



DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Telefon +49 8807 9228-0
Fax +49 8807 9228-22
info@darco.de | www.darco.de

Made in China

