

Byte av doppsko

För att undvika att orsaka skador på kryckan eller käppen i lättmetall ska du skilja den nedre delen av kryckan eller käppen från den övre delen genom att lossa kapselmuttern och trycka in knappen. Du kan nu dra ut det nedre röret. Ta sedan bort den gamla doppskon och sätt dit den nya. Tryck in det nedre röret i det övre röret, tills knappen klickar på plats. Fäst sedan kapselmuttern. För att försäkra dig om att doppskon sitter ordentligt fast, bör du välja en modell av doppsko som har en innerdiameter som är ca 1-2 mm mindre än det nedre rörets innerdiameter.

Armbågs-kryckor från Etac

Kryckorna finns i olika varianter för både vuxen och junior med olika typer av handtag - raka hårda, mjuka alternativt anatomiska handtag. Kryckan finns med ställbar alternativt fast höjd.

Max brukarvikt för vuxen modeller är 120–150 kg beroende på modell.

Max brukarvikt för Junior modeller är 100 kg.

Aktuell max brukarvikt finns uppmärkt på respektive krycka.

Stödkäppar från Etac

Stödkäppar finns med rakt eller anatomiskt handtag, fast eller justerbar längd.

Max brukarvikt för stödkäpparna är 100 kg.

Etac lämnar ett års garanti förutsatt att produkten använts i enlighet med våra instruktioner och ej utsatts för åverkan eller onormalt slitage.

Tillbehör/reservdelar:

Doppskor, Handtag, Isbrodd, Polstring, Fångrem

Produkterna är tillverkade av:
Kowsky GmbH, Neumünster, Tyskland

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se



Se vår hemsidan för mer information om
vårt sortiment av kryckor och stödkäppar.

www.etac.se

Bruksanvisning

Armbågs-kryckor och Stödkäppar



Användning

Gånghjälpmedel, som kryckkäpp och stödkäpp, används av flera olika anledningar. Det är viktigt att be om hjälp, råd och träning när man provar ut en käpp eller krycka för första gången.

Armbågskrycka & Stödkäpp - Viktigt!

- Anpassa längden på käppen efter Din egen längd.
 - Se till att knappen i snäpplåset är ordentligt på plats (fig A).
 - Se till att låsringen är ordentligt fastdragen på en käpp med ställbar längd (fig B).
 - Om Du skall byta handtag på en krycka, tex Anatomisk, Anatomisk (Soft), se då till att skruven på framsidan av handtaget är blir ordentligt åtdragen (fig C) innan Du tar kryckan i bruk.
- Använd t.ex. en 5-krona för att dra åt skruven!

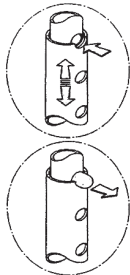


Fig A

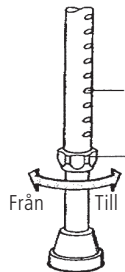


Fig B

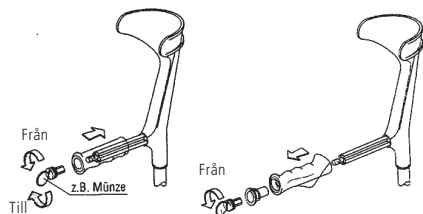


Fig C

Allmänna råd

Be någon kunnig person instruera hur man på ett korrekt sätt använder en stödkäpp/krycka. Be dem visa hur käppens/kryckans olika inställningar fungerar. Tänk speciellt på följande punkter:

- Om doppskon är sliten eller om någon form av skada syns på käppen, byt ut den mot en ny.
- Var försiktig vid gång på halt eller ojämnt underlag.
- Montera en isdubb på doppskon under vintertid.
- Håll käppen i ett stadigt grepp och inte för långt ifrån kroppen.
- Gå med käppen i lodrätt läge nära kroppen.
- Om Du skulle falla, skjut käppen ifrån Dig för att undvika att Du faller ovanpå den.
- Om möjligt, gå ej i trappor utan hjälp och stöd av någon annan person.
- Om endast en käpp används vid gång i trappor, håll i ledstången med den fria handen.

Varning!

- Vid gång, häng inte handväska, påsar eller dylikt på en käpp/krycka.
- Käppar/kryckor skall enbart användas som gånghjälpmedel och inte för andra ändamål som t.ex. att lyfta eller flytta på saker.
- Vi garanterar inte käppars kvalitet eller funktion om de mekaniskt ändras på något sätt.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör.

Is och snö

Utrusta käppen med någon form av isdubb vid gång på is och snö. Använd alltid original delar vad gäller säkerhetsdetaljer såsom t.ex. isdubbar och doppskor.

Rengöring

Käppar/kryckor rengörs med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Torka torrt. Mjuka (Soft) handtagen på kryckkäppar och stödkäppar rengörs bäst med vatten och diskmedel samt vid behov med hjälp av en mjuk borste. Använd aldrig feta eller oljiga rengöringsmedel.

Utbytbara handtag

På kryckkäppar med anatomiska handtag och mjuka(soft) anatomiska handtag kan handtagen bytas (fig C).

På anatomisk handtag (ej soft) kan Du dessutom justera handtaget i några olika vinklar efter vad som är bäst och bekvämast för brukaren.

Lossa på skruven som sitter på framsidan av handtaget, t.ex. med en 5-krona. Drag ut skruven (insats), och själva handtaget. Byt handtag och sätt ihop delarna igen.

Tillse att handtaget har nått in till basen. För att underlätta monteringen kan man fukta handtaget på insidan.

Drag åt skruven ordentligt! (med en 5-krona)

Kryckkäpp anatomisk mjuk (special) med justerbar övre armbygel (fig D).

Inställning av höjden mellan handtag och armstöd görs enligt följande:

Det finns fem inställningsmöjligheter, 21-26 cm, mellan handtag och övre del av armstöd.

Lossa vingmuttern som sitter ovanför handtaget.

Ta ut skruven, ställ in önskad höjd, sätt åter in skruven och skruva fast vingmuttern ordentligt.

OBS!

Max brukarvikt är 100 kg på denna krycka!

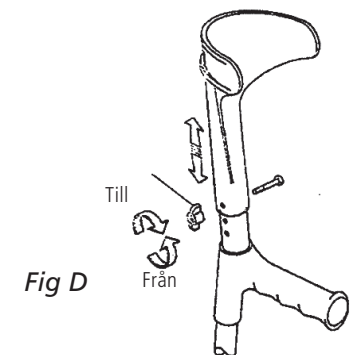


Fig D