


Brukermanual Nattbord Estrado



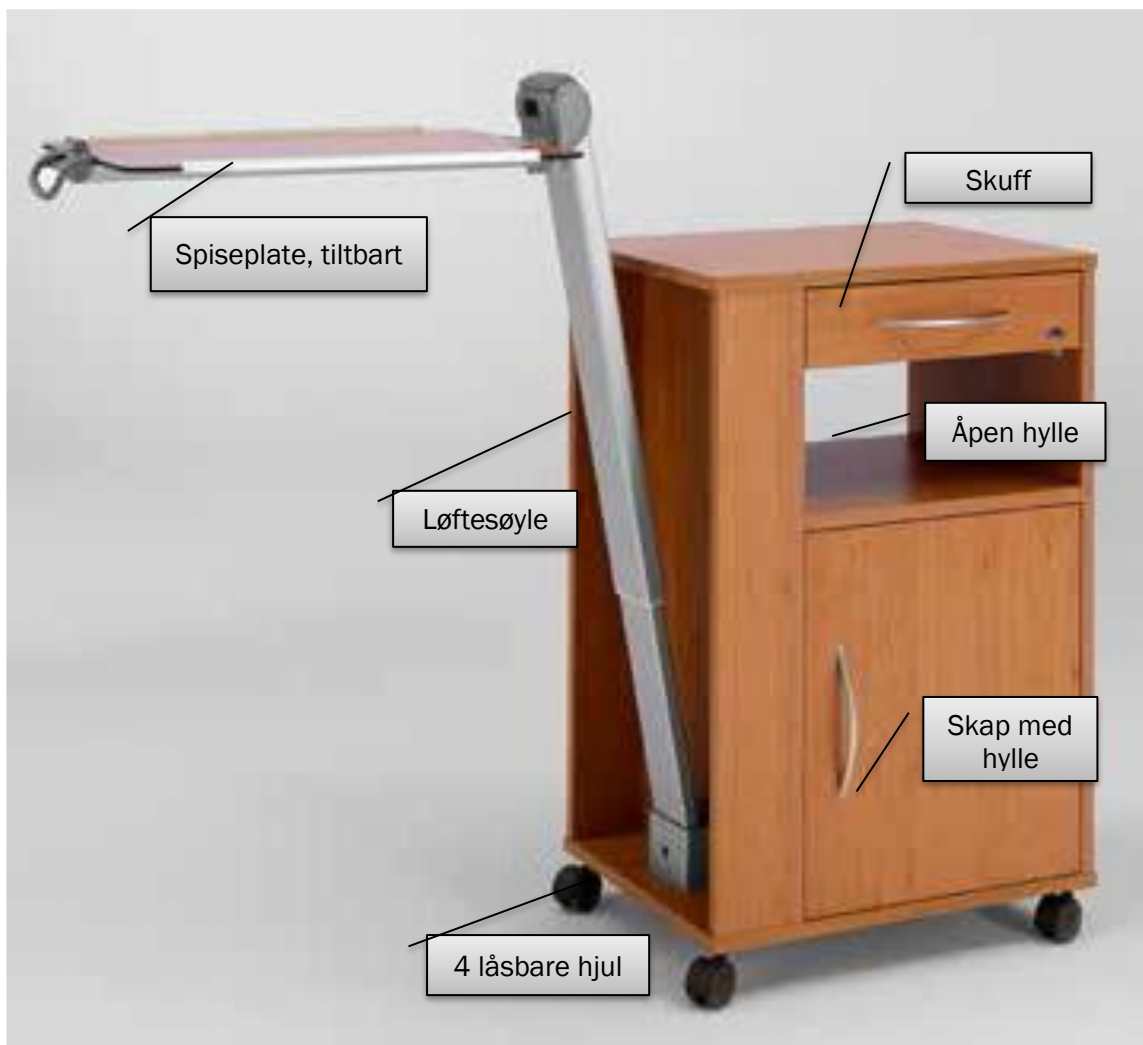

Dra ut løftesøylen



Trykk ned håndtaket



Sving ut bordplaten



Løftesøylen bør dras ut med en flat hånd!

Hinweis



Løft bordplaten opp med en liten skrå, når platen er ved toppen av løftesøylen, vinkler du ned spiseplaten



Press inn knappen med tommelen for å høydejustere



For å tilte spiseplaten, dra lett i knappen på enden av planten og tilt til ønsket vinkel med andre hånden

Vedlikehold:

Spiseplaten på nattbordet er laget av høykvalitets ABS-plast. Noen væsker som kan forårsake misfarging (kaffe, te etc) anbefales det å tørke opp væsken slik at det ikke tørker på overflaten.

Nattboder har glatte, rene overflater for enkel rengjøring. Nattbordet er laget for sykehjems-og institusjonsmiljø, og tåler godt rengjøring som er nødvendig/hensiktsmessig for disse miljøene, inkludert desinfisering/rengjøring med sprit.