

BRUKERVEILEDNING



INFUSJONSSTATIV VIOLETTA



Gjelder følgende modeller:

REF

080-3500-000, 080-3500-001, 080-3500-010, 080-3500-011,
080-3500-100, 080-3500-101, 080-3500-110, 080-3500-111,
080-3500-200, 080-3500-201, 080-3500-210, 080-3500-211,
080-3500-300, 080-3500-301, 080-3500-310, 080-3500-311

Operatøren anbefales å lese gjennom brukerveiledningen før produktet tas i bruk, for å unngå unødvendig fare for operatør eller produkt.

Med operatør menes personale eller pasient. Det kreves ingen opplæring eller spesielle kvalifikasjoner for å regulere produktet.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

* Infusjonsstativet (kroker + stativ) kan maks. belastes med 10 kg
hvorav 5 kg drypposer, jevnt fordelt.

* Hvis det skal monteres på en pumpe, må aluminiumsrøret beskyttes med en plate,
art. nr. FAP3000153S.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forord

Garanti

Viktig informasjon

1. Funksjonsbeskrivelse

- 1.1 Generell beskrivelse
- 1.2 Tiltent bruk
- 1.3 Klinisk nytte
- 1.4 Klinisk ytelse

2. Betjening

- 2.1 Oppsetting
- 2.2 Håndtak
- 2.3 Ekstra kroker
- 2.4 Høydejustering
- 2.5 Bevege seg rundt med oppsatt infusionsstativ

3. Vedlikehold og rengjøring

- 3.1 Rutinekontroller
- 3.2 Rengjøring
- 3.3 Smøre-, rengjørings- og desinfeksjonsmiddel

4. Teknisk spesifisering

- 4.1 Produktets levetid
- 4.2 Opplysninger om mål
- 4.3 Kassering av produkt

5. Kontaktopplysninger

FORORD

Velkommen som eier av et infusionsstativ produsert av Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB. Vi håper at du blir fornøyd med vårt kvalitetsprodukt.

Hvis det skulle oppstå et problem med et av produktene våre, er du velkommen til å kontakte oss. Vår serviceavdeling hjelper deg med den nødvendige ekspertisen for å løse problemet.

Brukerveiledningen som du holder i hånden, inneholder all informasjon som er nødvendig for å bruke, vedlikeholde og utføre service på produktet. Dokumentet oppdateres kontinuerlig etter hvert som produktene modifiseres. Vi tar derfor forbehold om eventuelle endringer i brukerveiledningen.

GARANTI

Sjöbloms gir 2 års garanti på material-, konstruksjons- og fabrikasjonsfeil, forutsatt at produktene ikke har vært utsatt for ytre påvirkning eller unormal slitasje. For at garantien skal gjelde må produktet være brukt i henhold til brukerveiledningen, og det må ha vært utført service i henhold til spesifikasjonen.

VIKTIG INFORMASJON

Dette produktet er beregnet for profesjonell medisinsk bruk. Brukerveiledningen må leses grundig før produktet tas i bruk, for å unngå unødvendig risiko for pasient og operatør.

Brukerveiledningen inneholder advarsler i tilfeller der det er fare for personskade, som betyr at ekstra oppmerksomhet er påkrevd. Feil bruk kan medføre livsfare.

En varseltrekant vises på steder med spesielt viktig informasjon.



Varseltrekant

VED ALVORLIG HENDELSE

Alle alvorlige hendelser som har inntruffet i forbindelse med produktet, bør rapporteres til Sjöbloms samt til kompetent myndighet, som i Norge er Statens legemiddelverk.

1. FUNKSJONSBESKRIVELSE

1.1 Generell beskrivelse

Infusionsstativ av aluminium. Fembeinsfot med hjul.

Infusionsstativet er utstyrt med to kroker og fembeinsfot. Det leveres både med og uten kjørehåndtak, og med et ekstra par kroker som tilvalg. Kjørehåndtaket er avtakbart. Rattlåsen har en ekspanderende konstruksjon som gir myk og effektiv låsing.

1.2 Tiltent bruk

Infusionsstativet brukes av pasient i et undersøkelsesrom eller i hjemmemiljø og reguleres av pasient eller helsepersonell i en behandlingssituasjon for voksne eller barn.

1.3 Klinisk nytte

Infusionsstativet er sikkert for dem som bruker det, og den lave vekten og muligheten til å felle det sammen gjør det svært praktisk for den som skal oppbevare eller transportere det. Derfor fungerer det optimalt ergonomisk både for pasienten og for personalet som sitter eller står ved stativet hele arbeidsdagen.

1.4 Klinisk ytelse

Infusionsstativet er manuelt regulerbart. Høyde og maksimal belastning er tilpasset for behandlingssituasjonen for voksne og barn i henhold til Tiltent bruk. De stabile hjulene gjør det lett å trille stativet.

2. BETJENING

2.1 Montering

Infusionsstativet leveres montert med unntak av håndtaket og de ekstra krokene (begge er tilvalg). Gjør følgende for å montere infusionsstativet:



Hold røret på infusionsstativet med den ene hånden og grip tak lengst ned mot foten med den andre hånden.

Press nedover, bort fra kroppen, for å åpne foten.

Ved stenging gjøres det samme i omvendt rekkefølge.



OBS! Vær oppmerksom ved oppsetting av foten. Det foreligger klemrisiko ved feil fremgangsmåte, samt risiko for at et av beina på stativet slår inn i kroppen. Foten på stativet skal åpnes ved at man presser foten bort fra sin egen kropp.

2.2 Håndtak

Håndtaket monteres på følgende måte:


Åpne rattet og plasser festet på håndtaket som vist på bildet.



Plasser rattet som vist på bildet. Skru til.



2.3 Ekstra kroker

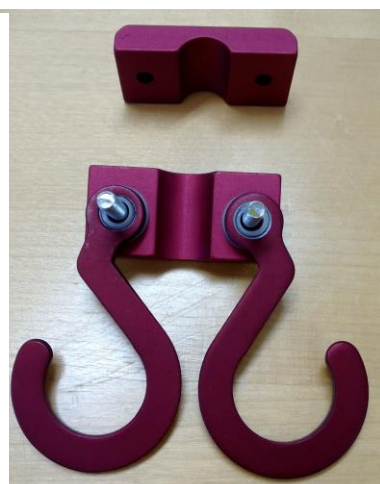

Ta av mutrene og løft av den ene halvparten av festet som vist på bildet.



Monter festet som vist på bildet. Høydeplasseringen på røret er valgfri.

2.4 Høydejustering



Infusionsstativet heves og senkes manuelt ved å løsne det respektive låserattet og heve/senke etter behov.

2.5 Bevege seg rundt med oppsatt infusionsstativ



Hvis infusionsstativet brukes i hjemmemiljø og pasienten er oppe og går mens han eller hun får drypp, er det viktig å være forsiktig slik at man ikke støter borti terskler som kan gjøre at infusionsstativet tipper.

3. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

3.1 Rutinekontroller

Rutinekontroller og smøring bør gjøres hver 6. måned eller ved behov, for å sikre fullgod funksjon.

Kontroller følgende:

- Eventuelle ulyder fra hjulene
- At hjulene triller fritt og uhindret
- Tilstanden til låserattet, slik at røret sitter skikkelig på plass
- Boltefester, slik at ikke noe løsner

3.2 Rengjøring

Produktet kan rengjøres og desinfiseres uten spesielle forholdsregler. Bruk rengjørings- og desinfeksjonsmidler som er egnet for formålet. Det tåler imidlertid ikke kjøring i vasketunnel eller autoklav.

4. TEKNISK SPESIFIKASJON

4.1 Produktets levetid

20 år.

4.2 Opplysninger om mål

Minimumshøyde 88,5 cm.

Maksimumshøyde 213 cm.

Vekt

3-delt stativ: 3,45 kg.

Håndtak: 245 g.

Maks. belastning

VIKTIG! Ved montering av pumpe må man kjøpe en ekstra aluminiumsdel i tillegg (art. nr. FAP3000153S) som beskytter røret mot klemskader og riper.



Maks. belastning 5 kg drypposer + 5 kg pumpe.

Hjul

75 mm.

4.3 Kassering av produkt

Produktet kan leveres som restavfall.

5. KONTAKTOPPLYSNINGER



Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB
Kavelvägen 4
S-894 35 SJÄLEVAD
Sweden

Tlf.: +46 (0)660 105 80

Faks: +46 (0)660 180 00

E-post: info@sjobloms.com

Hjemmeside: www.sjobloms.com