



ROHO DRY FLOATATION® Wheelchair Cushions

Operation Manual



SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

USER: Before using this product, read instructions and save for future reference.

ROHO® DRY FLOATATION® Rullstolsdynor

Bruksanvisning

LEVERANTÖR: Denna bruksanvisning ska överlämnas till användaren av denna produkt.

ANVÄNDARE: Innan produkten tas i bruk ska anvisningarna läsas noga och sparas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVSEDD ANVÄNDNING	72
PRODUKTSPECIFIKATIONER	72-73
VARNINGAR	74
TILLBEHÖR	75
JUSTERINGSINSTRUKTIONER	76-77
AVLÄGSNANDE & UTBYTE AV ÖVERDRAG	78
RENGÖRING & DESINFICERING AV DIN PRODUKT	78-79
FELSÖKNING	79
AVYTTRING	79
KONTAKTINFORMATION	79
RETURNERINGSVILLKOR	80
GARANTI	80

ROHO, Inc. strävar kontinuerligt efter att förbättra sina produkter och förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument. En aktuell version av detta dokument finns på www.roho.com.



ROHO® Cushioning Products tillverkas av ROHO, Inc.,
100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429, www.roho.com.

U.S.A.: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449 • e-mail: cc@roho.com

Utänför U.S.A.: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • e-mail: intl@roho.com

© 2007, 2015 ROHO, Inc.

Här följer ett antal varumärken och registrerade varumärken som tillhör ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION®, ISOFLO Memory Control®, Yellow Rope®, shape fitting technology®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, QUADTRO SELECT®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE™, och LOW PROFILE®.

Produkter som beskrivs i denna bruksanvisning kan vara skyddade av ett eller flera amerikanska och internationella patent och varumärken. För ytterligare information, var god se www.roho.com.

AVSETT BRUK:

Varje ROHO® DRY FLOATATION® produkt i denna bruksanvisning är en är en justerbar sittdynan för rullstol med luftfyllda celler. Det finns ingen viktgräns men dynan måste anpassas till individen på ett korrekt sätt.

ROHO, Inc. rekommenderar utvärdering av en läkare som har erfarenhet av sittplatser, positionering och rörlighet: 1) för att bestämma huruvida dynan är lämplig för individen; och 2) att avgöra om en fast sits rekommenderas om du använder kudden på en rörlig - sits rullstol.

Var och en av följande produkter som använder sig av DRY FLOATATION®-teknologi. Den är avsedd att anpassa sig till individens form i sittande ställning för att skydda hud och mjukvävnad, hjälpa till vid positionering samt tillhandahålla en miljö som underlättar sår-läkning.

- ROHO LOW PROFILE® TVÅKAMMARSDYNA (LOW PROFILE Dyna med två kammare)
- ROHO MID PROFILE™ TVÅKAMMARSDYNA (MID PROFILE Dyna med två kammare)
- ROHO HIGH PROFILE® TVÅKAMMARSDYNA (HIGH PROFILE Dyna med två kammare)
- ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® DYNA (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
- ROHO QUADTRO SELECT MID PROFILE™ DYNA (QUADTRO SELECT MID PROFILE)
- ROHO QUADTRO SELECT HIGH PROFILE® DYNA (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
- ROHO CONTOUR SELECT® DYNA (CONTOUR SELECT)
- ROHO ENHANCER® DYNA (ENHANCER)

Var och en av följande produkter som använder sig av DRY FLOATATION®-teknologi. Den är avsedd att anpassa sig till individens form i sittande ställning för att skydda hud och mjukvävnad samt tillhandahålla en miljö som underlättar sår-läkning.

- ROHO LOW PROFILE® ENKAMMARSDYNA (LOW PROFILE Dyna med en kammare)
- ROHO MID PROFILE™ ENKAMMARSDYNA (MID PROFILE Dyna med en kammare)
- ROHO HIGH PROFILE® ENKAMMARSDYNA (HIGH PROFILE Dyna med en kammare)

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

MATERIAL:

Rullstolsdynorna i denna bruksanvisning är tillverkade av neoprenegummi med nickelpläterade mässingsventiler. SELECT-dynorna har även ISOFLO Memory Control®. Över och undersidan på ISOFLO Memory Control består av polykarbonat, knapparna består av polypropylen och axeln består av polypropylen som är gjuten över aluminium.

PRODUKTSPECIFIKATIONER FORTS:**STANDARDDIMENSIONER OCH VIKT PÅ DYNORNA:**

DYNA	HÖJD	MEDELVIKT WEIGHT*
LOW PROFILE SINGLE COMPARTMENT CUSHION	2.25 in. (5.5 cm)	2.5 lbs. (1.1 kg)
LOW PROFILE DUAL COMPARTMENT CUSHION	2.25 in. (5.5 cm)	2.5 lbs. (1.1 kg)
QUADTRO SELECT LOW PROFILE	2.25 in. (5.5 cm)	2.5 lbs. (1.1 kg)
MID PROFILE SINGLE COMPARTMENT CUSHION	3.25 in. (8.5 cm)	3.0 lbs. (1.4 kg)
MID PROFILE DUAL COMPARTMENT CUSHION	3.25 in. (8.5 cm)	3.0 lbs. (1.4 kg)
QUADTRO SELECT MID PROFILE	3.25 in. (8.5 cm)	3.0 lbs. (1.4 kg)
HIGH PROFILE SINGLE COMPARTMENT CUSHION	4.25 in. (10.5 cm)	3.25 lbs. (1.5 kg)
HIGH PROFILE DUAL COMPARTMENT CUSHION	4.25 in. (10.5 cm)	3.25 lbs. (1.5 kg)
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE	4.25 in. (10.5 cm)	3.25 lbs. (1.5 kg)
CONTOUR SELECT	2.25 till 4.25 in. (5.5 till 10.5 cm)	3.5 lbs. (1.6 kg)
ENHANCER	2.25 till 4.25 in. (5.5 till 10.5 cm)	3.5 lbs. (1.6 kg)

*Obs: Medelvikten är baserad på en kammardyna med storleken 9 x 9 (16.5 in. x 16.5 in., 42.0 cm x 42.0 cm).

DYNA	MINSTA BREDD			MINSTA DJUP			STÖRSTA BREDD			STÖRSTA DJUP		
	# kamm ares	in.	cm	# kamm ares	in.	cm	# kamm ares	in.	cm	# kamm ares	in.	cm
LOW PROFILE SINGLE COMPARTMENT CUSHION	6	11.5	29.0	6	11.5	29.0	11	20.0	50.5	11	20.0	50.5
LOW PROFILE DUAL COMPARTMENT CUSHION	6	11.5	29.0	6	11.5	29.0	11	20.0	50.5	11	20.0	50.5
QUADTRO SELECT LOW PROFILE	5	11.0	28.0	6	11.75	30.0	13	24.5	62.5	12	22.0	56.0
MID PROFILE SINGLE COMPARTMENT CUSHION	7	13.25	33.5	7	13.25	33.5	11	20.0	50.5	11	20.0	50.5
MID PROFILE DUAL COMPARTMENT CUSHION	8	14.75	37.5	9	16.5	42.0	8	14.75	37.5	9	16.5	42.0
QUADTRO SELECT MID PROFILE	8	16.0	41.0	8	15.25	38.5	10	19.5	49.5	10	18.5	47.0
HIGH PROFILE SINGLE COMPARTMENT CUSHION	6	11.5	29.0	6	11.5	29.0	15	26.75	68.0	12	21.75	55.0
HIGH PROFILE DUAL COMPARTMENT CUSHION	6	11.5	29.0	6	11.5	29.0	11	20.0	50.5	11	20.0	50.5
QUADTRO SELECT HIGH PROFILE	6	12.75	32.5	6	11.75	30.0	14	26.25	67.0	12	22.0	56.0
CONTOUR SELECT	7	14.5	36.5	8	15.25	38.5	13	24.5	62.5	12	22.0	56.0
ENHANCER	8	14.75	37.5	8	14.75	37.5	11	20.0	50.5	11	20.0	50.5

Obs: Kontakta Kund vård för specifika dynstorlekar.




VARNINGAR

ROHO medicinska produkter är tänkta att vara del av en heltäckande behandling. ROHO, Inc. rekommenderar att en kliniker, såsom en läkare eller terapeut gör produktrekommendationer baserade på en undersökning av individens medicinska och terapeutiska situation.

- Kontrollera huden ofta, minst en gång om dagen. Nedbrytning av hud/mjukdelar kan inträffa på grund av ett antal faktorer, som kan variera mellan individer. Rodnad, tryckskador, eller mörkare områden (jämfört med normal hud) kan indikera början på mjuk vävnadsnedbrytning. Rådgör omedelbart med en läkare.
- Sittdynan och överdraget **MÅSTE** vara i kompatibla storlekar och användas enligt instruktionerna i manualen. **OM SÅ INTE SKER** kan fördelarna med att använda sittdynan minska eller elimineras, och då ökar även risken för skada på hud och annan mjukvävnad samt riskerna för fall.
- **KONTROLLERA UPPBLÅSNINGEN OFTA, HELST EN GÅNG OM DAGEN!**
- **KORREKT MÄNGD LUFT:** Bruk av annan pump än den medföljande handpumpen kan skada dynan och upphäva garantin.
- **FÖR LITE LUFT:** Använd **ALDRIG** en dyna utan tillräckligt med luft. För lite luft minskar eller förstör fördelarna med dynan och ökar risken för att huden eller annan mjuk vävnad kan skadas. Om din dyna verkar ha för lite luft eller verkar läcka, kontrollera att alla ventil(er) är stängda genom att vrida luftventilerna medsols. **ÖBS:** För SELECT-dynor, kontrollera att den gröna knappen på ISOFLO Memory Control är nedtryckt på mitten av ISOFLO till UNLOCKED (OLÅST) läge så att alla kammare fylls vid upp pumpningsprocessen. Om din dyna ändå inte håller luften ska du omedelbart kontakta sjukvårdspersonal, leverantör eller ROHO, Inc.
- **FÖR MYCKET LUFT:** Använd **ALDRIG** en dyna med för mycket luft. Detta gör att du inte kan sjunka in i dynan och det kommer att minska eller förstöra dynans fördelar och öka riskerna för skada på huden eller annan mjuk vävnad.
- **RIKTNING PÅ DYNAN OCH ÖVERDRAGET:** Produkten måste användas med luftkammarna uppåt. Om överdraget inte satts på korrekt eller är av fel storlek, kommer det att minska eller förstöra dynans fördelar och öka riskerna för skada på huden eller annan mjuk vävnad.
- **TRYCK:** Ändringar i höjdnivå kan nödvändiggöra justeringar på din dyna. Kontrollera din dyna när du ändrar höjdnivå.
- **PUNKTERING:** Undvik skarpa objekt i närheten av dynan eftersom de kan punktera luftkammarna och få dynan att tappa luft.
- **HETTA/FLAMMOR: UTSÄTT EJ** din dyna för höga temperaturer, öppen låga eller het aska.
- **KLIMAT:** Om en dyna har befunnit sig i temperaturer under 32°F/0°C och verkar ovanligt stel ska dynan värmas upp i rumstemperatur. Öppna sedan luftventilen i hörnet. Rulla ihop dynan och rulla sedan upp den igen tills neoprenet är mjukt och böjbart igen. Upprepa korrekta justeringsprocedurer innan dynan tas i bruk.
- **INSTABILITET OCH RISK FÖR FALL: ANVÄND EJ** din dyna ovanpå eller tillsammans med andra produkter eller material om inget annat anges i avsnittet för Avsett bruk. Att göra så kan öka instabiliteten och risken för fall. Rådfråga din sjukvårdspersonal om hur dynan ska användas.
- **HINDER: PLACERA EJ** några hinder mellan användaren och dynan eftersom det kommer att göra dynan mindre effektiv.
- **HANTERING: ANVÄND EJ** ventilerna som handtag för att bära eller dra dynan. Bär dynan antingen med hjälp av det gula bärrepet av nylon (där så är lämpligt), dynans underkant eller överdragets bärhandtag.
- **LÖSNINGAR: LÅT EJ** oljebaserade lotioner eller lanolin komma i kontakt med din dyna eftersom de kan negativt påverka materialet.
- **OZONGENERATORER:** Den amerikanska miljövärdsstyrelsen, U.S. Environmental Protection Agency, Health Canada, och andra statliga myndigheter har utfärdat varningar angående bruk av ozongeneratorer. Långvarig exponering för ozon kommer att negativt påverka gummi, tyger och andra material som ingår i din ROHO-produkt och kan påverka funktionen på din produkt samt upphäva garantin.
- **PRODUKTANVÄNDNING: ANVÄND EJ** din dyna som flytredskap (t. ex. flytväst).
- **ANVÄND EJ** någon pump, överdrag eller reparationssett som inte kommer från ROHO, Inc. Garantin kan komma att upphävas om så skulle ske.

TILLBEHÖR

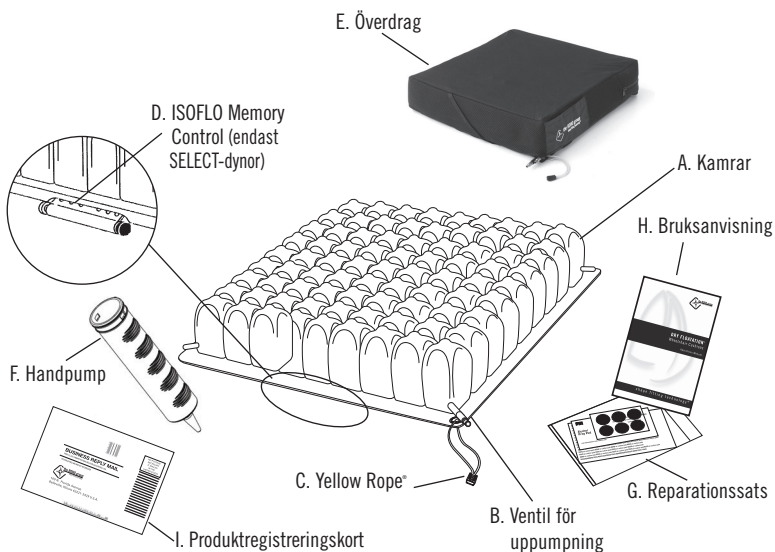


- A. **Kamrar:** Individuella, sammankopplade luftkamrar.
- B. **Ventil för uppumpning:** Används för att öppna och stänga dynans luftväg. Vissa modeller har mer än en ventil.
- C. **Yellow Rope:** Används för att lyfta och bära dynan.
- D. **ISOFLO Memory Control:** Endast på SELECT-dynor. ISOFLO Memory Control gör det möjligt för dig att sköta luftdistributionen i dynan så att positionering och stabilitet kan ställas in genom att låsa in luften i separata kamrar.
- E. **Överdrag:** Används för att skydda dynan. Fästen med krok och ögla på botten som gör det lättare att sätta fast dynan i stolen ingår.
- F. **Handpump:** Används för att pumpa upp dynan.
- G. **Reparationssett:** Sats med lagningslapp för mindre reparationer.
- H. **Bruksanvisning:** Instruktioner för justering, vård, garanti och annan viktig information om din dyna.
- I. **Produktregistreringskort:** Används för att registrera din produkt. Fyll i produktregistreringskortet och skicka det till ROHO Inc. eller registrera produkten online på www.roho.com.


Om du behöver beställa reservdelar **från U.S.A.**, kontakta ROHOs kundtjänst, ring din leverantör eller besök ROHO-butiken på www.therohostore.com. **Utänför U.S.A.**, kontakta ROHOs distributör i det land där du bor.

JUSTERINGSINSTRUKTIONER:


! **OBS: Dynor med dubbla kamrar:** För att maximera fördelarna med att kunna bestämma sittposition för personer med snedställda bäcken måste den sidan som har den djupaste benutskjutningen justeras först. Dubbla kammare kan användas för placering sida till sida eller framsida till baksida. För personer som använder placering framsida till baksida ska den bakre sektionen ställas in först. När båda justeringarna gjorts ska båda facken kontrolleras igen så att de är rätt inställda.

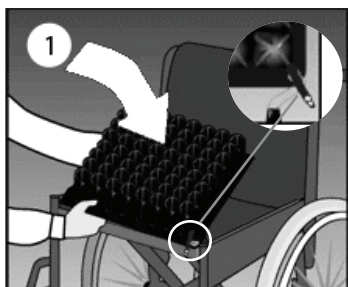


1. Placera dynan i mitten av sitsen och se till att luftkamrarna pekar uppåt. Fråga personen som skrev ut dynan om dynor finns där ventilerna sitter på annan plats.

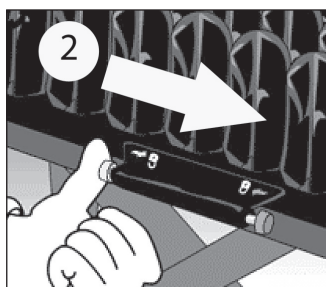


2. (DETTA STEG ENDAST FÖR SELECT-DYNOR) Tryck ISOFLÖS gröna knapp mot mitten "UNLOCKED" för att öppna.

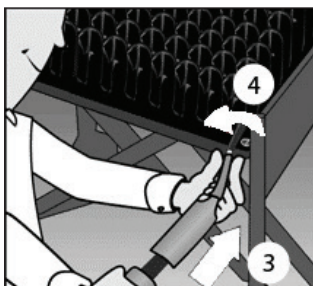


3. Skjut pumpens gummimunstycke över ventilen.
4. Vrid ventilen **motsols** för att öppna.

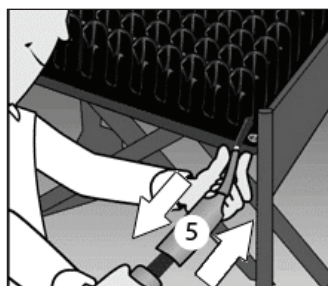


5. Pumpa upp dynan tills den börjar att böja sig uppåt något.

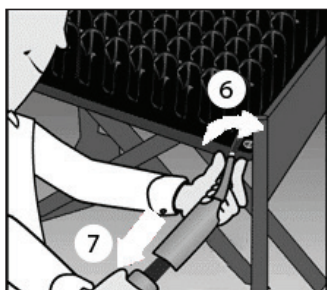

6. Nyp i pumpens munstycke och vrid det **medsols** för att stänga.
7. Ta bort pumpen. (Upprepa steg 1 - 7 för de återstående luftventilerna på dynor med fler ventiler.)

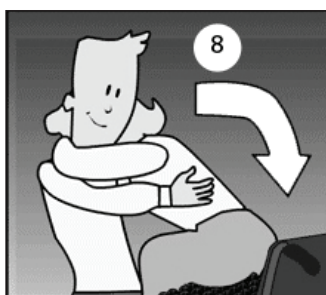


8. Låt användaren sitta på stolen och se till att dynan sitter mitt under personen. Användaren ska sitta som han/hon brukar göra.

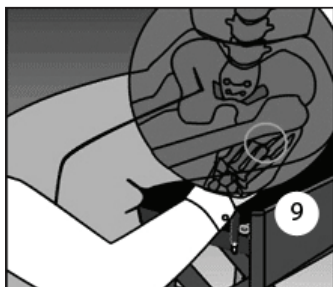JUSTERINGSPÅRNINGAR FORTS:

9. Låt din hand glida mellan dynans yta och användarens ena sittbensknöl. Lyft användarens ben något och känn efter användarens lägsta ben (sittbensknöl) finns. Sänk sedan benet till sittande läge.



10. Öppna ventilen för att släppa ut luft medan du håller handen under personens sittbensknöl.

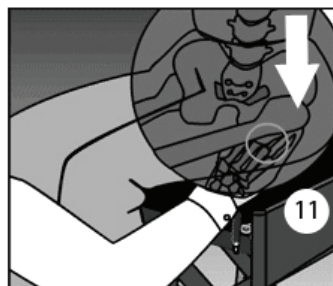


11. Släpp ut luft tills du knappt kan röra fingertopparna.

! UPPBLÅSNING: SITTE EJ på en dyna som inte blåsts upp ordentligt. För lite eller för mycket luft i dynan, även individuella kammare, minskar eller förstör dynans fördelar och kan öka risken för skada på huden eller annan mjuk vävnad. Dynan är mest effektiv när det finns 1.5 cm till 2.5 cm luft mellan användarens sittbensknölar och ytan på dynan.



12. Vrid ventilen till stängd. (Upprepa steg 9 - 12 för de återstående luftventilerna på dynor med flera ventiler.)

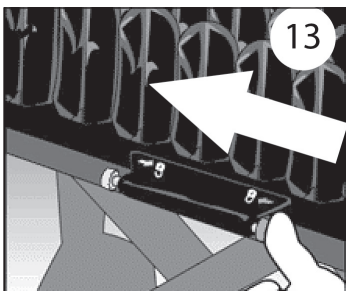

13. (ENDAST SELECTDYNNOR) Sätt användaren på dynan i önskad position och be att användaren behåller denna position medan luft flödar igenom ISOFLO Memory Control. När luftflödet är klart, tryck ISOFLOs "röda" knapp mot mitten till LÅST läge. Detta kommer att isolera flödet av luft och leda till en mer stabil sittposition. Kontrollera ytterligare en gång dynans kammare för att vara säker på att den pumpats upp ordentligt.

SÅ HÄR TAR MAN AV ÖVERDRAGET & SÄTTER PÅ ETT ANNAT:


Även om ett överdrag inte krävs medföljer ett ROHO-överdrag med varje standarddyna för att motverka att dynans kammare sticker ut utanför rullstolsstolen och är praktiskt vid flyttning t.ex. glidning på en bräda. Överdragets undersida består av ett antiglidmaterial som hjälper till att hålla dynan på plats i stolen.

Så här sätter du på överdraget:

1. Vik ut överdraget med antiglidmaterialet uppåt och med dragkedjan mot dig.
2. Sätt in dynan i överdraget med luftkammarna nedåt.
3. Standardöverdrag: Dra det oljetförsedda hörnet av din dyna genom en öppning i hörnan av överdraget tills metallöljetten syns. Upprepa denna procedur tills alla fyra hörnen syns. (Var försiktig när du drar ventilaxeln och rephandtaget genom öppningen).

Heavy Duty Cover/Hygienöverdrag: Sätt försiktigt in dynan i överdraget med ventilen mot dragkedjan.

4. Dra igen dragkedjan och vänd dynan så att **kammarna pekar uppåt**. Din dyna är nu klar att användas förutsatt att den har anpassats efter användaren (se Justeringsinstruktioner i denna bruksanvisning).

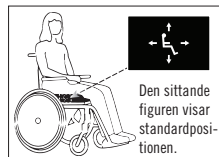

Se etikett på undersidan av sittyndan och bild på överdrag för korrekt orientering av dyna och överdrag.

Om den har satts i ordentligt kommer dynan att ligga platt i stolen (antiglidmaterialet nedåt) med alla kammarna täckta och alla fyra hörnen synliga (gäller ej HD).

Så här tar man av överdraget: Öppna dragkedjan och ta av överdraget från dynan.

⚠ Undersök om överdraget har några skador och byt ut om så behövs.

RENGÖRING & DESINFICERING AV DIN PRODUKT:

Rengöring och desinficering är två olika processer. Rengöring måste göras före desinficeringen. Produkten måste rengöras, desinficeras och kontrolleras så att den fungerar ordentligt mellan olika användare.

Skötsel av överdraget: Ta bort krokfästena från undersidan av överdraget före det rengörs och desinficeras. Tvätta med liknande färger.

Så här rengör man överdraget: Ta av överdraget. Maskintvätta i kallt vatten (30°C) med ett mildt tvättmedel, skonsamt program eller torka rent med ett neutralt rengöringsmedel och varmt vatten. Torktumla, låg inställning.



Så här desinficerar man överdraget: Handtvätt kallt vatten (30°C) med 1 del flytande hushållsblekmedel till 9 delar vatten och skölj sedan noga. Överdraget kan även tvättas i maskin i hett vatten (60°C) för att desinficera. Torktumla på låg inställning.



⚠ Obs: Följ säkerhetsföreskrifterna på blekmedelsförpackningen.

Så här rengör man dynan: Ta av överdraget, stäng ventil(erna) och placera den i en stor ho. ROHO, Inc. rekommenderar bruk av ett mildt diskmedel eller tvättmedel eller annat rengöringsmedel för allmänbruk. Späd enligt anvisning på förpackningen för rengöring av ytan. Använd en mjuk plastborste, svamp eller tvättlapp för att lätt skrubba alla ytor på dynan. Skölj med rent vatten och lufttorka. **UTSÄTT EJ** dynan för direkt solljus.

För att desinficera dynan: Repetera rengöringsinstruktionerna ovan med en lösning av 1 del flytande hushållsblekmedel per 9 delar varmt vatten. Följ säkerhetsföreskrifterna på etiketten på blekmedelsflaskan. Håll den rena produkten fuktig med blekmedelslösning i 10 minuter. Skölj noga med rent vatten och lufttorka. **Obs:** De flesta bakteriedödande desinficeringsmedel är säkra om de används enligt tillverkarens instruktioner för utspädning.

UNDVIK:



- att maskintvätta eller torktumla dynan.
- att använda slipande material som stålull eller skursvampar.
- att använda frätande, maskindiskmedel.
- att använda rengöringsprodukter som innehåller petroleum eller organiska lösningsmedel som till exempel acetone, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, vätskor för kemtvätt, medel för borttagning av klistermärken o.s.v.
- att låta vatten eller rengöringslösning komma in i produkten.
- att utsätta produkten för ultraviolettt ljus eller rengöringsmetoder med ozongas.
- att använda oljebaserade lotioner, lanolin, eller fenolbaserade desinficeringsmedel på din produkt eftersom de kan påverka integriteten av materialet.

RENGÖRING & DESINFICERING AV DIN PRODUKT. FORTS.:

Så här steriliserar man kudden: Följ instruktionerna för rengöring och desinficering ovan. ROHOs produkter är inte packade under sterila förhållanden och de är inte avsedda, och behöver ej heller att steriliseras innan de tas i bruk. Höga temperaturer accelererar föråldringsprocessen och kan orsaka skada på produkten. Om regler vid institutionen kräver sterilisering, öppna ventil(erna) och använd den lägsta möjliga temperaturen under kortast möjliga tid. Gassterilisering är att föredra före ångautoklav men ingen av dem kan rekommenderas. I alla processer som innebär tryck, se till att alla ventiler är öppna för att förhindra skada på produkten. ROHO, Inc. avråder starkt steriliseringsmetoder vid temperaturer högre än 93° C för DRY FLOATATION produkter.

FELSÖKNING:

Läcker luft: Se först till att ventilerna är ordentligt stängda genom att vrida ventilerna medsols. Om dynan fortfarande läcker ska du se efter om det uppstått hål i dynan. Om det inte syns några hål, ska ventilen stängas och en uppblåst sektion av dynan sänkas ned i en diskho eller badkar för att se om luft slipper ut.

Om hål stora som knappålshuvud uppstått ska du använda reparationsssatsen som medföljde din produkt och följa instruktionerna för reparation. Om stora hål eller annat läckage har upptäckts, se avsnittet "BEGRÄNSAD GARANTI".

Obekvämt/ostadigt: Se till att dynan inte blåsts upp för mycket. (se justeringsinstruktioner). Se till att luftkammare och överdragets elastiska översida sitter "UPPÅT". Se till att dynan inte är för stor eller för liten för rullstolen. Låt användaren sitta på dynan i minst en timma för att vänja sig vid strukturen på produktens yta och känslan av att sjunka ned i luftkammarna.

Dyna glider omkring på rullstolen: Se till att undersidan på dynan som består av en anti-glidyta sitter "NEDÅT." Läs etiketterna om riktning på dynan och överdraget.

AVYTTRING:

Om de används och bortskaffas på rätt sätt, så har delar av produkterna i denna handbok inga kända miljörisiker. Kassera produkten och/eller komponenter i enlighet med lokala bestämmelser på din ort. Återvinning av ROHO produkter: Begagnade och uttjänade ROHO produkter kan slängas i brännbart avfall hos en kvalificerad återvinningsstation med utgångspunkt utifrån lokala riktlinjer där produkterna utranteras.

KONTAKTINFORMATION:

Inom U.S.A.: ROHO Kundservice och Garanti ärenden

Telefon: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449

Garanti ärenden : warranty@roho.com • Kundservice : cc@roho.com

Obs: Om du ombuds returnera någon artikel, ska den skickas till:

ROHO, Inc., 1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223

Utanför U.S.A.: ROHO International

Telefon: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • E-post: intl@roho.com

Eller besök www.roho.com för en lista med ROHO's internationella distributörer.

RETURNERINGSVILLKOR:

Alla produkter som returneras måste vara nya och oanvända och godkännande måste ges i förhand av ROHO Inc. Du beläggs dessutom med en avgift för återupptagning i lagret. Innan du returnerar din produkt i **U.S.A.**, var god kontakta vår garantiserviceavdelning.

Utänför U.S.A., kontakta distributören för ROHO i det land där du bor.

BEGRÄNSAD GARANTI:

Vad täcks?

ROHO, Inc. täcker eventuella defekter i material eller tillverkning av produkten.

Hur länge?

Från det datum då produkten inköptes:

SELECT CUSHIONS	36 månader
Alla andra DRY FLOATATION Products	24 månader
Överdrag till dynorna	6 månader

Vad täcks inte av garantin?

En produkt som har missbrukats, skadats i samband med en olycka, eller skadats på grund av en naturkatastrof som till exempel översvämning, tromb, jordskakning, eldsvåda. Utbyte av tillbehör som medföljer produkten eller manipulering av produkten gör att garantin upphävs.

Vad kunden måste göra.

Inom **U.S.A.**, ska kunden kontakta garantiserviceavdelningen hos ROHO, Inc.. **Obs:** Artiklar som sänts till ROHO, Inc. utan föregående tillåtelse kommer ej att returneras till kunden. **Utänför U.S.A.**, kontakta distributören för ROHO i det land där du bor.

Frågor?

Se **KONTAKTINFORMATION**.

Disclaimer.

Eventuella underförstådda garantier som exempelvis **KÖPVÄRDE OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE** är begränsade till samma tidsperiod som för de produkttyper som vi hänvisar till ovan i avsnittet "Hur länge" och åtgärder som vidtas vid fordran mot sådana garantier eller eventuella uttryckta garantier som omfattas av detta måste inledas inom den tidsperioden.

Dina rättigheter och den effekt denna garanti har på dem.

Denna garanti begränsar varaktigheten av alla underförstådda garantier enligt ovan och begränsar eller utesluter ersättning för otursam eller följaktig skada. Vissa lagsagor tillåter inga begränsningar för hur länge underförstådda garantier kan gälla och vissa lagsagor tillåter inte uteslutning eller begränsning av otursam eller följaktig skada så dessa bestämmelser är eventuellt inte tillämpliga i ditt fall. Även om denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter är det möjligt att du också har andra rättigheter som kan variera från en lagsaga till en annan.



Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

www.roho.com



The Quality Management System
of ROHO, Inc. is certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

T20200
Revision: SV 04/15
Print Date: 04/10/15

Qty: 1



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

