


Etac Transit

Manual svensk

 etac®

742255 2022-12-21

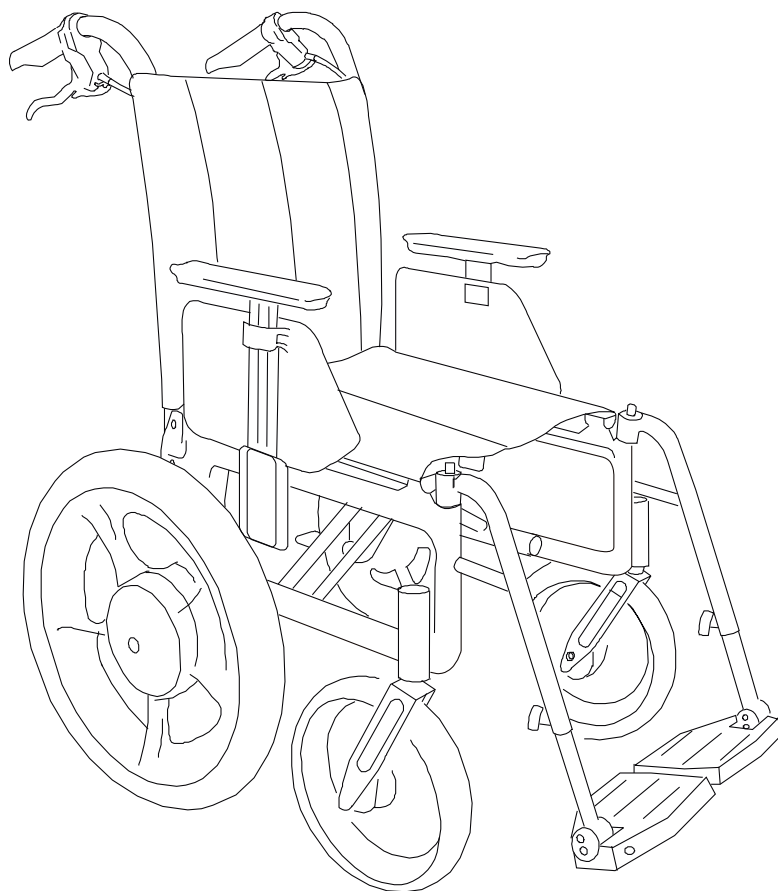

Innehåll

1. Allmänt – inledning		6. Efterjusteringar	
Avsedd användning	3	Vårdarbroms	24
2. Beskrivning		Benstöd steglöst, vinkelreglerbart (tillval).....	24
.....	4	Amputationsbenstöd (tillval).....	24
3. Stolens möjligheter		7. Tillbehör - justering, handhavande	
.....	4-5	Höftbälte	25
4. Tillbehör		8. Teknisk data	
.....	5-6	Etac Transit	26
5. Inställningar		Tester och garantier	26
Fremre sitshöjd	7	11. Service och underhåll	
Sitshöjdsjustering med hjälp av framgaffelfäste	7	Tvätt av rygg och sits	27
Vinkelinställning av framgaffelfäste.....	7	Drivhjul/länkhjul	27
Demontera/montera framgaffel	8	Bromsar	27
Brukarmanual		Tvätt av chassi.....	27
.....	9-20	Bättringsfärg	27
Symboler och varningar	10	Övrigt	27
Transport i fordon	11		
Handhavande	12-13		
Inställningar sittkomfort.....	14-15		
Körteknik, användning.....	16-18		
Skötselråd.....	20		
Felsökningsschema	20		
5. Inställningar forts.			
Sitsvinkel.....	21		
Sitsdjup.....	21		
Sittkomfort	21		
Justering av ryggstödshöjd	22		
Justering av ryggvinkel	22		
Justering av ryggstödshöjd (höjdregerbart körhandtag) ...	22		
Justering av ryggklädsel (reglerbar)	23		

1. Allmänt

Tack för att Du valt en produkt från Etac. För att undvika skador vid montering, hantering och användning, ska denna manual läsas igenom och sparas. Du hittar den också under www.etac.com där Du kan välja språk via länken "International" och "Local websites". Här hittar Du även övrig produktdokumentation som t.ex. förskrivarinformation, förköpsguide och rekonditioneringsanvisning.

I den här manualen är Brukaren den person som sitter i stolen. Hjälparen är den person som assisterar brukaren.




Den här symbolen förekommer i manualen tillsammans med text. Den uppmärksammar moment där rullstolen, brukarens eller hjälparens säkerhet kan äventyras.



Den här symbolen förekommer i manualen tillsammans med text. Här hittar du tänkvärda råd och tips.

I denna manual finner Du i mittuppslaget en del som ska ryckas loss och som innehåller brukarinformation.

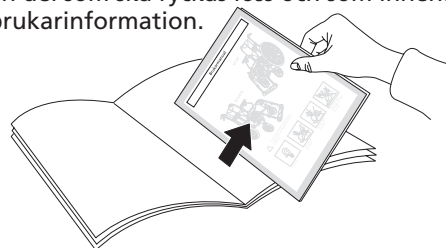

Avsedd användning

Transit är en manuell kryssfälld transportrullstol med variationsmöjligheter och den är framförallt avsedd att användas ute. Sitsen är inställbar i vinkel. Ryggstöd och fotplattor är inställbara i höjd och vinkel. Som komplement finns olika tillval och tillbehör: Olika benstödsvarianter, sittdyna, höjdregerbara körhandtag, tipskydd mm.

Transit är lätt att hantera och har en bra sittkomfort och bra köregenskaper.

Om en allvarlig incident inträffar i samband med användning av produkten ska den utan dröjsmål rapporteras till den lokala återförsäljaren och den behöriga nationella myndigheten. Den lokala återförsäljaren kommer att vidarebefordra informationen till tillverkaren.

Verktyg



Insexnyckel
3, 4, 5, 6 mm



Ringnyckel
8, 10, 13 mm



Hylsnyckel
24/19 mm




Skruvmejsel
PH1

2. Beskrivning

- 1 Bromshandtag vårdabroms/parkeringsbroms
- 2 Bromsvajer
- 3 Ryggör
- 4 Klädsel rygg
- 5 Armstöd kort
- 6 Skyddsskiva
- 7 Klädsel sits
- 8 Benstöd
- 9 Fotplatta
- 10 Ratt fotplattslås
- 11 Länkhjul
- 12 Framgaffel
- 13 Kryss
- 14 Gavel
- 15 Bakhjul
- 16 Serienummeretikett*


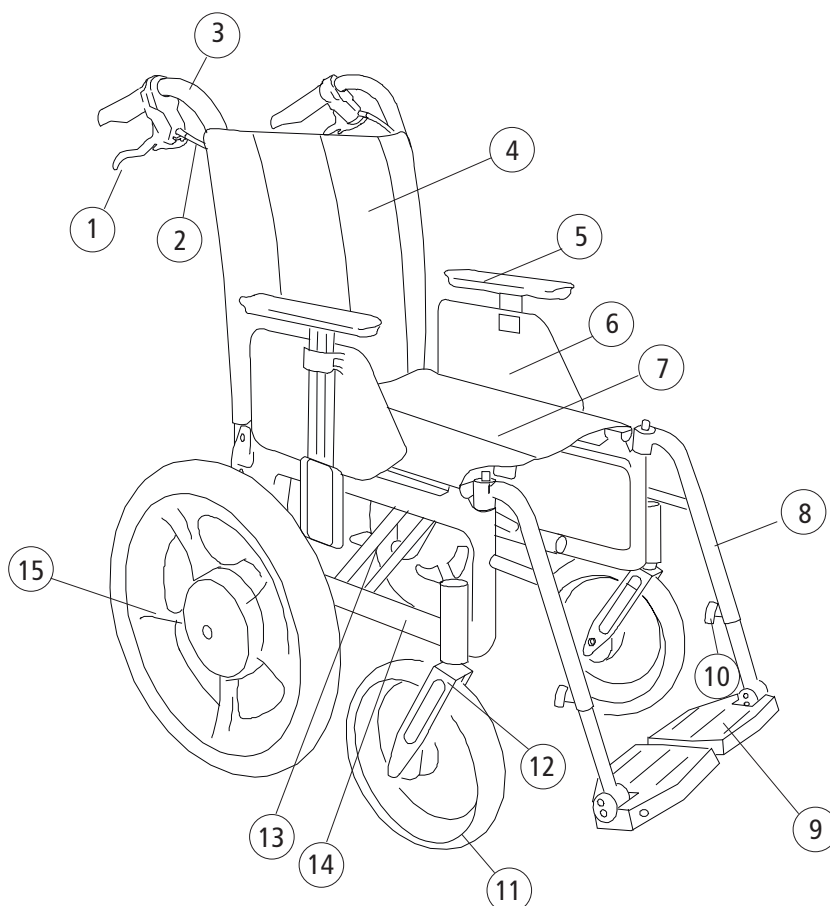





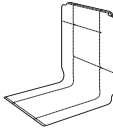
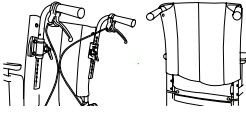
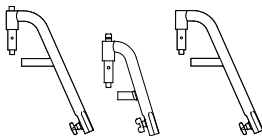
*Produktens tillverkningsdatum kan utläsas i den streckkod som finns på produkten. Under streckkoden står siffran 11 inom parentes. Sifferkombinationen efter denna parentes är tillverkningsdatumet.



3. Stolens möjligheter

I avsnittet "Stolens möjligheter" kan du se alla de anpassningar som kan göras på rullstolen. Ytterligare så kallade "Udda kombinationer" finns, t.ex. vad gäller drivhjul, länkhjul och ryggmodell. Kontakta kundservice.


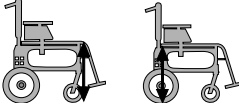
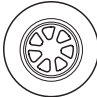

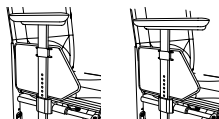
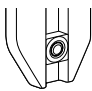
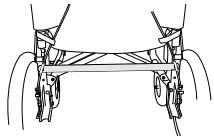
För mer information om stolens möjligheter, se www.etac.com

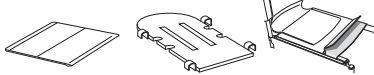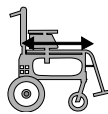Sitshöjd		Främre	51 cm
		Bakre	49 cm
Länkhjul		8x2" massivt	
Framgaffel			
Bakhjul		16x2" bakhjul med vårdarbroms/parkeringsbroms luftpumpat, fast axel	
		16x2" bakhjul med vårdarbroms/parkeringsbroms massivt, fast axel	
Sits		Fast	Hård, sitshöjd 2 cm lägre än tygklädsel. Lätt att ta av vid hopfällning
		Justerbar	
Sitsdjup		42 cm	
Ryggstöd		Höjd 40-47,5 (fasta lägen 2,5 cm)	
		Vinkel -6° - +6°, fasta lägen	
		Med höjdregerbara körhandtag, bakomliggande	
Ryggklädsel		Fast	
		Reglerbar	
		Institution	
Ryggöverdrag		Standard	
		med brodyr	
		med brodyr och logga	
Körhandtag		Höjdregerbara	
		Fasta	
Benstöd		Låsbara	
		Låsbara med snäv vinkel alt kort med snäv vinkel	
		Låsbara institution vid vinkel	





3. Stolens möjligheter

I avsnittet "Stolens möjligheter" kan du se alla de anpassningar som kan göras på rullstolen. Ytterligare så kallade "Udda kombinationer" finns, t.ex. vad gäller drivhjul, länkhjul och rygghjull. Kontakta kundservice.



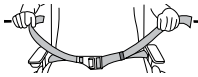

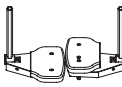


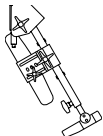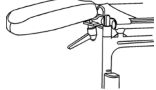
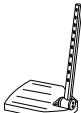




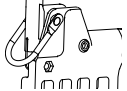
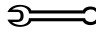
För mer information om stolens möjligheter, se www.etac.com

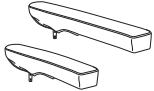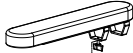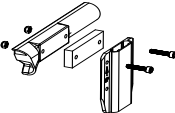Benstöd, vinkelreglerbart		Mod 1 med vadplatta reglerbar i höjd, djup, vinkel och sidled
Amputations- benstöd		Justerbart i höjd, reglerbart i längd, vinkel och sidled. Kan kombineras med amputationsvikter.
Fotstöd		Standard: Max längd 51 cm Min längd 33 cm
		Kort infästningsrör för att kombineras med korta snäva benstöd
Armstöd		Längd 25 cm, höjjusterbart
		Längd 38 cm, höjjusterbart
		Längd 25 cm, höjjusterbart med fingerskruv
		Längd 38 cm, höjjusterbart med fingerskruv
Låssats armstöd		Låst armstöd är inte avtagbart men fritt för höjjustering
Stag		Förhindrar ihopfällning
Färg ram		Grå blåster

4. Tillbehör

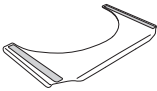Överdrag armstöd	Avtagbart, 25 alt 38 cm långt polstrat alt gel, mörkgrå plysch alt svart Dartex. Passar armstöd med massiv platta.	
Armstödsdyna	Bred och mjuk, 8x40 cm, monteras på armstöd	
Breddningsatts	För att flytta ut drivhjul, broms och armstöd 10 mm per sida	
Bord	Transparent, monteras på långa armstöd	

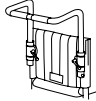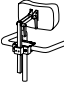4. Tillbehör

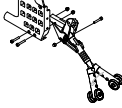Hemibord	Transparent, bredd upp till 50 cm. Kan kompletteras med halkskydd	
Sittdyna	Mörkgrå plysch och svart velour, 56 cm, kapas efter inställt sittdjup, tvättbar	
Höftbälte	Tvådelat, med fästpunkter på rullstolsramen	
Hälband	Svart nylon, reglerbart i längd	
Förlängd fotplatta	Monteras på befintlig fotplatta, från sitsbredd 40-55 cm	
Vadband	Avtagbart, svart nylon, reglerbart i längd	
Polstring	För vadband	
Körbygel	Höj- och sänkbara med 2 cm intervall. Avtagbara.	
Huvudstöd	Monteras på körbygel, reglerbart i höjd, djup och vinkel.	
Brukarbroms		
Tippskydd	Uppfällbart, fast längd	
Tippskydd	Teleskoperande, uppfällbart. Justerbart i höjd, reglerbart i längd och vinkel	
Käpphållare	Tvådelad varav resården fästes runt käppröret.	
Transportfäste		
Verktyg		

5. Inställningar

Främre sitshöjd

Främre sitshöjd kan justeras med hjälp av:


- Framgaffelfästet, justerbart i höjd och vinkel.



Tänk på tipprisken.
Kontrollera alltid tippskyddens inställning.

Sitshöjdsjustering med hjälp av framgaffelfäste

Lossa skruvarna (A och B). Justera efter streckmarkeringarna för lika höjd på båda sidor. Kontrollera och justera så att fästet är i lod (se avsnitt "Vinkelinställning av framgaffelfäste")

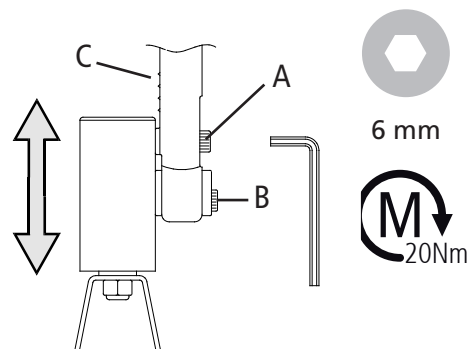

Tänk på tipprisken.
Kontrollera alltid tippskyddens inställning.

Vinkelinställning av framgaffelfäste

Rätt vinkelinställning är viktig för rullstolens köregenskaper.

Lossa fästskruven (A) ca 2 varv så att tagningen (C) går fri inuti hylsan.

För in insexnyckeln i hålet (B) och vrid tills fästet är lodrätt mot golvet. Starta alltid från ett läge så att hjulet förflyttas framåt i vridningen (D).




Tryck in hylsan och håll i rätt läge medan fästskruven dras åt.



Tänk på tipprisken.
Kontrollera alltid tippskyddens inställning.




Ta sikte mot något lodrätt, t ex dörrpost, bordsben vid inställningen.

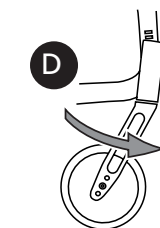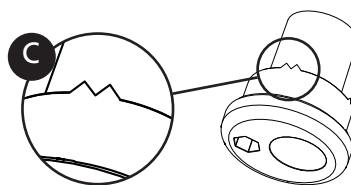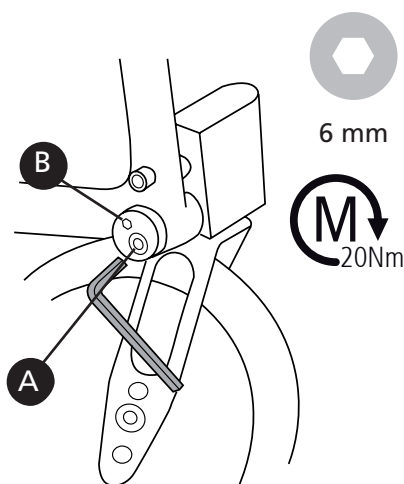

5. Inställningar

Demontera/montera framgaffel

- Demontera täckproppen (A) och lossa låsmuttern (B). Dra ut framgaffeln och flytta över den fasade brickan (C) och kullagret till den nya gaffeln.
- Montera brickor och kullager i framgaffelfästet enligt illustration. Bricka (C) placeras med fasad sida mot gaffeln. Fjäderbricka (D) överst under låsmuttern.
- Drag åt låsmuttern till stopp och lossa sedan 1/2-1 varv. Då får fjäderbrickan rätt inspanning vilket minskar risken att länkhjulet börjar "vobbla".
- Montera täckproppen.

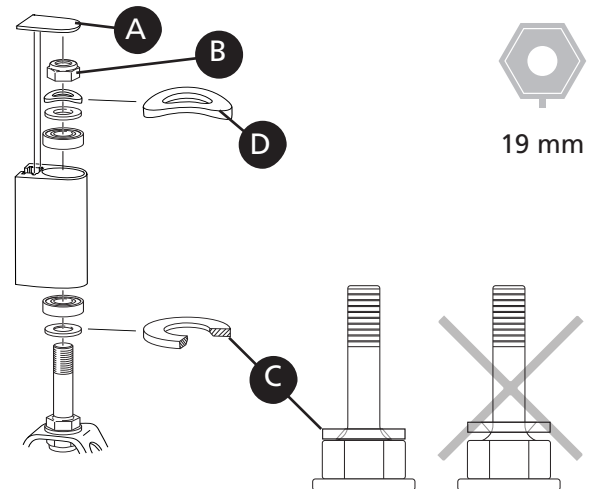


Brukarmanual


74225R 2022-12-21



Denna del av manualen (Brukarmanual) ska ryckas loss och vid alla tillfällen medfölja rullstolen då den innehåller viktig brukarinformation.

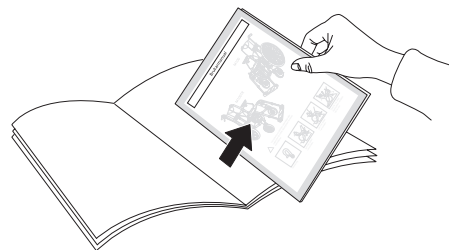

Etac Transit

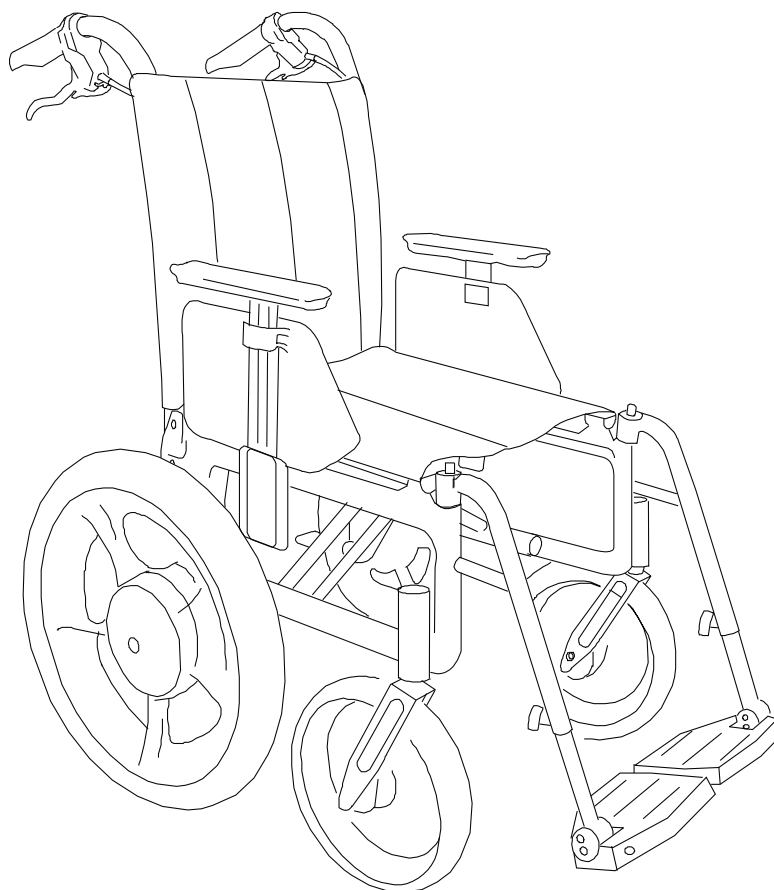

Brukarmanual


Innehållsförteckning

Brukarmanual


Symboler och varningar	10
Transport i fordon	11
Handhavande	12-13
Inställningar sittkomfort	
Ryggöverdrag	14
Sittdyna	14
Ryggklädsel	14
Ryggvinkel	14
Fotplattor	15
Vad/Hälband	15
Armstöd	15
Körteknik, användning	16-18
Skötselråd	20
Felsökningschema	20

Symboler och varningar


Dessa symboler förekommer på etiketter och i brukarmanual.

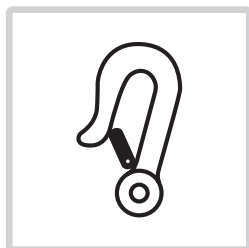


Förankring

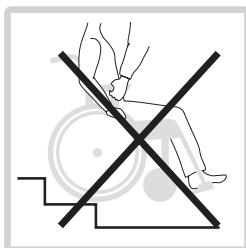


Lyft inte stolen
i armstöden

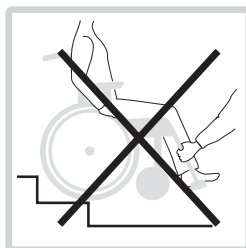

Lyft inte stolen
i benstöden

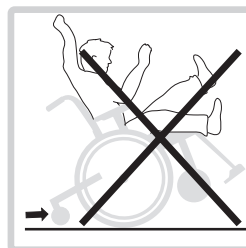


Tipprisk: Ha alltid
tippskydden nerfällda
när du kör.

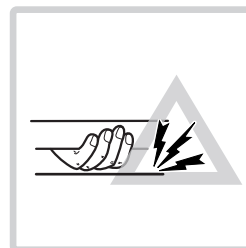



Klämrisk

Allmänna varningar


Följande ska beaktas vid all användning av produkten.

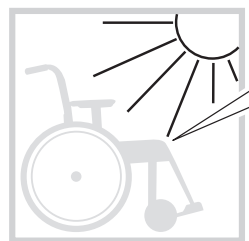

Starkt soljus kan
värma upp delar på
stolen och orsaka
brännskador

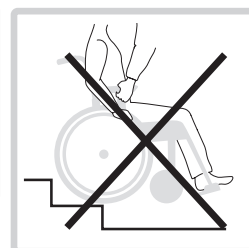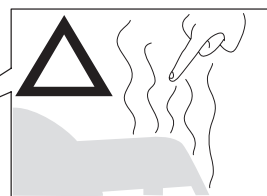

Lyft inte stolen
i benstöden

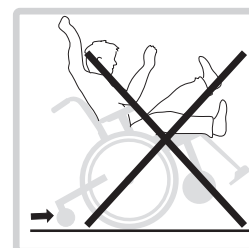

Tipprisk: Ha alltid
tippskydden nerfällda
när du kör.



Stolen kan tippa om
lutningen bakåt är
större än 9°. Använd
tippskydd!



Vid justering av sitshöjd eller ryggvinkel så måste
tippskyddets funktion kontrolleras.

Brukarmanual

Transport i fordon


Etacs rullstolar är krocktestade och godkända enligt ISO 7176-19 (se avsnitt "Tester och garantier" i manualen).

Etac rekommenderar i nämnd ordning:

1) Brukaren flyttar över till ett fordonsäte och använder fordonets trepunktsbälte vid transport. Rullstolen placeras då i bagaget eller i baksätet på ett säkert sätt så att den inte kan välta eller rulla.



- Rullstolen bör i första hand placeras i bagageutrymmet.
- Om rullstolen placeras i baksätet, se till att den inte kan välta eller rulla. Fäst den, om möjligt med bilens säkerhetsbälte.

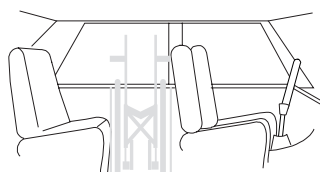

2) Rullstolen förankras framåtvänd i fordonet enligt denna manual, brukaren använder separat trepunktsbälte som är förankrat i fordonet. Det är på detta sätt rullstolen är testad och godkänd enligt ISO 7176-19.








Förankring

- Transportfäste bak skall användas
- Förankringsanordningen får ej dras genom hjulen eller runt ryggrören.



- Parkeringsbromsen skall användas
- Tippskyddet skall fällas ner
- Tillval/tillbehör som kan demonteras utan verktyg skall plockas av och spännas fast
- Ett rätt inställt huvudstöd skall användas
- Ryggstödet skall vara i höjd med eller över brukarens skuldror
- Tvärstag skall användas

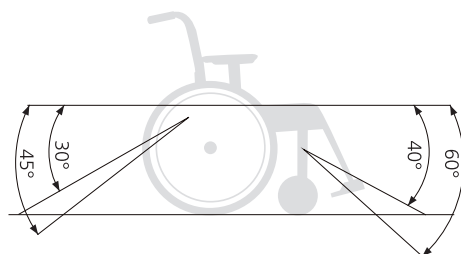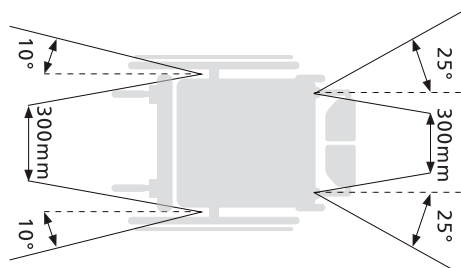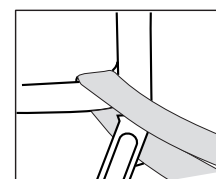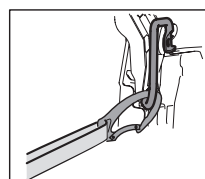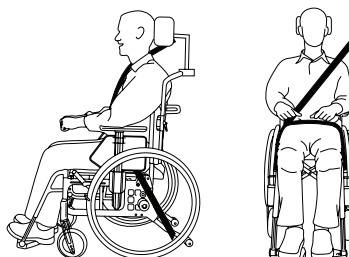

3) Enligt direktivet 2001/85/EG, bilaga VII, punkt 3.8.3. kan det i fordon finnas särskilt markerade rullstolsplatser, som tillåter transport med rullstolen vänd mot färdriktningen. Används detta färd sätt skall brukaren/vårdaren vara aktiv/aktiva i åkandet, ha beredskap för hastiga rörelser samt förmåga att bibehålla en genom hela transporten säker sittställning. Brukarens rörelsehinder får inte vara så stort att denne inte klarar av att hålla i sig och rullstolen i det i fordonet monterade handtaget vid hastighetsförändringar eller riktningssändringar.



- Parkeringsbromsen skall användas
- Tippskyddet skall fällas ner
- Tillval/tillbehör som kan demonteras utan verktyg skall plockas av och spännas fast.
- Ett rätt inställt huvudstöd skall användas
- Ryggstödet skall vara i höjd med eller över brukarens skuldror
- Höftbälte bör användas


Brukarmanual

Handhavande




Utfällning

- Tryck ena sitsröret nedåt, med hela handen ovanpå sitsen.
- Håll ej om sitsröret vid utfällning, pga klämrisk.
- Fäll ned fotplattorna.

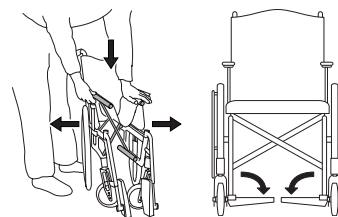




Ihopfällning

- Eventuell körbygel och/eller tvärstag monteras av/snäpps loss.
- Fäll upp fotplattorna.
- Lyft sitsen uppåt.

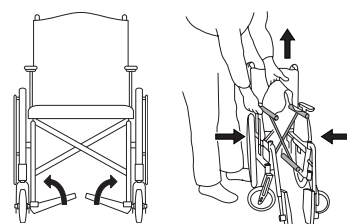


Tippskydd

- Tippskydden är uppfällbara.

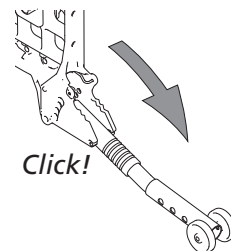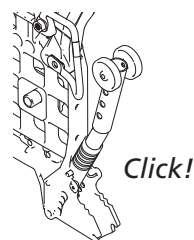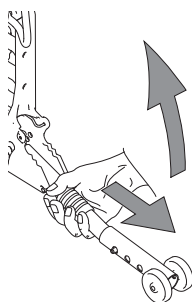

- När du fäller ner tipskyddet, se till att låstappen snäpper i ordentligt.

- Efter alla justeringar på stolen måste tipskyddens funktion kontrolleras. Om tipskydden måste justeras, kontakta din hjälpmedelscentral.

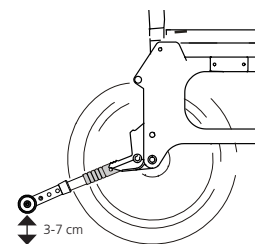



Brukarmanual

Benstöd

Benstöden kan lyftas av/svängas åt sidan vid behov. Låsbara benstöd genom att trycka ned den röda knappen (A).

Vid montering av låsbara benstöd, tryck ned den röda knappen (A), sätt benstödet på plats och släpp upp knappen. Benstödet är nu låst (B).

Vid demontering/montering av låsbara benstöd Institution, tag av plastkåpan och tryck ner knappen med en skruvmejsel.

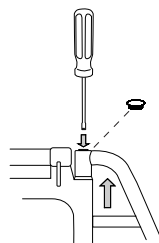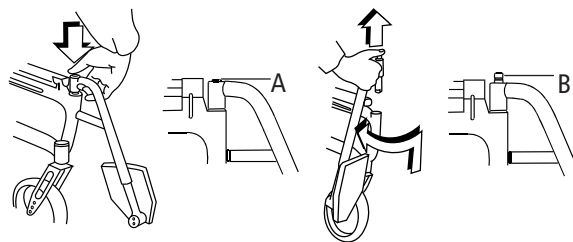

Kontrollera att benstöden har låst innan lyft.

Körhandtag/körbygel, höj- och sänkbara

Lossa vred (A) och tryck plastbrickan inåt. Ställ in önskat höjdläge. Se till att körhandtagen hamnar i ett "snäpp-läge", drag åt vreden.





Se till att vreden är ordentligt åtdragna. Det är speciellt viktigt när man lyfter rullstolen med brukaren i.




Se till att körhandtagets låsspärr alltid har snäppt ut under körhandtagsfästet.



Körbygel måste tas bort innan stolen kan fällas ihop.

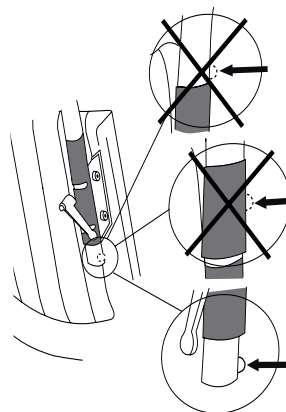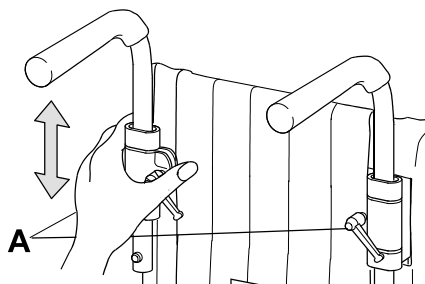


Vårdarbroms (färdbroms)

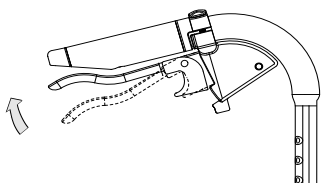

- Bromsa under färd genom att dra bromshandtaget uppåt.

Vårdarbroms (parkeringsbroms)

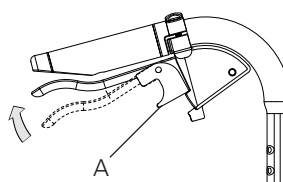

- Aktivera parkeringsbromsen genom att dra bromshandtaget uppåt och tryck in knappen A.
- Lossa genom att trycka handtaget uppåt.

Brukarmanual

Inställningar sittkomfort

Sittkomfort

Vad som är bra sittkomfort beror på varje enskild persons behov och möjligheter. Här följer generella riktlinjer för vad man bör tänka på när inställningarna görs. Välj sittdyna med omsorg. Förutom komfort, påverkar den stabilitet och därmed rörelsefriheten. Sittdynor har också olika av grad tryckfördelning.

Ryggstödetts inställning är en kombination av vinklar, höjd och form. Därför kan även ryggstödetts vinkelinställningar och höjd behöva finjusteras i samband med att ryggklädseln ställs in.



Ryggöverdag

- Slacka samtliga ryggband, men se till att kardborren fortfarande låser mot varandra.
- Placera ryggöverdagets så att det bildar ett veck mellan sits och ryggstöd så att brukaren kan "sitta in" ordentligt på sitsen.



Sittdyna

- Se till att sitsdjupet är korrekt inställt.
- Lägg dynan så långt bak på sitsen att de rundade hörnen kommer in mellan ryggstödskenorna.
- Mät upp passande längd för sittdynan, och kapa den enligt medföljande instruktioner.
- För att få mer konturerad sittdyna, kan den kompletteras med en komfortkil, som placeras i fodralets ficka på undersidan av sittdynan.

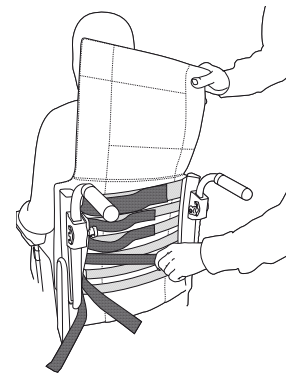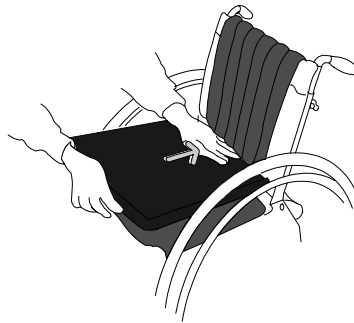

Ryggklädsel reglerbar

Inställning av ryggklädseln görs med brukaren sittandes i rullstolen.

- Se till att brukaren sitter så långt bak på sitsen som möjligt.
- Ge bäckenet stöd genom att spänna det band som är placerat strax under svanken.
- Justera därefter det översta bandet så att brukaren får stöd och balans i överkroppen.
- De övriga banden regleras för att lämna plats åt stuss och följa ryggens naturliga rundning.



Tänk på tippisken.
Kontrollera alltid tippskyddets inställning.



Spänn ej de översta banden för hårt då detta påverkar kryssets utfällning, dvs sitsrörens låsning mot ramen.

Ryggvinkel

Ryggvinkeln kan behöva justeras i samband med att ryggklädselns form ställs in. Kontakta din förskrivare.

Brukarmanual

Inställningar sittkomfort


Fotplattor

Justera höjden så att du känner att fötterna får stöd och låren vilar mot dynan.

För utomhusbruk bör fotplattorna ha 4 – 5 cm till marken.




Tipprisk!
Stå aldrig på fotplattorna

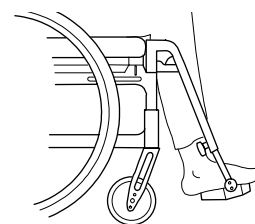

Justering av vinkel


Justera fotplattornas vinkel så att fotlederna får 90° vinkel.

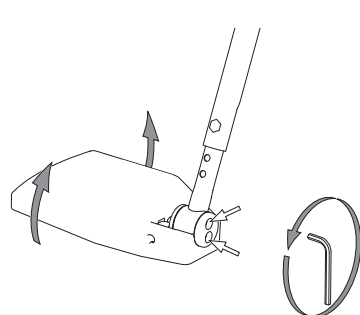

5 mm


Justering av höjd

Lossa låsratten helt på benstödet. Drag ut skruven. Ställ in höjden. Montera skruv och ratt. Drag åt ordentligt.

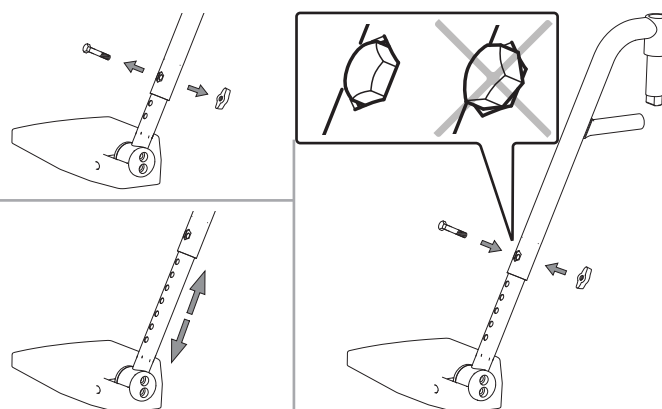


Ändring av fotplattornas djup

Justera fotplattornas djup genom att växla höger och vänster fotplatta. Glöm inte att justera vinkeln.

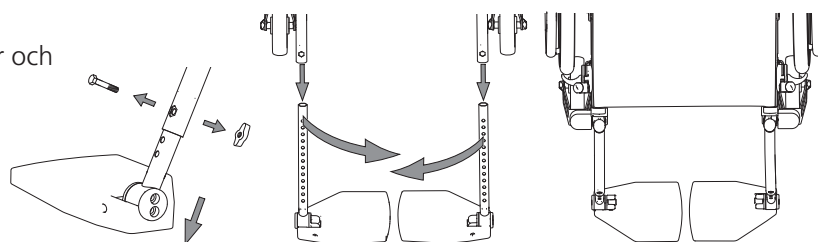


Vad/Hälband

- Justera längden så att fötternas mittdel hamnar på fotplattorna.

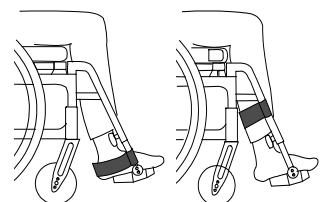

Armstöd (justering)

- Lossa skruven på insidan av armstödsbrickan.
- Flytta armstödet upp eller ned till önskad höjd och skruva fast.
- Rätt inställda armstöd ger stöd åt överkroppen. Armstödsplattan ska vara ca 5 mm högre än armbågen när denna är böjd i 90°.

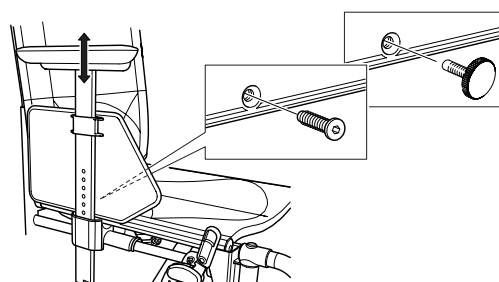

3 mm

Brukarmanual


Körteknik, användning



Parkering



Parkera inte i backe med brukare i rullstolen.

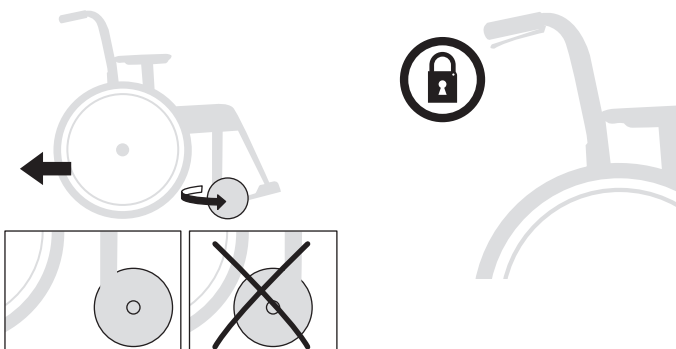

Överflyttning till/från rullstol




Stå aldrig på fotplattorna, tipprisk!




Sidledes




Framifrån

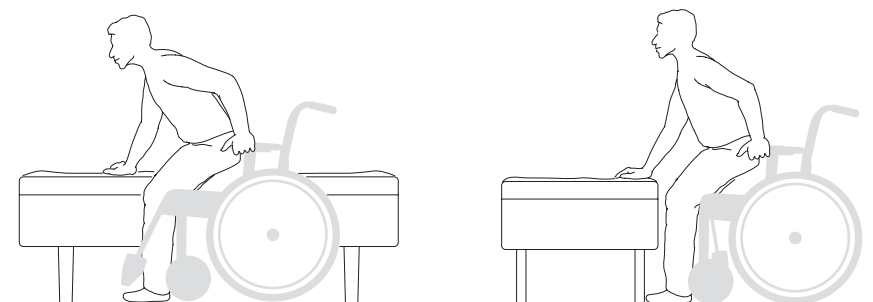

Lyft av rullstol

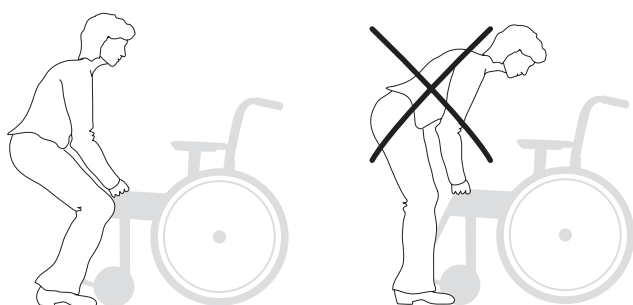

- Se till att höj/sänkbara körhandtag är ordentligt åtdragna samt att låsbara benstöd är ordentligt låsta.
- Ej låsbara benstöd svängs in under sitsen och rullstolen lyfts i ramens främre övre del.

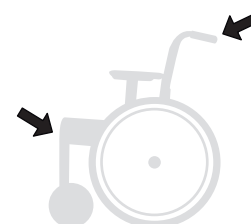


Brukarmanual



Upp framlänges

– Se till att tippskydden är inaktiva.

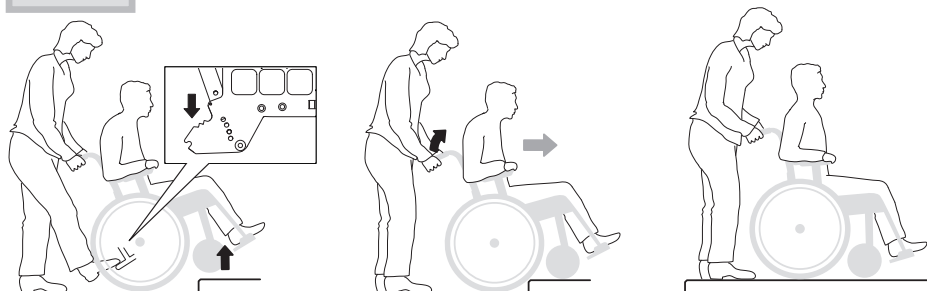


Aktivera tippskydden efteråt!



Upp baklänges

– Se till att tippskydden är inaktiva.

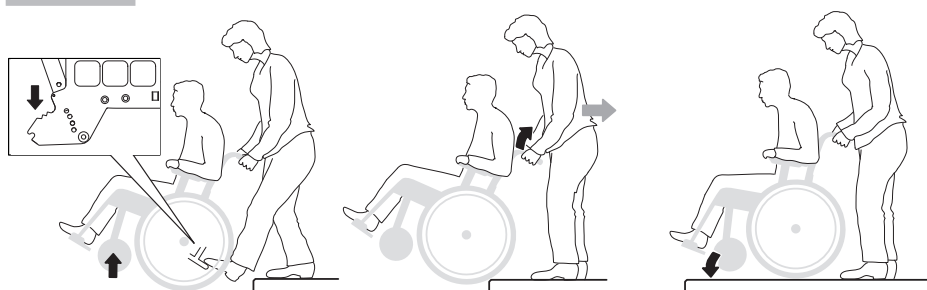


Aktivera tippskydden efteråt!



Ned framlänges

– Se till att tippskydden är inaktiva.

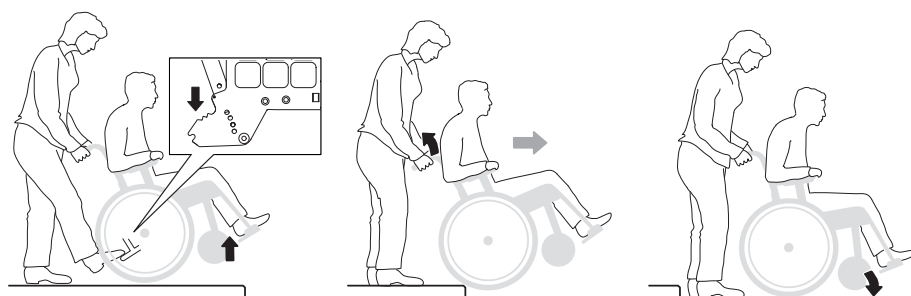


Aktivera tippskydden efteråt!



Ned baklänges

– Se till att tippskydden är inaktiva.

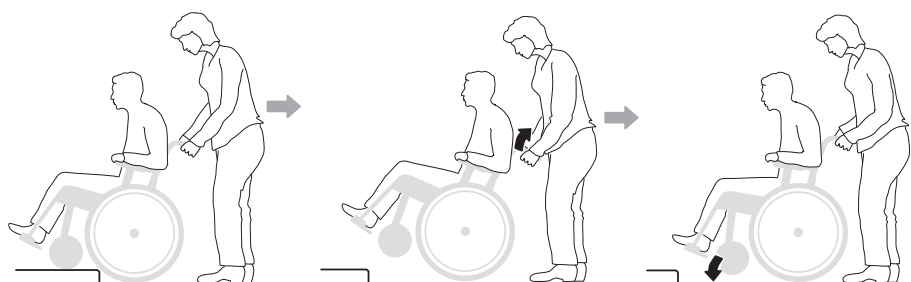

Aktivera tippskydden efteråt!




Brukarmanual



Trappor, upp

– Se till att tipskydden är inaktiva. Åk aldrig i rulltrappa, även om hjälpare finns. Se till att höj- och sänkbara handtag är åtskruvade.

Vi rekommenderar att man alltid är två hjälpare vid denna förflyttning. En som går bakom och håller i körhandtagen och en som går framför och håller i ramen (eller i benstöden om dessa är låsbara).

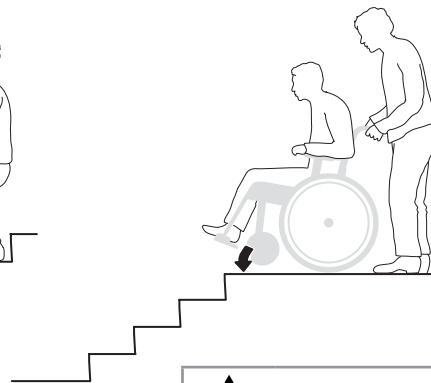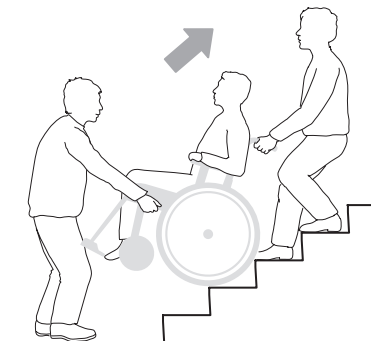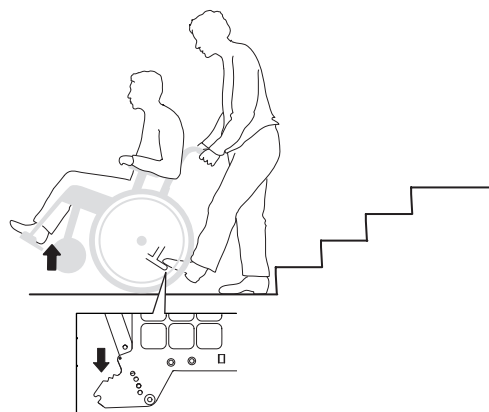




Aktivera tipskydden efteråt!



Trappor, ner

– Se till att tipskydden är inaktiva. Åk aldrig i rulltrappa, även om hjälpare finns. Se till att höj- och sänkbara handtag är åtskruvade.

Vi rekommenderar att man alltid är två hjälpare vid denna förflyttning. En som går bakom och håller i körhandtagen och en som går framför och håller i ramen (eller i benstöden om dessa är låsbara).

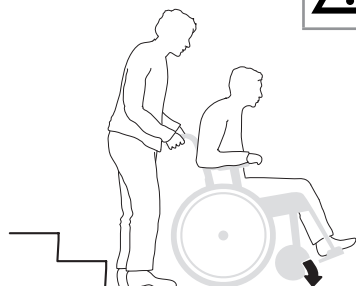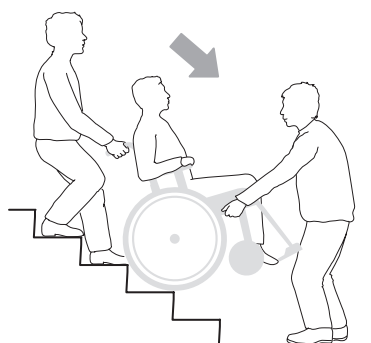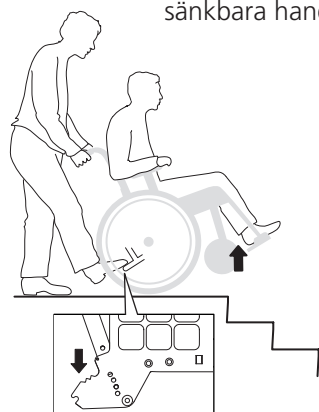

Aktivera tipskydden efteråt!

Brukarmanual

Skötselråd

Länkhjul: Rengör länkhjulsaxlar vid behov.

Chassi: Rengör chassit med rengöringsmedel utan slipmedel som har pH-värde mellan 5 – 9, eller med 70% desinfektions-sprit. Skölj och torka.

Klädsel: Tvätt, se märkning på klädsel.

Vid svårare problem, kontakta hjälpmedelscentralen.



Vid behov smörj rörliga delar/leder med ex. cykelolja eller liknande.

Felsökningschema

Rullstolen drar snett	<ul style="list-style-type: none"> • Pumpa däcken (gäller luftpumpade hjul) • Kontrollera och justera framgaffelfästernas höjd- och vinkelinställning • Brukaren snedbelastar rullstolen
Rullstolen är "tung" att köra	<ul style="list-style-type: none"> • Pumpa däcken (gäller luftpumpade hjul) • Kontrollera att drivhjulsfästena är rätt monterade • Rengör länkhjulsaxlarna från hår och smuts
Rullstolen är "tung" att svänga	<ul style="list-style-type: none"> • Pumpa däcken (gäller luftpumpade hjul) • Kontrollera att framgafflarna ej är för hårt åtdragna • Rengör länkhjulsaxlar från hår och smuts
Bromsarna tar dåligt	<ul style="list-style-type: none"> • Justera vajens längd (se avsnitt "Vårdarbroms")
Länkhjulen "vobblar"	<ul style="list-style-type: none"> • Framgafflarna är inte tillräckligt hårt dragna • Kontrollera och justera framgaffelfästernas höjd- och vinkelinställning
Rullstolen är svår att fälla ihop/ut	<ul style="list-style-type: none"> • Klädseln är för spänd • Smörj och rengör kryssdelarna under sitsen
Rullstolen känns "rank"	<ul style="list-style-type: none"> • Pumpa däcken (gäller luftpumpade hjul) • Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna



Etac
 Box 203, 334 24 Anderstorp, Sweden
 Tel +46 371 58 73 00
 Fax +46 371 58 73 90
 www.etac.com

5. Inställningar

Sitsvinkel


Sitsvinkeln fås genom skillnaden mellan främre och bakre sits höjd.



Tänk på tipprisken.
Kontrollera alltid tippskyddens inställning.

Vid ändrad sitsvinkel:

- Justera framgaffelfästernas vinkelinställning.
- Kontrollera ryggstödvinkeln.

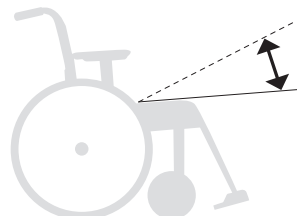


Sitsdjup (reglerbar klädsel)

Sitsdjupet kan regleras genom att lyfta den främre sitsklädseln och flytta den bakåt/framåt.



Tänk på tipprisken.
Kontrollera alltid tippskyddens inställning.

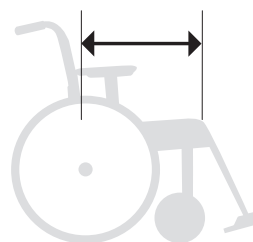


Sittkomfort

Efter inställning av sits höjd, sitsvinkel, sitsdjup och ryggvinkel, ska ryggklädseln justeras för att ge stöd och komfort. Se avsnitt "*Inställningar sittkomfort*" i Brukarmanualen.

5. Inställningar

Justering av ryggstödshöjd

Rygghöjden är justerbar (se "Stolens möjligheter"). Lossa skruvarna (A). Drag ryggklädseln uppåt. Lossa muttrarna (B) och justera till önskad höjd. Se till att båda sidorna har samma höjd.

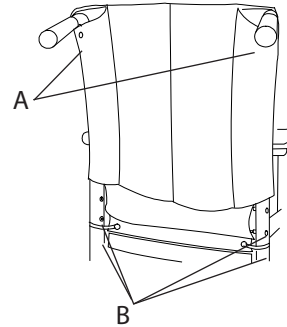

5 mm




Tänk på tippriksen.
Kontrollera alltid tipskyddens inställning.

Justering av ryggvinkel

Ryggstödet är inställbar i fasta lägen (se "Stolens möjligheter"). Vinkeln justeras med hjälp av muttern på insidan av drivhjulsfästena.

Lossa muttern (A), ta ut skruven och ställ in önskad vinkel, dra åt muttern igen.

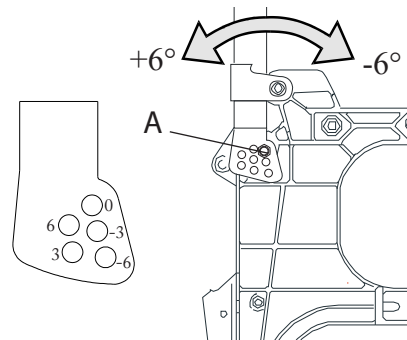

10 mm




Kontrollera att vinkeln blev lika på båda sidorna genom att jämföra avståndet mellan ryggrör och armstödsplatta.



Tänk på tippriksen.
Kontrollera alltid tipskyddens inställning.

Justering av ryggstödshöjd (höjddreglerbart körhandtag)

Rygghöjden är justerbar (se "Stolens möjligheter"). Lossa skruvarna (A). Ta bort körhandtagsfästet. Lossa skruvarna (B) och dra ryggklädseln uppåt. Lossa muttrarna C och justera till önskad höjd. Se till att båda sidorna har samma höjd.

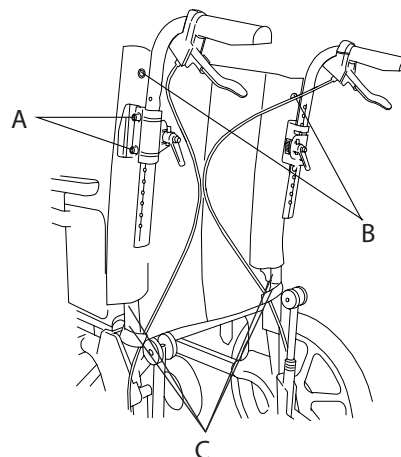

3 mm
5 mm



Tänk på tippriksen.
Kontrollera alltid tipskyddens inställning.



8 mm

5. Inställningar

Justering av ryggklädsel (reglerbar)

Ryggklädselns form är individuellt reglerbar med hjälp av sex kardborreband och ryggöverdrag.


- Låt ryggöverdraget bilda ett ordentligt utrymme mellan sits och rygg, så att man kan "sitta in" mot ryggstödet.
- Slacka alla banden och se till att brukaren sitter så långt bak på sitsen som möjligt.
- Spänn banden så att de följer ryggens kontur och ger ett stöd i svanken.



Spänn ej de översta banden för hårt då detta påverkar kryssets utfällning, dvs sitsörens låsning mot ramen.




Tänk på tipprisen.
Kontrollera alltid tippskyddens inställning.

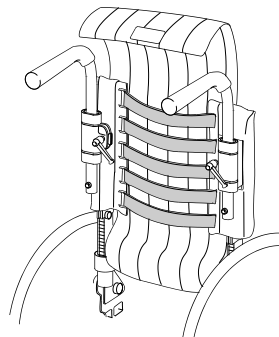

6. Efterjusteringar

Vårdarbroms

Vid justering av broms lossa muttern (A) och justera bromsen genom att skruva (B) upp/ner. När bromsen tar lagom hårt drag åt muttern (A). Denna justering rekommenderas att göras när bromsen ej fungerar tillfredställande.

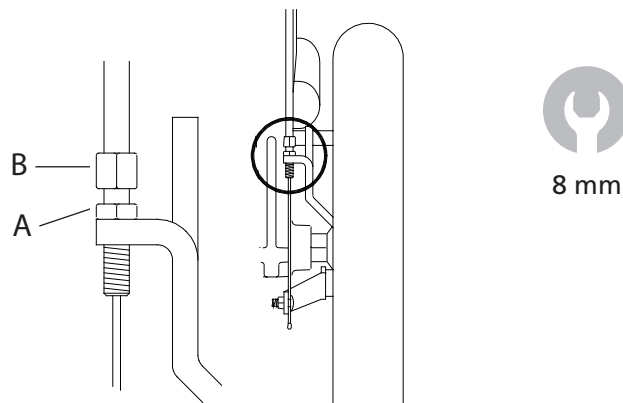


Benstöd, steglöst vinkelreglerbart



Stå aldrig på fotplattorna, tipprisk! Vid lyft av rullstol, tag av benstöden och lyft i ramen (undre eller övre ramrör).



Ha alltid skruv och ratt till fotplatta monterad även om inte fotplatta används.

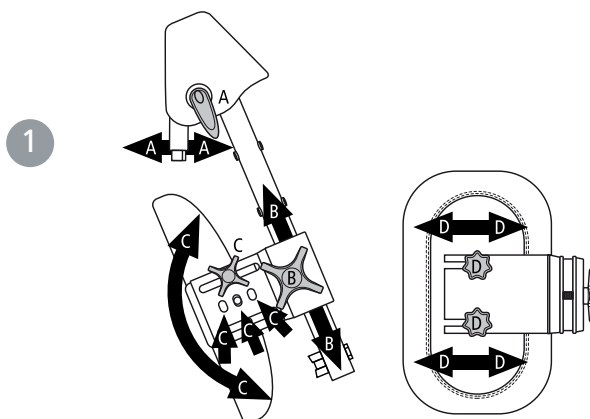

Amputationsbenstöd




Sitt aldrig på amputationsstödet. Vid lyft av rullstol, tag av amputationsstödet, fäll in det andra benstödet under sitsen (alt tag av det) och lyft i ramen (undre eller övre ramrör).



4 mm



6 mm

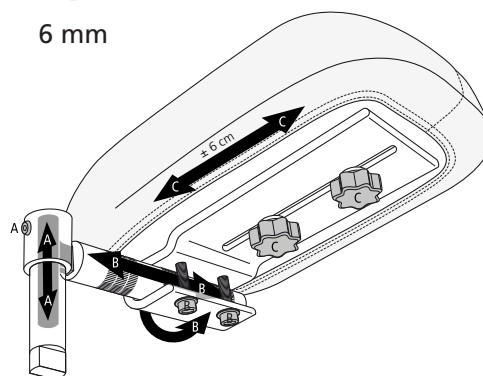

Amputationsbenstödet är justerbart i höjd och sidled samt reglerbart i djup och vinkel.


7. Tillbehör

Höftbälte




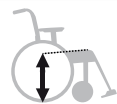
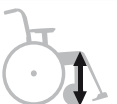
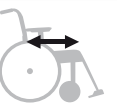


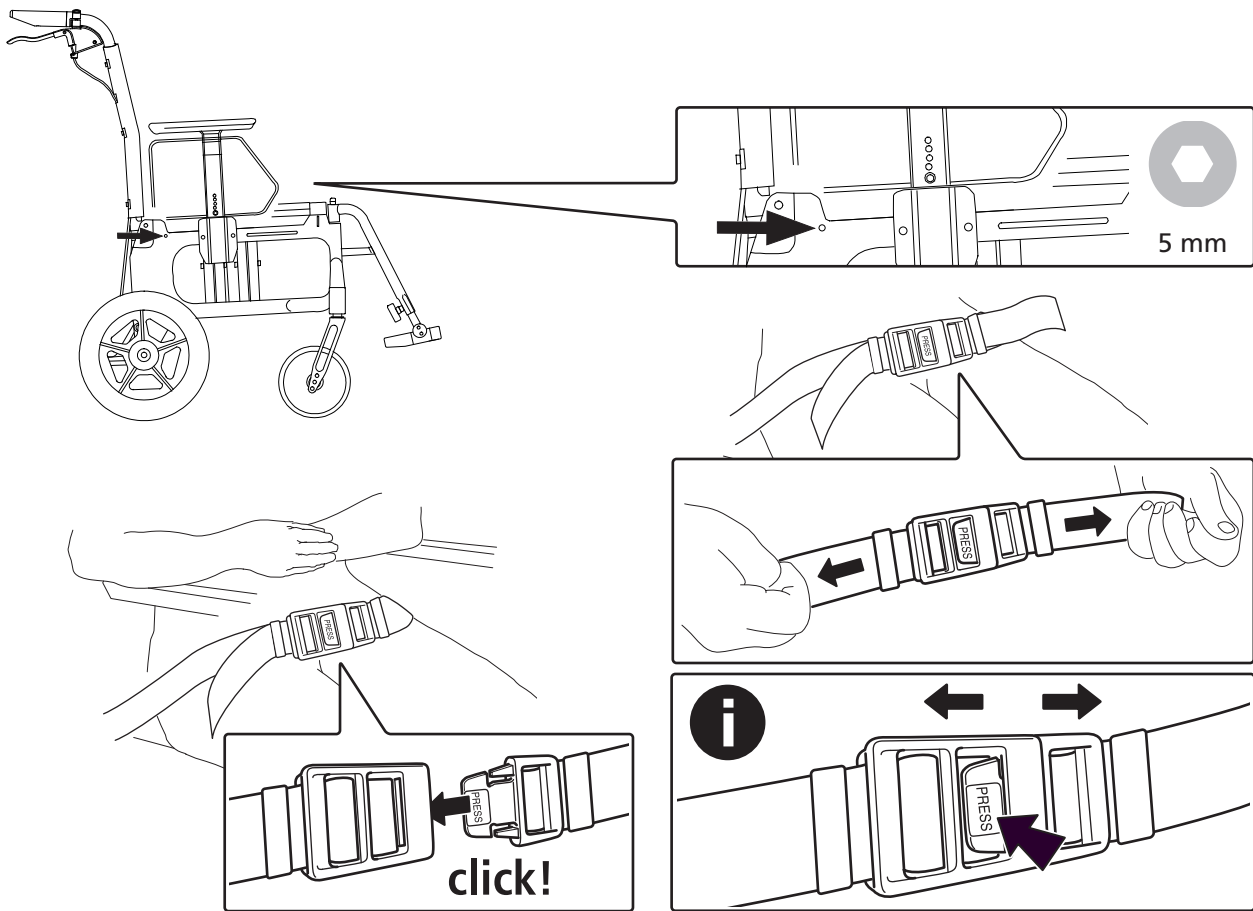

Höftbältet är tvådelat, reglerbart i längd och har snäpplås. Det monteras i hålet strax framför ryggliden, ovanför drivhjulsfästet.


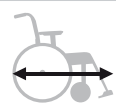




! Kontrollera att brukaren inte glider fram på sitsen med följd att bältet stramar åt blodtillförseln i höft/midje-regionen.

! Höftbältet är enbart till för positionering i rullstolen. Det får ej ersätta ett säkerhetsbälte i bil.





8. Teknisk data

Stoltyp	Art nr Etac Transit	Total bredd	Sitshöjd bak	Sitshöjd fram	Sitsdjup från ryggör	Ryggstöds-höjd	Transport-bredd	Vikt	Max brukarvikt
									
35 cm	13140301	500 mm	490 mm	480-510 mm	420 mm	400-475 mm	250 mm	16,8 kg	135 kg
40 cm	13140305	550 mm	490 mm	480-510 mm	420 mm	400-475 mm	250 mm	16,9 kg	135 kg
45 cm	13140309	600 mm	490 mm	480-510 mm	420 mm	400-475 mm	250 mm	17,0 kg	135 kg
50 cm	13140311	650 mm	490 mm	480-510 mm	420 mm	400-475 mm	250 mm	17,1 kg	135 kg
55 cm	13140317	700 mm	490 mm	480-510 mm	420 mm	400-475 mm	250 mm	17,2 kg	135 kg

Total höjd	Total längd	Benstöds-längd	Längd ihop-fälld	Benstödsvin-kel	Sitsvinkel
					
85-120 cm	100-106 cm	26-52 cm	76-81 cm	108°-114°	-3° -+3°

Mått och vikter gäller stol med 16" drivhjul, 200x50 massivt länkhjul.
Måttollerans ± 2%

Max lutning sidled	Max lutning ner
	
>20°	>16°

Tester och garantier

CE märkning, tester:

Produkten uppfyller kraven i förordningen för medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Produkten är testad och uppfyller kraven enligt EN 12183, i vilken ingår ISO 8191-2.

Kombinationsavtal finns se www.etac.com.

Etacs rullstolar är testade enligt ISO 7176-19. De är krockprovade hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Testen har utförts med fastspännings-anordning UNWIN_WWR/ATF/K/R och med trepunktsbälte UNWIN_WWR/HD/ATF/K/R.

Livslängd:

Huvudproduktens förväntade varaktighet och livslängd är minst fem år. Huvudprodukten omfattas av sits- och ryggchassi. Resterande delar/tillbehör hanteras i enlighet med manual och rekonditioneringsmanual. Den faktiska livslängden kan variera beroende på hur mycket och intensivt produkten används men är max 10 år. För fullständig information om produktens livslängd, se www.etac.com.

Följande ytbehandlingsmetoder har använts:

Lackerade ytor = Pulverapplicerad polyester eller ED-lackering
Ej lackerade aluminiumdelar = Anodisering
Ej lackerade stålytor = Förzinkning

Garanti:

5 års garanti mot fel i material och tillverkning. För villkor, se www.etac.com.

Förvaring:

Produkten ska förvaras inomhus på en torr plats med en temperatur över 5°C. Om produkten har lagrats en längre tid (mer än fyra månader) ska dess funktion kontrolleras av sakkunnig före användning.

Specialanpassning:

är allt som går utanför Manualens instruktioner och inställningar. Rullstol specialanpassad av kund får ej behålla Etac:s CE märkning. Etac:s garanti upphör att gälla. Om osäkerhet föreligger angående anpassningens utförande, rådfråga Etac.

Rullstol sammankopplad med annan produkt får inte behålla endera produktens CE-märkning om inte kombinationsavtal finns. Kontakta Etac för aktuell information.



Sorteras enligt nationella föreskrifter

9. Service och underhåll

Tvätt av rygg och sits

Klädseln är tillverkad av tvåskikts polyesterduk.

Sitsklädseln är fastsatt i längsgående spår i sitsrören och den kan enkelt demonteras från chassit genom att skruva bort ändavslutningarna.

Ryggklädseln tas av genom att skruva loss insexskruvarna på ryggrörens baksida (1st per sida) och med höjdregerbara körhandtag lossa körhandtagsfästet.

Drag därefter klädseln uppåt och tvätta enligt tvättråd på produkten.

Drivhjul/länkhjul

Däck/slang: Kontrollera däcktrycket (se däckside) minst en gång i månaden, och även däckmönstret.

Hjulaxlar: Rengör hjulaxlar från hår och smuts vid behov.

Kullager: Underhållsfria.

Framgaffelfästen:

För bästa köregenskaper, måste fästena vara vinkelrätt inställda. Kontrollera även att framgafflarna är korrekt åtdragna. Se avsnitt "*Demontera/montera framgaffel*".

Bromsar

Hård nedsmutsning kan påverka bromsmekanismen negativt. Vid behov av justering, se avsnitt "*vårdarbroms*".

Tvätt av chassi

Det är viktigt, både för din egen trevnads skull och stolens hållbarhet att hålla stolen ren. Den är försedd med dräneringshål vilket gör den lätt att tvätta och torka.

Rengör chassit med rengöringsmedel utan slipmedel som har pH-värde mellan 5 – 9, eller med 70% desinfektionssprit. Skölj och torka.

Bättringsfärg

För mindre repor och lackskador finns bättringsfärg.

Övrigt

Om något på din rullstol inte fungerar, tag kontakt med din ordinator eller hjälpmedelscentral. Defekt rullstol får inte användas.

Vid rekonditionering och byte av delar bör originaldelar från Etac eller komponenter med motsvarande kvalitet användas.

Vid användning av andra delar ansvarar inte Etac för funktion och säkerhet.



Vid behov smörj rörliga delar/leder med ex. cykelolja eller liknande.



Etac Supply Center AB
Långatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com



 **etac**[®]