


Kaskad

Brukarmanual / User manual

Duschpall med teleskopben
Shower stool with telescopic legs
Art.nr: 8120 7010

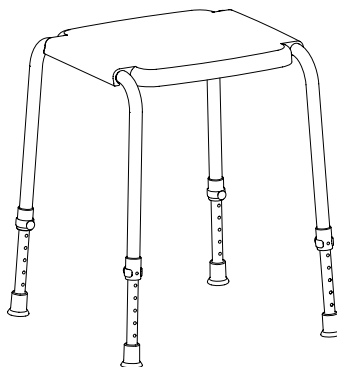


Beskrivning:

Kaskad är en pall utvecklad för att användas i duschen eller i badrummet. Pallen har en stabil konstruktion försedd med teleskoperande ben som erbjuder en möjlig sitthöjd mellan 42 cm och 58 cm. Kaskad duschpall finns även med fasta höjder 50 cm alternativt 60 cm.

Description:

Kaskad is a stool developed for use in the shower or in the bathroom. The stool has a stable construction equipped with telescopic legs offering a potential seat height between 42 cm/16½" and 58 cm/22¾". The Kaskad shower stool is also available in two fixed heights, 50 cm/19¾" or 60 cm/23½" cm.

Inställning av höjden / Adjusting the height

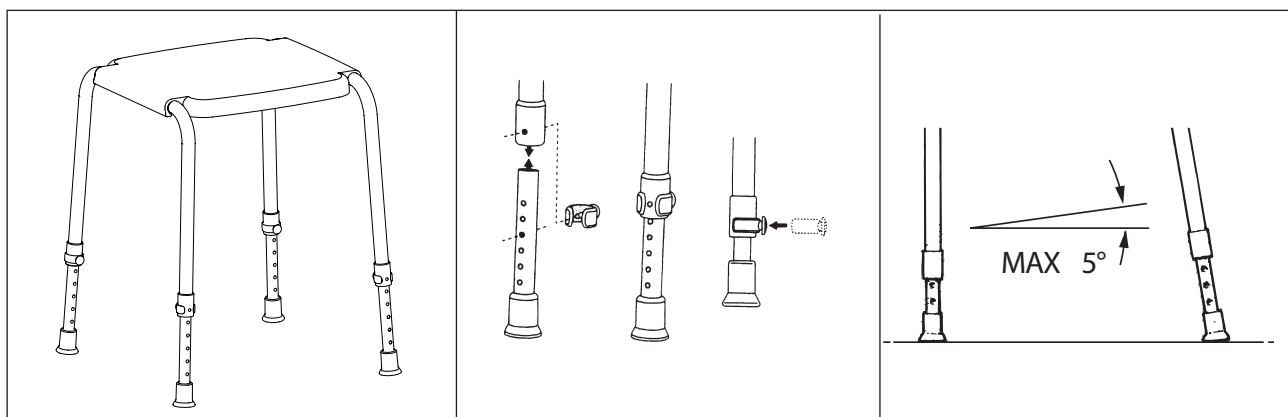

Säkerhet:

Varning: Vinkla inte stolen mer än 5° (1 håls skillnad)

Max brukarvikt 150 kg: Pallen skall ej belastas med mer än 150 kg.

Rengöring: Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionsprensprit.

Dekontaminering: Pallen kan vid behov dekontamineras i max 85°C i 3 minuter.

Safety:

Warning: Do not angle the stool more than 5° (difference of 1 hole).

Max. weight 150 kg: The stool must not be subjected to a load greater than 150 kg/330.7 lbs.

Cleaning: Clean the product using a solvent-free cleaning agent with a pH value of 5-9 or with a 70% disinfectant solution.

Decontamination: The stool can be decontaminated at max. 85° C/185°F for 3 minutes if required.



www.etac.com

78394B

09-02-10

Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com



etac®