


EliRamp

Bruksanvisning norsk

 **etac**[®]

Versjon 1 2018-08-31

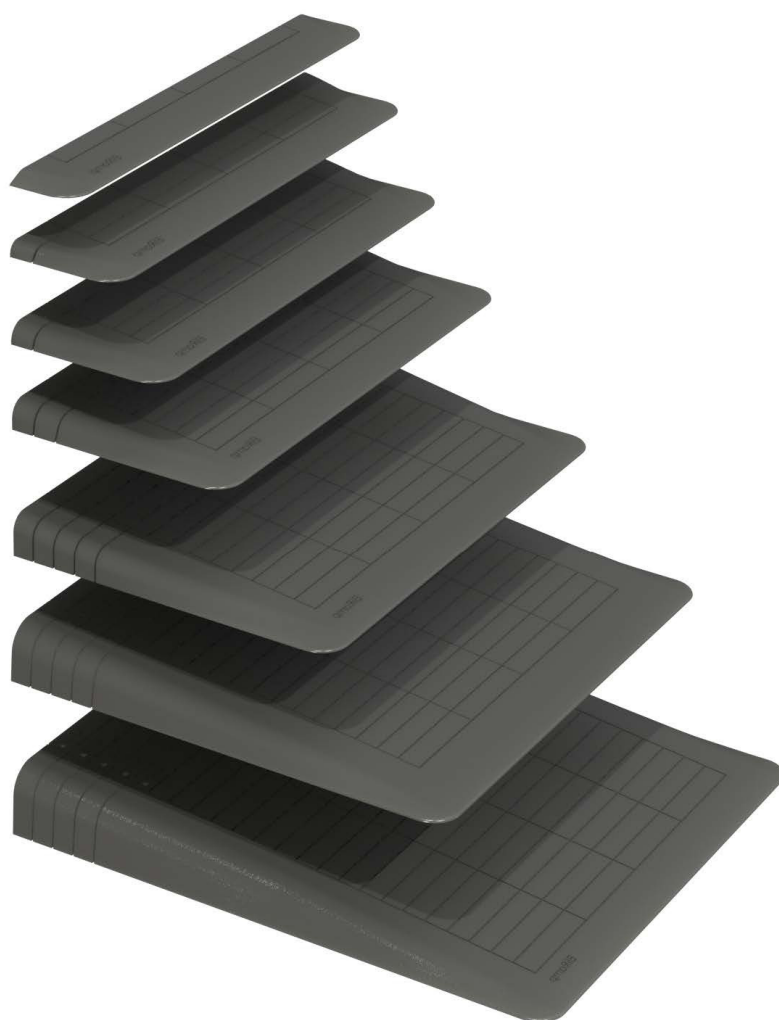

EliRamp Terskeleliminator

Bruksanvisning

Eliramp leveres i 7 standard moduler som dekker alle terskelhøyder mellom 1,5–12,5 cm med 0,5 cm høydeintervall.

Med unntak av den minste er det på rampens overside (bilde 1) ett eller flere vertikale spor beregnet for kutting med Stanley kniv, sag eller stikksag (bilde 2). Høydeindikator er preget inn i rampen med tall og pil. Den øverste viser total høyde og de andre høyden i hvert kuttespor. Grunnet Eliramp sitt patenterte design er det kun maks 2 cm tykkelse på gummien i sporene som skal kuttes uavhengig av modul. For hvert spor som kuttes reduseres høyden med 0,5 cm og dybden med 4 cm. Stigningsforholdet forblir uforandret 1:8 eller 7,125°. Kan enkelt trimmes med sag/stikksag (bilde 3).

Rengjør området før innstallering. Legg Eliramp enkelt på plass eller fest den til underlaget (innendørs) ved hjelp av dobbeltsidig tepetape (bilde 4). Kan også limes fast inne og ute med egnet en-komponent bygninglim (bilde 5). Husk å avfett gummi med varmt vann tilsatt oppvaskmiddel ved bruk av tape eller lim.



Beskrivelse EliRamp	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Høyde (mm)	Art.nr.	HMS nr.
125 mm	900	1000	125	ER125	170087
Kuttespor på bakside	900	960	120		
Kuttespor på bakside	900	920	115		
Kuttespor på bakside	900	880	110		
Kuttespor på bakside	900	840	105		
100mm	900	800	100	ER100	170088
Kuttespor på bakside	900	760	95		
Kuttespor på bakside	900	720	90		
Kuttespor på bakside	900	680	85		
Kuttespor på bakside	900	640	80		
75mm	900	600	75	ER75	170089
Kuttespor på bakside	900	560	70		
Kuttespor på bakside	900	520	65		
Kuttespor på bakside	900	480	60		
Kuttespor på bakside	900	440	55		
50mm	900	400	50	ER50	170090
Kuttespor på bakside	900	360	45		
Kuttespor på bakside	900	320	40		
35mm	900	280	35	ER35	170091
Kuttespor på bakside	900	240	30		
25mm	900	200	25	ER25	170092
Kuttespor på bakside	900	160	20		
15mm	900	120	15	ER15	170093

Leverandør:
Etac AS
Vanemveien. 1, 1599 Moss
Postboks 249, 1501 Moss
Tlf 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

Produsent:
Ramp Solutions AS
Gyldenprisveien 16
5056 Bergen
Tlf 55947700
post@rampsolutions.no