

Vikbar ramp Anyramp VR Bruksanvisning nr.17

- Tack för att ni valt en produkt från oss!
- Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Rampen skall gå lätt att vika ut och ihop.
- Läs noga igenom bruksanvisningen och varningstexter innan du använder rampen. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
- På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal vikt rampen får belastas.
- Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad ramperna är lämpliga för.
Ta det försiktigt och använd rampen med gott omdöme.
- För att vika ut rampen behöver excenterlåset (se bild A) låsas upp.
- Vik ut rampen och placera rampen med "läppen" stadigt vilande på det övre planet. (Se bild B)
Läppen är på undersidan försedd med halkskyddsmatta för att förhindra att rampen halkar på underlaget. Iakttag dock försiktighet vid användandet så att ej någon del på rullstolen hakar fast och drar med sig rampen.
- Efter att rampen använts klart låses rampen med excenterlåset. (se bild A)
- Skulle en skada uppstå på rampen får den ej användas förrän skadan reparerats av fackman. Reservdelar presenteras på särskild reservdelslista.
- Garantitiden är 5 år.

Bild A

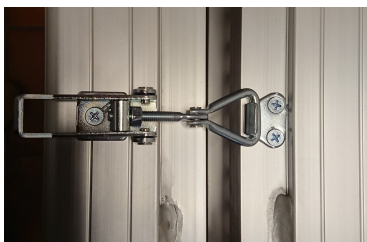


Bild B



Skötsel och rekonditionering

- Rampen skall hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rampen kan rengöras med högtryckstvätt.

Demontering och återvinning

- Allt ingående material är till 100% återvinningsbart. Aluminium lämnas som metallskrot.

