


back in a box[™] seat in a box[™]

Svensk Användarhandbok

SV INNEHÅLL

Säkerhet	4
Garanti	4
Verktyg	4
Underhåll	4
Kom igång med dynsystemet	5
Ryggdyna	6
Sittdyna	7
Kilar	8
Toppdynor	9
Överdrag	10
Tvättanvisning	11
Mått	12
Tekniska data	12
Tillverkare	12
Återförsäljare	12

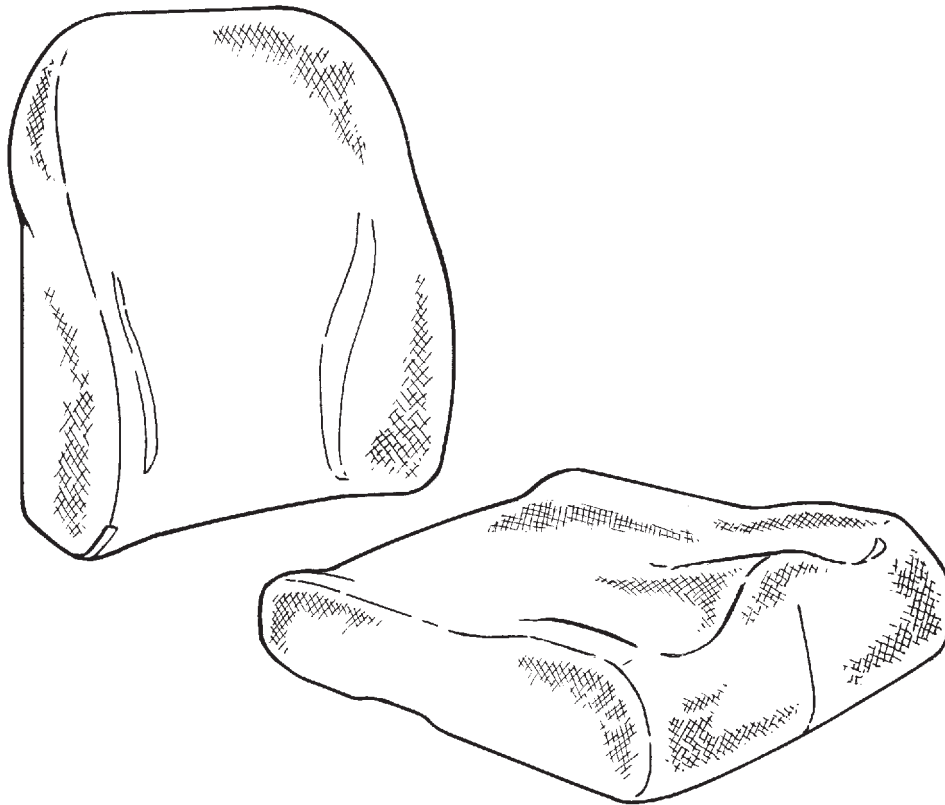


SV DYNSTEM

För att uppnå optimal sittkomfort och flexibilitet har dynsystemet från R82 utvecklats i nära samarbete med fysioterapeuter och ergoterapeuter.

Vi är övertygade om att dynsystemet från R82 uppfyller de krav som ställs på korrekt sittställning och komfort vad gäller moderna hjälpmedel för barn.

Dynsystemet består av rygg- och sittdynor, kilar och överdrag som noggrant tillpassas och formas efter användarens behov. Dynorna tillpassas i samarbete med den lokala fysio- eller ergoterapeuten.

Denna bruksanvisning visar hur man till fullo kan tillvarata de många möjligheter detta dynsystem erbjuder. Därför bör den grundligt läsas igenom innan dynsystemet tas i bruk.

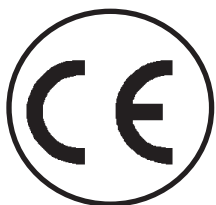

SV SÄKERHET

Dynorna är CE-märkta. Detta är din garanti på att de uppfyller de europeiska säkerhetskraven. Dynorna är CE-märkta i enlighet med Europarådets direktiv 93/42/EEG, klass I, av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Dynorna är likaledes godkända i överensstämmelse med ISO 7176-16 och EN 1041.



Vid användning av icke-originaldelar skall CE-märket avlägsnas från produkten. Lämna aldrig användaren i produkten utan uppsyn.

SV GARANTI

R82 lämnar en 2-årsgaranti med avseende på brister som orsakats av tillverkningsfel eller bristfälligt material. Det kan ha en negativ inverkan på garantin om kunden underlåter att utföra erforderlig service och/eller dagligt underhåll i enlighet med riktlinjerna och föreskrivna intervall som anges av leverantören och/eller i bruksanvisningen. För mer information – se R82:s webbplats/nedladdning. Garantin gäller endast om R82-produkten används i samma land som den köptes och om produkten kan identifieras med ett serienummer. Garantin täcker inte skada genom olyckshändelse, inklusive skada orsakad av felaktig användning eller försummelse. Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar som utsätts för normalt slitage och behöver bytas ut regelbundet. Garantin är ogiltig om delar/tillbehör används som inte är R82-originaldelar eller om produkten repareras eller modifieras av någon annan än en auktoriserad R82-representant eller av fackman officiellt godkänd av R82 att utföra reparationer och underhåll av R82-produkter. R82 förbehåller sig rätten att före godkännande av garantianspråket kontrollera den aktuella produkten samt relevant dokumentation och att besluta om den defekta produkten ska repareras eller ersättas. Det åligger kunden att returnera den aktuella produkten som garantianspråket gäller till inköpsstället. Garantin lämnas av R82 eller, därefter, av en R82-återförsäljare.

SV VERKTYG

En hobbykniv och en linjal medföljer för tillpassning av dynor och kilar.



Det är en god idé att ha ett skärsäkert underlag när dynor och kilar skall tillpassas. Samtidigt bör knivbladet vara vasst för att kunna göra precisa utskärningar. Det kan ibland vara lättare att klippa än att skära i den mjuka skumplasten.



Verktyg bör förvaras utom räckhåll för barn

SV UNDERHÅLL



Kontrollera regelbundet att Velcro-bandet inte har lossnat från skumplasten eller från kilarna samt att alla justeringar är rätt gjorda.




Vid isärtagning av modulerna skall man se till att skumplasten inte släpper vid Velcro-bandet.

SV KOM IGÅNG MED DYNSYSTEMET

Dynor, kilar och överdrag levereras tillsammans i en låda. Lådan innehåller även en linjal, en hobbykniv och denna användarhandboken.


Dynor och kilar tillpassas och skäres grovt. Dynorna bör därefter provas före den slutliga tillskärningen och innan överdraget kan monteras.




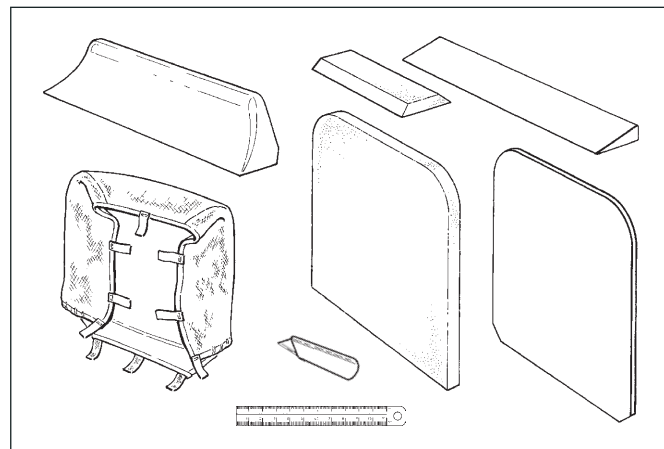


! Det är en god idé att ha ett skärsäkert underlag när dynor och kilar skall tillpassas. Samtidigt bör knivbladet vara vasst för att kunna göra precisa utskärningar. Det kan ibland vara lättare att klippa än att skära i den mjuka skumplasten.

! Verktyg bör förvaras utom räckhåll för barn

! Vid isärtagning av modulerna skall man se till att skumplasten inte släpper vid Velcro-bandet.

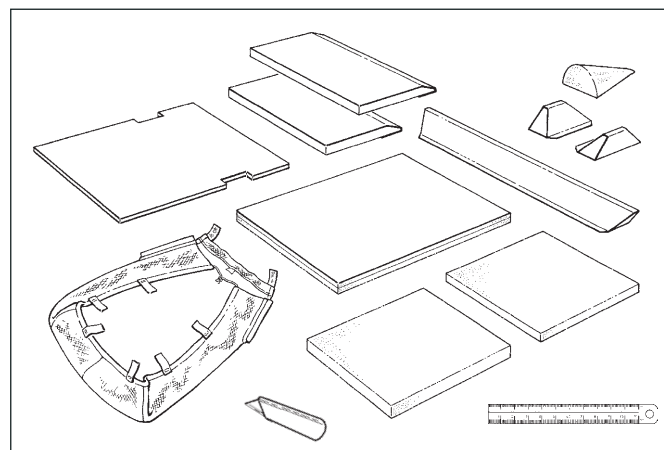

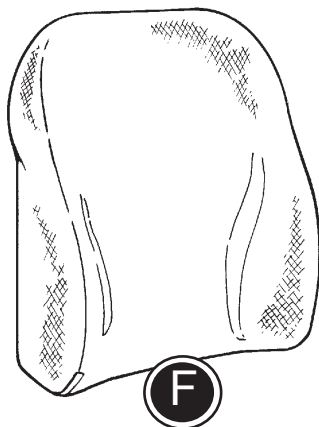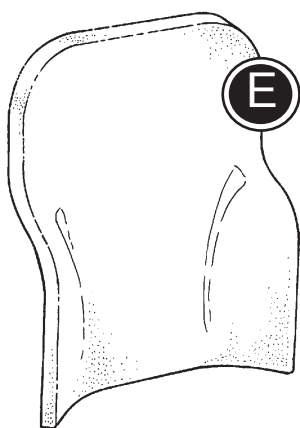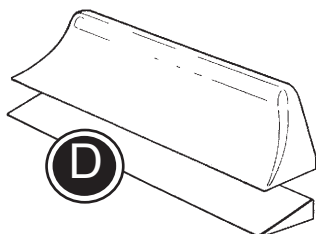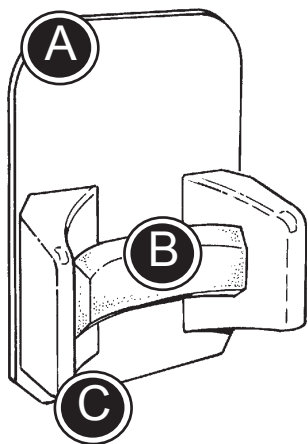

SV RYGGDYNA

Basdelen (A) kan byggas ut med olika kilar, så den noggrant anpassas till användarens behov. Det kan bli nödvändigt att skära till basdelen, så den kan placeras i stolen.

Basdelen med svankstöd (B) och sidostödkilar (C) Önskas en djupare sidostödkil, kan en ryggkil (D) monteras mellan basplattan och sidkilen.

När önskat stöd uppnåts, avslutar man med en toppdyna (E).

Till sist förses dynan med ett överdrag (F).

Alla kilar och dynor kan skäras till efter behov.



Dynorna skall tillpassas i samarbete med den lokala fysio- eller ergoterapeuten.

SV SITTDYNA

Basdelen (A) kan byggas ut med olika kilar, så den noggrant anpassas till användarens behov. Det kan bli nödvändigt att skära till basdelen, så den kan placeras i stolen.

Basdelen med abduktionskil (B), kilar fram och i sidor (C) samt dyna (D)




När önskat stöd uppnåtts, avslutar man med en toppdyna (E).


Till sist förses dynan med ett överdrag (F).

Alla kilar och dynor kan skäras till efter behov.



Dynorna skall tillpassas i samarbete med den lokala fysio- eller ergoterapeuten.

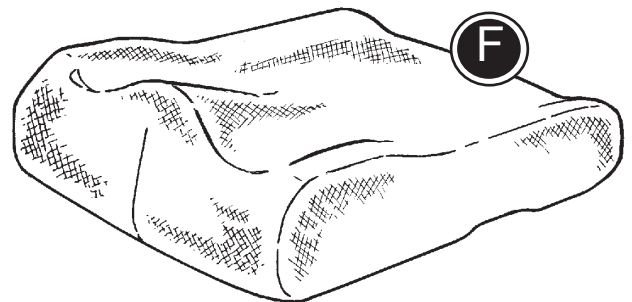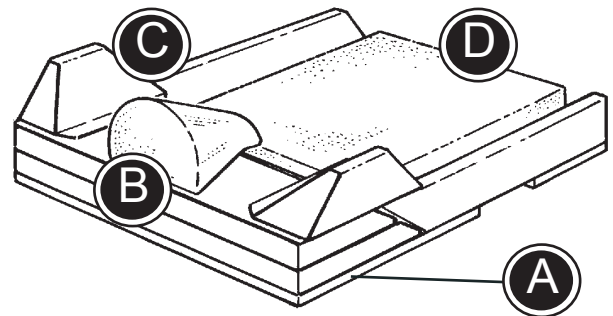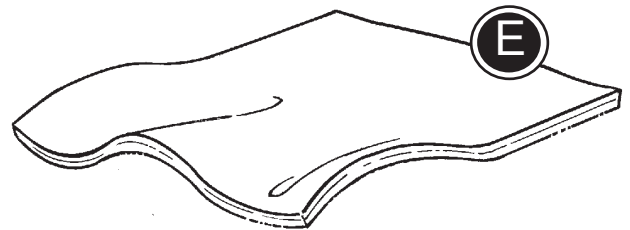

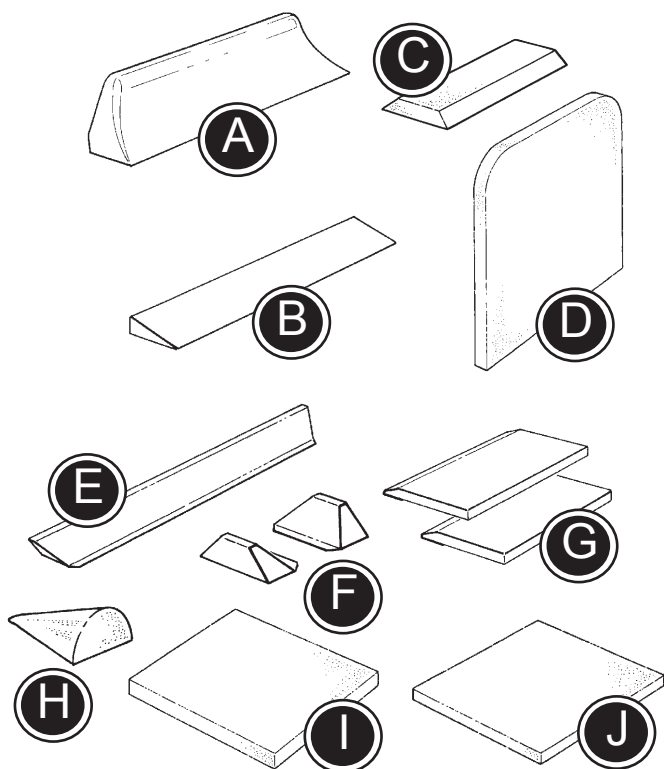

SV KILAR

Basplattan för sits respektive rygg kan byggas ut med olika kilar och dynor, som alla kan skäras till och tillpassas efter behov.

Rygg:

- A) Sidostödkil
- B) Ryggkil
- C) Svankstöd
- D) Toppdyna, T-foam

Sits:

- E) Sidokil, stor
- F) Sidokilar, små
- G) Kilar, sits
- H) Abduktionskil
- I) Dyna, T-foam
- J) Dyna, skumplast

Alla kilar är försedda med Velcro-band på baksidan, för att kunna fästas fast på basdelen.

Kilarna kan skäras till i rätt längd och vinkel med tillhörande hobbykniv.



Det är en god idé att ha ett skärsäkert underlag när dynor och kilar skall tillpassas. Samtidigt bör knivbladet vara vasst för att kunna göra precisa utskärningar. Det kan ibland vara lättare att klippa än att skära i den mjuka skumplasten.



Verktyg bör förvaras utom räckhåll för barn.

SV TOPPDYNOR




När kilarna har monterats på basdelen, skall toppdynorna monteras.

A) Toppdyna rygg

B) Toppdyna sits

Alla dynor är försedda med Velcro-band på baksidan, för att kunna fästas fast på basdelen och kilarna.

Dynorna kan skäras till med en hobbykniv.

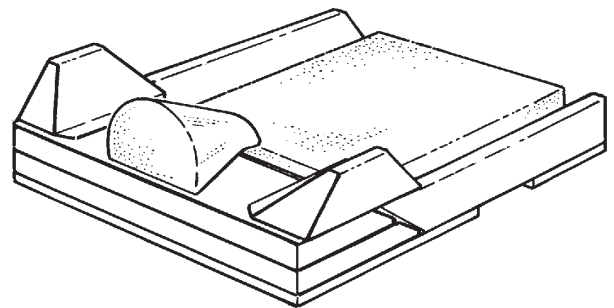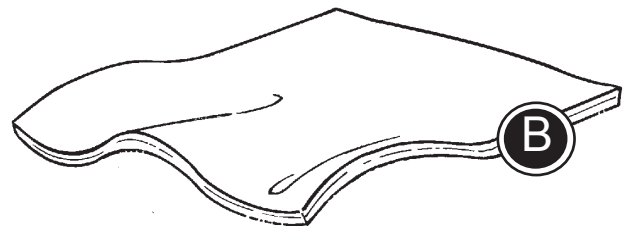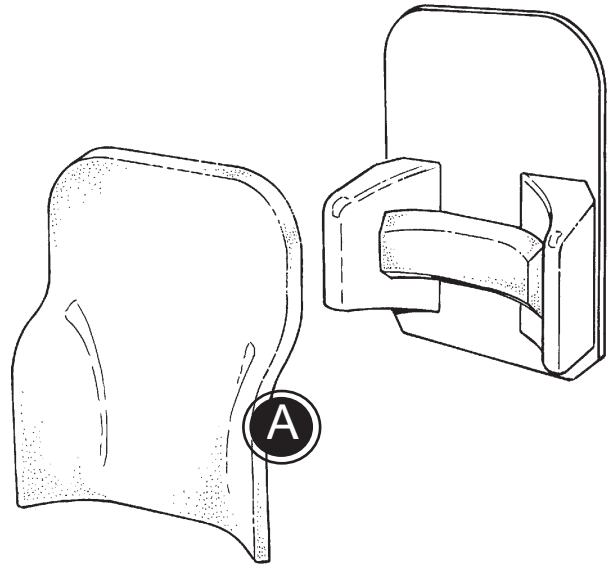




SV ÖVERDRAG

Överdraget sträcks ut över dynor och kilar och fästs baktill med hjälp av Velcro-stropparna.

Överdragets storlek är flexibelt och det kan därför monteras ovanpå flera olika monteringsvarianter av kilar.

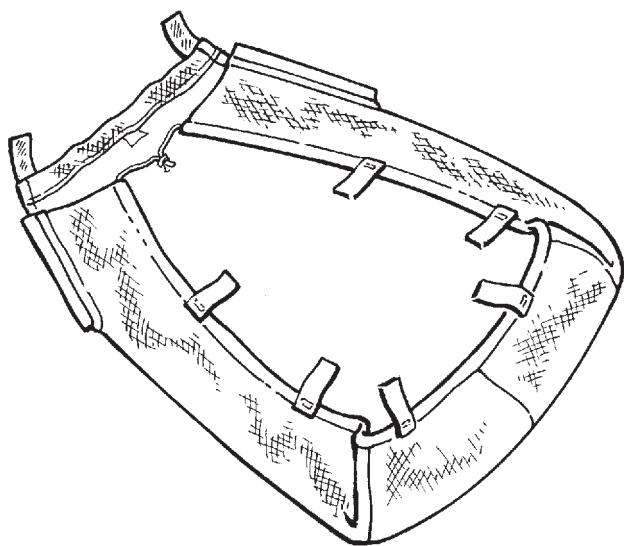

SV TVÄTTANVISNING

Överdraget kan tas av och maskintvättas i enlighet med tvättanvisningen.

Det får inte klorblekas eller strykas och bör droptorka, dvs. hängas upp vått.



SV MÅTT

	Storlek 1 cm	Storlek 2 cm	Storlek 3 cm	Storlek 4 cm
Basdel, rygg (A), H x B x D	39x27x1	41x31x1	44x35x1	44x39x1
Toppdyna, T-foam (B), H x B x D	39x37x3	41x41x3	44x45x3	44x49x3
Sidostödkil (C), H x B x L	9x9x60	9x9x60	11½x10½x60	11½x10½x60
Svankstöd (D), H x B x D	9x26x2	9x26x2	11x30½x2	11x30½x2
Ryggkil (E), H x B x D	3x10x60	3x10x60	3x10x60	3x10x60
Överdrag, rygg (F), H x B	39x37	41x41	44x45	44x49
Toppdyna, sits (A), D x B x H	38x30x2	43x34x2	47x38x2	47x42x2
Dyna, T-foam (B), D x B x H	24x18x3	27x21½x3	30x24x3	30x29½x3
Dyna, skumplast (C), D x B x H	24x18x2	27x21½x2	30x24x2	30x29½x2
Basdel, sits (D), D x B x H	35½x27½x1	40x31x1	44x35x1	44x39x1
Kil (E), D x B x H	16½x38½x2	16½x38½x2	16½x38½x2	16½x38½x2
Kil (F), D x B x H	16½x38½x2	16½x38½x2	16½x38½x2	16½x38½x2
Sidokilar, små, sits (G), H x B x L	5x5x13	5x5x13	5x5x13	5x5x13
Sidokil, stor, sits (H), H x B x L	5x5x70	5x5x70	5x5x70	5x5x70
Abduktionskil (I), H x B x D	7x10x12	7x10x12	7x10x12	7x10x12
Överdrag, sits (J), D x B	38x30	43x43	47x38	47x42

SV TEKNISKA DATA

Dynor: Flamsäkert skum
Överdrag: Flamsäkert material

SV TILLVERKARE

R82 A/S
Parallevej 3
8751 Gedved

SV ÅTERFÖRSÄLJARE

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Sweden
Tel 0371-58 73 00
Fax 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se