



Integrerad laddare

Tillbehör Mobila lyftar

molift®
by Etac

BM03204 Rev B 2023-06-21

Integrerad laddare

Alla modeller av Molifts mobila lyftar kan erhållas med en fabriksmonterad integrerad laddare. Lyften laddas då utan att man behöver ta bort batteriet.

Laddning


Anslut kontakten till vägguttag för laddning. Vi rekommenderar att lyften sätts på laddning när den inte används eller varje natt. Ta aldrig ur DIN kontakts adaptern. Om den är urtagen var uppmärksam på att den monteras tillbaka försiktigt och på rätt sätt.

Laddningslampa


När laddaren är ansluten för laddning till vägguttag, lyser laddningslampan.

Beskrivning av laddningslampa::

Laddningslampa	Status
Gul	Klar att använda
Gul	Initieringsläge
Röd	Snabb laddning
Grön/Gul	Påfyllnadsladdning
Grön	Underhållsladdning
Röd/Grön	Fel

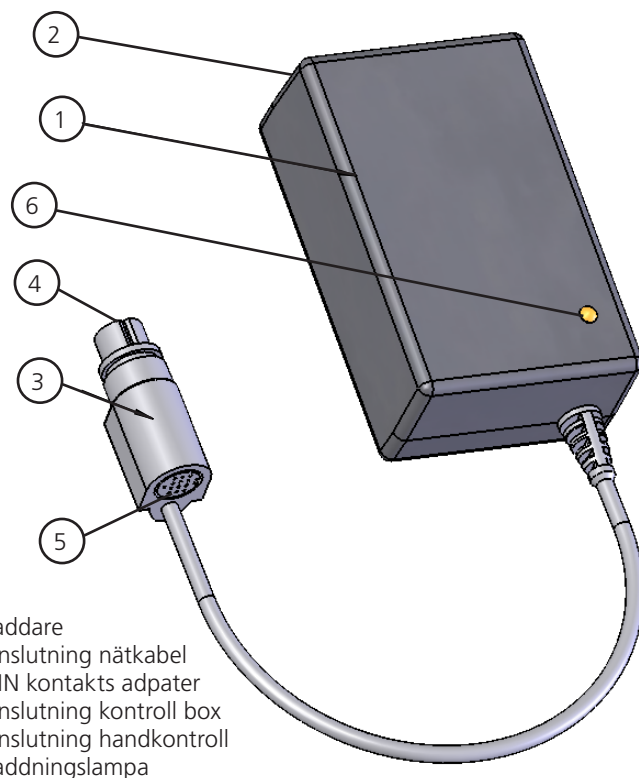


Montering av integrerad laddare på Mobila lyftar

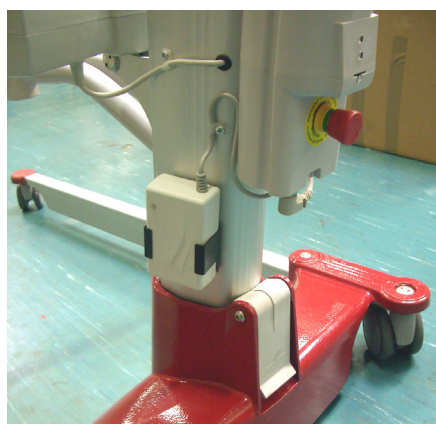

Mover 205
Mover 300
Partner 255



Mover 180
Smart 150

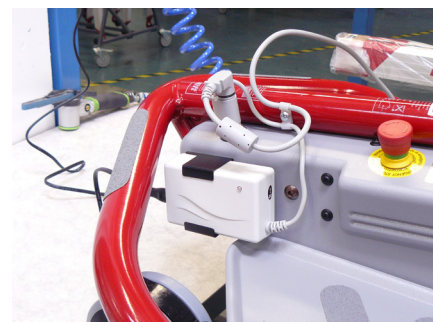

Quick Raiser 1
Quick Raiser 2
Quick Raiser 2+



UK REP

Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP

Promefa AG

Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach, CH
+41 44 872 97 79



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp

+46 371 58 73 00
info@etac.com
www.etac.com

etac®
Creating Possibilities