

molift[®]

SMART

Koffert for Molift Smart - Artikkel nr. 0990200



CE

- tilbehør fra


molift[®]
by Etac

BRUKERMANUAL

Transport koffert for Molift Smart

Plassering av Molift Smart i kofferten

- Slå løfteren helt sammen, slik som beskrevet i løfterens brukermanual.
- Husk å feste løfteopphenget i kroken og strikken rundt hjulene på benene.
- Løft opp hele løfteren og plasser den opp ned i kofferten. Hjulene på chassis skal være i samme ende som hjulene på kofferten.
- Pass på at det ikke er noen løse deler i kofferten, plasser batterier og lader på en sikker måte, fortrinnsvis i nedre del av kofferten.

 *Løfteopphenget må ligge rett (ikke vinklet) i kofferten når denne skal lukkes.*

- Lukk kofferten og lukk igjen låsene.

Reservedeler

- 0990201 - Hjul (2 3/4")
- 0990202 - Håndtak

