



Tryckavlastning för
hälar och armbågar

 **etac**®



Heelift® hälskydd

En kostnadseffektiv metod som förebygger och behandlar trycksår på hälarna, helt utan tryck. Heelift® är ett hälskydd utformat av ortopeder med syfte att förebygga och behandla trycksår på hälen. Heelift® eliminerar effektivt trycket mot hälen genom att hälen höjs upp från omgivande tryck, vilket ger snabbare läkning. Heelift® är tillverkad av mjukt och fast polyuretanskum för bästa patientkomfort.

Funktionalitet och komfort

Heelift har hög komfort och stöd samt förenklad enhandsstängning. En förlängd söm upptill gör att stöveln smalnar av framtill. Det ger ökat stöd och förbättrat skydd mot droppfot, fotdeformitet eller sammandragning av hälsenan. De två släta och mjuka banden med D-ringslåsning gör det enkelt att spänna banden utan risk för hudirritation.

Heelift är latexfri och har en friktionsfri baksida i trikkå som ökar patientens rörlighet samt ett polyuretanstöd som förhindrar veckning. Den är även utrustad med en extra kudde som ger skydd mot höftrotation och droppfot eller ger ytterligare upphöjningseffekt.



Heelift® Glide hälskydd

Vad gör Heelift® Glide så unik? Ett mjukt, smidigt yttertyg gör att patientens ben enkelt kan "glida" från sida till sida, vilket hindrar benet från att fastna på lakan och filter.

Det betyder att:

- Foten stannar i rätt position
- Mindre omvårdnadstid behövs för patienten
- Trycksårspreventionen för hälen maximeras
- Motverkar droppfot.

Heelift® Glide används för patienter som löper hög risk för sår på häl eller som tidigare haft trycksår på hälarna.

Artikel	Art.nr
Hälskydd Heelift® Glide Original	DADM-HLG
Hälskydd Heelift® Glide Mjuk	DADM-HLSG
Hälskydd Heelift® Original	DADM-HL
Hälskydd Heelift® Mjuk	DADM-HLS
Hälskydd Heelift® Petit	DADM-HLSP
Hälskydd Heelift® Bariatric	DADM-HLSB
Hälskydd Heelift® Sträck	DADM-HLTB
Armbågsskydd Elbowlift®	DADM-EL


Vadomfång:
Heelift Glide/Original/Mjuk: ca 25–35 cm
Heelift Petite: ca 15–25 cm
Heelift Bariatric: upp till 58 cm

Tvättråd
Handtvätt rekommenderas, med varmt vatten och mild rengöringsmedel. Vid maskintvätt och torktumlning ska remmarna stängas och stöveln placeras i tvättpåse eller örngott. Tvätta i 60° C

Tillverkare

Detaljer

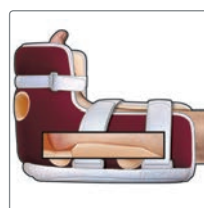

Två varianter

Heelift® Glide hälskydd finns i två olika varianter, Heelift® Glide Original och Heelift® Glide Mjuk. Båda är idealiska att använda på patienter som är orörliga eller nyopererade, lider av diabetes, hjärtsjukdomar eller kostrelaterade bristsjukdomar.

Fler användningsområden

De kan också användas vid droppfot, förlamning (ej spastisk) samt pre- och post-operativt vid höftfrakturer och hudtransplantation. Heelift Glide Mjuk för patienter med ödem och för patienter med hypersensitiv hud.

Heelift® Original och Mjuk hälskydd – Effektiv avlastning för hälen

Heelift är ett hälskydd utformat av ortopedier med syfte att förebygga och behandla trycksår på hälen. Heelift eliminerar effektivt trycket mot hälen genom att hälen höjs upp från omgivande tryck, vilket ger snabbare läkning. Heelift är tillverkad av mjukt och fast polyuretanskum för bästa patientkomfort.

Heelift hälskydd finns i olika varianter, Heelift® Original och Heelift® Mjuk, som båda är idealiska att använda på patienter som är orörliga eller nyopererade, lider av diabetes, hjärtsjukdomar eller kostrelaterade bristsjukdomar. De kan också användas vid droppfot, förlamning (ej spastisk) samt pre- och post-operativt vid höftfrakturer och hudtransplantation.

Detaljer



Heelift® Original

Heelift® Original – För ben utan ödem. Insidans utformning ger god ventilation.



Heelift® Mjuk

Heelift® Mjuk – För ben med ödem och för patienter med hypersensitiv hud.



Mjuk våfflad insida

Den mjuka insidan ger en skön och behaglig komfort.



Mjuk slät insida

Den mjuka och släta insidan minimerar risken för hudirritation och tryckpunkter.



Lätt att justera

Kardborrebanden spänns enkelt med hjälp av bandens D-ringslåsning.



Extra kudde

Extrakudden kan användas som hjälp för att förhindra höftrotation.

Elbowlift® Armbågsskydd – Effektivt skydd för armbågarna

Att skydda den känsliga armbågen från friktionsbrännsår och kontusioner kan vara en utmaning. Elbowlift erbjuder en latexfri och effektiv lösning. Elbowlift dämpar och frilägger armbågen så att ytkontakten minimeras. Det skyddar mot olecranon bursitis, ulnar neuritis, trycksmärta och trycksår samt hudskada.

Detaljer



Lätt att placera

Mitthålet ger en ökad patientkomfort och fungerar som hjälp vid placering av armbågen.



Justerbara band

Det justerbara och vadderade Velcro® bandet håller kudden på plats.



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se