


Heelift® Original / Mjuk / Glide

Bruksanvisning

Heelift® Original, Heelift® Mjuk och Heelift® Glide är produkter framtagna för användning både förebyggande och vid behandling av trycksår. De är latexfria och de är gjorda av bekvämt, tvättbart (se skötselinstruktionerna) polyuretanskum. Modellerna är framtagna för att ge en säker passform och förpackningen innehåller därför en extrakudde om ytterligare anpassning krävs. Vadomfång för Heelift Original/Mjuk/Glide: ca 25–35 cm.

Öppning för hälen

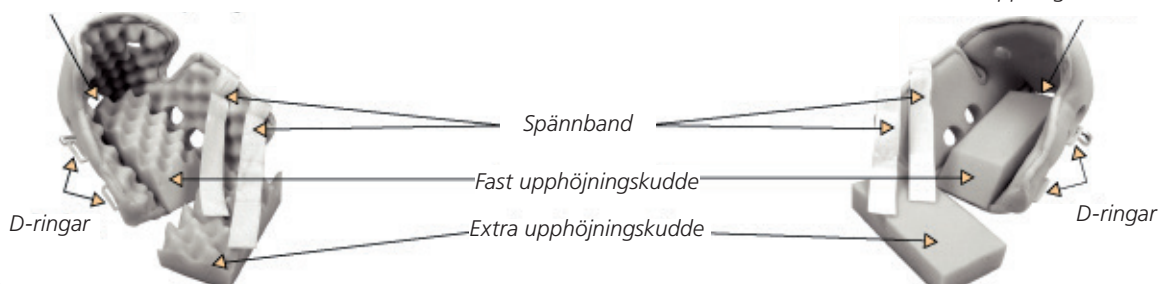

Öppning för hälen

Användning

STEG 1

Öppna Heelift-stöveln (Fig. 1). Lägga extrakudden åt sidan. HA DEN TILLGÄNGLIG, den kan behövas senare om stöveln behöver anpassas ytterligare.



fig 1

STEG 2

Placera foten inuti stöveln med hälen placerad över hålrummet (Fig. 2). Hälen ska hänga över den nedre höjningskudden.



fig 2

STEG 3

Dra spännbanden över skenbenet mot D-ringarna. Trä igenom banden genom D-ringarna (Fig. 3). Förslut och fäst banden. Låt flikarna vara lite öppna så att ventilationen främjas.



fig 3

STEG 4

Kontrollera passformen. Du bör kunna få in fingrarna mellan hälöppningen och sängen (Fig. 4). Stöveln ska inte kunna röra sig fritt kring benet.

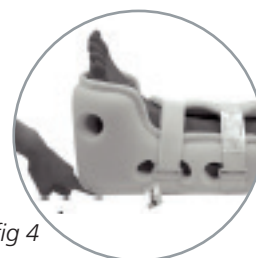


fig 4

Justera passformen

VARNING! Skär INTE igenom stövelns söm och ta INTE bort hela den självhäftande baksidan från extrakudden annat än om det är nödvändigt.



LÄNGRE BEN

Placera extrakudden lite utanför den fasta kudden.



HÖFTROTATION

Sätt fast extrakudden i vågrätt läge utanpå stöveln.



DROPPFOT

Sätt fast extrakudden i lodrätt läge bakom stövelsulan.



MALLEOLÄRT TRYCKSÅR

Klipp bort skumbulorna runt ankeln. Klipp bort en del av den fasta kudden vid behov.



BEN HOS ÖVERVIKTIG PATIENT

Om hälen kommer i kontakt med lakanet placerar man extrakudden ovanpå den fasta kudden för extra upphöjning.



HÄLSEMAN

Om rodnad uppstår i det här området klipper man ut ett "V" ur den fasta kudden. Om båda kuddarna används är det den övre kudden som ska anpassas.

Skötsel

- Handtvätt rekommenderas, med varmt vatten och mildt rengöringsmedel.
- Vid maskintvätt och torktumling ska remmarna stängas och stöveln placeras i tvättpåse eller örngott. Tvätta i 60° C.



74667A

2015-10-12

Etac Sverige AB, Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371-58 73 00, Fax. 0371-58 73 90

www.etac.se

etac®