

Bruksanvisning

Etac Socky Strømpepåtrekker

Socky strømpepåtrekker, kort



Strømpepåtrekker for å ta på korte og lange strømper og sokker.

Socky strømpepåtrekker, lang



Strømpepåtrekker for å ta på korte og lange strømper og sokker.

Beskrivelse	Art. nr.	Vekt	Lengde
Sockystrømpepåtrekker, kort	80601002-2	94 g	40 cm
Sockys strømpepåtrekker lang	80601001-2	146 g	60 cm
Strømpepåtrekker Socky for støtte- og kompresjonsstrømper	80601003-2	90 g	100 cm

Mål

Passer alleskøstørrelser. Normal til stor leggomkrets.

Materiale

Tøy: Polyester, plastdeler: Polypropen

Design


HM Center

Rengjøring


Produktet kan tørkes av og vaskes for hånd. Rengjør med vanligerengjøringsmidler uten slipemiddel med pH-verdi 5-9. Desinfiseres med 70% rengjøringsprit.




Strømpepåtrekker Socky for støtte- og kompresjonsstrømper

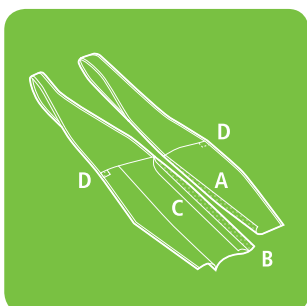

Fest borrelåsen (A mot B)
Brett over fliken (C).

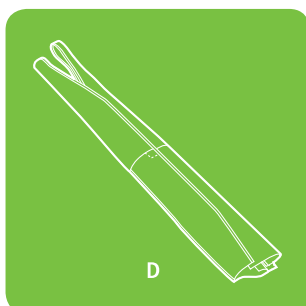

Brett sammen og fest
borrelåsen (D).

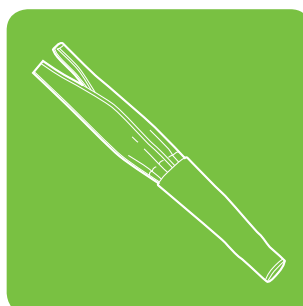

Trekk på hele strømpens
lende, med hælen ned.



Trekk i begge håndtakene
samtidig. Foten skal være tørr
ved bruk av Socky.