

Vikbar ramp iRAMP

Bruksanvisning nr.15

- Tack för att ni valt en produkt från oss!
- Kontrollera att inga skador har uppstått på rampen under transporten. Rampen skall gå lätt att vika ut och ihop.
- Läs noga igenom bruksanvisningen och varningstexter innan du använder rampen. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
- På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal last rampen får belastas.
- Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad ramperna är lämpliga för.
Ta det försiktigt och använd rampen med gott omdöme.
- Vik ut rampen (se bild A) och placera rampen med "läppen" stadigt vilande på det övre planet.(Se bild B) Läppen är på undersidan försedd med halkskyddsmatta för att förhindra att rampen halkar på underlaget. Iakttag dock försiktighet vid användandet så att ej någon del på rullstolen hakar fast och drar med sig rampen.

Bild A

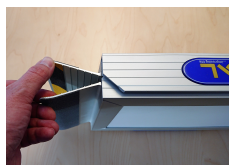


Bild B



- Skulle en skada uppstå på rampen får den ej användas förrän skadan reparerats av fackman.
- Garantitiden är 5 år.

Skötsel och rekonditionering

- Rampen skall hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls. Rampen kan rengöras med vanligt diskmedel. Skölj rent med vatten.

Demontering och återvinning

- Allt ingående material är till 100% återvinningsbart. Aluminium lämnas som metallsrot.



Leverandør i Norge:

Etac AS

Vanemveien 1, 1599 Moss

Postboks 249, 1501 Moss

Tlf 815 69 469

hovedkontor.norge@etac.com

www.etac.no