



Caribou Wiedereinsatz

DEUTSCH

Wiederverwendung

Der Strong Base von R82 kann wiederverwendet werden. Bitte beachten Sie die Angaben zur Produktnutzungsdauer in der Gebrauchsanweisung. Die jeweils aktuelle Version der Gebrauchsanweisung finden Sie unter R82.org

Reinigung

Waschen

Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten.

Gestell mit pH-neutraler Mischung aus warmen Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel oder 70 prozentiger Desinfektionsmittellösung reinigen und anschließend trocknen lassen. Eine Liste geeignete Reinigungsmittel finden Sie auf <http://www.r82.org>

Verwenden Sie für die Reinigung der Teile keinen Hochdruckreiniger.

Waschanleitung

Das Produkt kann bei 60 °C mit einem milden Reinigungsmittel in einer für medizinische Geräte geeigneten Teilewaschanlage gereinigt werden.

Vor der Reinigung, entfernen Sie sämtliches Zubehör inklusive der Motoreinheit, des Akkupacks und des Handschalters.

Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten.

Verwenden Sie die Trocknungsfunktion der Waschanlage, um das Produkt zu trocknen.

Die Teilewaschanlage sollte auf die folgenden Einstellungen eingestellt werden:

- Wassertemperatur: 60 ° C
- Waschdauer: 5 Minuten
- Trockentemperatur: 50 ° C
- Trockendauer: 10 Minuten

Das Produkt vor Wiedereinsatz bitte vollständig trocknen lassen

Nach der Reinigung: Montieren Sie die Motoreinheit und den Handschalter und setzen Sie den Akkupack an der dafür vorgesehene Stelle ein. Überprüfen Sie die Verstellfunktionen, indem Sie alle Bedienelemente auf dem Handschalter betätigen.

Überprüfung auf defekte oder verschlissene Komponenten

Verbogene, gerissene, korrodierte oder deformierte Teile müssen ersetzt werden. Verschlossene oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionierende Teile sollten ersetzt werden. Kleinere Beschädigungen an lackierten Oberflächen können mit einem Lackstift behoben werden.

Werden andere als Original-R82 Ersatzteile oder Anbauteile verwendet muss die CE-Kennzeichnung

entfernt werden. Original-R82 Teile wurden zusammen mit dem Produkt für die bestimmungsgemäße Verwendung getestet und gesetzlichen Prüfverfahren unterzogen.

Kontrolle

Die folgenden Funktionen müssen gemäß Verwendungszweck kontrolliert und eingestellt werden.

Alle Kontrollen und Einstellungen müssen nach den Vorgaben in der Gebrauchsanweisung erfolgen:

- Bei Produkten mit Gasdruckfeder oder Tel-eskopstange: Prüfen Sie den Verriegelungsmechanismus auf Funktion. Prüfen Sie, ob die Grundplatte sich horizontal und vertikal verstellen lässt und die eingestellte Position hält.
- Laden Sie den Akku auf. Prüfen Sie den Handschalter auf Funktion, in dem Sie die Grundplatte vertikal und horizontal verstellen.
- Überprüfung der Castorbuchsen, Rollen und Bremsen auf Funktion.
- Die Fußplatte ist verstellbar, Prüfen Sie die Längen- und Winkeleinstellung auf Funktion und Fixierung.
- Sichtprüfung der Polsterauflagen auf Beschädigung, wie Risse, Löcher oder Abnutzung der Oberflächenbeschichtung.
- Überprüfung aller Schraubgewinde auf Funktion. Besonderes Augenmerk gilt den Gewinden in den Adaptern zur Aufnahme der Grundstangen, Verlängerungsplatten, Fuß- und Kopfstützen.
- Sichtprüfung der Brust- und Beckengurte auf Funktion. Bei Abnutzungserscheinungen oder Defekten, insbesondere an den Klettverschlüssen und Klickschnallen müssen diese ausgetauscht werden.
- Überprüfung der Kunststoffaufnahmen / Verbindungsstellen des Rahmens mit der Grundplatte auf Defekte. Besonderes Augenmerk gilt den Befestigungspunkten / Schraubenaufnahmen
- Überprüfung der rückwärtig und seitlich angebrachten Montageschienen zur Aufnahme von Zubehörteilen, Funktionstest: Stufenloses verschieben der Gleitstücke/ der Halterungen ist ohne Einschränkung möglich.


Beachten Sie, dass die Produktlebensdauer begrenzt ist, vor allem wenn das Produkt für die Nutzung über einen längeren Zeitraum ver-schrieben wird.

Entsorgung

Am Ende des Produktlebenszyklus sollte das Produkt nach den einzelnen Materialien getrennt ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt oder entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich für eine genaue Beschreibung der einzelnen Materialien an Ihren Händler vor Ort. Für Informationen über die Möglichkeiten einer umweltfreundlichen Entsorgung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

DEUTSCH

DE

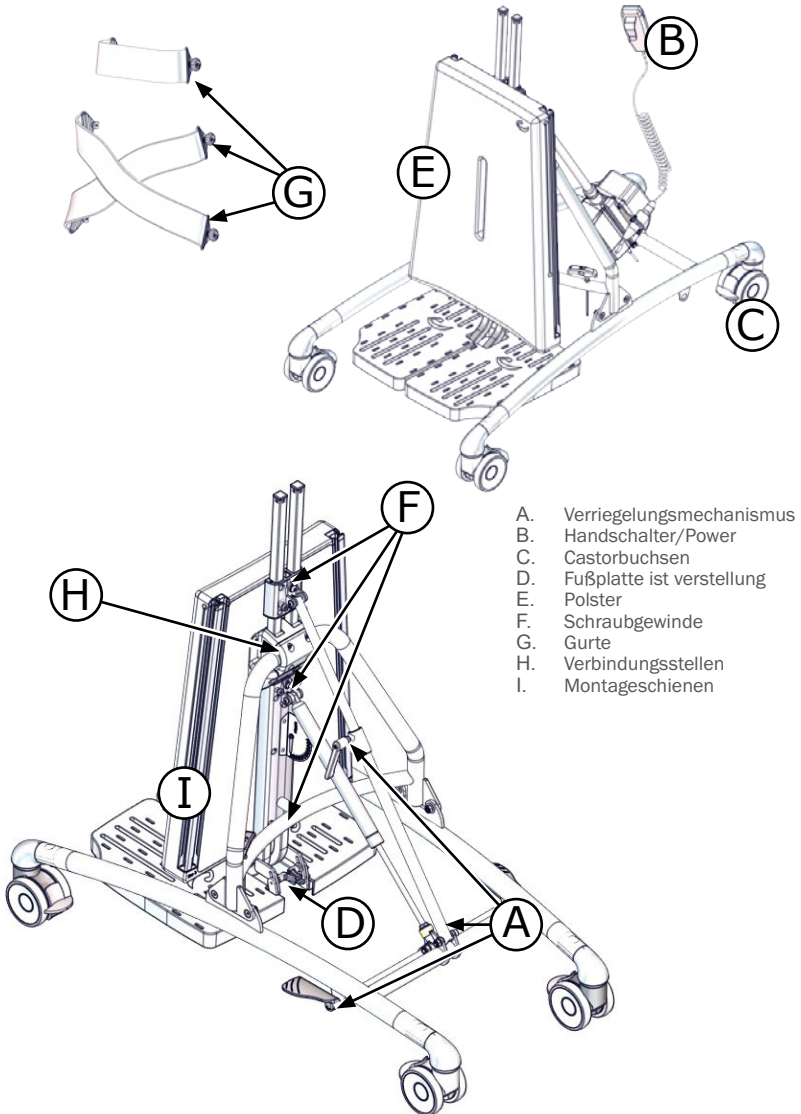

- A. Verriegelungsmechanismus
- B. Handschalter/Power
- C. Castorbuchsen
- D. Fußplatte ist verstellung
- E. Polster
- F. Schraubgewinde
- G. Gurte
- H. Verbindungsstellen
- I. Montageschienen

DEUTSCH

Caribou - Materialien:

	Material	Material Art	Oberflächenbehandlung
Rahmen	Stahl	S235	Pulverbeschichtet
	Aluminium	EN AW 6060	Chromatiert
	Aluminium	EN AC 46100	Chromatiert
	Kunststoff	PP G15	-
Polsterung	Aluminium	EN AW 6060	Chromatiert
	Kaltschaum	PUR	-
	Holz	Sperrholz	-
Kopfpolster	Aluminium	EN AW 6060	Eloxiert
	Holz	Speerholz	-
	Kaltschaum	PUR	-
Gurten	Aluminium	EN AC 46100	Chromatiert
	Stoff		-
Seitenpelotten	Stahl	S235	Chromatiert
	Holz	Sperrholz	-
	Kaltschaum	PUR-	-
Shulterpelotten	Stahl	S235	-
	Edelstahl	X5CrNi18-10	-
	Kaltschaum	PUR	-
Abduktionskeils	Holz	Sperrholz	Chromatiert
	Kaltschaum	PUR	-
Kniepelotten	Stahl	S235	Chromatiert
	Kunststoff	PP G15	-
	Kaltschaum	PUR	-
Fußstützen	Stahl	S235	Chromatiert
	Kunststoff	ABS	-
Terapietisch	Stahl	S235	Chromatiert
	Kunststoff	ABS	-
Keilen	Schaum	Plastazote	-
Helper´s handle	Stahl	S235	Pulverbeschichtet
	Schaum	-	-
Gas spring	Stahl	S235	Pulverbeschichtet



nothing compares to a smile!



R82 A/S

Parallevej 3
8751 Gedved
Denmark
Tel +45 79 68 58 88
Fax +45 75 66 51 92
R82@R82.com
R82.org

Supplier for:
Rest of the world

R82 UK Ltd.

England
Tel. +44 (0)121 561 2222
Fax +44 (0)121 559 5437
R82uk@R82.com
R82.co.uk

Supplier for:
United Kingdom, Ireland

R82 GmbH

Germany
Tel +49 (0)6132 710 70
Fax +49 (0)6132 710 710
R82de@R82.com
R82.de

Supplier for:
Germany, Switzerland, Austria

R82 Nederland B.V.

The Netherlands
Tel +31 (0)513 68 16 86
Fax +31 (0)513 68 19 84
R82nl@R82.com
R82.nl
R82.be

Supplier for:
The Netherlands, Belgium

R82 au Pty Limited

Tel +61 (02) 8213 6666
Fax +61 (02) 8213 6655
R82.com.au
facebook.com/R82Australia

Supplier for:
Australia

Find your local dealer

R82.org

DISTRIBUTOR: