


cougar[™]

Nederlandse gebruiksaanwijzing

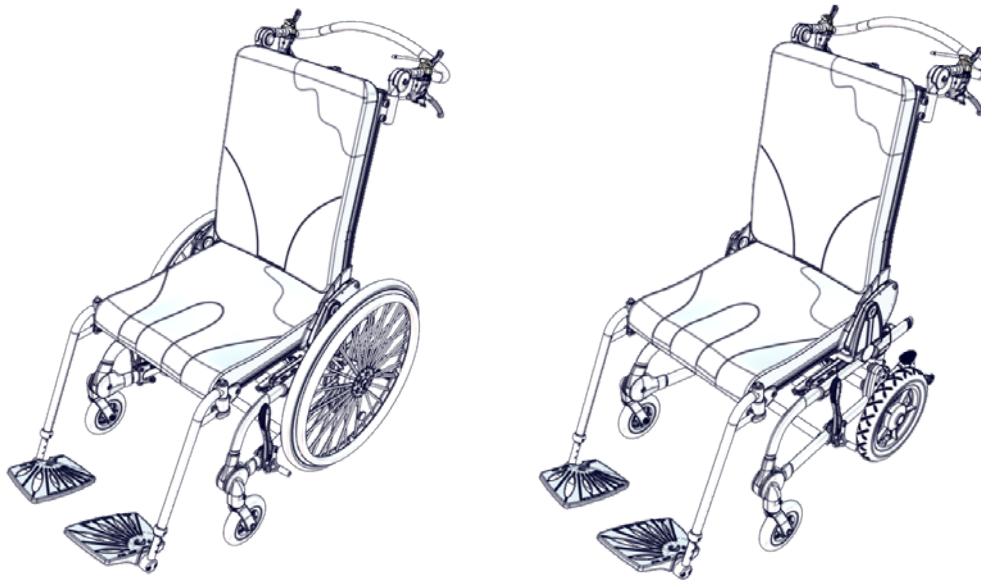

Norwegian Design Reg. No. 80196

NL INHOUDSOPGAVE

Bestemming - Verklaring van overeenstemming - R82 Garantie	3
Veiligheid	4
Onderhoudsinformatie	5
Montagehandleiding	6
Klaar maken voor gebruik - T-tool	8
Transfer in en uit de Cougar	9
Gasveer verstelling	10
Quick release wielen	11
Zithoek- en rughoek verstelling	12
Duwbeugel.....	13
Duwbeugel.....	13
Anti-tipsteunen.....	14
De lumbaalsteun verstellen	14
Beensteunen en voetplaten.....	15
Zithoogte verstellen	16
Zithoek verstellen	16
Zitdiepte verstellen	17
Handrem.....	18
Trommelrem	19
Wielcombinaties	19
Aanpassen zwaartepunt.....	20
Rugsteungedeelte	21
Spatborden	21
Armsteunen, kledingbeschermers en armsteunverlengers	22
Spaakbeschermers	23
Voetsteun monteren	23
Beensteunen	24
Stokhouder	25
Blad voor zuurstoffles	25
Werkblad	25
Abductieklos	26
Bekkensteunen	26
Hoofdsteun	27
Fixatievesten en gordels	27
Fix-locks	28
Product-indentificatie stickers.....	29
Maatgegevens.....	30
Productveiligheid	31
Technische gegevens.....	32
Fabrikant.....	32

Wij waarderen uw keuze voor een nieuw product van R82 – een wereldwijde leverancier van technische hulpmiddelen en instrumenten voor hulpbehoevende kinderen en volwassenen. Lees deze Gebruikershandleiding voorafgaande aan het gebruik goed door, zodat u volledig kunt profiteren van de opties die door dit product worden aangeboden. Bewaar de Gebruikershandleiding voor toekomstige referentie.

Bestemming

Het betreft een rolstoel voor kinderen en volwassenen met een beperking.

Indicaties

De rolstoel kan worden gebruikt door kinderen en volwassenen met een beperking die niet in staat zijn om rechtop te blijven zitten of zich zonder een hulpmiddel te verplaatsen. De rolstoel is dus bedoeld voor mensen met een functionele beperking en niet met een specifiek gezondheidsprobleem of een specifieke leeftijd.

De gebruiker is degene die in de rolstoel zit. De verzorger is degene die de rolstoel bedient. Laat de gebruiker nooit alleen in de rolstoel achter. Zorg ervoor dat de verzorger permanent toezicht houdt.

Het gebruik van de rolstoel wordt vaker op een dag stopgezet als de gebruiker in een ander hulpmiddel of een conventioneel product gaat liggen, staan of zitten.

De rolstoel is geschikt voor het vervoer van kinderen en volwassenen vanaf 22 kg tot het aangegeven maximumgewicht.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend

Voorzorgsmaatregelen

Speciale aandacht moet worden gegeven aan de overwegingen over de samenstelling van het product en het gebruik van accessoires voor gebruikers met beperking in hun:

- Zintuiglijke waarneming en pijn voelen: ga dan na of de rolstoel en de bijbehorende accessoires met hun ondersteuning niet te veel druk veroorzaken.
- Motoriek (bv. door ongecontroleerde bewegingen te maken): overweeg dan om een rolstoel met een dynamische rugleuning te gebruiken.
- Vermogen om rechtop te blijven zitten: gebruik dan de rolstoel met accessoires (bv. zijsteunen, vest, riemen of armsteunen en een blad).
- vermogen om de positie van hun hoofd te handhaven: overweeg het gebruik van accessoires of een product dat ondersteuning biedt voor de positionering van het hoofd.

Toepassingsgebieden

Dit product kan binnen en buiten worden gebruikt

Meegeleverd gereedschap:

- een 4mm en 5mm inbussleutel
- 13 mm steeksleutel

Verklaring van overeenstemming

Dit product voldoet aan de vereisten van de Verordening medische hulpmiddelen (2017/45). Het CE-keurmerk moet worden verwijderd bij reconstructie van het product, wanneer het wordt gebruikt in combinatie met een product van een andere fabrikant of wanneer er andere dan originele R82-reserveonderdelen en -bevestigingen worden gebruikt. Verder voldoet dit product aan de vereisten conform:

- EN 12183

De CE-markering moet worden verwijderd als:

- er veranderingen aan het product worden aangebracht;
- het product voor iets anders wordt gebruikt dan het beoogde doel en de conformiteitsverklaring
- niet de originele R82-reserveonderdelen en -fittingen worden gebruikt.



Als het hulpmiddel met andere producten wordt gecombineerd, mag deze combinatie het beoogde doel van de producten niet veranderen of de producten zodanig wijzigen dat niet kan worden gegarandeerd dat de combinatie aan de toepasselijke vereisten voldoet. De persoon die/het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de combinatie van de producten moet ervoor zorgen dat aan de toepasselijke vereisten wordt voldaan.

Voorbeelden van toepasselijke vereisten:

- uitlijning van gebruikersgewicht/massa van de gecombineerde zitting en onderstel, goedkeuring voor vervoer van beide producten in voertuigen (ISO16840-4 voor de zitting en ISO7176-19 voor het onderstel);
- materiaalveiligheid (biocompatibiliteit, ontvlambaarheid), veiligheid mechaniek (stabiliteit, klemgevaar, onderlinge verbinding), elektrische veiligheid.



Recycle informatie

Wanneer een voorziening het einde van haar levensduur bereikt, dient het te worden gescheiden op verschillende materialen, zodat de onderdelen kunnen worden gerecycled of op een juiste wijze kunnen worden afgevoerd. Neem, indien nodig, contact op met de importeur voor een nauwkeurige beschrijving van elk materiaal.

Accessoires en reserve onderdelen

De voorzieningen van R82 kunnen worden uitgerust met diverse accessoires, die voldoen aan de behoefte van het kind/de tiener. Vervangende-onderdelen zijn beschikbaar op aanvraag. De specifieke accessoires vindt u op onze website. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

R82 Garantie

R82 biedt 2 jaar garantie op gebreken in uitvoering en materialen en 5 jaar garantie op framebreuk veroorzaakt door lasfouten. De garantie kan nadelig worden beïnvloed, indien de dealer of ouders zijn/haar verantwoordelijkheid niet neemt ten aanzien van servicebeurten en/of dagelijks onderhoud conform de door R82 voorgeschreven en/of in de User Guide aangegeven richtlijnen en intervallen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van etac onder de rubriek; Service > download.

De levensduur van deze voorziening bij normaal gebruik is 8 jaar, indien al het onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met instructies van de fabrikant en aantoonbaar zijn vastgelegd. Het hulpmiddel kan binnen zijn levensduur worden teruggegeven

De garantie geldt alleen in het land waar het product is gekocht, en als de voorziening kan worden geïdentificeerd aan de hand van het serienummer. De garantie dekt geen schade door ongevallen, met inbegrip van schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onachtzaamheid. De garantie heeft geen betrekking op gebruiksonderdelen zoals bijvoorbeeld banden en bekleding welke onderhevig zijn aan normale slijtage en op gezette tijden moeten worden vervangen.

Deze garantie vervalt indien andere dan niet-originele onderdelen/accessoires worden gebruikt of als het product niet is onderhouden, gerepareerd of gewijzigd volgens de richtlijnen en intervallen die door de leverancier worden voorgeschreven en/of worden vermeld in de gebruikershandleiding (User Guide). R82 behoudt zich het recht voor om de voorziening waarvoor een claim wordt ingediend inclusief de bijbehorende documentatie te onderzoeken alvorens de garantie claim te honoreren en/of te besluiten de defecte voorziening, accessoire of het onderdeel te vervangen of te repareren. De dealer dient het betreffende onderdeel waarvoor een claim wordt ingediend op te sturen naar het adres waar hij het heeft aangeschaft.

Voorverkoopinformatie

- www.etac.com

Veiligheid

De op deze voorziening aangebrachte stickers, aanduidingen en instructies mogen nooit afgedekt of verwijderd worden en moeten gedurende de gehele levensduur van de voorziening op hun plek blijven zitten en duidelijk leesbaar zijn. Vervang of herstel onleesbare of beschadigde stickers, aanduidingen en instructies onmiddellijk. Neem contact op met de importeur voor instructies.

In geval van een ongewenste gebeurtenis met betrekking tot het apparaat, moeten incidenten tijdig worden gemeld aan uw lokale dealer en de nationale bevoegde autoriteit. De lokale dealer stuurt de informatie door naar de fabrikant.

Voor informatie over veiligheidsberichten, terugroepacties en lokale dealergegevens kunt u terecht op de website etac.com.

Ouder/verzorgende

- Lees alle instructies en User Guide aandachtig door voor gebruik en bewaar deze als naslagwerk. Onjuist gebruik van deze voorziening kan leiden tot ernstig letsel aan het kind/de tiener
- Instellingen en afstellingen aan het product of de accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door personen die de gebruikershandleiding hebben gelezen en de noodzakelijke instructies hebben ontvangen van een productadviseur.
- Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Verstikkingsgevaar als ze worden verwijderd van hun oorspronkelijke plaats
- Gebruik altijd de juiste tiltechnieken en tilhulpmiddelen
- Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in dit product achter. Zorg dat een zorgverlener permanent toezicht houdt
- Let op eventuele maximaaanduidingen voordat u een in/verstelling gaat verrichten
- Reparaties/vervangingen mogen alleen worden gedaan met behulp van nieuwe originele R82-reserve-onderdelen en accessoires en volgens de richtlijnen en intervallen voorgeschreven door R82
- In geval van twijfel over het veilig kunnen gebruiken van uw voorziening of als er onderdelen niet juist functioneren, raden wij u aan om de voorziening niet langer te gebruiken en zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw dealer
- Let op dat er geen lichaamsdelen in de bewegende delen bekneld raken terwijl u die afstelt
- Zorg ervoor dat er geen lichaamsdelen vastzitten in openingen voor de montage van steunen/accessoires.
- Informatie over transport is te vinden in het document "Transport in motorvoertuigen" dat bij het product wordt geleverd
- Informatie over wegligging is te vinden in het document "Wegligging" dat bij het product wordt geleverd

Omgeving

- Controleer de temperatuur van het oppervlak van het product voordat u een gebruiker erin laat plaatsnemen. Dit geldt met name voor gebruikers met een gevoelloze huid, omdat zij geen warmte kunnen voelen. Laat het product voor gebruik afkoelen als het oppervlak warmer is dan 41 °C
- Gebruik deze voorziening op een vlakke ondergrond zonder obstakels. Wees bedacht op een verminderde manoeuvreerbaarheid op gladde wegen

- Bij gebruik op hellende ondergronden, verwijzen wij u naar de specificatie van de maatgegevens

Kind/tiener

- Als het kind/de tiener tegen het maximale gewicht aan zit en/of veel ongecontroleerde bewegingen maakt, dient u te overwegen om over te stappen op een grotere maat, met een hogere maximale belasting of te kiezen voor een andere voorziening

De voorziening

- Voer voor het eerste gebruik alle in/verstellingen uit aan de voorziening en accessoires en zorg ervoor dat alle knoppen, schroeven en gespen goed vastzitten. Houd alle gereedschappen buiten bereik van kinderen
- Verwijderbare onderdelen zonder gebruik van gereedschap: wielen, voetsteun en kussens. Het verwijderen ervan heeft een nadelig effect op het apparaat
- Activeer (wanneer aanwezig) de remmen voordat het kind/de tiener in de voorziening wordt geplaatst
- Activeer de anti-tips wanneer het product wordt gebruikt op hellingen
- Activeer de anti-tips wanneer u de kantelverstelling en/of rughoekverstelling verstelt
- Deactiveer de anti-kanteluitrusting alvorens een stoeprand op te rijden die hoger is dan 10 cm
- Controleer of de voorziening stabiel staat alvorens het kind/de tiener in de voorziening te plaatsen
- Wij raden aan om het kind te waarschuwen alvorens u de kantelverstelling en/of rughoekverstelling verstelt
- Controleer of de wielen en banden in goede staat zijn, op druk zijn en goed vastzitten alvorens de voorziening te gebruiken
- De juiste bandenspanning staat vermeld op de behuizing van de banden en in het hoofdstuk met technische gegevens over de banden.
- Gebruik het product in geval van een lekke band niet totdat het probleem is verholpen.
- De toegang tot en de wendbaarheid in een motorvoertuig hangt voor een groot deel af van de grootte van het apparaat en de draaicirkel; kleinere apparaten en/of apparaten met een kortere draaicirkel bieden over het algemeen eenvoudiger toegang tot een voertuig en zijn makkelijker wendbaar in een voertuig bij een naar voren gerichte positie. Overeenkomstig bijlage D van ISO 7176-19 is het product beoordeeld op geschiktheid voor het gebruik van in voertuigen verankerde heup- en schoudergordels. Het apparaat krijgt de totaalscore "Goed"
- Een product zonder gebruiker erin kan over de weg en door de lucht worden vervoerd
- Het bevestigen van extra gewicht kan de stabiliteit nadelig beïnvloeden. De plaats van de punten die zijn bedoeld om extra gewicht te dragen worden vermeld in de Montagehandleiding in de paragraaf over accessoires.
- Stel de gasveer niet bloot aan druk en hoge temperaturen. DO niet doorboren.
- Inspecteer de voorziening en alle accessoires regelmatig en vervang defecte/versleten onderdelen voor gebruik
- Dit product is getest op ontvlambaarheid in overeenstemming met EN 1021-2 en ISO 7176-16
- Het product kan zijn vlambestendige eigenschappen verliezen als geen originele R82-onderdelen worden gebruikt: Kussens

Onderhoudsinformatie

Het onderhoud van de voorziening is geheel en al de taak van de bezitter van het hulpmiddel. Als een hulpmiddel niet volgens de instructies wordt onderhouden, kan dat de garantie op het hulpmiddel ongeldig maken. Verder kan het niet-onderhouden van een hulpmiddel de klinische toestand of veiligheid van het kind en/of de begeleider in gevaar brengen.

Neem indien nodig contact op met uw plaatselijke dealer voor hulp bij het instellen, gebruiken of onderhouden van het product.

Vóór 1e gebruik

- Lees vóór gebruik van de voorziening de User Guide goed door en bewaar deze op een veilige plek als naslagwerk
- Stop het meegeleverde gereedschap in het opbergtasje aan het frame

Dagelijks

- Gebruik een droge doek om de voorziening te reinigen
- Visuele inspectie: herstel of vervang beschadigde of versleten onderdelen
- Controleer of alle fixaties aanwezig zijn en correct zijn aangebracht
- Controleer alle fixaties en gespen op tekenen van slijtage van onderdelen
- Let op eventuele maximaaanduidingen voordat u een in/verstelling gaat verrichten

Wekelijks

- Controleer (indien aanwezig) of alle wielen kunnen vrij bewegen en al wielvergrendelingen en remmen kunnen gemakkelijk worden geactiveerd
- Veeg resten en vuil weg met een doek die is uitgewrongen in warm water met een mild reinigingsmiddel/milde zeep zonder chloor, en maak het product voor gebruik droog
- Banden: Controleer regelmatig de bandenspanning (aanbevolen: 55 PSI/3,8 bar/380 kPa) en het profiel van de banden. Geadviseerd wordt dit minimaal één keer per maand te doen.

Maandelijks

- Alle moeren, bouten en knoppen van deze voorziening moeten worden gecontroleerd en aangedraaid om losraken te voorkomen
- Doe wat smeermiddel op de wegzwenkbare onderdelen. We raden aan een professioneel smeermiddel te gebruiken

Jaarlijks

- Inspecteer het frame op scheuren en werk de servicechecklist af. Gebruik nooit een voorziening welke gebreken vertoont. Raadpleeg de servicechecklist
- te kunnen functioneren.
- Als er trommelremmen gemonteerd zijn, moeten de binnen- en buitenkabels strak zijn, zonder knikken, zodat de remmen goed blijven werken.

Wassen

De stof kan op 60° met een zacht schoonmaakmiddel in een machine worden gewassen.

De inlegstukken van schuim kunnen op 40° in de wasmachine worden gewassen met een mild wasmiddel:

Het schuim mag tijdens en na het wassen niet worden verbogen, samengedrukt of uitgewrongen, aangezien dit de vorm negatief kan beïnvloeden.

Hulpmiddelen wasmachine

Dit product kan gedurende 15-20 minuten op 60 ° in een wasmachine voor medische hulpmiddelen schoongemaakt worden. Gebruikmakend van een mild schoonmaakmiddel of desinfectie schoonmaakmiddel zonder chloor.

Desinfectie

Het product kan zonder accessoires en kussen worden gedesinfecteerd met een ontsmettingsmiddel met isopropylalcohol 70%. Het wordt aanbevolen om eventuele resten en vuil met een doek en warm water met een mild(e) wasmiddel/zeep zonder chloor van het product te verwijderen en het product te laten drogen voordat u gaat desinfecteren.

Service-interval


Het product moet elke 12 maanden nauwkeurig worden nagekeken (elke 6 maanden bij intensief gebruik), of als het opnieuw wordt teruggegeven voor gebruik of als het langere tijd niet in gebruik is geweest (langer dan 4 maanden). Het product moet worden nagekeken door een vakbekwaam technicus die weet hoe je het product moet gebruiken.

Onderhoudschecklist:

Controleer de volgende functies op de beoogde werking en stel af waar nodig. Repareer of vervang beschadigde of versleten onderdelen. Controleer:

- Controleer de afstelling van het zitvlak. Het zitvlak is verstelbaar en blijft daarna in die positie staan.
- Het systeem om de zitting te kantelen wordt afgesteld om vrij en zonder overbodige beweging te kunnen lopen
- Smeer het kantelingsysteem niet
- Controleer of de zwenkwielen vrij kunnen bewegen en of alle wielvergrendelingen/-remmen gemakkelijk ingeschakeld kunnen worden. Zo nodig aanpassen.
- Controleer of wielen met snelkoppeling verwijderd/vervangen kunnen worden
- Anti-tips kunnen worden bevestigd in werk- en ruststand
- Controleer de bandenspanning
- De spaakbeschermers hebben geen barsten en zijn aan het wiel bevestigd, waarbij de clips op elke beschermer zijn gemonteerd.
- Vóór opslag: Zet de wielvergrendelingen/remmen altijd uit
- Controleer of moeren en bouten op het product zijn aangehaald
- Doe wat smeermiddel op de wegzwenkbare onderdelen
- Controleer het product op scheuren of tekenen van slijtage aan de onderdelen
- Controleer of alle etiketten op het product intact zijn


Montagehandleiding

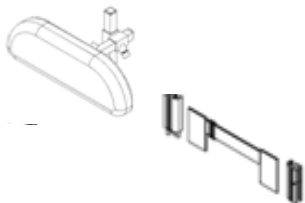


Montage-
handleiding
9996097144



Zie pagina 26

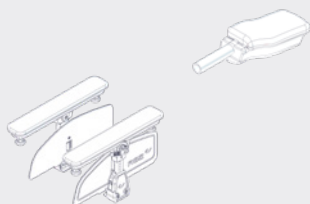

Zie pagina 22

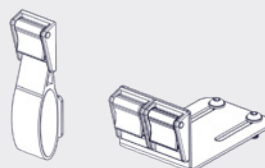


Zie pagina 28




Zie pagina 23




Zie pagina 21

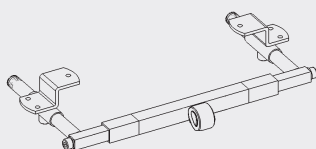

Zie pagina 23

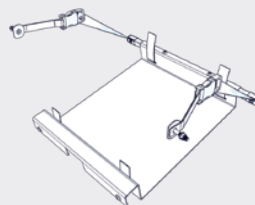

Zie pagina 25

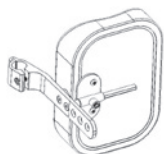


Zie pagina 24



Montage-
handleiding
9996097133




Zie pagina 25

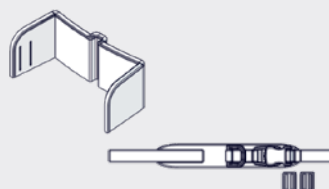


Montage-
handleiding
9996097244









Zie pagina 26

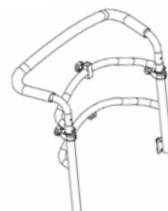

Montage-
handleiding
9996097143

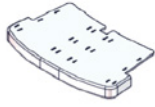

Montage-
handleding
9996097248

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


NL KLAAR MAKEN VOOR GEBRUIK




De Cougar wordt ingeklapt geleverd zodat hij tijdens transport zo weinig mogelijk ruimte in beslag neemt.

Volg onderstaande aanwijzingen om de Cougar gebruiksklaar te maken.

- 1) Trek de zitting helemaal naar achteren voor een correct uitgangspunt.
- 2) Trek aan de riem (A) aan de achterzijde van de rolstoel en kantel het ruggedeelte in verticale positie.
- 3) Trek de hendel (B) naar buiten, breng de gasveer aan en laat de hendel los. U moet daarbij een klik horen.
- 4) Draai de duwbeugel naar de gewenste positie en zet hem vast (C).

De Cougar is nu klaar voor gebruik.


 Zorg er voor dat het vergrendelmechanisme aan het uiteinde van de riem (A) en de hendel voor de gasveer (B) op hun plaats klikken wanneer u het ruggedeelte kantelt.

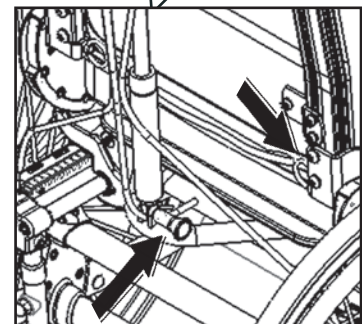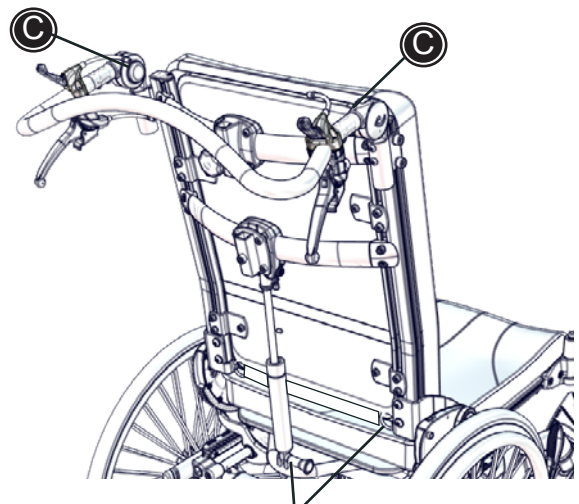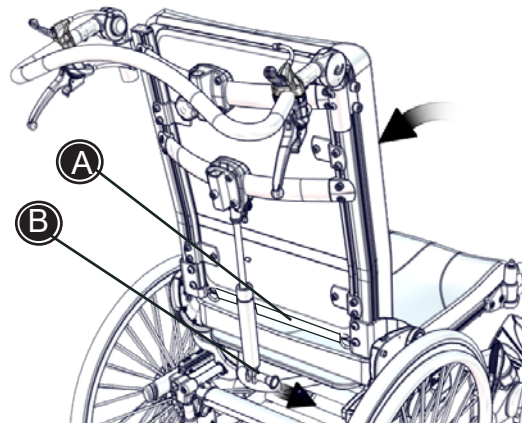

NL T-TOOL

De T-tool (A) helpt de vierkante plaatjes in de gleuf te houden wanneer men bijvoorbeeld kniesteunen of een bekkensteun monteert of verstelt.

Steek de T-tool in de gleuf en draai hem 90° zodat hij het plaatje ondersteunt.

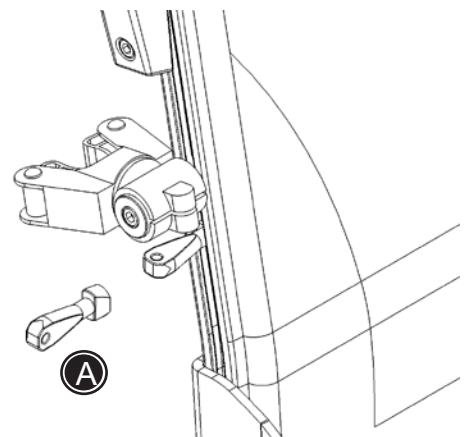

NL TRANSFER IN EN UIT DE COUGAR

Voordat de gebruiker plaatsneemt in de Cougar, dient u beide remmen te activeren, de voetsteunen opzij te klappen of de beensteun weg te halen. Tevens dienen de anti-tipsteunen naar achteren te zijn uitgeklapt.

Laat vervolgens de gebruiker in de Cougar plaatsnemen en maak de fixaties (b.v. heupgordel, fixatievest of wegzwenkbare zijsteunen) zorgvuldig vast.

Het is niet nodig om de beensteunen weg te halen wanneer de gebruiker met behulp van een tillift in de Cougar plaatsneemt.


NL GASVEER VERSTELLING

De Cougar is uitgerust met een gasveer ten einde de hoek te kunnen verstellen. Na enige tijd kan het nodig zijn dat de gasveer opnieuw moet worden bijgesteld. Dit is alleen nodig indien:

- De gasveer niet meer vastgezet kan worden
- De gasveer niet meer reageert op de bedieningshendel


Als de gasveer niet meer in een bepaalde stand te blokkeren is (schuift langzaam uit) dient u eerst de moer **(B)** met een 17mm steeksleutel los te draaien. Draai vervolgens de as **(A)** links om (tegen de klok in) en draai de moer **(B)** weer vast. Controleer of het probleem is verholpen. Herhaal deze handelingen zonedig (of vraag uw dealer om hulp).

Als de gasveer volstrekt niet reageert op de bedieningshendel (schuift niet in- of uit) dient u de moer **(B)** met een 17mm steeksleutel los te draaien. Draai vervolgens de as **(A)** rechts om (met de klok mee) en draai de moer **(B)** weer vast. Controleer of het probleem is verholpen. Herhaal deze handelingen zonedig (of vraag uw dealer om hulp).

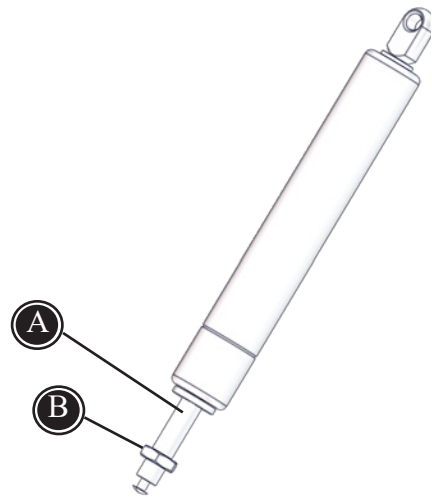

! Stel de gasveer niet bloot aan druk, hoge temperaturen en perforatie.

! Zorg dat de "zuigerstang" niet wordt blootgesteld aan krassen. Gebruik bij voorkeur een (zachte) doek en geen scherp gereedschap voor het bijstellen van de gasveer.

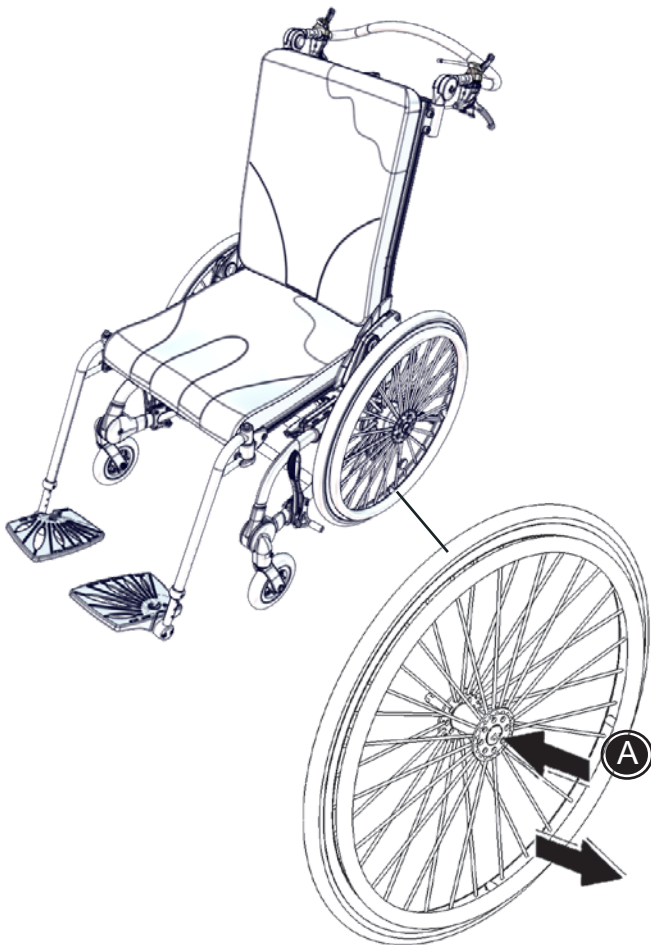

NL QUICK RELEASE WIELEN

De Cougar is standaard uitgevoerd met Quick - Release achterwielen. Hiermee kunnen de achterwielen eenvoudig van het frame worden verwijderd.

Als u een wiel wilt verwijderen, drukt u knop (A) op de achteras in en trekt u de as met het wiel naar u toe.

Op dezelfde wijze kunnen de achterwielen worden teruggeplaatst. Op het moment dat u de as van het achterwiel terugplaatst dient u een klik te horen. Laat vervolgens de knop (A) los en controleer of het wiel goed vast zit.

! Trek aan het wiel om te controleren of de as op zijn plaats zit en vergrendeld is.

! Voordat u de achterwielen verwijderd en/of terugplaatst dienen beide remmen te zijn gedeactiveerd.

NL ZITHOEK- EN RUGHOEK VERSTELLING

Zithoekverstelling (kantelverstelling):
Activeer de linker hendel (A) aan de duwbeugel om de zithoek te verstellen.




De Cougar kan met of zonder gasveer voor de rughoekverstelling worden besteld.
Colg onderstaande aanwijzingen om de rughoek te verstellen:

Rughoekverstelling (met gasveer):
Activeer de rechter hendel (B) aan de duwbeugel om de hoek van het ruggedeelte te verstellen.

Rughoekverstelling (bediening door gebruiker):
De Cougar kan worden uitgevoerd met een bedieningshendel, zodat de gebruiker zelf de rughoek kan verstellen. Monteer de hendel (C) in het rugleuningsprofiel.

U kunt de hoekverstellingen eenvoudig uitvoeren terwijl de gebruiker in de Cougar zit.

Rughoekverstelling (eenmalig):
Draai de bouten (D) los met de meegeleverde 5 mm inbussleutel en plaats de dwarsverbinding op de gewenste hoogte. De rughoek verandert wanneer de dwarsverbinding wordt verplaatst. Draai de bouten (D) vast wanneer de gewenste positie is bepaald.

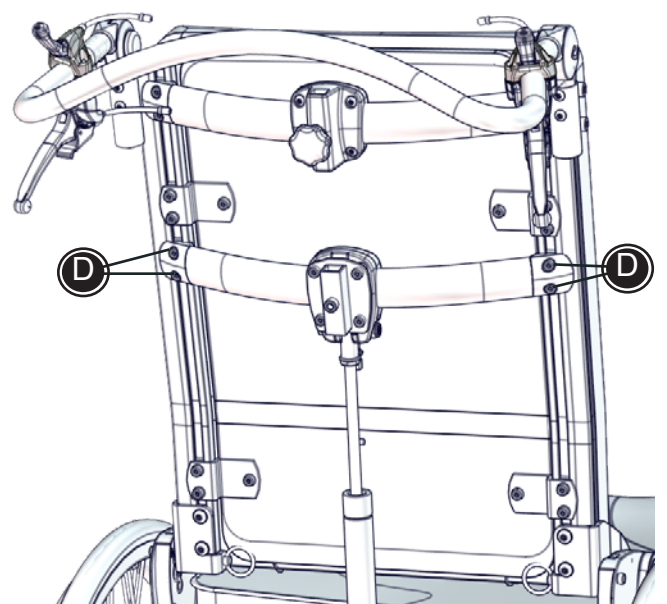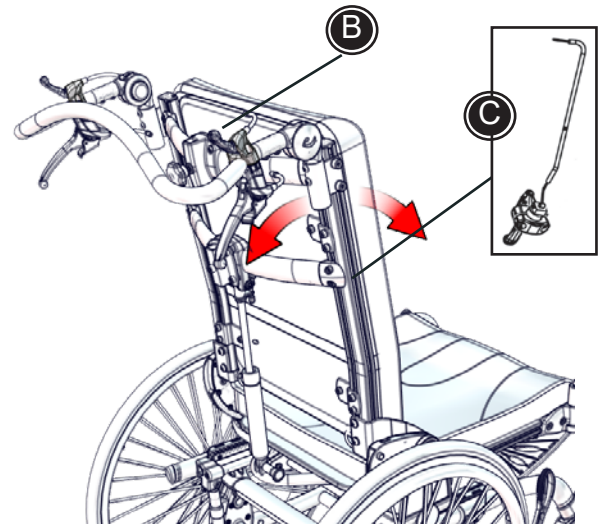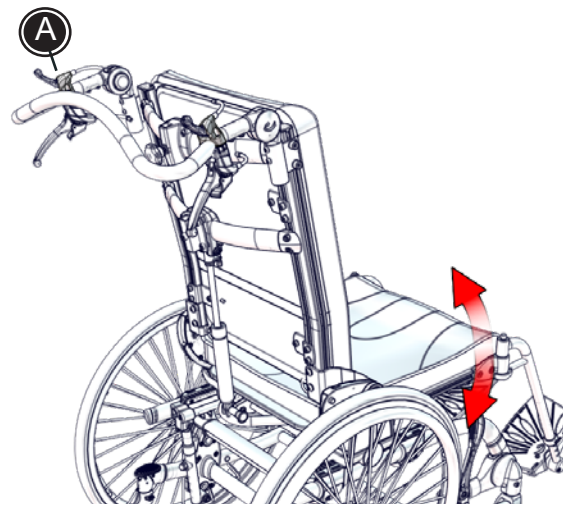


NL DUWBEUGEL

Volg onderstaande aanwijzingen voor het monteren van de duwbeugel.

- 1) Verwijder de zwarte kunststof afwerkdopjes (A) van de bovenzijde van de rugprofielen.
- 2) Schuif de duwbeugel in de rugprofielen en zet deze vast met behulp van de 2 inbusbouten (B) aan beide zijden.

! De bovenste inbusbouten aan beide zijden, dienen vastgezet te worden ter hoogte van de daartoe aangebrachte markeringen in het rugprofiel.


- 3) Dit dient ter voorkoming van het naar boven trekken van de duwbeugel tijdens gebruik.

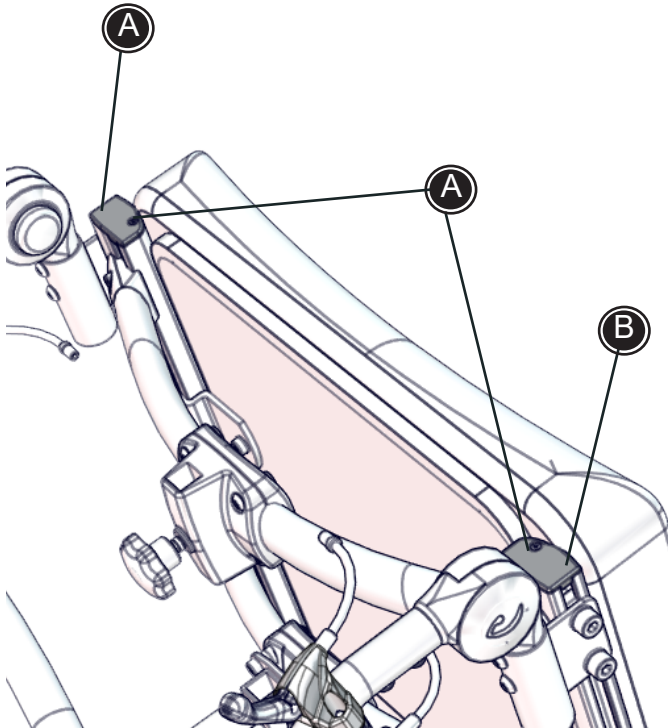

NL DUWBEUGEL

U kunt de hoek van de duwbeugel eenvoudig verstellen en zo aanpassen aan de lichaamslengte van de verschillende begeleiders.

! Gebruik nooit de duwbeugel voor het tillen of duwen van de rolstoel op/af een trap, verhoging, trottoirband etc. De rolstoel kan alleen worden opgetild door twee personen die de rolstoel vasthouden aan het frame. Til de rolstoel nooit op aan de duwbeugel.

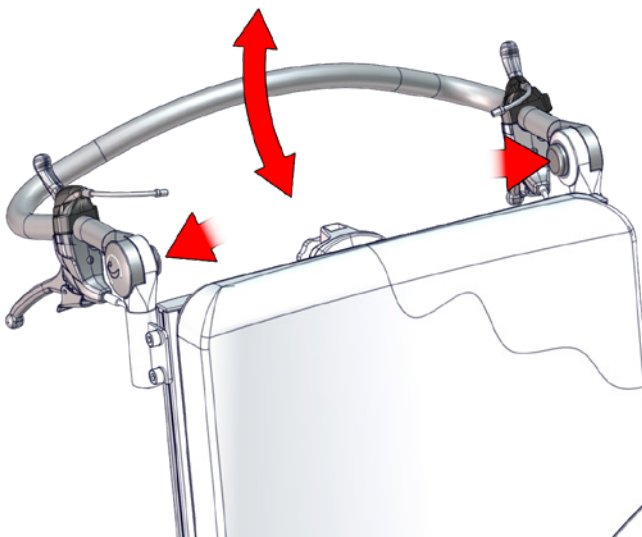


NL ANTI-TIPSTEUNEN

De Cougar wordt standaard met anti-tipsteunen geleverd. De anti-tipsteunen bevinden zich aan de achterzijde van de Cougar, onder de zitting.

Om gebruik te maken van de anti-tipsteunen moeten deze licht naar beneden worden gedrukt (A) met de voet en in de gewenste positie worden gedraaid. Als u de anti-tipsteun niet wilt gebruiken, draait u hem 180°.




Maak altijd gebruik van de anti-tipsteunen wanneer de Cougar in een kantelstand staat. Wij raden u aan de werking van de anti-tipsteunen regelmatig te controleren.

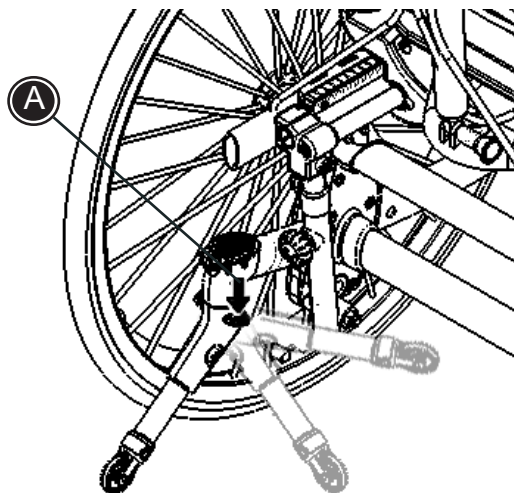


NL DE LUMBAALSTEUN VERSTELLEN

- * Verwijder de hoes.
- * Plaats de lumbaalsteun op de gewenste plek tegen het rugkussen aan. Druk vast tegen het klittenband.
- * Plaats de hoes terug.

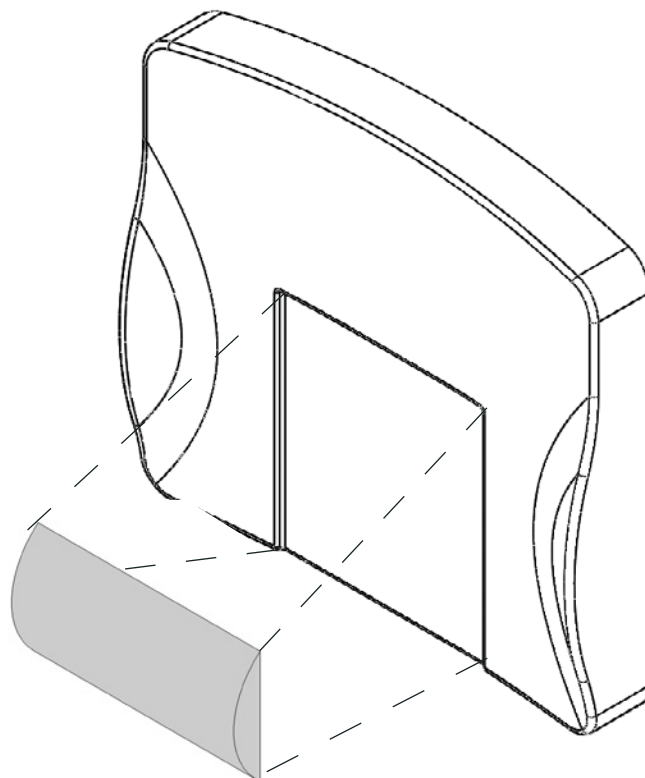


NL BEENSTEUNEN EN VOETPLATEN

Volg onderstaande aanwijzingen als u beensteunen wilt aanbrengen op de Cougar:

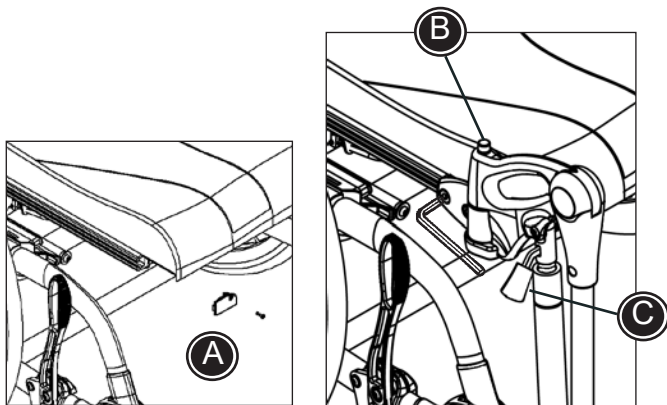

1) De beensteunen aanbrengen:

Maak met een schroevendraaier het afwerkdopje (A) los en leg het weg. Monteer de bevestigingen voor de beensteunen. Zet ze vast met de meegeleverde 5mm inbusleutel. Plaats het afwerkdopje terug. Plaats de beensteun in de bevestiging. Duw de ontgrendelknop (B) omlaag wanneer u de beensteun wilt aanbrengen of juist weghalen. Zorg ervoor dat de ontgrendelknop op zijn plaats klikt.

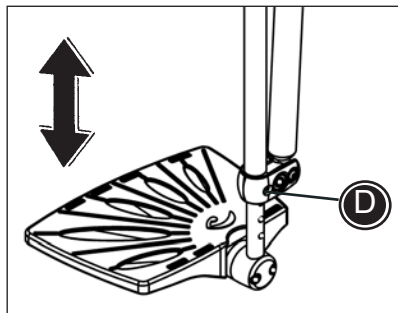


2) "Wegzwenk"-functie:

Duw de ontgrendelknop (B) omlaag en trek de beensteun iets omhoog. Nu kunt u hem naar opzij draaien. Draai de beensteun op zijn plaats. Zorg ervoor dat de ontgrendelknop (B) op zijn plaats klikt.


3) Hoekverstelbare beensteunen:

Duw de hendel (C) omlaag als u de hoek van elke beensteun afzonderlijk wilt verstellen.

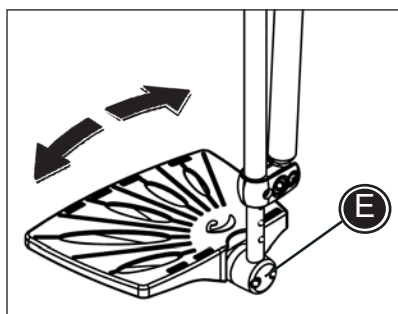

4) In hoogte verstelbare voetplaten:

Verwijder de inbusbout (D) met behulp van de meegeleverde 5mm inbusleutel. Stel de hoogte van de voetsteun in en draai de inbusbout weer vast.

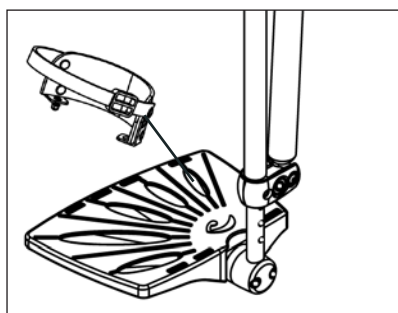

5) Hoekverstelbare voetplaten:

Gebruik de meegeleverde 5mm inbusleutel om de inbusbouten (E) los te draaien. Stel de hoek van elke voetplaat afzonderlijk in en draai de inbusbouten vast.


6) Hakbakken:

Plaats de hakbak op de voetplaat en zet de hakbak vast met de meegeleverde bout, gebruikmakende van de al aanwezige gaten in de voetplaat.


NL ZITHOOGTE VERSTELLEN

Volg onderstaande aanwijzingen om de zithoogte te verstellen:

- 1) Verwijder de zwarte beschermcapjes.
- 2) Draai de moeren (A) los met steeksleutels no. 13 en verwijder de bouten.
- 3) Zet de zitting in de gewenste hoogte.
- 4) Plaats de bouten terug en draai de moeren weer vast.
- 5) Plaats vervolgens weer de zwarte beschermcapjes.

 Zorg er voor dat de zithoogte aan beide zijden van het frame gelijk is.

 De hoek van de zitting verandert wanneer de zithoogte wordt veresteld.

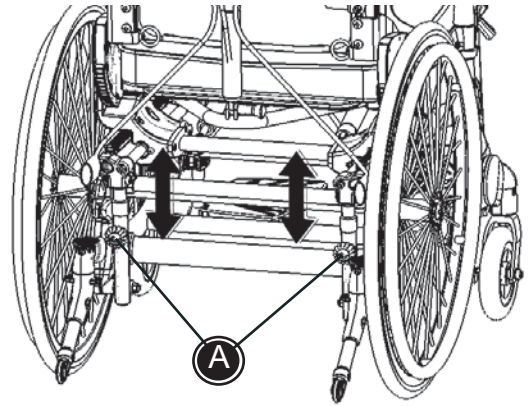


NL ZITHOEK VERSTELLEN



Ontspan de gasveer aan de achterzijde van de Cougar, door de rechter hendel (A) aan de duwbeugel te activeren.

Trek de zitting helemaal naar achteren voor een correcte uitgangspositie voor de zithoekverstelling. Volg onderstaande aanwijzingen om de zithoek te verstellen:


- 1) Demonteer het onderste deel van de gasveer (B).
- 2) Draai de bouten (C) onder de zitting los en stel de zithoek in. Draai de bouten weer vast.
- 3) Draai de bouten (D) los. Stel de hoogte van de buis aan de achterzijde af. Zo kunt u het onderste deel van de gasveer weer aanbrengen. Draai de bouten weer vast.

 Zorg ervoor dat de zithoogte aan beide zijden van het frame gelijk is.

 De hoogte van de buis moet aan beide zijden van de Cougar gelijk zijn.

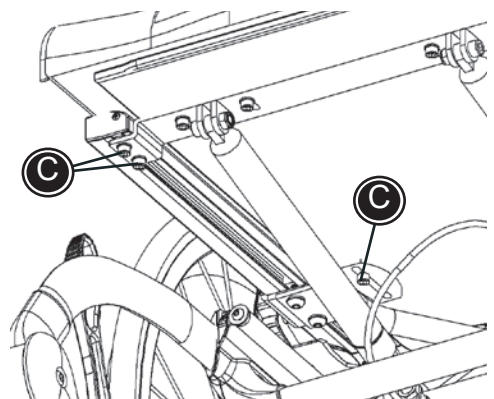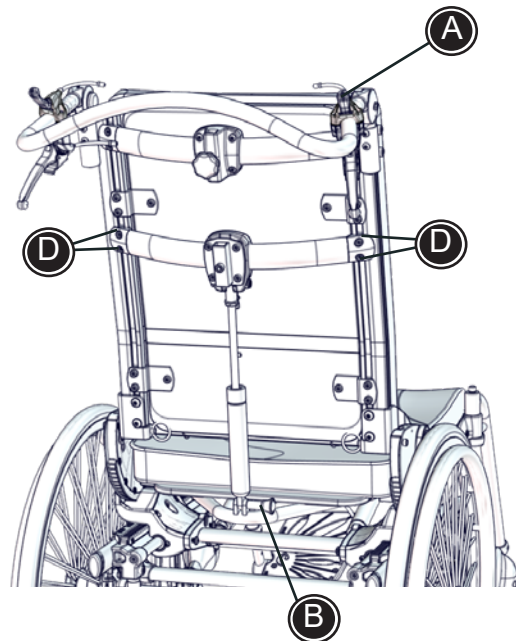

NL ZITDIEPTE VERSTELLEN

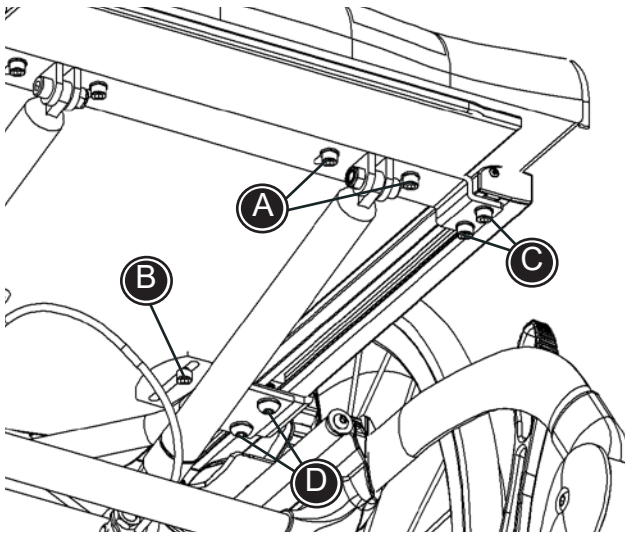

Ontspan de gasveer aan de achterzijde van de Cougar, door de rechter hendel aan de duwbeugel te activeren en plaats de rugleuning in verticale positie.

De zitting is 10 cm in diepte verstelbaar. Volg onderstaande aanwijzingen om de zitdiepte te verstellen:

- 1) Kantel de Cougar naar achteren zodat u toegang heeft tot de houten zittingplaat aan de onderzijde. Verwijder voor een beter zicht de beensteunen.
- 2) Verwijder de inbusbouten (A) en (B) met behulp van de meegeleverde 5mm inbus-sleutel.
- 3) Breng de houten plaat in de gewenste positie. De voorgeboorde bevestigingspunten in de houten plaat hebben een tussenruimte van 5 cm.
- 4) Draai de inbusbouten (A) en (B) in de gewenste positie vast.
- 5) Draai de inbusbouten (C) en (D) aan beide zijden los en beweeg de profielen naar voren of achteren.
- 6) Draai de inbusbouten (C) en (D) vast als de profielen zich in de gewenste positie bevinden.



Tijdens het verstellen van de zitdiepte mag u de hendel voor de zithoekverstelling niet activeren.



Zorg dat de zitprofielen aan beide zijden op dezelfde positie worden afgesteld.


NL HANDREM


De handrem bevindt zich onder aan het frame en kan door zowel gebruiker als begeleider worden bediend.


- * Als u de remhendel naar voren drukt wordt de rem geactiveerd.
- * Als de remhendel naar achteren wordt getrokken wordt de rem gedeactiveerd.



De handrem is aan het frame gemonteerd en kan, afhankelijk van wielmaat en remprestaties, naar voren of achteren worden verplaatst. Hoe dicht het remblokje naar het wiel toe wordt geschoven hoe zwaarder de rem werkt. Hoe verder het remblokje van het wiel af wordt geschoven hoe lichter de rem werkt.

Draai met de meegeleverde 4mm inbussleutel de inbusbouten (A) los als u het remblokje wilt verplaatsen. Draai de inbusbouten vast wanneer de gewenste positie is bereikt.

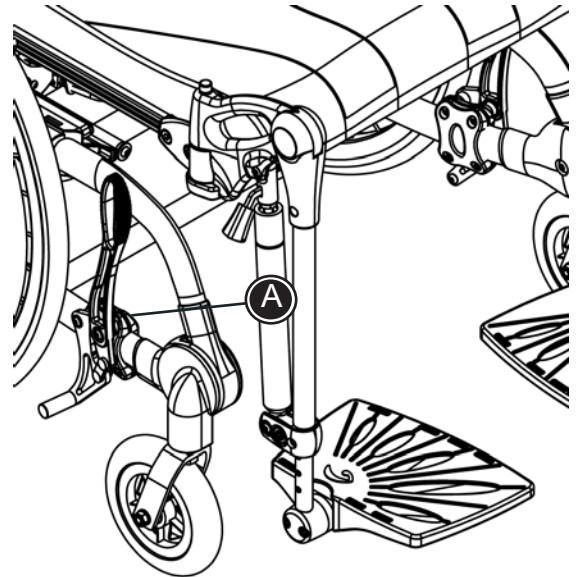

 Voor een goede werking van de rem dient u de banden op spanning te houden en deze regelmatig te controleren. Aanbevolen druk achterbanden: 55 PSI/3,8 bar/380 kPa.

 Zorg voor een afstand van 8-10 mm tussen het remblokje en de achterband.

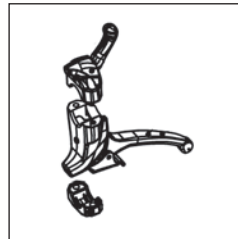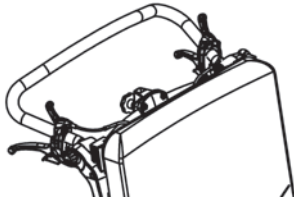

NL TROMMELREM

De hendels voor de trommelrem bevinden zich aan de duwbeugel en worden door de begeleider bediend.

Knijp de hendel in om de rem in werking te stellen. Activeer de rode hendel om de rem te deactiveren.


NL WIELCOMBINATIES

De aanbevolen wielcombinaties voor de Cougar staan in onderstaande tabel.

Als u een andere zithoogte wenst, kijk in deze gebruiksaanwijzing dan onder "Zithoogte verstellen".

Wielcombinaties:

	12½"	20"	22"	24"
6"	✓	✓	✓	✓
8"	✓	-	✓	✓

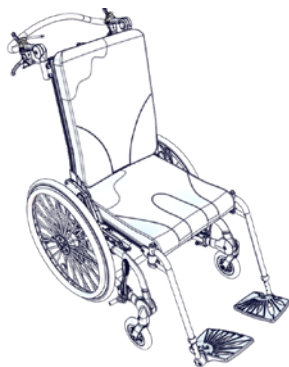

Het is belangrijk dat u ook de hoek van de voorvork verstelt als u van wielgrootte verandert. U verkrijgt de beste rij-eigenschappen als u de voorvorken loodrecht op de grond en beide voorvorken in dezelfde hoek houdt.



Voor het verstellen van de voorvorken draait u de bouten voldoende los. Vervolgens drukt u de voorwielbevestiging naar buiten. Draai voorzichtig de voorvork in de gewenste positie en draai de bouten weer vast. Zorg hierbij dat de vertandingen goed in elkaar vallen.

Zorg ervoor dat de juiste anti-tip steun wordt gebruikt.

	12½"	20"	22"	24"
6"	kort	kort	lang	lang
8"	kort	-	lang	lang

NL AANPASSEN ZWAARTEPUNT

Het zwaartepunt kan bij de Cougar worden aangepast door het verstellen van de zitting en de achterwielen. Volg onderstaande aanwijzingen voor het aanpassen van het zwaartepunt:

1) Verwijder de achterwielen.

Verplaatsen van de zitting:




- 2) Draai de 4 inbusbouten (A) aan beide zijden van het frame los. Kantel de zitunit en verwijder voorzichtig de buitenste afdekplaatjes. Druk hiervoor lichtjes het frame naar buiten.
- 3) Verplaats de zitting naar voren of achteren door lichtjes het frame naar buiten te drukken. Verplaats de zitting naar positie A, B of C. Zorg er voor dat de kunststof fittingen (C) in de gaten van de gewenste positie vast "klikken".
- 4) Plaats de buitenste afdekplaatjes weer terug (druk hiervoor lichtjes het frame naar buiten) en draai de 4 inbusbouten vast.

Verplaatsen van de achterwielen:

- 5) Verwijder de hoogteverstelling (D) aan beide zijden volledig met behulp van steeksleutel no. 13.
- 6) Kantel de complete zitunit naar voren en laat deze op de vloer rusten.
- 7) Demonteer aan beide zijden de asgat-bevestiging (E) met behulp van ringsleutel no. 17.
- 8) Draai de 7 inbusbouten met de meegeleverde inbus-sleutel en de bout met een waterpomptang los en verwijder de buitenste afdekplaat (F). Verwijder de kleine kunststof dopjes uit de gaten aan de binnenzijde van het frame.
- 9) De dwarsverbinding kan nu naar de gewenste positie A, B of C worden verplaatst. Druk hiervoor lichtjes het frame naar buiten en verplaats de dwarsverbinding naar voren of achteren. Zorg er voor dat beide zijden van de dwarsverbinding in de gaten van de gewenste positie vast "klikken".
- 10) Plaats de buitenste afdekplaat (F) terug en draai de 7 inbusbouten + bout weer vast. Druk de kunststof dopjes terug in de gaten. Monteer de asgat-bevestiging. Kantel de complete zitunit weer terug naar achteren. Monteer de hoogteverstelling en breng als laatste de achterwielen aan.

De Cougar is klaar voor gebruik.

Zorg er voor dat ook de positie van de handremmen wordt aangepast. Het verstellen van de positie (A,B en C) gaat met stappen van 5 cm.

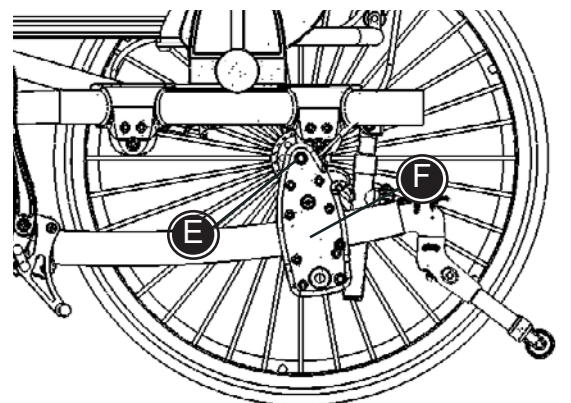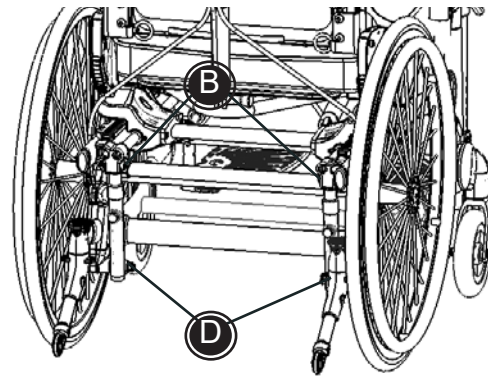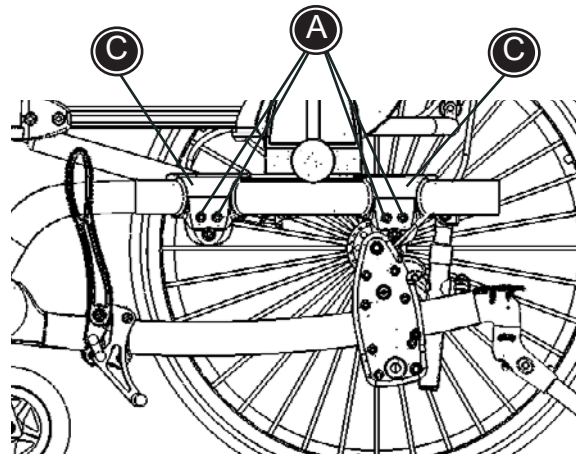


! Wanneer de 24" achterwielen in de voorste positie (A) worden geplaatst, kunnen alleen trommelremmen gebruikt worden.

! Geadviseerd wordt om het aanpassen van het zwaartepunt te laten uitvoeren door een gekwalificeerd technicus.

! Het is belangrijk dat u alle (inbus-)bouten stevig aandraait en ze regelmatig controleert, vooral wanneer het zwaartepunt is aangepast.

! Als het zwaartepunt meer naar de achteras komt te liggen (= zitunit meer naar achteren of achterwielen meer naar voren), dan kan dit de kans op kiepen vergroten. Geadviseerd wordt om dan gebruik te maken van de anti-tipsteunen.

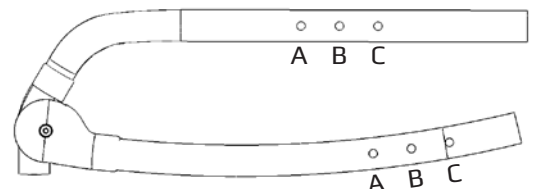



NL RUGSTEUNGEDEELTE

De Cougar kan worden geleverd met ofwel een houten rugondersteuningsplaat, ofwel een rugsteun met spanbanden, ofwel voorbereid voor speciale rugsteunmontage.

Rugsteun met houten plaat:
De houten plaat is bevestigd in de profielen van het ruggedeelte.

Rugsteun met spanbanden:
De rugsteun met spanbanden is bevestigd in de profielen van het ruggedeelte. De spanbanden kunnen versteld worden, bijvoorbeeld voor meer of minder lende-ondersteuning. De spanbanden zijn voorzien van klittenband (A) om het verstellen te vereenvoudigen.

Speciale rugsteunmontage:
De Cougar kan worden voorbereid voor montage van speciale rugondersteuning van andere fabrikanten. De speciale rugsteun en bijbehorende fittingen kunnen gemonteerd worden op de ronde buizen in de rugbevestiging. Volg hiervoor verder de aanwijzingen die meegeleverd worden bij de speciale rugbevestiging.

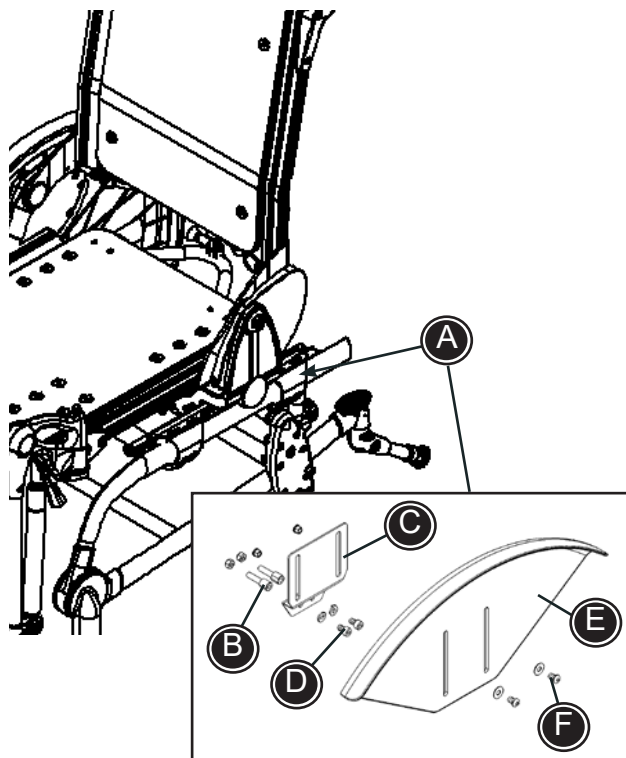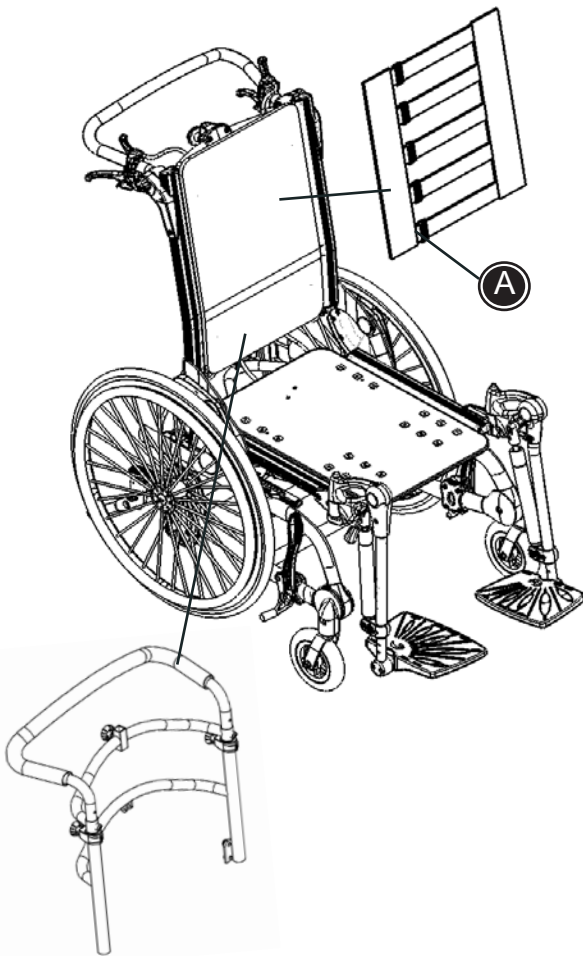

NL SPATBORDEN

Op de Cougar kunnen spatborden worden gemonteerd. Volg onderstaande aanwijzingen om de spatborden te monteren:

- 1) Monteer de fittingen voor de spatborden op de achterzijde van het frame (A). Verwijder de 2 bouten en bevestig de meegeleverde speciale bouten (B).
- 2) Plaats de fitting (C) en zet deze vast met de meegeleverde veerringen en inbusbouten (D). Gebruik voor het vastdraaien de 5 mm inbus-sleutel.
- 3) Plaats tot slot de spatborden (E) in de fittingen. Trek de bouten, plaatjes en moeren (F) zo ver mogelijk omhoog in de rails en zet vast.

! De zitting en de wielen kunnen bij de Cougar verplaats worden. Als de zitting in de meest voorste stand staat ingesteld en de wielen in de meest achterste stand staan ingesteld (of net andersom). Dan is de montage van de spatschermen niet mogelijk.

NL ARMSTEUNEN, KLEDING- BESCHERMERS EN ARMSTEUN- VERLENGERS

Draai de inbusbouten los en verwijder het afwerkdopje van het zittingprofiel. Monteer de bevestiging voor de armsteun in het zittingprofiel (A) en zet vast met de meegeleverde 5mm inbussleutel.

De bevestigingen kunnen naar voren of achteren worden verplaatst, afhankelijk van de positie waar de armsteunen moeten komen.



Breng de armsteun aan in de bevestiging. Druk de knop (B) in en schuif de armsteun omhoog of omlaag naar de gewenste hoogte. Laat de knop los.


Kledingbeschermers: Bij aflevering is de kledingbeschermer bevestigd aan de armsteunbuis. De kledingbeschermer kan naar boven of beneden worden versteld, afhankelijk van de plaats waar de kledingbeschermer nodig is. Verwijder de inbusbout (C) met behulp van de meegeleverde 5mm inbussleutel. Schuif de kledingbeschermer naar de gewenste positie en draai de inbusbout weer vast.

De kledingbeschermer kan ook zonder armsteun worden bevestigd. Verwijder de kledingbeschermer en plaats hem in de opening in de armsteun-bevestiging. In deze stand is de kledingbeschermer niet in hoogte verstelbaar.

Armsteunverlengers:

De armsteun kan verlengd worden. Monteer de verlenging in het uiteinde van de armsteun (D) en zet het verlengstuk vast met de stelknoppen.

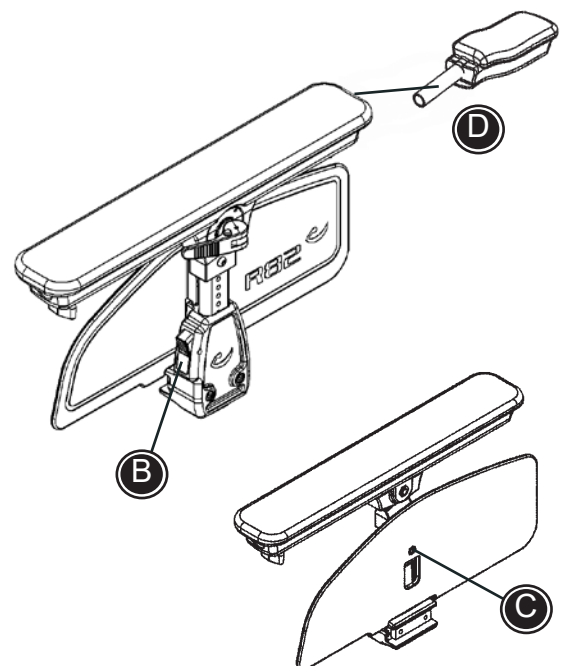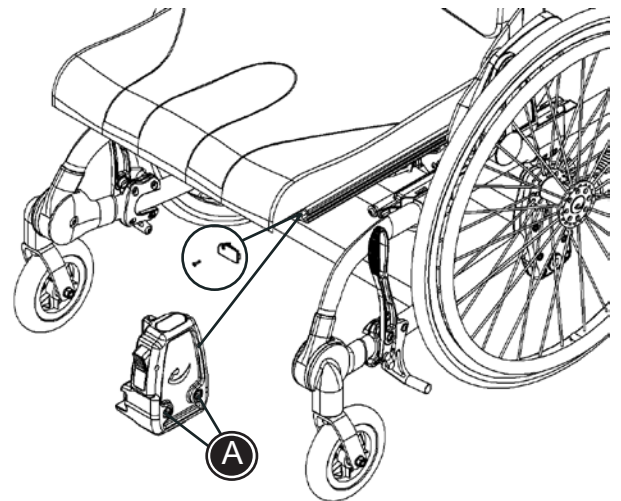


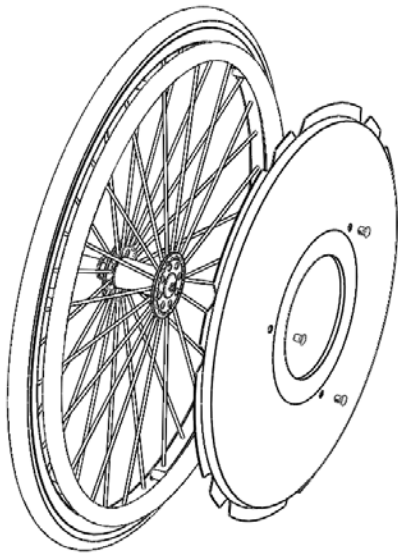

NL SPAAK- BESCHERMERS



Volg onderstaande aanwijzingen om de spaakbeschermers aan te brengen:

- * Plaats de spaakbeschermers aan de buitenzijde van de achterwielen.
- * Bevestig de meegeleverde clips in de openingen van de spaakbeschermers en klik ze vast op de spaken.

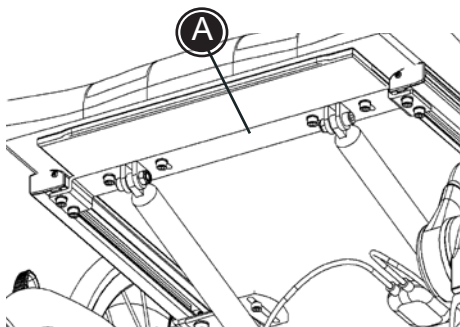

NL VOETSTEUN MONTEREN

De Cougar kan worden uitgerust met verschillende voetsteunen en voetsteunstangen. Volg de onderstaande instructies voor een correcte bevestiging:

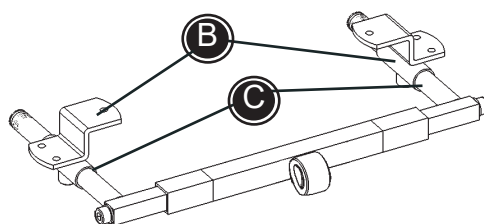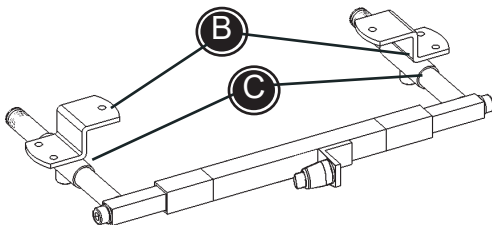


- * Demonteer de bevestigingen (A) onder de zitting en monteer de nieuwe bevestigingen (B).
- * Plaats de voetensteunbevestiging in de buizen van de bevestigingen (B).
- * Monteer de gewenste voetsteunstang en voetsteunen/voetplaat. De Cougar is nu klaar voor gebruik.



NL BEENSTEUNEN

De beensteunen zijn eenvoudig in hoogte en hoek te verstellen.

- * Hoogteverstelling. Draai de schroef (C) los.
- * Hoekverstelling. Draai de schroef (E) los.
- * Als u de diepte wilt verstellen, verwijdt u de schroef (E) uit de montageplaat. Vervolgens stelt u de nieuwe positie in, brengt u de schroef weer aan en draait u de schroef stevig vast.

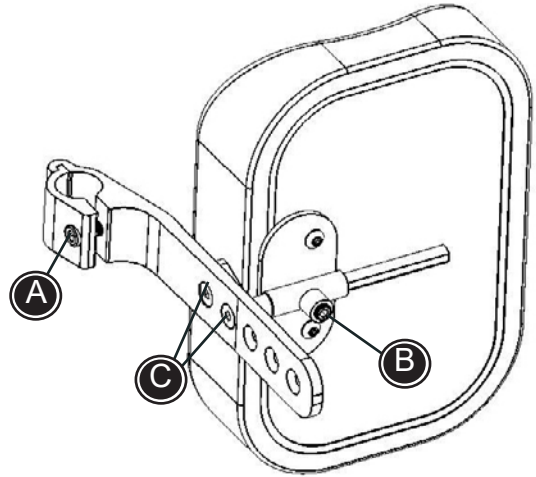


Controleer of alle schroeven stevig aangedraaid zijn.

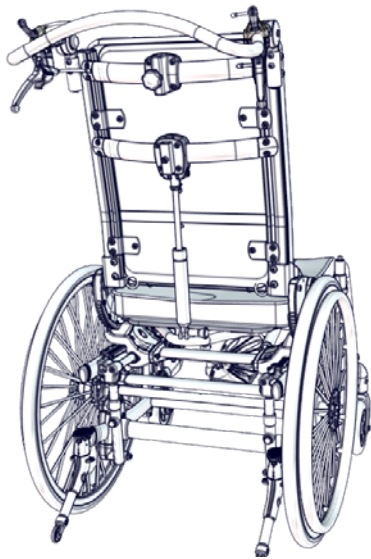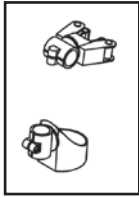

NL STOKHOUDER

Op de Cougar kan een stokhouder worden gemonteerd.


Bevestig de houder met klem aan de bovenzijde van het frame en de houder met bak aan de onderzijde van het frame.

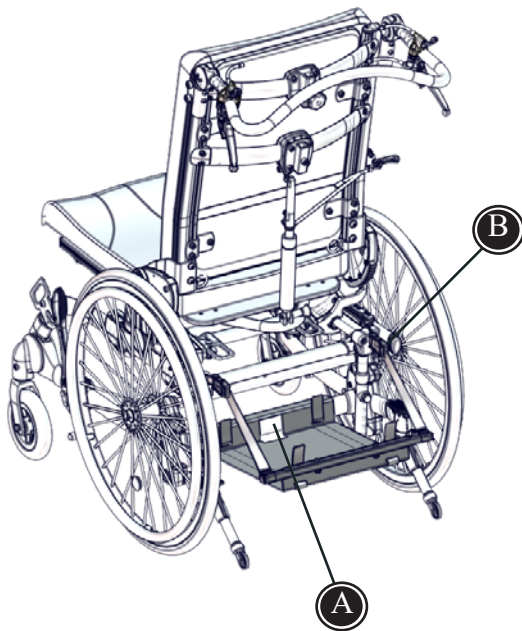

NL BLAD VOOR ZUURSTOFFLES

- * Bevestig het blad aan de onderste stang van het frame (A).
- * Boor een gat aan elke zijde van het frame en monteer de riemen met behulp van de meegeleverde bouten (B).
- * Verstel de riemen zodanig dat het blad horizontaal staat.

i U kunt uw lokale dealer vragen om hulp bij het monteren van dit blad.

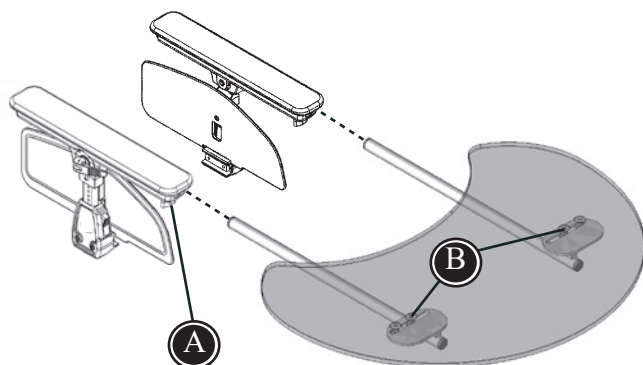

NL WERKBLAD

Steek de beide buizen van het werkblad in de openingen aan de voorzijde van de armsteunen. Zet het werkblad vast met de stelknoppen (A).


Gebruik de meegeleverde 5mm inbussleutel om de breedte van het beslag van het werkblad (B) in te stellen.

NL ABDUCTIEKLOS

De Cougar kan worden uitgerust met een abductieklos.

Monteer de bevestiging in de voorgeboorde bevestigingspunten onder de zitting. Gebruik daarbij de meegeleverde inbusbouten en de 4mm inbusleutel.

Plaats de abductieklos in de bevestiging en zet vast met de stelknop (A).

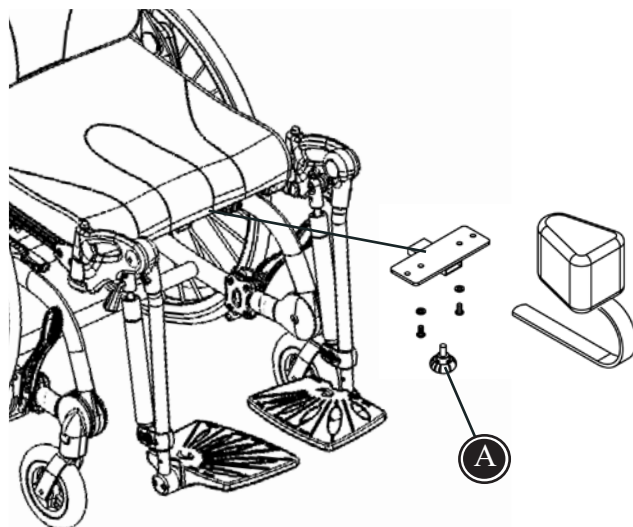


NL BEKKENSTEUNEN


Draai de inbusbout los en verwijder het afwerkdopje van het zittingprofiel. Bevestig de bekkensteun en zet deze vast met de meegeleverde 3mm inbusleutel (A).

De bekkensteunen kunnen op meerdere manieren versteld worden. Draai de inbusbouten (B) en (C) los. Verstel de bekkensteun en zet vast met de meegeleverde 5mm inbusleutel.

De bekkensteunen zijn ook in diepte verstelbaar. Draai met behulp van de meegeleverde 3 mm inbusleutel de inbusbouten (D) in de bevestiging los. Bepaal de gewenste positie en draai de inbusbouten weer vast.

Indien er gekozen wordt voor bekkensteunen vervallen de kledinbeschermers.

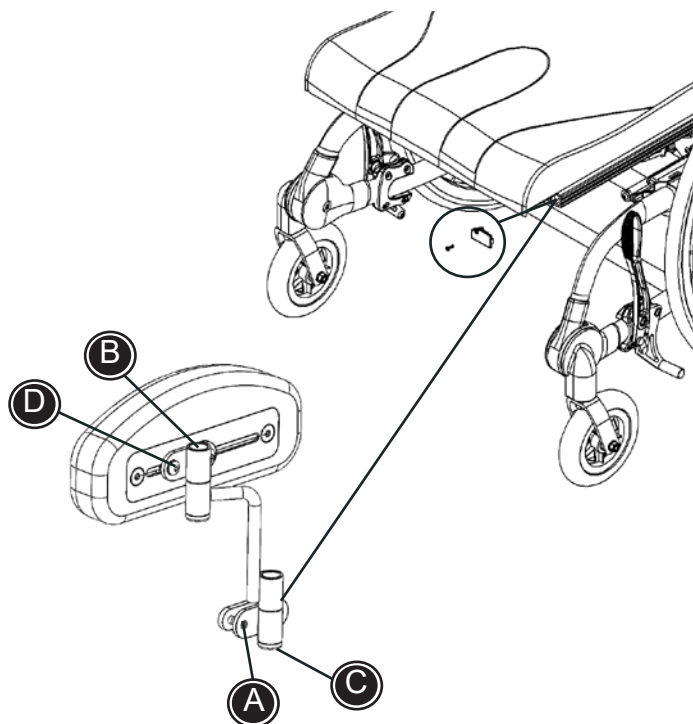

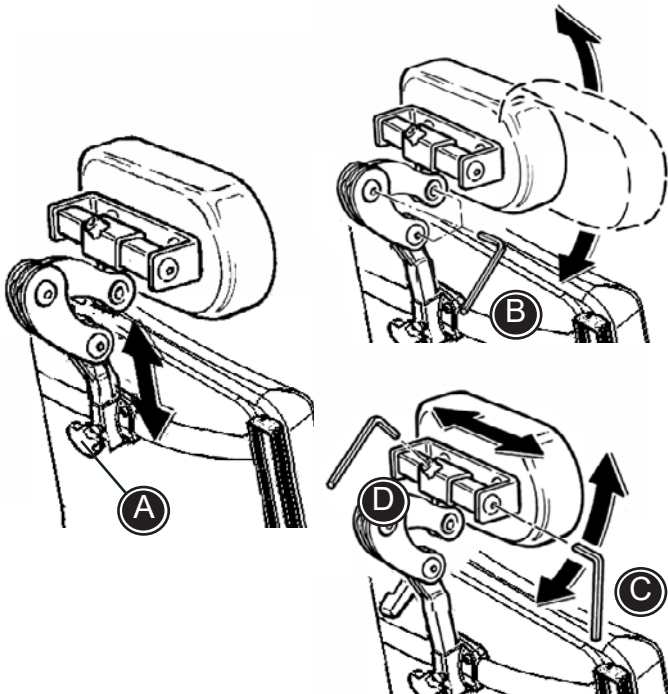


NL HOOFDSTEUN

Plaats de hoofdsteun in de bevestiging in het ruggedeelte van de Cougar en zet de hoofdsteun vast met de stelknop (A).

Hoek- en zijdelingse verstelling van de hoofdsteun (B).

Het beste is om alle instelmogelijkheden los te draaien en de juiste positie te kiezen. Zet vervolgens alle bouten weer vast.

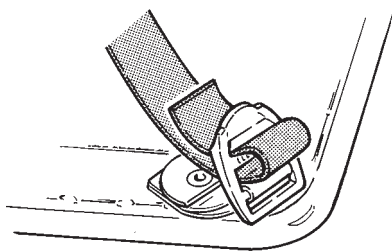

NL FIXATIEVESTEN EN GORDELS

Standaard is de Cougar uitgerust met bevestigingen (in de vorm van gespen) voor bijv. een heupgordel.

Er kunnen nog meer fixatievesten en -gordels op de Cougar worden bevestigd. Monteer hiervoor de benodigde fix-locks volgens bovenstaande beschrijving.




Zorg er voor dat alle fixaties en verstellingen goed vastzitten en controleer deze regelmatig.


NL FIX-LOCKS

Fix-locks kunnen worden gemonteerd in de profielen van zowel zitting als ruggedeelte (A). De fix-lock met de klem moertjes wordt in het profiel geplaatst. Draai de klem moertjes in horizontale richting. Trek de fix-lock naar buiten terwijl u hem vastzet met de meegeleverde 3mm inbussleutel.

Aan de bovenste buis van het ruggedeelte kunnen twee fix-locks met riemen worden aangebracht (B). Bevestig de riem rond de buis met de metalen gesp aan de binnenzijde. Bevestig de riem in de metalen gesp en zet deze vervolgens stevig vast.

Fix-locks kunnen ook aan de achterkant van de zitting worden gemonteerd (C). Monteer de bevestiging met de fix-locks in de vorgeboorde bevestigingspunten aan de bovenzijde van de houten plaat. Gebruik de meegeleverde bouten om de bevestiging vast te zetten.

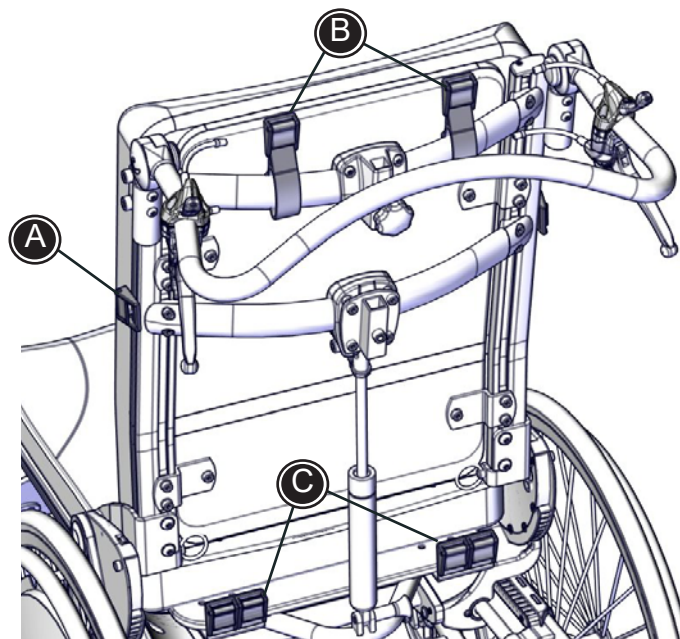

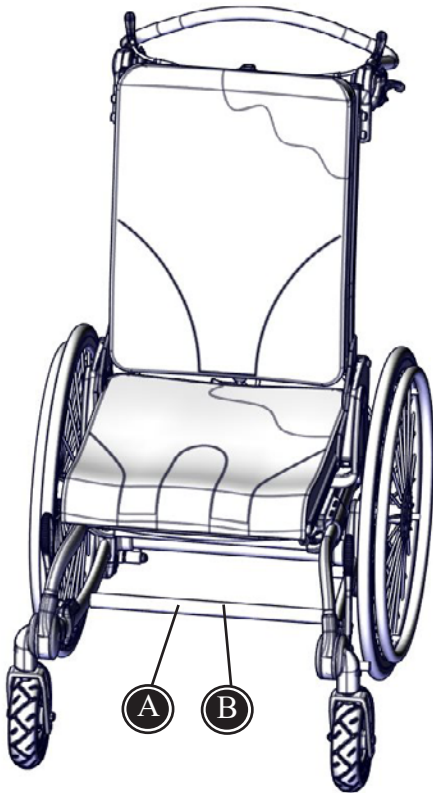


NL PRODUCT-IDENTIFICATIE STICKERS



A) Serienummer

Deze sticker bevindt zich op de voorste doorlopende buis onder de zitting.

B) Fabrikant

Deze sticker bevindt zich op de voorste doorlopende buis onder de zitting.

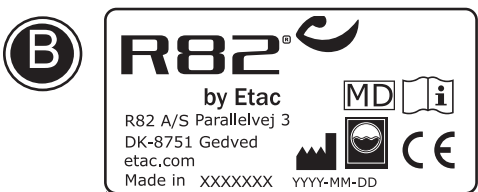

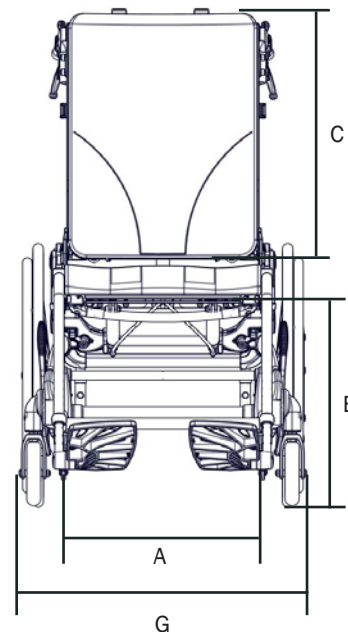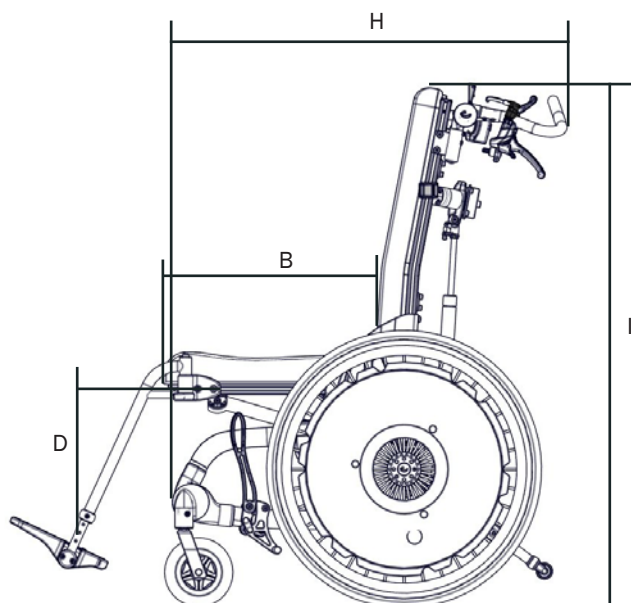

NL MAATGEGEVENS

	Maat 1 mm (inch)	Maat 2 mm (inch)	Maat 3 mm (inch)	Maat 4 mm (inch)
Zitbreedte (A)	350 (13 ³ / ₄ "	400 (15 ¹ / ₂ "	450 (17 ¹ / ₂ "	500 (19 ¹ / ₂ "
Zitdiepte (met anatomisch rugkussen) (B)	370-470 (14 ¹ / ₂ -18 ¹ / ₄ "	370-470 (14 ¹ / ₂ -18 ¹ / ₄ "	430-530 (16 ³ / ₄ -20 ³ / ₄ "	490-590 (19-23")
Rugleuninghoogte (C)	450 (17 ¹ / ₂ "	500 (19 ¹ / ₂ "	600 (23 ¹ / ₂ "	600 (23 ¹ / ₂ "
Onderbeenlengte (D)	280-460 (11-18")	280-460 (11-18")	280-460 (11-18")	280-460 (11-18")
Onderbeenlengte, solide beensteunen (D)	240-420 (9 ¹ / ₄ -16 ¹ / ₄ "	240-420 (9 ¹ / ₄ -16 ¹ / ₄ "	240-420 (9 ¹ / ₄ -16 ¹ / ₄ "	240-420 (9 ¹ / ₄ -16 ¹ / ₄ "
Zithoogte, vanaf de vloer (E)	460-530 (18-20 ³ / ₄ "	460-530 (18-20 ³ / ₄ "	460-530 (18-20 ³ / ₄ "	460-530 (18-20 ³ / ₄ "
Breedte met 22" wielen (G)	570 (22 ¹ / ₄ "	620 (24 ¹ / ₄ "	670 (26 ¹ / ₄ "	720 (28")
Lengte, zonder voetsteunen (H)	780 (30 ¹ / ₂ "	780 (30 ¹ / ₂ "	830 (32 ¹ / ₄ "	830 (32 ¹ / ₄ "
Hoogte, bovenkant rugleuning (I)	960 (37 ¹ / ₂ "	990 (38 ¹ / ₂ "	1080 (42")	1100 (43")
Gevouwen zonder beensteunen:				
Hoogte, bovenkant rugleuning	660 (25 ³ / ₄ "	660 (25 ³ / ₄ "	660 (25 ³ / ₄ "	660 (25 ³ / ₄ "
Lengte	780 (30 ¹ / ₂ "	780 (30 ¹ / ₂ "	830 (32 ¹ / ₄ "	830 (32 ¹ / ₄ "
Draaicirkel	880 (34 ¹ / ₄ "	940 (36 ³ / ₄ "	970 (37 ³ / ₄ "	1000 (39")
Massa hulpmiddel, met spanbandenrugsysteem en z/ beensteunen	25 kg (55 lb)	26 kg (57 lb)	27 kg (59,5 lb)	28 kg (61,5 lb)
Max. massa gebruiker	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)	120 kg (264 lb)
Max. massa gebruiker bij transport	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)
Max. nominale belasting	102 kg (224.8 lb)	103 kg (227 lb)	129 kg (284.3 lb)	150 kg (330.9 lb)
Hoekverstellingen:				
Kantelverstelling	37° (45°)	37° (45°)	37° (45°)	37° (45°)
Rugleuningverstelling	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°	0° - 35°
Beensteunen	90°	90°	90°	90°

De Cougar is opgemeten met de volgende wielcombinatie, geplaatst in de standaard wielpositie: 22" achterwielen en 6" voorwielen. De Cougar is opgemeten met comfort kussens en met de zitting in horizontale en het ruggedeelte in vertical positie. Omdat we diverse types beensteunen en kussens leveren, is het gewicht vermeld zonder beensteunen en kussens. Een andere configuratie dan de bovengenoemde standaarduitvoering kan andere maatgegevens opleveren.

Productveiligheid

Door de verschillende varianten en instellingen kan de rolstoel groter worden dan de aanbevolen afmetingen.

Door de rolstoel niet groter te maken dan de aanbevolen totale breedte en totale lengte kan de gebruiker gegarandeerd probleemloos door nooduitgangen en vluchtroutes gaan. (Zie tabel 1)

Tabel 1

Aanbevolen afmetingen	Klaar voor gebruik (mm)
Totale lengte – maximum	1200
Totale breedte – maximum	700
Totale hoogte – maximum	1200
Draaidiameter – maximum	1000
Draaibreedte – maximum	1300
Vrije hoogte boven de grond - minimum	30

Productveiligheid

Door de verschillende varianten en instellingen kan het zijn dat de rolstoel te groot is voor vervoer met de trein. Er kunnen maatregelen worden genomen om na te gaan of de betreffende rolstoel binnen de limieten valt. (Zie tabel 2)

Tabel 2

Rolstoelen die met de trein kunnen worden vervoerd - limieten	
Totale lengte – maximum	1200 mm + 50 mm voor voeten
Totale breedte – maximum	700 mm + 50 mm aan weerszijden voor handen
Totale hoogte – maximum	1375 mm (inclusief 95e percentiel voor een mannelijke gebruiker)
Draaidiameter – maximum	1500 mm
Kleinste wielen	Geschikt voor een opening van 75 mm horizontaal en 50 mm verticaal
Gewicht – maximum	200 kg voor handbewogen rolstoel en inzittende (inclusief bagage)
Obstakelhoogte die kan worden overwonnen - maximum	50 mm
Vrije hoogte boven de grond - minimum	60 mm onder de voetsteun met een hellingshoek van 10° aan de bovenkant om vooruit te gaan
Helling waarop de rolstoel veilig en stabiel blijft - maximum	6° dynamische stabiliteit in alle richtingen 9° statische stabiliteit in alle richtingen, ook met geactiveerde rem

NL TECHNISCHE GEGEVENS

Frame:	Poedergecoat Aluminium buizen
PA6 kunststof delen:	Glasvezelversterkt nylon
Kussens:	Vlamvertragend koudschuim.
Hoezen:	Vlamvertragende Trevira CS

NL FABRIKANT

R82 A/S
Parallevej 3
DK- 8751 Gedved