



HMI-nr 29994 fra hmi-basen.dk



Cross

Kørestolen med mange muligheder

 **etac**®

Cross

Kørestolen med mange muligheder

Komfort ryg og sæde som tilbehør

Mange indstillingsmuligheder

Robust

God kørekomfort

Crashtestet

11 drivhjulpositioner

Stort tilbehørsprogram



Cross

Cross er en sjælden kombination af komfort og køreegenskaber. Stabiliteten og udformningen er de grundlæggende elementer. Alle funktioner er naturlige at arbejde med, lette at vedligeholde og enkle at forstå. Cross har mange indstillingsmuligheder og et stort tilbehørsprogram. Dermed giver Cross god mulighed for at imødekomme individuelle behov, hvad angår siddestilling og komfort. Cross er testet i henhold til DS/EN 12183, ISO-7176 og ISO-10542.

Cross som standard

Stel	Aluminium og stålør, sammenklappeligt
Skubbehåndt.	Højderegulerbare, aftagelige
Ryg	Trinløs justerbar højde og vinkel, faconen reguleres med 5 velcrobånd, velourovertræk
Sæde	Justerbar højde og vinkel, regulerbar dybde
Sædepude	Anatomisk formet koldskum, velourbetræk
Armlæn	Aftagelige og højdejusterbare, L 26 cm (kan ombyttes til L 36 cm)
Hjul, lav	Drivhjul: 22" med Quick Release, højtryk Forhjul: 125 mm x 30 mm, massive
Hjul, høj	Drivhjul: 24" med Quick Release, højtryk Forhjul: 165 mm x 30 mm, massive
Drivringe	Rustfri stål
Bremser	Vinklede knæledsbremser
Benstøtter	Vid vinkel, svingbare og aftagelige
Fodplader	Delte og opklappelige, regulerbar højde, trinløs justerbar vinkel
Tipsikringer	Opklappelige
Forgafler	Lav: Drejelige 360°, korte Høj: Drejelige 360°, mellem
Farve	Koksgrå grafit
Garanti	Stel: 5 år v/fejl i materialer/fremstilling Øvrigt: 2 år v/fejl i materialer/fremstilling



Bestilling af Cross

Cross findes i en kort og en lang, samt en høj og en lav model. Kort model anbefales ved SD 47,0 cm og derunder. Ved skiftende brugere laves en høj model nemt om til en lav model ved at udskifte hjul og forgafler. Se artikelnumrene på næste side.

Bestilling af Cross

Kort model, lav	Sædedybde*	Sædehøjde, fortil**	Sædehøjde, bagtil**	HMI-nr.	Art. nr.
SB 35,0 cm	37,0 - 47,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	29994	13122301
SB 37,5 cm	37,0 - 47,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	29996	13122303
SB 40,0 cm	37,0 - 47,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	29998	13122305
SB 42,5 cm	37,0 - 47,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30000	13122307
SB 45,0 cm	37,0 - 47,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30002	13122309
SB 47,5 cm	37,0 - 47,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30004	13122313
SB 50,0 cm	37,0 - 47,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30006	13122311

Kort model, høj

SB 35,0 cm	37,0 - 47,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	29993	13120301
SB 37,5 cm	37,0 - 47,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	29995	13120303
SB 40,0 cm	37,0 - 47,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	29997	13120305
SB 42,5 cm	37,0 - 47,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	29999	13120307
SB 45,0 cm	37,0 - 47,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30001	13120309
SB 47,5 cm	37,0 - 47,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30003	13120313
SB 50,0 cm	37,0 - 47,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30005	13120311

Lang model, lav

SB 35,0 cm	43,0 - 53,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30008	13122302
SB 37,5 cm	43,0 - 53,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30010	13122304
SB 40,0 cm	43,0 - 53,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30012	13122306
SB 42,5 cm	43,0 - 53,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30014	13122308
SB 45,0 cm	43,0 - 53,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30016	13122310
SB 47,5 cm	43,0 - 53,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30018	13122314
SB 50,0 cm	43,0 - 53,0 cm	38,0 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	30020	13122312

Lang model, høj



SB 35,0 cm	43,0 - 53,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30007	13120302
SB 37,5 cm	43,0 - 53,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30009	13120304
SB 40,0 cm	43,0 - 53,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30011	13120306
SB 42,5 cm	43,0 - 53,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30013	13120308
SB 45,0 cm	43,0 - 53,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30015	13120310
SB 47,5 cm	43,0 - 53,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30017	13120314
SB 50,0 cm	43,0 - 53,0 cm	42,5 - 52,0 cm	41,0 - 50,0 cm	30019	13120312

* Kort model anbefales ved SD 47,0 cm og derunder

** Målt uden sædepude. Sædepuden er anatomisk formet, 7,5 cm høj på midten fortil og 3,5 cm høj bagtil

Mål og vægt, Cross kort model, lav, standardudførelse

SB:	Sædebredde	35,0 cm	37,5 cm	40,0 cm	42,5 cm
SD:	Sædedybde	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm
SH:	Sædehøjde, fortil uden pude*	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm
	Sædehøjde, bagtil uden pude*	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm
B:	Bredde	57,0 cm	59,5 cm	62,0 cm	64,5 cm
	Transportbredde	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm
RH:	Ryghøjde	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm
UBL:	Underbenslængde	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm
	Vægt med / uden aftagelige dele**	18,0 / 10,1 kg	18,2 / 10,2 kg	18,3 / 10,3 kg	18,5 / 10,4 kg
	Maks. brugervægt	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
	Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°
	Maks. kipning af sædeenhed forover / bagover (std. 3° bagover)	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°
	Cambervinkel	2°	2°	2°	2°

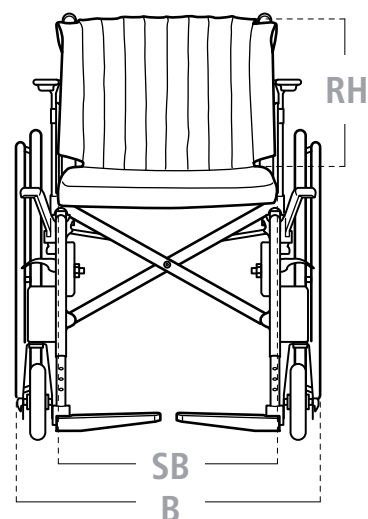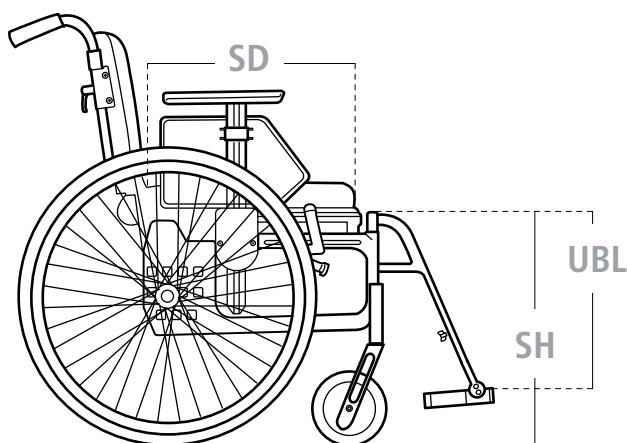

SB:	Sædebredde	45,0 cm	47,5 cm	50,0 cm
SD:	Sædedybde	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm
SH:	Sædehøjde, fortil uden pude*	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm
	Sædehøjde, bagtil uden pude*	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm
B:	Bredde	67,0 cm	69,5 cm	72,0 cm
	Transportbredde	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm
RH:	Ryghøjde	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm
UBL:	Underbenslængde	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm
	Vægt med / uden aftagelige dele**	18,6 / 10,5 kg	18,8 / 10,6 kg	18,9 / 10,7 kg
	Maks. brugervægt	125 kg	125 kg	125 kg
	Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°
	Maks. kipning af sædeenhed forover / bagover (std. 3° bagover)	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°
	Cambervinkel	2°	2°	2°



* Sædepuden er anatomisk formet, 7,5 cm høj på midten fortil og 3,5 cm høj bagtil

** Drivhjul, benstøtter, armlæn og sædepude



Mål og vægt, Cross kort model, høj, standardudførelse

SB: Sædebredde	35,0 cm	37,5 cm	40,0 cm	42,5 cm
SD: Sædedybde	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm
SH: Sædehøjde, fortil uden pude*	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm
Sædehøjde, bagtil uden pude*	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm
B: Bredde	57,0 cm	59,5 cm	62,0 cm	64,5 cm
Transportbredde	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm
RH: Ryghøjde	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm
UBL: Underbenslængde	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm
Vægt med / uden aftagelige dele**	18,5 / 10,4 kg	18,7 / 10,5 kg	18,8 / 10,6 kg	19,0 / 10,7 kg
Maks. brugervægt	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°
Maks. kipning af sædeenhed forover / bagover (std. 3° bagover)	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°
Cambervinkel	2°	2°	2°	2°

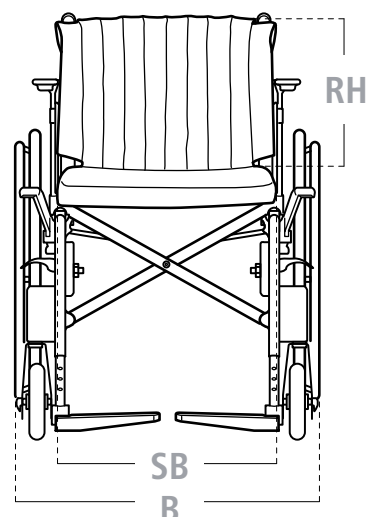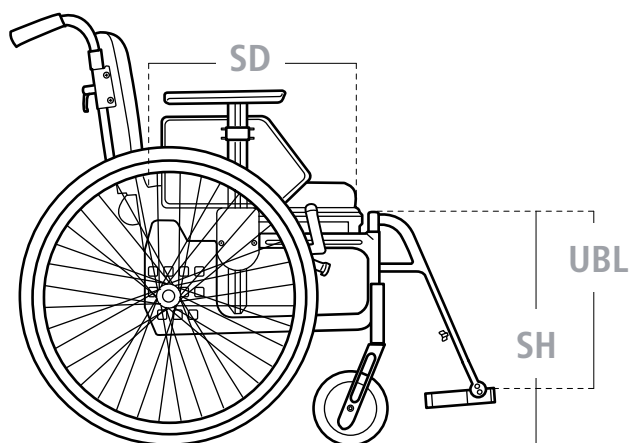

SB: Sædebredde	45,0 cm	47,5 cm	50,0 cm
SD: Sædedybde	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm	37,0 - 47,0 cm
SH: Sædehøjde, fortil uden pude*	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm
Sædehøjde, bagtil uden pude*	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm
B: Bredde	67,0 cm	69,5 cm	72,0 cm
Transportbredde	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm
RH: Ryghøjde	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm
UBL: Underbenslængde	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm
Vægt med / uden aftagelige dele**	19,1 / 10,8 kg	19,3 / 10,9 kg	19,4 / 11,0 kg
Maks. brugervægt	125 kg	125 kg	125 kg
Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°
Maks. kipning af sædeenhed forover / bagover (std. 3° bagover)	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°
Cambervinkel	2°	2°	2°



* Sædepuden er anatomisk formet, 7,5 cm høj på midten fortil og 3,5 cm høj bagtil

** Drivhjul, benstøtter, armlæn og sædepude



Mål og vægt, Cross lang model, lav, standardudførelse

SB: Sædebredde	35,0 cm	37,5 cm	40,0 cm	42,5 cm
SD: Sædedybde	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm
SH: Sædehøjde, fortil uden pude*	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm
Sædehøjde, bagtil uden pude*	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm
B: Bredde	57,0 cm	59,5 cm	62,0 cm	64,5 cm
Transportbredde	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm
RH: Ryghøjde	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm
UBL: Underbenslængde	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm
Vægt med / uden aftagelige dele**	18,4 / 10,5 kg	18,6 / 10,6 kg	18,7 / 10,7 kg	18,9 / 10,8 kg
Maks. brugervægt	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°
Maks. kipning af sædeenhed forover / bagover (std. 3° bagover)	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°
Cambervinkel	2°	2°	2°	2°

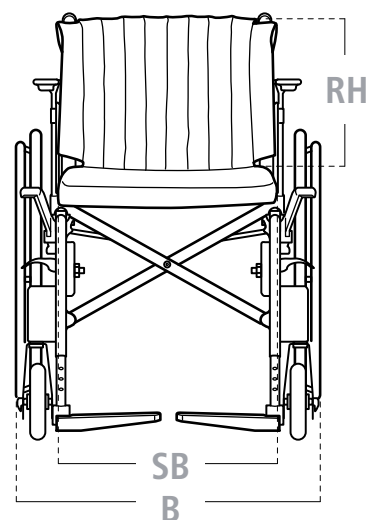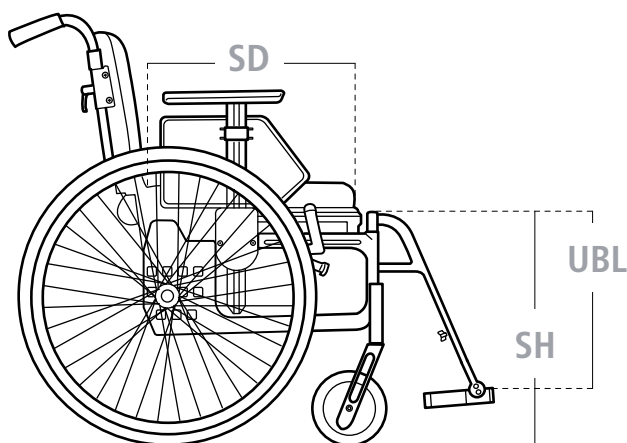

SB: Sædebredde	45,0 cm	47,5 cm	50,0 cm
SD: Sædedybde	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm
SH: Sædehøjde, fortil uden pude*	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm	38,0 - 47,5 cm
Sædehøjde, bagtil uden pude*	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm	38,5 - 47,5 cm
B: Bredde	67,0 cm	69,5 cm	72,0 cm
Transportbredde	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm
RH: Ryghøjde	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm
UBL: Underbenslængde	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm
Vægt med / uden aftagelige dele**	19,0 / 10,9 kg	19,2 / 11,0 kg	19,3 / 11,1 kg
Maks. brugervægt	125 kg	125 kg	125 kg
Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°
Maks. kipning af sædeenhed forover / bagover (std. 3° bagover)	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°
Cambervinkel	2°	2°	2°



* Sædepuden er anatomisk formet, 7,5 cm høj på midten fortil og 3,5 cm høj bagtil

** Drivhjul, benstøtter, armlæn og sædepude



Mål og vægt, Cross lang model, høj, standardudførelse

SB: Sædebredde	35,0 cm	37,5 cm	40,0 cm	42,5 cm
SD: Sædedybde	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm
SH: Sædehøjde, fortil uden pude*	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm
Sædehøjde, bagtil uden pude*	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm
B: Bredde	57,0 cm	59,5 cm	62,0 cm	64,5 cm
Transportbredde	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm
RH: Ryghøjde	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm
UBL: Underbenslængde	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm	38,0 - 56,0 cm
Vægt med / uden aftagelige dele**	18,9 / 10,8 kg	19,1 / 10,9 kg	19,2 / 11,0 kg	19,4 / 11,1 kg
Maks. brugervægt	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°
Maks. kipning af sædeenhed forover / bagover (std. 3° bagover)	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°
Cambervinkel	2°	2°	2°	2°

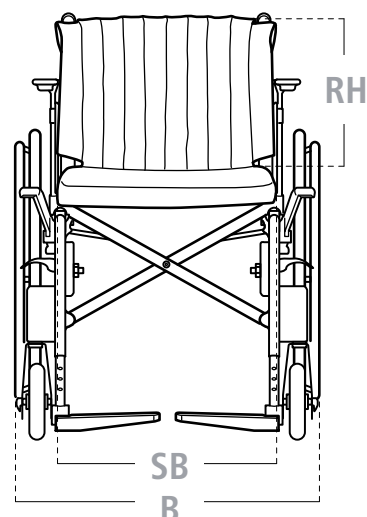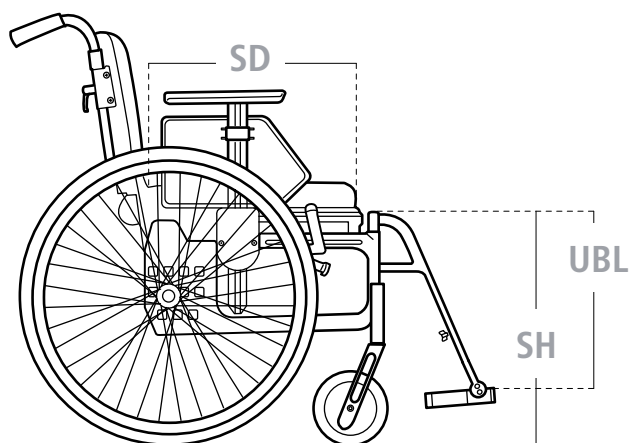

SB: Sædebredde	45,0 cm	47,5 cm	50,0 cm
SD: Sædedybde	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm	43,0 - 53,0 cm
SH: Sædehøjde, forrest uden pude*	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm	42,5 - 52,0 cm
Sædehøjde, bagtil uden pude*	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm	41,0 - 50,0 cm
B: Bredde	67,0 cm	69,5 cm	72,0 cm
Transportbredde	22,0 cm	22,0 cm	22,0 cm
RH: Ryghøjde	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm	30,0 - 45,0 cm
UBL: Underbenslængde	38 - 56 cm	38 - 56 cm	38 - 56 cm
Vægt med / uden aftagelige dele**	19,5 / 11,2 kg	19,7 / 11,3 kg	19,8 / 11,4 kg
Maks. brugervægt	125 kg	125 kg	125 kg
Maks. vinkling af ryg forover / bagover	6° / 15°	6° / 15°	6° / 15°
Maks. kipning af sædeenhed forover / bagover (std. 3° bagover)	7° / 9°	7° / 9°	7° / 9°
Cambervinkel	2°	2°	2°

* Sædepuden er anatomisk formet, 7,5 cm høj på midten fortil og 3,5 cm høj bagtil

** Drivhjul, benstøtter, armlæn og sædepude



Detaljer, Cross



Cross kan bestilles med ekstra høj ryg i sædebredderne 40,0 - 50,0 cm. Ryggen kan højdejusteres fra 38 - 55 cm.



Cross indstillet som aktiv stol. Monteret med sidebeskyttere, egerbeskyttere og hel fodplade.



Cross monteret med nakkestøtte, høj komfort ryg, komfort sæde, lange armlæn med armlænsputer og eleverbare benstøtter med polstring på lægpladerne. Forsat er Cross letkørende og vejer væsentlig mindre end en komfortstol.

Tilbehør og reservedele, Cross



Nakkestøtte
(Monteres med beslag på skubbebøjle eller høj komfort ryg)

Nakkestøtte	24462-60
Beslag til montering på kørebøjle	25795
Beslag til montering på rygpude	406256



Skubbebøjle, højdejusterbar
7 - 23 cm fra ryggens overkant

SB 35,0 cm	25578-01
SB 37,5 cm	25579-01
SB 40,0 cm	25580-01
SB 42,5 cm	25581-01
SB 45,0 cm	25582-01
SB 47,5 cm	25730-01
SB 50,0 cm	25583-01



Ledsagerbremses, komplet sæt

Med 22" drivhjul	25861
Med 24" drivhjul	25862



Skubbehåndtag, højdejusterbart
0 - 16 cm fra ryggens overkant

Universal	*25585-01
-----------	-----------



Tværstang

SB 35,0 cm	25610
SB 37,5 cm	25611
SB 40,0 cm	25612
SB 42,5 cm	25613
SB 45,0 cm	25614
SB 47,5 cm	25739
SB 50,0 cm	25615

* Monteret på Cross som standard

Tilbehør og reservedele, Cross



Ryglænstaske

Sort med logo, 9 liter 92009



Armlæns pude, hemiplegi
(monteres på lange armlæn)
OBS: Passer til 25173-1 og 25173-2

Højre	25770-60-1
Venstre	25770-60-2



Rygsæk

Grå med logo, 15 liter 92011



Armlæns pude

Kort, 26 cm	62282-60
Lang, 36 cm	62283-60



Aftageligt armlæn, højdejusterbart 17 - 31 cm fra sædet

L 26 cm, højre	*25172-1
L 26 cm, venstre	*25172-2
L 36 cm, højre	25173-1
L 36 cm, venstre	25173-2



Armlæns pude med trykafastende gel

Kort, 26 cm	26240-60
Lang, 36 cm	26241-60



Opklappeligt armlæn, højdejusterbart 23 - 29 cm fra sædet

Højre	25546-1
Venstre	25546-2



Afstandsforøger til armlæn (fungerer ikke i alle drivhjulspositioner)

Sæt, forøger sædebredden med 2 cm	26854
-----------------------------------	-------



Armlæns pude, hemiplegi
(monteres på lange armlæn)
OBS: Passer til 27350-1 og 27350-2

Højre	27313-60-1
Venstre	27313-60-2



Aftagelig sidebeskytter

Højre	25189-1
Venstre	25189-2

Tilbehør og reservedele, Cross



Bord i klar plast, D 32 cm (monteres på lange armlæn)

SB 35,0 cm	B 45,0 cm	24417
SB 37,5 cm	B 47,5 cm	25187
SB 40,0 cm	B 50,0 cm	24418
SB 42,5 cm	B 52,5 cm	25188
SB 45,0 cm	B 55,0 cm	24419
SB 47,5 cm	B 57,5 cm	25731
SB 50,0 cm	B 60,0 cm	24601



Halvbord i klar plast, D 26 cm (monteres på langt armlæn)

Højre	B 30 cm	AS13011
Venstre	B 30 cm	AS13012



Beslag til rørbord (monteres på langt armlæn)

Universal	82078SPC
-----------	----------



Vinklet knæledsbremse

Højre	*27532-1
Venstre	*27532-2



Bremseforlænger

Knæk	25515
------	-------



Enhåndsbremse

Højre	26292-1
Venstre	26292-2



Enhåndsdrift, anvend både drivenhed og teleskopaksel

Drivenhed, sæt	26522
Teleskopaksel	
SB 35,0 - 37,5 cm	27317
SB 40,0 - 42,5 cm	27318
SB 45,0 - 50,0 cm	27319



Rygovertræk, velour, kan maskinvaskes ved 40°

SB 35,0 cm	*62135-60
SB 37,5 cm	*62387-60
SB 40,0 cm	*62136-60
SB 42,5 cm	*62388-60
SB 45,0 cm	*62137-60
SB 47,5 cm	*62389-60
SB 50,0 cm	*62305-60



Komfort rygovertræk (anvendes ryggiler, skal ryg- overtrækket være en størrelse større end stolen)

SB 35,0 cm	62895-60
SB 37,5 cm	62896-60
SB 40,0 cm	62897-60
SB 42,5 cm	62898-60
SB 45,0 cm	62899-60
SB 47,5 cm	62900-60
SB 50,0 cm	62901-60
SB 52,5 cm	62902-60



Lav komfort ryg, H 44 cm (SD mindskes med 5 cm)

SB 35,0 - 37,5 cm	26620-60
SB 40,0 - 42,5 cm	26621-60
SB 45,0 - 47,5 cm	26622-60
SB 50,0	26623-60

Tilbehør og reservedele, Cross



Høj komfort ryg, H 59 cm (SD mindskes med 5 cm)

SB 35,0 - 37,5 cm	26625-60
SB 40,0 - 42,5 cm	26626-60
SB 45,0 - 47,5 cm	26627-60
SB 50,0	26628-60




Kort sædeplade, L 44 cm

SB 35,0 - 37,5 cm	26720
SB 40,0 - 42,5 cm	26721
SB 45,0 - 47,5 cm	26722
SB 50 cm	26723



Rygkile

Kort, 15 cm	62346-60
Lang, 30 cm	62347-60

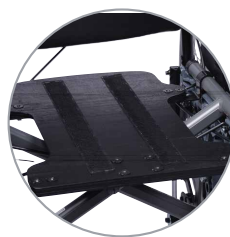

Lang sædeplade, L 50 cm

SB 35,0 - 37,5 cm	26725
SB 40,0 - 42,5 cm	26726
SB 45,0 - 47,5 cm	26727
SB 50,0 cm	26728



Rygrør til dameryg (kan kun anvendes, hvis sædebredden er 40 cm eller bredere. Anvendes med rygovertræk 5 cm smallere end stolens sædebredde. Begge rør udskiftes)

Højre	26269-01-1
Venstre	26269-01-2



Sædepude af anatomisk formet koldskum. Velourbetræk, kan maskinvaskes ved 40°

SB 35,0 cm	*62230-60
SB 37,5 cm	*62231-60
SB 40,0 cm	*62232-60
SB 42,5 cm	*62233-60
SB 45,0 cm	*62234-60
SB 47,5 cm	*62374-60
SB 50,0 cm	*62266-60



Formet sædepude, kort velour, L 44 cm)

SB 35,0-37,5 cm	26600-60
SB 40,0-42,5 cm	26601-60
SB 45,0-47,5 cm	26602-60
SB 50,0 cm	26603-60



Inkontinens sædeovertræk, kort model

SB 35,0 cm	85035-K
SB 37,5 cm	85037-5K
SB 40,0 cm	85040-K
SB 42,5 cm	85042-5K
SB 45,0 cm	85045-K
SB 47,5 cm	85047-5K
SB 50,0 cm	85050-K



Formet sædepude, lang velour, L 50 cm

SB 35,0-37,5 cm	26605-60
SB 40,0-42,5 cm	26606-60
SB 45,0-47,5 cm	26607-60
SB 50 cm	26608-60



Inkontinens sædeovertræk, lang model

SB 35,0 cm	85035-L
SB 37,5 cm	85037-5L
SB 40,0 cm	85040-L
SB 42,5 cm	85042-5L
SB 45,0 cm	85045-L
SB 47,5 cm	85047-5L
SB 50,0 cm	85050-L

Tilbehør og reservedele, Cross



Hoftesele i ét stykke, snaplås

Maks. L 170 cm 62190



2-delt hoftesele, plastlås

Maks. L 100 cm 25668



Polstret hoftesele, Y-model med plastlås

Polstret del

Str. 2	L 32 - 35 cm	3185427-2
Str. 3	L 37 - 40 cm	3185427-3
Str. 4	L 46 - 51 cm	3185427-4



Drivhjul, højtryksdæk

22" x 1" med drivring i rustfri stål	*25678
22" x 1" med drivring i sort plast	25793
24" x 1" med drivring i rustfri stål	*25097
24" x 1" med drivring i sort plast	25792



Drivhjul, lavtryksdæk

20" x 1 3/8" med drivring i rustfri stål	25088
26" x 1 3/8" med drivring i rustfri stål	26313



Drivhjul, flexeldæk

22" x 1" med drivring i rustfri stål	26278
24" x 1" med drivring i rustfri stål	26279



Dæk, højtryk


22" x 1"	*81125
24" x 1"	*80558

Tilbehør og reservedele, Cross



Dæk, lavtryk

20" x 1 $\frac{3}{8}$ "	80133
22" x 1 $\frac{3}{8}$ "	80325
24" x 1 $\frac{3}{8}$ "	80137

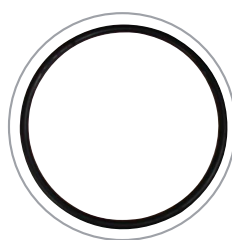


Drivring, mosgummi

20"	24442
22"	24551
24"	80800



Slange, luft

20" x 1 $\frac{3}{8}$ "	80132
22" x 1"	*80136
22" x 1 $\frac{3}{8}$ "	80327
24" x 1"	*80560
24" x 1 $\frac{3}{8}$ "	80138

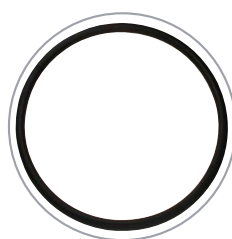


Drivring, plastbelagt aluminium

20"	81229
22"	80895
24"	80894



Drivring, rustfri stål

20"	21034
22"	*24395
24"	*24023

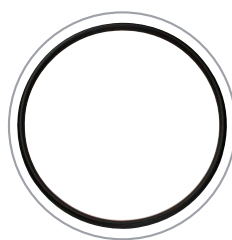

Drivring, plast, oval, sort

22"	80910
24"	80911



Drivring, aluminium

20"	81109
22"	25636
24"	25181



Egerbeskytter, gråt Etac tryk

20"	25502-28
22"	25503-28
24"	25504-28



Egerbeskytter, gult Etac tryk

20"	25502-29
22"	25503-29
24"	25504-29

Tilbehør og reservedele, Cross



Hjælpeudløser Quick Release

Universal	24051-01
-----------	----------



Benstøtte, snæver vinkel (uden fodplade)

Universal	25570-01
Universal, kort (-7 cm)	25571-01
Universal, låsbar	25573-01



Tipsikring, opklappelig

20" drivhjul, højre	26270-1
20" drivhjul, venstre	26270-2
22" drivhjul, højre	*26162-1
22" drivhjul, venstre	*26162-2
24" drivhjul, højre	*26162-1
24" drivhjul, venstre	*26162-2



Benstøttepulstring, kan anvendes på benstøtterne ovenfor med vid og snæver vinkel

Højre	44030H
Venstre	44030V



Træderør

Universal	25766
-----------	-------



Eleverbar benstøtte, vinkelregulerbar (uden fodplade)

Standard	25660-01
Universal	27149
Konsol til lægpude	24544-01
Lægpude SB 35,0-37,5 cm	62105-60
Lægpude SB 40,0 - 42,5 cm	62104-60
Lægpude SB 40,0 - 50,0 cm	62484-60
Lægpude SB 50,0 - 60,0 cm	62451-60
Indfæstningsrør (+10 cm)	25564



Dobbelt stokkeholder (monteres på tipsikring art. nr. 26162-1 / 26162-2)

Komplet	26002
---------	-------



Eleverbar benstøtte, vinkelregulerbar (uden fodplade)

Standard	25660-01
Universal	27149
Konsol til lægpude	24544-01
Lægpude SB 35,0-37,5 cm	62105-60
Lægpude SB 40,0 - 42,5 cm	62104-60
Lægpude SB 40,0 - 50,0 cm	62484-60
Lægpude SB 50,0 - 60,0 cm	62451-60
Indfæstningsrør (+10 cm)	25564



Benstøtte, vid vinkel (uden fodplade)

Universal	*25574-01
Universal, låsbar	25575-01

Tilbehør og reservedele, Cross



Elevbar benstøtte med lægplade (uden fodplade, SB skal være min. 37,5 cm)

Universal	26100
Polstring til lægplade	44031



Fodpladeforøger til delt fodplade, forøger dybden 8 cm

SB 40,0 - 42,5 cm	50798
SB 45,0 - 47,5 cm	50799
SB 50,0 cm	50800



Amputationsbenstøtte, højdejusterbar, længderegulerbar og vinkelregulerbar

Universal, velour	25516-60
Universal, dartex	25516-63



Hel fodplade

SB 35,0 - 37,5 cm B 21 x D 17 cm	25936
SB 40,0 - 50,0 cm B 26 x D 17 cm	25937



Gipsbenstøtte, højdejusterbar, længderegulerbar og vinkelregulerbar (kan også bestilles efter mål)

Universal	44501
L 50 x B 20 cm	



Hel fodplade, forhøjet, kan justeres 8 - 23 cm fra sædets kant

SB 35,0 cm	26306
SB 37,5 cm	26307



Delt fodplade D 13 cm, højre (kan byttes rundt med venstre)

SB 35,0 cm	*25641-1
SB 37,5 cm	*25642-1
SB 40,0 cm	*25643-1
SB 42,5 cm	*25644-1
SB 45,0 cm	*25645-1
SB 47,5 cm	*25736-1
SB 50,0 cm	*25646-1
Indfæstningsrør +10 cm	25564



Lægbånd, regulerbar længde

SB 35,0 - 37,5 cm	25356
SB 40,0 - 42,5 cm	25357
SB 45,0 - 47,5 cm	25358
SB 50,0 cm	25359



Delt fodplade D 13 cm, venstre (kan byttes rundt med højre)

SB 35,0 cm	*25641-2
SB 37,5 cm	*25642-2
SB 40,0 cm	*25643-2
SB 42,5 cm	*25644-2
SB 45,0 cm	*25645-2
SB 47,5 cm	*25736-2
SB 50,0 cm	*25646-2
Indfæstningsrør +10 cm	25564



Hælrem, regulerbar længde

Universal	24458
-----------	-------

Tilbehør og reservedele, Cross



Bredt forgaffelfæste

Universal	25763
-----------	-------



Værktøjssæt

Komplet	25174
---------	-------



Transportfæste (bør anvendes sammen med hoftesele og nakkestøtte)

Komplet	26158
---------	-------



Forgaffel, drejelig 360° (uden forhjul)

Kort	*24677
Mellem	*24678
Lang	24679



Forhjul

4", 100x30 mm massivt	27870
5", 125x30 mm massivt	*27865
6", 150x30 mm massivt	27869
6,5", 165x30 mm massivt	*27866
7", 175x45 mm halvmas- sivt	27867
8", 200x35 mm massivt	27864



Iltflaskeholder

Holder til 2 liter	AL200520
Holder til 2,5 liter	AL200525
Holder til 5 liter	AL200550
Fæste	AL200222

