

panda futura 5TM

Suomenkielinen käyttöohje

EN 12182
EN 12183

SISÄLLYS

Käyttötarkoituksella	3
CE-todistus	3
R82-takuu	3
Turvallisuus	3
Kierrätys	3
Kunnossapidon vastuista.....	4
Pesu	4
Tuotteen konepesu	4
Desinfiointi	4
Lisävarusteet ja varaosat.....	4
Huoltoväli.....	4
Tarkistuslista huoltoa varten	4
Ennakkomyyntitietoja.....	4
Tekniset tiedot.....	4
Valmistaja	4
Lisävarusteet	5
Mitat.....	6
Nostotekniikkaa	7
Tuotteen tunnistheet.....	7
Symbolit.....	8
Ohjeet.....	9 - 17

Yleistä

Onnittelut uuden R82 tuotteen hankinnasta -maailmanlaajuiselta lasten ja nuorten teknisten apuvälineiden toimittajalta. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on auttaa käyttäjää apuvälineen oikeassa käytössä. Lukekaa tämä User Guide ennen käyttöä ja pitäkää se tallessa tulevaa käyttöä varten.

Käyttötarkoituksella

Laitte on modulaarinen istuinjärjestelmä toimintarajoitteisille lapsille ja aikuisille.

Käyttöaiheet

Laitetta voivat käyttää toimintarajoitteiset lapset ja aikuiset, jotka eivät pysty pysyttelemään istuma-asennossa. Laitteen kohderyhmä perustuu toiminnallisuuteen eikä erityiseen terveydentilaan tai ikään.

Käyttäjä on laitteessa istuva henkilö. Hoitaja on laitetta käyttävä henkilö. Älä jätä käyttäjää ilman valvontaa. Varmista hoitajan jatkuva valvonta.

Laitteen käyttö keskeytetään useammin päivällä, jolloin käyttäjä makaa, seisoo tai istuu toisessa apulaitteessa tai tavallisessa kalusteessa.

Laitte soveltuu kuljetukseen lapsille ja aikuisille, jotka painavat vähintään 43 kg ja enintään ilmoitetun kuljetuksen maksimipainon verran.

Vasta-aiheet

Ei tunnettuja vasta-aiheita

Varotoimet

Eritystä huomiota tulee kiinnittää tuotteen kokoonpanoon ja lisävarusteiden käyttöön sellaisten käyttäjien kohdalla, joilla on rajoitteita:

- Aistitoiminnot ja kivun aistiminen: harkitse tuotteen ja sen lisävarusteiden antaman tuen aiheuttaman paineen lisätarkistuksia.
- Liikkumiskyky (esim. pakkoliikkeet): harkitse dynaamisella selkänöjalla varustetun laitteen käyttöä.
- Kyky säilyttää istuma-asento: käytä tuotetta lisävarusteiden kanssa (esim. sivulaidat, liivit, vyöt tai käsinojat ja pöytälevy).
- kyyssä säilyttää pään asento. Harkitse lisävarusteiden tai pään asentoa tukevan tuotteen käyttöä.

Käyttöalueet

Tuote on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.

Mukana toimitettavat työkalut;

- 5 mm:n kuusiokoloavain

CE-todistus

Tämä tuote on lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (2017/745) vaatimusten mukainen. Lisäksi tämä tuote on seuraavien vaatimusten mukainen:

- EN 12182
- EN 12183

CE-merkki täytyy poistaa,

- jos tuote kootaan uudelleen
- jos tuotetta käytetään muuten kuin käyttötarkoituksen mukaisesti ja/tai muuhun kuin sen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaiseen tarkoitukseen
- jos tuotetta käytetään yhdessä muiden kuin alkuperäisten R82-varaosien ja varusteiden kanssa.

Jos laite yhdistetään muihin tuotteisiin, yhdistäminen ei saa muuttaa tuotteiden käyttötarkoitusta tai tehdä tuotteisiin muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttämiseen. Tuotteiden yhdistämisestä vastaavan henkilön/

yrityksen on varmistettava, että sovellettavat vaatimukset täyttyvät.



Kierrätys

Tuotteen saavutettua lopullisen käyttöiän, materiaaliosat tulee erotella erikseen kierrätystä tai hävitystä varten. Tarvittaessa ota yhteyttä paikalliseen myyjään varmistaaksesi oikean materiaalin. Ota yhteyttä lähimpään ympäristöpisteeseen, varmistaaksesi materiaalin oikean jätemääräysten mukaisen kierrätyksen.

Lisävarusteet ja varaosat

R82 tuotteet voidaan toimittaa erilaisilla lisävarusteilla, vastaten käyttäjän yksilölliseen tarpeeseen. Varaosat ovat saatavilla tilauksesta. Erikoisvarusteet löytyvät nettisivustoltamme tai lisätietoja saa paikalliselta edustajalta.

R82:n takuu

www.etac.com/support

Myyntiä edeltävät tiedot ja ohjeet

Myyntiä edeltävät tiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.etac.com tuotteen alta asiakirjaosiosta.



Turvallisuus

Tuotteen merkkejä, symboleja ja ohjeita ei saa peittää tai siirtää, ja ne tulee olla selkeästi esillä ja luettavissa koko tuotteen käyttöajan. Vaihda tai korjaa välittömästi epäselvät tai vahingoittuneet merkit, symbolit ja ohjeet. Ota yhteyttä paikalliseen edustajaan.

Mikäli laitteeseen liittyviä haittatapahtumia ilmenee, niistä on ilmoitettava paikalliselle jälleenmyyjälle ja kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian. Paikallinen jälleenmyyjä välittää tiedot valmistajalle.

Vårdare

- Lukekaa kaikki ohjeet ennen käyttöä ja pitäkää ne tallessa tulevaa käyttöä varten. Tuotteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle vakavan vamman.
- Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos ne irrotetaan paikoiltaan.
- Käytä aina tarkoitukseen sopivaa nostotekniikkaa ja apuvälinettä.
- Lämna aldrig brukaren i produkten utan uppsikt. Se till att en vuxen har ständig uppsikt.
- Korjauksissa/vaihdossa saa käyttää ainoastaan R82 alkuperäisiä varaosia, ja säätäminen ja välien asetukset saadaan tehdä ainoastaan toimittajan ohjeistuksen mukaisesti.
- Mikäli R82 tuotteessa on ongelma tai mikä tahansa osa on rikkoontunut, lopettakaa tuotteen käyttö heti ja ottakaa välittömästi yhteyttä paikalliseen edustajaan.
- Tiedot rungon ja istuimen yhdistelmästä, mukaan lukien maksimikuormitus, löytyvät täältä: etac.com.
- Tietoja kuljetuksesta on tuotteen mukana toimitetussa "M1460 Transportation in Motor Vehicles" -asiakirjassa.

Ympäristö

- Tarkasta tuotteen pinnan lämpötila ennen käyttäjän asettamista siihen. Tämä koskee erityisesti käyttäjiä, joiden ihossa ei ole tuntoa, koska he eivät tunne kuumuutta. Jos pinnan lämpötila on yli 41 °C, anna tuotteen jäähtyä ennen käyttöä.

Käyttäjä

- Jos käyttäjä on lähellä maksimiarvoja ja/tai hänellä on runsaasti hallitsemattomia liikkeitä esim. huojumista, tulee harkita suurempaa kokoa R82 tuotteesta.

Tuote

- Tarkista ennen käyttöä, että kaikki kiinnitykset ja säädöt sekä osat ovat oikein ja paikoillaan. Pidä kaikki työkalut lasten ulottumattomissa.
- Varmista tuotteen vakaus ennen kuin sijoitat lapsen apuvälineeseen.
- Tarkasta tuote ja kaikki osat, vaihda kuluneet osat ennen käyttöä.
- Älä naarmuta mäntää; on tärkeätä käyttää liinaa tai vastaavaa, mikäli kaasujousen säätämiseen käytetään työkaluja.
- Tämän tuotteen syttymättömyys on testattu syttymättömällä tasolla EN-1021-1-, EN 1021-2- ja ISO 7176-16 -määräysten mukaisesti.
- Tämä tuote voi menettää tulenkestävyyssominaisuutensa, jos sitä käytetään yhdessä muiden kuin alkuperäisten R82-pehmusteiden kanssa.
- Tuote on hyväksytty kuljetukseen ajoneuvoissa standardin ISO 7176-19 mukaisesti. Lisätietoa on tuotteen mukana toimitetussa "M1460 Transportation in Motor Vehicles" -asiakirjassa.
- Tuote täyttää ISO 7176-19 -standardin liitteen D vaatimukset. Sen soveltuvuus auton lantio- ja olkavöihin on arvioitu. Laite saa kokonaispistemäärän "Hyvä".

TEKNISET TIEDOT

Istuin: ABS: akryliiniriilibutadieenistyreeni Kierrätettävä
Vaahtomuovi: Tulenkestävä
Päällys: Gemma

VALMISTAJA

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved - Tanska

JAKELIJA

ALGOL-TREHAB OY
KARAPELLONTIE 6
02610 ESPOO
PUH. (09) 509 91
FAKSI (09) 5099 490
SÄHKÖP. INFO.ALGOLTREHAB.FI@ALGOL.FI
INTERNET WWW.ALGOLTREHAB.FI

Huolto- ja kunnossapitotiedot

Lääkinnällisen laitteen huolto ja ylläpito on kokonaan kyseisen laitteen omistajan vastuulla.

Jos laitetta ei huolleta ja kunnossapidetä ohjeiden mukaisesti, laitteen takuu saattaa raueta. Lisäksi laitteen huollon ja kunnossapidon laiminlyönti voi vaarantaa käyttäjien ja/tai heidän hoitajiensa kliinisen tilan tai turvallisuuden. Älä suorita huolto- ja kunnossapitotöitä, kun käyttäjä on tuotteessa. Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, jos tarvitset apua laitteen käyttöönottoa, käyttöä tai huoltoa ja kunnossapittoa varten.

Käyttöikä

Tämän laitteen käyttöikä normaalissa käytössä on kahdeksan vuotta, jos kaikki kunnossapito- ja huoltotyöt tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti ja dokumentoidaan todistetusti. Laite voidaan luovuttaa uudelle käyttäjälle sen käyttöiän aikana.

Huoltoväli

Tarkastusväliä voidaan muuttaa käytön ja kulumisen mukaan. On suositeltavaa tarkastaa tuote vuosittain, aina kun se otetaan uudelleen käyttöön ja pitkän varastoinnin jälkeen (yli 4 kuukautta). Tarkastuksen saa suorittaa vain henkilö, joka ymmärtää tuotteen käytön.

Huollon tarkastusluettelo:

Tarkista ja säädä seuraavat asiat käyttötarkoituksen mukaan:

- Selkänöjan kallistukseen käytettävä kaasujousi sekä selkänöjan lukituskahva.
- Lisävarusteet voidaan asettaa ja lukita selkänöjan yläosassa oleviin kiinnikkeisiin käyttämällä niihin asennettuja nuppia ja kahvoja.
- että kiinnikkeille tarkoitetut palat selkänöjassa ja istuimessa ovat hyvässä kunnossa
- että tuotteen mutterit ja pultit on kiristetty kunnolla
- kiinnikkeet ja soljet kulumisen merkkien varalta
- tuote naarmujen tai kulumisen merkkien varalta
- että tuotteen kaikki tarrat ovat ehjiä

Korjaa tai vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat.

Kunnossapito

Ennen jokaista käyttökertaa suosittelemme:

Pyyhi tuotteesta kaikki jäämät ja epäpuhtaudet lämpimässä vedessä ja kloorittomassa miedossa pesuaineessa/saippuassa kostutetulla liinalla ja anna tuotteen kuivua ennen käyttöä. Tarkista tuote silmämääräisesti vaurioituneiden tai kuluneiden osien suhteen.

Pesu

Päätuote

Tämä tuote voidaan pestä 60 °C:ssa miedolla pesuaineella 10 minuutin ajan lääketieteellisille laitteille tarkoitetussa pesukoneessa. Käytä tuotteen kuivaamiseen koneen kuivaustoimintoa. Irrota kaikki lisävarusteet ja pese ne erikseen.

Kangas ja päälliset

Päällinen voidaan pestä koneessa enintään 40 asteessa käyttäen mietoa pesuainetta.

Erota vaahtomuovi ja päällinen ennen pesua.

Vaahtomuovi

Vaahtomuovisisäkkeet saa pestä vain käsin. Käytä lämmintä vettä ja klooritonta mietoa pesuainetta/saippuaa ja anna kaikkien osien kuivua ennen käyttöä.

Älä taivuta, purista tai väännä vaahtomuoviosaa pesun aikana tai sen jälkeen, sillä se voi vaikuttaa haitallisesti sen muotoon.

Käsinpesu

Tämä tuote ja sen lisävarusteet voidaan pestä myös käsin. Käytä lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta/saippuaa ilman klooria ja anna kaikkien osien kuivua ennen käyttöä.

Desinfiointi

Tuote voidaan desinfioida 70-prosenttisellä IPA-desinfiointineesteellä. Suositeltavaa on pyyhkiä tuotteesta kaikki jäämät ja epäpuhtaudet lämpimässä vedessä ja kloorittomassa miedossa pesuaineessa/saippuassa kostutetulla liinalla ja antaa tuotteen kuivua ennen desinfiointia.


Materiaalit

- Alumiinia
- Muovia
- Ruostumatonta terästä
- Terästä
- Kangas
- Vaahto

Pintakäsittely


Korroosionestoon käytettiin seuraavia pintakäsittelymenetelmiä:

- Lakatut pinnat = polyesterijauhemaali tai elektroforeesipinnoite
- Lakkaamattomat alumiiniosat = eloksoitu pinnoite
- Lakkaamattomat teräspinnat = galvanointi

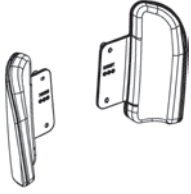


89811-5xx

Katso sivu

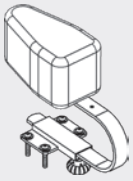


89930-5
89130-20

Katso sivu

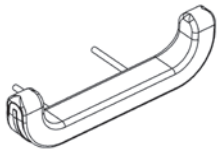

89642-xxx

Katso sivu

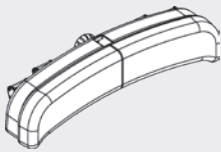


89658-xxxx

Katso sivu



8910301-4
8910301-5

Katso sivu

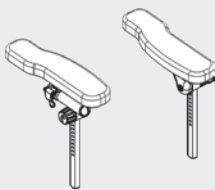





89619-x

Katso sivu



8910725-5

Katso sivu

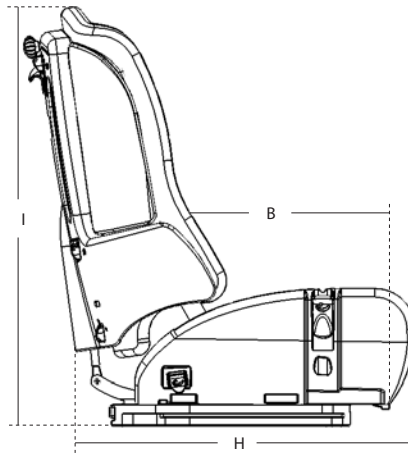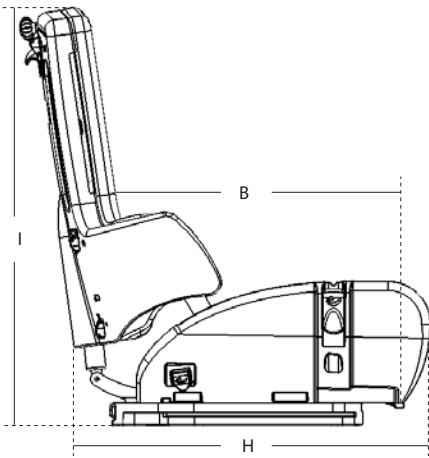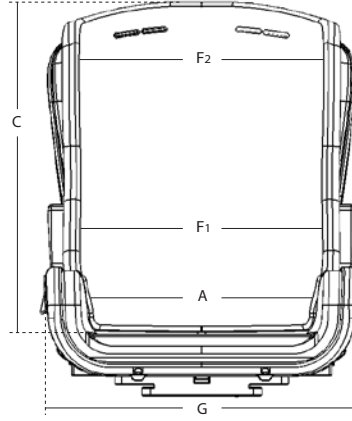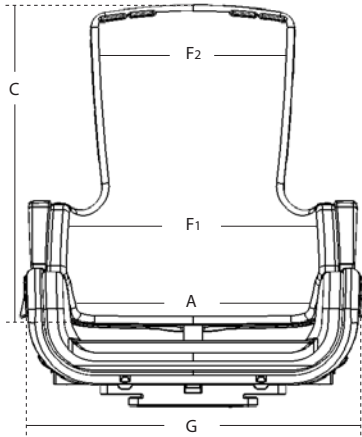

MITAT

	Panda Futura 5 Aktiivi	Panda Futura 5 Vakio
	mm (inch)	mm (inch)
Istuinleveys (A)	350 (13 ³ / ₄ "	350 (13 ³ / ₄ "
Istuinsyvyys (B)	430 (17")	430 (17")
Selkänöjan korkeus (C)	590 (23 ¹ / ₄ "	590 (23 ¹ / ₄ "
Selkänöjan leveys, yläosa (F2)	350 (13 ³ / ₄ "	380 (15")
Selkänöjan leveys, alaosa (F1)	320 (12 ¹ / ₂ "	270 (10 ³ / ₄ "
Käsinojat istuimen etäisyydelle	210-300 (8 ¹ / ₄ -11 ³ / ₄)	210-300 (8 ¹ / ₄ -11 ³ / ₄)
Käsinojan etureuna	480 (19")	480 (19")
Kokonaisleveys (G)	560 (22")	560 (22")
Kokonaispituus (H)	560 (22")	560 (22")
Kokonaiskorkeus (I)	670 (26 ¹ / ₂ "	670 (26 ¹ / ₂ "
Laitteen massa	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
Käyttäjän enimmäismassa	85 kg (187.3 lb)	85 kg (187.3 lb)
Käyttäjän enimmäismassa kuljetuksessa	85 kg (187.3 lb)	85 kg (187.3 lb)
Enimmäisnimelliskuorma	102 kg (224.8 lb)	102 kg (224.8 lb)
Selkänöjan kulmansäätö	(-5°) to (30°)	(-5°) to (30°)

Panda Futura 5 mitat ovat ISO 7176-5 mukaisia, istuin vaakatasossa ja selkänöja pystyasennossa. Valikoimamme sisältää runsaasti erilaisia lisävarusteita, minkä vuoksi paino ja mitat on ilmoitettu ilman niitä. Muut kuin vakioasetukset, saattavat johtaa eri mittaustulokseen.

TUOTTEEN TUNNISTUS

Panda Futura 5 -istuin


A) Valmistaja

Kilpi sijaitsee istuimessa pehmusteen alla vasemmassa yläkulmassa.



B) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee istuimessa pehmusteen alla oikeassa yläkulmassa.

A



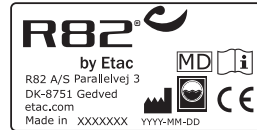


B

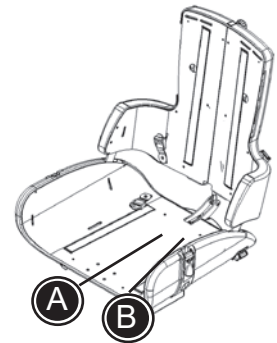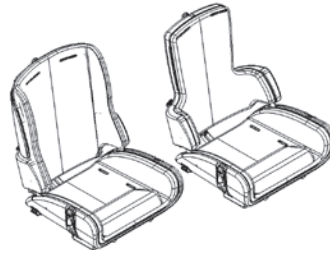

Nostotekniikkaa

Käytä aina tarkoitukseen sopivaa nostotekniikkaa ja apuvälinettä

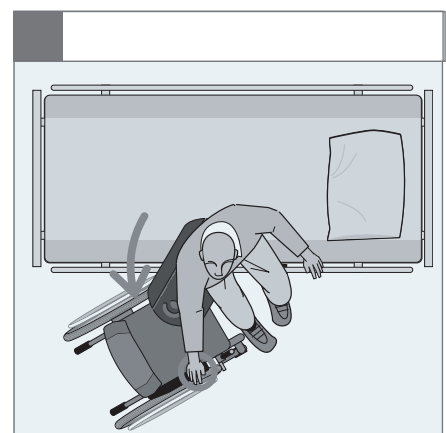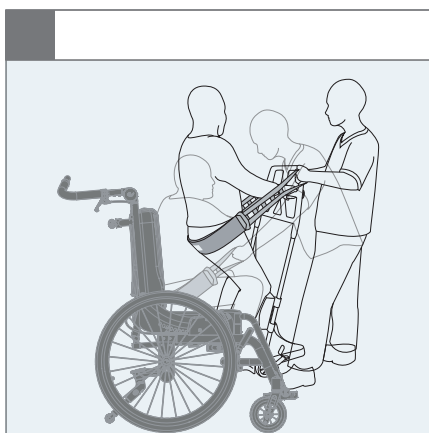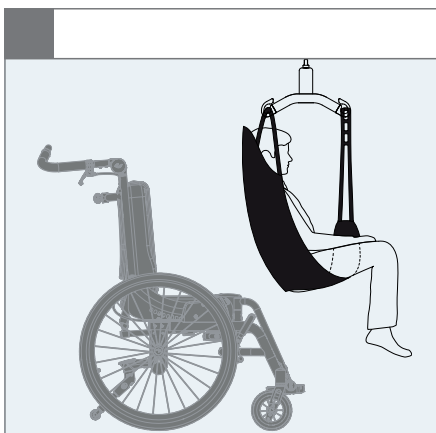

Symbolit



Käyttö sisä- ja ulkotiloissa



Lisäohjeet

Viimeisin versio User Guide on saatavissa Etac nettisivuilta, josta se voidaan tarvittaessa tulostaa



Varoitus

Tämä symboli näkyy käyttöohjeessa yhdessä numeron kanssa, joka viittaa jäljempänä näkyviin ohjeisiin. Sen avulla kiinnitetään huomiota tilanteisiin, joissa tuote tai käyttäjän tai hoitajan turvallisuus voi vaarantua.

01 = Juuttumisvaarat

02 = Vaarat kallistettaessa

03 = Kuljettaminen moottoriajoneuvoissa

05 = Puristumisvaara



Varoitus

Älä vedä/nosta tuolia työntötangosta/kädensijoista, etenkin portaissa

ISTUIMET

Panda Futura 5:n istuin on saatavissa vaihtoehtoina (A) STANDARD ja (B) ACTIVE.

Pääasiallinen ero näiden kahden mallin välillä on istuinten muotoilu. ACTIVE-istuin on muotoiltu siten, että yläraajoilla on enemmän liikkumatilaa ja on ideaalinen aktiivisemmille lapsille.

STANDARD-istuin on muotoiltu sivutuolin, jotka antavat lapselle enemmän tukea ja rajoitetumman liikkuvuuden.

Lapsen vartalonhallinta määrää sen, kumpi malli on sopivin. Istuin on helposti vaihdettavissa toiseen malliin (katso jäljempänä). Selkänojan pehmuste on vaihdettava mallia vaihdettaessa. Molempiin istuimiin sopii laaja lisävarusteiden valikoima.



VARTALOTUKIEN ASENTAMINEN / IRROTUS


Noudata alla olevia ohjeita vartalotukien asentamiseksi/irrottamiseksi oikein:


Asentaminen:

- * Aseta vartalotuet selkänojassa oleviin aukkoihin (A)
- * Kiinnitä takaa käyttäen mukana seuraavia ruuvipultteja ja 5 mm:n kuusiokoloavainta (B)


Irrotus:

- * Poista ruuvipultit (B) takaa käyttäen mukana seuraavaa 5 mm:n kuusiokoloavainta
- * Irrota vartalotuet

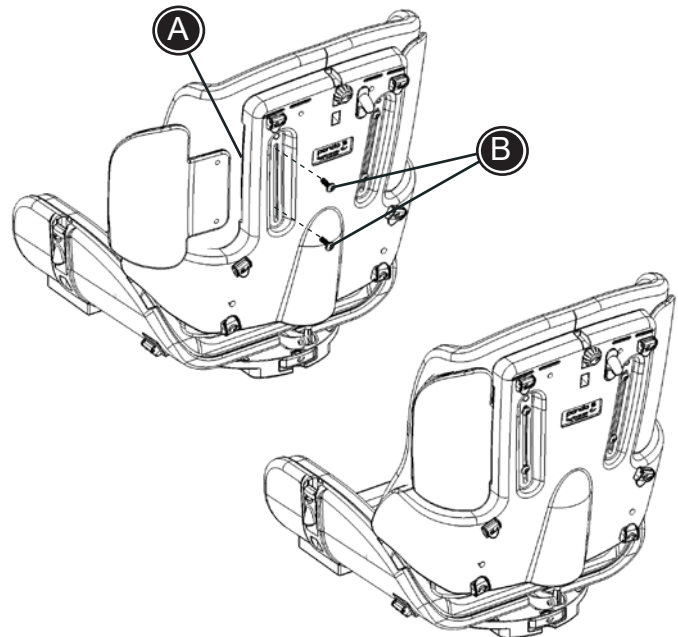


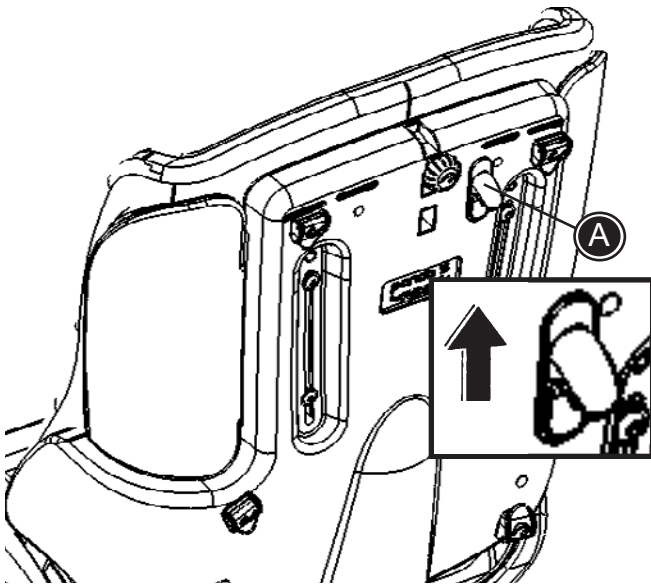

SELKÄNOJAN KALLISTAMINEN

 Äkillisen kallistumisen estämiseksi tartu lujalla otteella selkänojasta ennen kahvan nostamista.

Nosta kahvaa (A) ylöspäin selkänojan kallistamiseksi ennen selkänojan työntämistä.

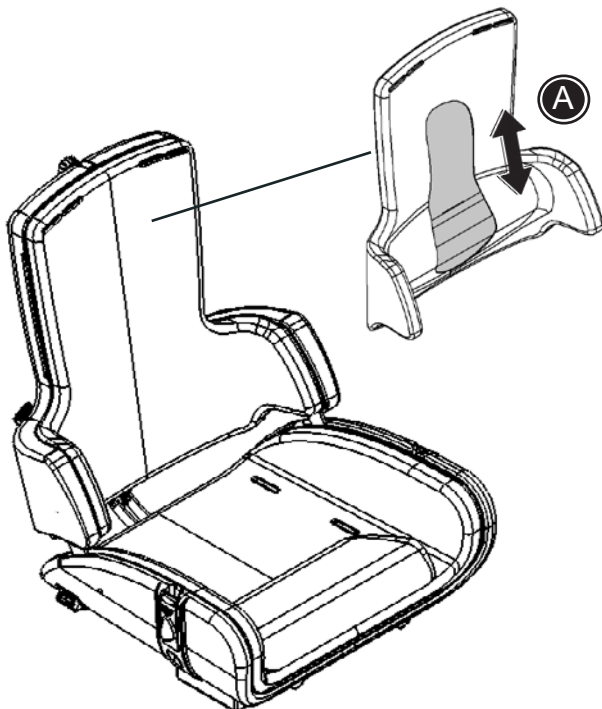


LANNETUKI

Panda Futura 5 toimitetaan selkänojan pehmusteessa olevan säädettävän lannetuen kanssa. Siirrä lannetukea ylös- tai alaspäin (A) tuentarpeen mukaisesti.

HAARAKIILA

Panda Futura 5 on varustettu haarakiiilan asennusta varten.

- * Kiinnitä kiinnitysosa mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella (A).
- * Haarakiiila asennetaan kiinnitysosaan ja sen syvyyttä säädetään käyttämällä vipua (B).

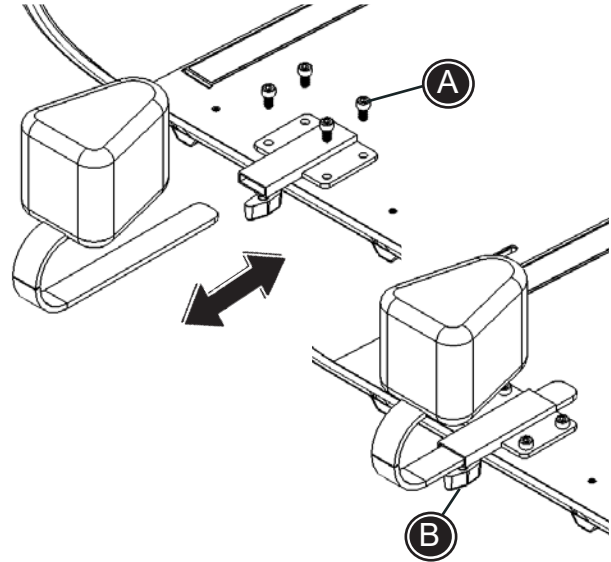


ISTUIMEN JATKE

Panda Futura 5 on varustettu istuimen jatkeen asennusta varten.

- * Työnnä istuimen jatkeesta tulevat tangot kahteen istuimen alla olevaan aukkoon.
- * Työnnä oikeaan asemaan ja kiristä mukana seuraavilla ruuvipulteilla ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella (A).




SELKÄNOJAN JATKE

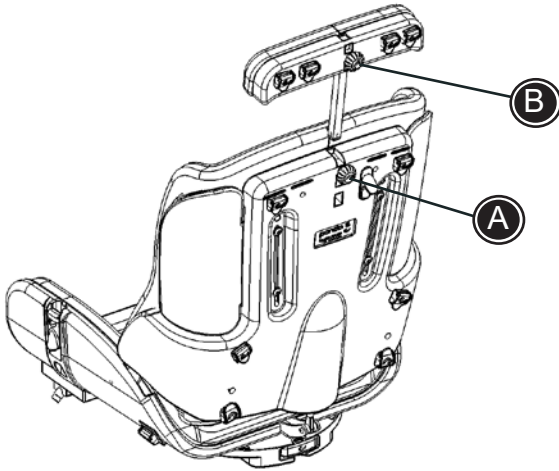

Panda Futura 5 on varustettu selkänöjan jatkeen asennusta varten.

- * Asenna selkänöjan jatkeesta tuleva tanko selkänöjassa olevaan kiinnitysosaan ja kiristä siipiruuvilla (A).
- * Avaa siipiruuvia (A) tai (B) korkeuden säätämiseksi.

! Kun säädät selkänöjan jatketta, varo, etteivät sormet jää tuolin selkänöjan ja selkänöjan jatkeen väliin.

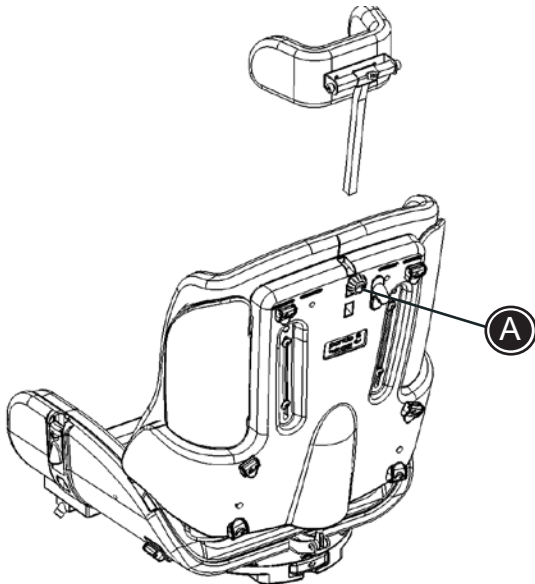


PÄÄNTUKI

Panda Futura 5 on varustettu päntuen asennusta varten.

- * Asenna päntuen tanko selkänöjassa olevaan kiinnitysosaan ja kiristä siipiruuvilla (A).

! Kun säädät niskatukea, varo, etteivät sormet jää tuolin selkänöjan ja niskatuen väliin.

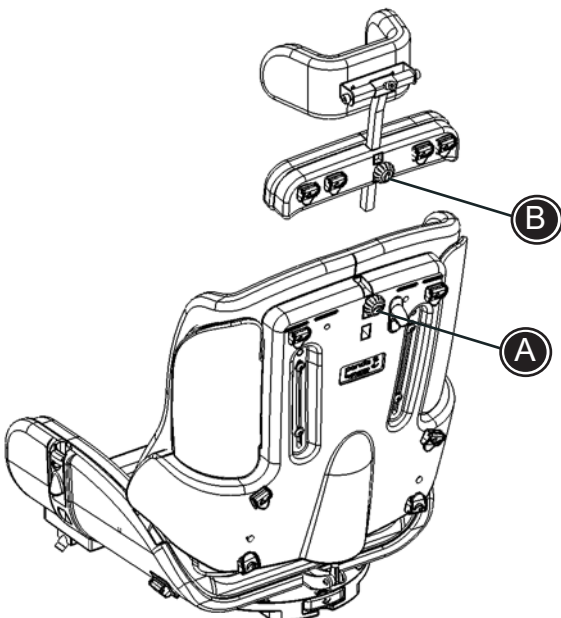

SELKÄNOJAN JATKE JA PÄÄNTUKI

Noudata alla olevia ohjeita selkänöjan jatkeen ja päntuen asentamiseksi samanaikaisesti.

- * Liu'uta päntuen tanko selkänöjan jatkeessa olevan aukon läpi ja edelleen selkänöjassa olevaan aukkoon/kiinnitysosaan.
- * Säädä päntuen korkeus ja kiristä siipiruuvilla (A).
- * Säädä selkänöjan jatkeen korkeus ja kiristä siipiruuvilla (B).


! Kun kallistat selkänöjaa, varo, etteivät sormet jää selkänöjan ja istuimen väliin.

! Varoitus 05 Vaarana puristuksiin jääminen niskatuen ja rungon/työntökaaren väliin selkänöjaa säädettäessä

VARTALOTUET

Panda Futura 5 on varustettu vartalotukien asennusta varten.


- * Aseta vartalotuet aukkoihin.
- * Aseta mutterit yksi kerrallaan selkänojassa olevaan reikään (A) ja vartalotuissa oleviin aukkoihin.
- * Kiristä takaa mukana seuraavilla pulteilla (B) ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
- * Säädä korkeus ja kiristä.

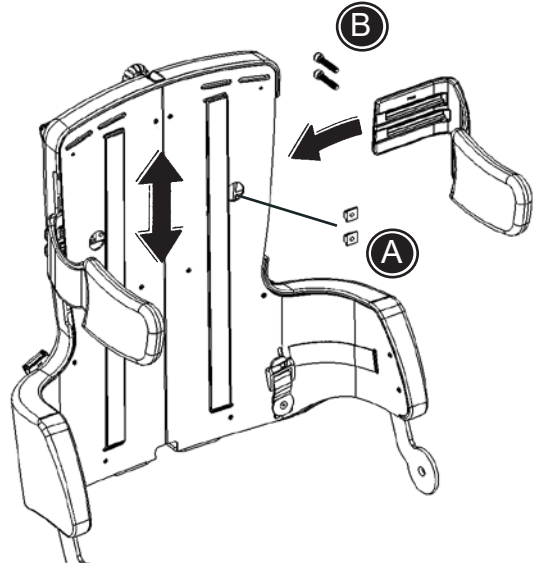

SIVUUNKÄÄNTYVÄT VARTALOTUET

Panda Futura 5 on varustettu sivuun kääntyvien vartalotukien asennusta varten.


- * Aseta vartalotuet aukkoihin.
- * Aseta mutterit yksi kerrallaan selkänojassa olevaan reikään (A) ja vartalotuissa oleviin aukkoihin.
- * Kiristä takaa mukana seuraavilla pulteilla (B) ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
- * Säädä korkeus ja kiristä.

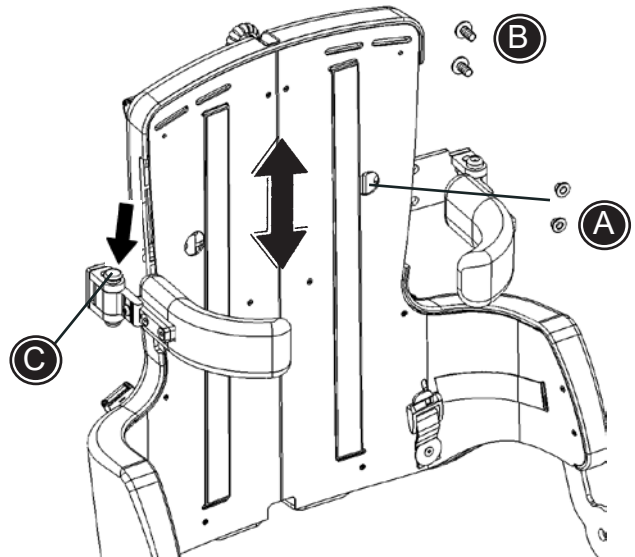

Sivuun kääntyvät vartalotuet vapautetaan painamalla punaista painiketta (C) ja käännetään sitten sivuun.



Avustajan tulisi tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään 3 kuukauden välein.

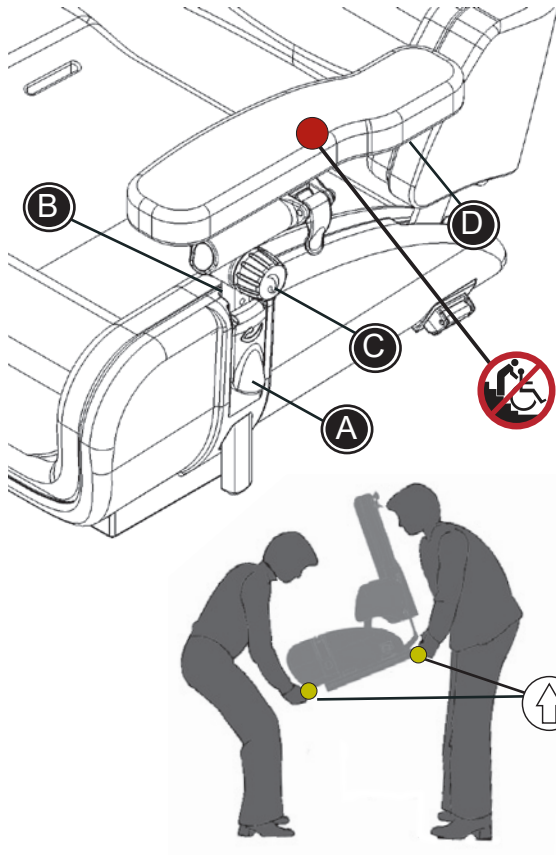

KÄSINOJA

Korkeussäätö:

Avaa vipu (A) käsinojan siirtämiseksi oikeaan asentoon. Aseta pieni ruuvi (B) halutulle korkeudelle. Sulje vipu säätämisen jälkeen.


Käsinojan pehmusteen kallistussäätö:

Avaa sormiruuvi (C).

Säädä käsinojan pehmusteen kallistusta sivuittain: avaa pehmusteen alla olevia ruuveja (D).

! Kun säädät käsinojaa, varo, etteivät sormet jää istuimen ja käsinojan väliin.

! Älä kannata tuotetta käsinojasta

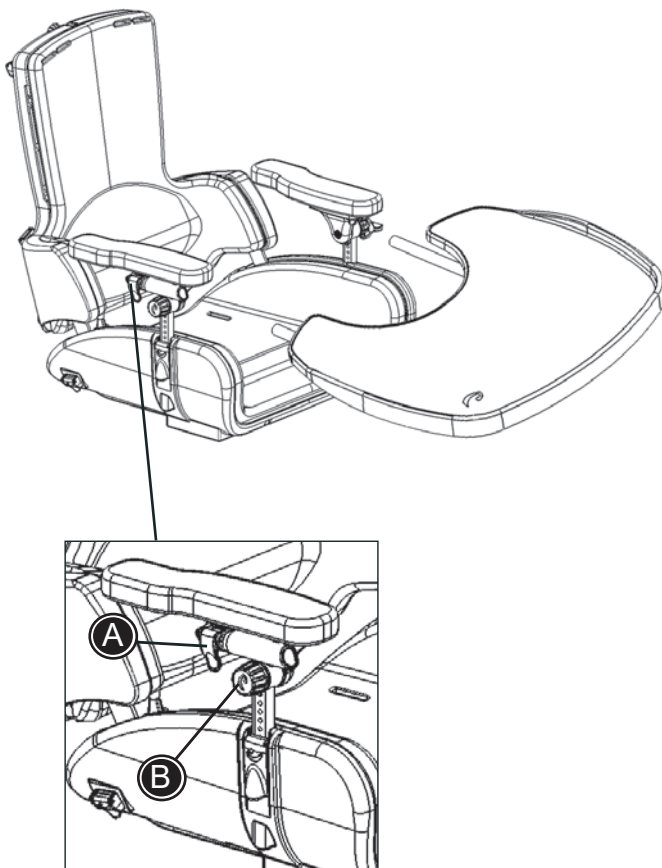

PÖYTÄLEVY

A) Asentaminen ja syvyyssäätö


B) Pöytälevyn kallistaminen käsinojien kallistuksen avulla.


! Pöytälevy voidaan asentaa vain käsinojilla varustettuun Panda Futura 5:een.

RISTIKKOLIIVI

Liivi ja ristikkoliivi voidaan avata ja sulkea käyttämällä solkia ja vetoketjua.

- * Kiinnitä olkahihnat selkänojan pehmusteessa olevan aukon läpi ja selkänojan yläosassa oleviin fixlock-kiinnittimiin (A).
- * Kiinnitä ylemmät hihnat selkänojassa oleviin fixlock-kiinnittimiin (B).
- * Kiinnitä alemmat hihnat selkänojan alaosassa oleviin vyönkiinnittimiin (C).


 Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein. Tarkista nämä säännöllisesti.

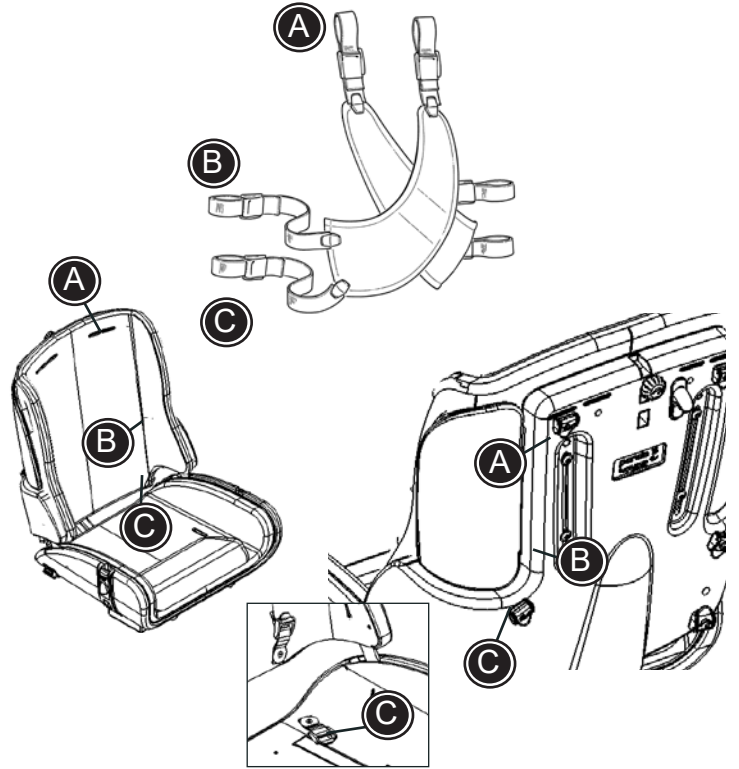



LANTIOVYÖ

F
I
N Lantiovyö voidaan avata ja sulkea solkien avulla.

- * Kiinnitä hihnat istuimen alla oleviin kiinnikkeisiin (A).

 Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein. Tarkista nämä säännöllisesti.

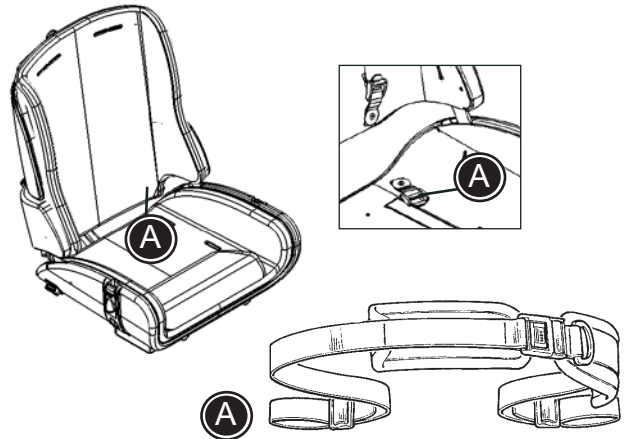

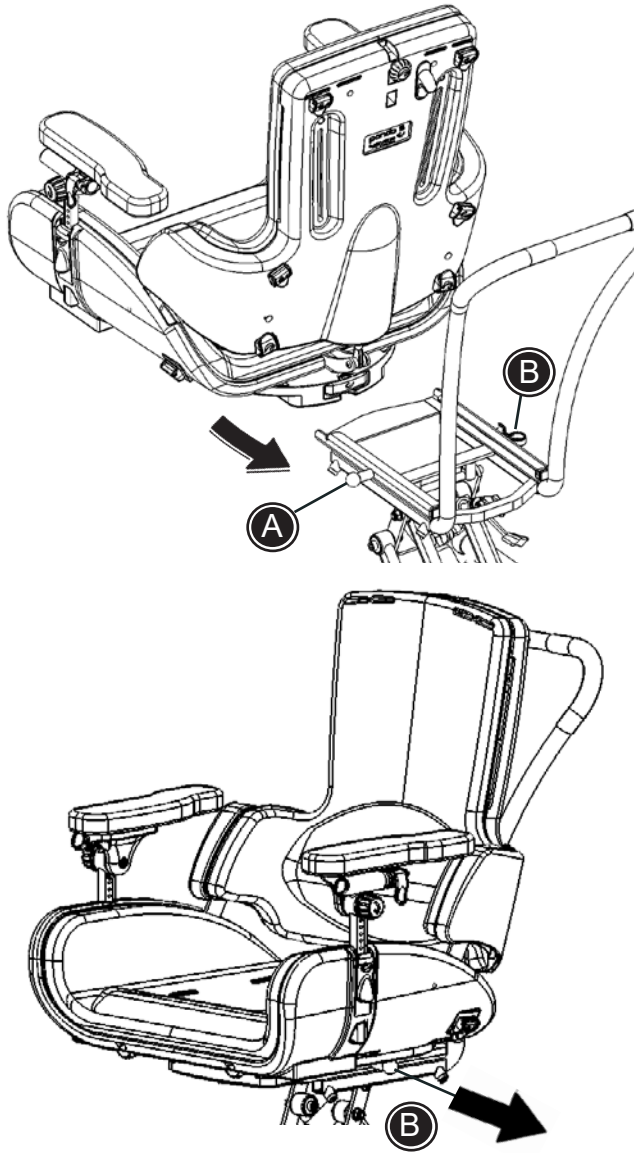

PANDA FUTURA 5 HIGH-LOW:X -ALUS-TALLA, KOKO 2

! Tätä yhdistelmää ei pidä käyttää vahvasti spastisille, voimakkaita liikkeitä tekeville lapsille.

Istuimen asentaminen:

Aseta istuin adapteriin ja työnnä se kokonaan taakse, kunnes se loksauttaa paikalleen. Lukitse punainen kahva (A) istuimen lukitsemiseksi tukevasti paikalleen.

! Älä käytä ensimmäistä koloa, johon se loksauttaa. Se on vain turvakolo, joka pysäyttää istuimen, jos se vahingossa hyppää ulos oikeasta kolosta.

Istuimen irrotus:

Avaa punainen kahva (A). Vedä nuppi (B) ulos, liu'uta istuinta eteenpäin kunnes se irtoaa adapterista.

! Maksimikuorma alustalla on 60 kg.

! Panda Futura 5:tä EI voida asentaa kokoa 1 olevalle alustalle.


i Viittaamme 'Alustojen käyttöohjeisiin' lisätietojen saamiseksi kokoa 2 olevien alustojen version ja toimintojen osalta


TYÖNTÖTANKO HIGH- LOW:X SISÄALUSTALLE

Syvyysäättö:

Avaa alustan molemmilla puolilla olevia ruuveja (A) ja säädä työntötangon syvyys. Työntötanko säätty kahteen asemaan ja loksahda paikalleen varmistusnastan avulla.

Kiristä vaadittuun asemaan.


 Älä käytä työntötankoa alustan nostamiseen/vetämiseen ylös tai alas portaita, reunakiveyksiä jne. Alustan nostamiseen tarvitaan kaksi ihmistä. Älä milloinkaan nosta alustaa työntötangosta.

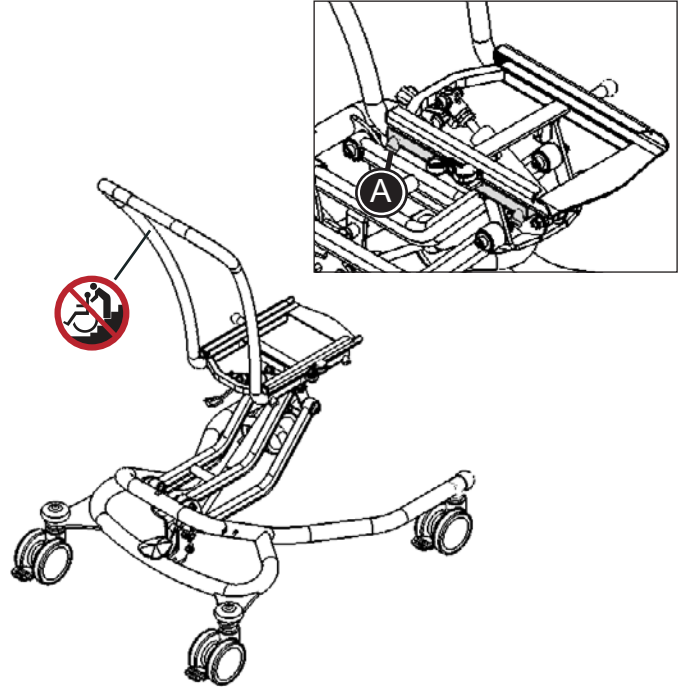

SIVUUN KÄÄN-TYVÄT POLVITUET

Kiinnitä kiinnitysosa (A) istuimen alle 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Työnnä polvituet kiinnitysosaan ja kiristä 6 mm:n kuusiokoloavaimella (B)

- * Avaa ruuveja (C) 6 mm:n kuusiokoloavaimella polvituen tankojen kulman säätämiseksi.
- * Avaa ruuveja (B) tai (D) 4 tai 6 mm:n kuusiokoloavaimilla syvyyden säätämiseksi.
- * Itse polvituet ovat kulma- ja sivuttaisuunnassa säädettäviä (E) 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
- * Paina kannattimessa (F) oleva punainen painike alas polvitukien kääntämiseksi sivuun.

 Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään 3 kuukauden välein.

