



Manuel forflytning
og positionering

 etac®

Kære kunde

Denne lommebog viser udvalgte produkter fra vores store sortiment af manuelle forflytningshjælpemidler og positioneringspuder. Du får et godt overblik over vores produkter og deres vigtigste funktioner.

Immedias manuelle forflytningssortiment garanterer sikre og komfortable forflytninger. De glatte produkter reducerer friktion og fremmer vægtforskydning. De hjælper også til at fremme det naturlige bevægemønster, så forflytningen kan udføres med lethed og værdighed for både bruger og hjælper.

Produkterne er udviklet ud fra principper om det naturlige bevægemønster, vægtoverføring, viden om friktion og etik. Ideen bag produkterne er, at de skal være simple og lette at anvende for både bruger og hjælper.

Med venlig hilsen
Etacs forflytnings-team

Konsulent for Kommuner og institutioner

Stine Kjær Mikkelsen
Tlf. 40 44 37 29
stine.kjaer@etac.com



Konsulent for Hospitaler og Hospice

Maj Andkjær
Tlf. 40 44 37 22
maj.andkjaer@etac.com



Find hele vores sortiment på www.etac.dk

Indhold



Positionering - Liggende

Immedia SatinSheet System	4
Immedia In2Sheet	10
Immedia 4WayGlide Mini & Midi.....	11
Immedia 4WayGlide LPL	12
Immedia TwinSheet4Glide.....	13
Immedia Nylonlagner.....	14
Tilbehør til 4WayGlide LPL og TwinSheet4Glide.....	15
Immedia MultiGlide.....	16
Immedia MultiGlide Single Patient Use (SPU).....	17



Positionering - siddende

Immedia Drejepuder	18
Immedia OneWayGlide	19



Forflytning- siddende

Immedia Glidebrætter	20
----------------------------	----



Forflytning - Liggende

Immedia 2Move	21
---------------------	----



Support

Immedia Sling og OneManSling.....	22
Immedia BedString	23



Specialløsninger

Immedia NonSlip.....	24
Immedia Absorberende Underlag.....	25



Fra siddende til stående

Molift Raiser Pro NYHED!	26
---------------------------------------	----



Positioneringspuder

Lück Rhombo-med® Lejringsrulle	28
Lück Rhombo-med® Rygstøttepude med fane.....	29
Lück Rhombo-med® Rhombi Støttepude	29
Lück Rhombo-med® Kanalsyet pude.. ..	30
Lück Kilepude.....	30
Lück Rhombo-med® Lejringspude	31
Lück Rhombo-fill® Nakkepude.....	31

Immedia SatinSheet System


KOMPLET SYSTEM TIL VENDING OG POSITIONERING.

Brugervenlig bevægelse og håndtering er vigtige parametre i et sikkert arbejdsmiljø. Immedia SatinSheet er et veldesignet system bestående af glidelagen (BaseSheet) og trækklagen (DrawSheet), der arbejder sammen for at gøre positionering og forflytning lettere for brugere og hjælpere.

SatinSheet Systemet skal ikke fjernes efter brug, og kan bruges i en række forskellige miljøer, herunder i hjemmet, på plejehjem og hospitaler.

ANVENDELSESOMRÅDER

- I sengen, uanset funktionsniveau
- I sengen, for tunge brugere eller brugere med smerter eller tryksår
- Vending i seng
- Positionering i seng
- Højere op i seng

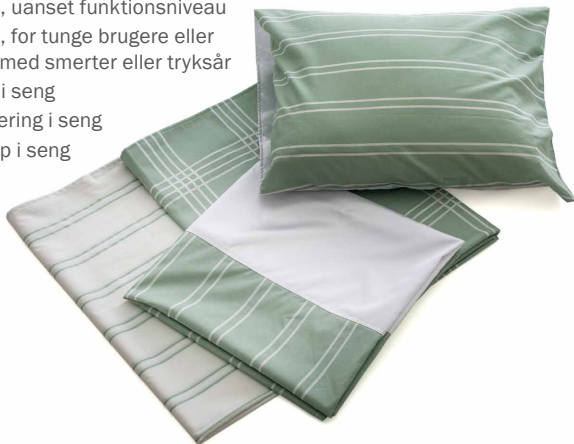

Lær mere...

... Om at bruge SatinSheet System.
Vores nye animerede film giver dig nyttige
instruktioner til dit daglige arbejde.



Scan koden for
instruktionsvideo




BRUG AF SATINSHEET

De to hoveddele i systemet: Det nederste lag - BaseSheet (glidelagen) og det øverste lag - DrawSheet (trækklagen), kan bl.a. benyttes på følgende måder:

SatinSheet 2Direction BaseSheet

- Bruges alene til den selvhjulpne bruger

Placer et SatinSheet 2Direction glidelagen (BaseSheet) i sengen som et almindeligt lagen, for at understøtte den selvhjulpne brugers sideværts bevægelse.

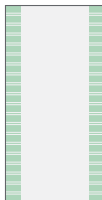


2Direction Drawsheet

- Til den delvis afhængige bruger

Kombinationen af et SatinSheet BaseSheet med 2Direction DrawSheet, giver hjælperen mulighed for at vende brugeren i sengen. Der opnås reduceret friktion i 2 retninger.

Placer et SatinSheet 2Direction BaseSheet i sengen, og tilføj et 2Direction DrawSheet ved den delvis afhængige bruger, der har brug for ekstra hjælp til sideværts bevægelse.

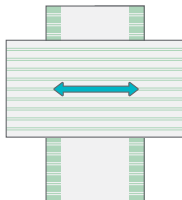


4Direction Drawsheet

- Til den afhængige bruger

Kombination af SatinSheet BaseSheet med 4Direction DrawSheet udgør et system hvor to plejere kan forflytte bruger i alle 4 retninger, ved minimal belastning.

Placer et SatinSheet 2Direction BaseSheet i sengen, og tilføj SatinSheet 4Direction ved den afhængige bruger, der har brug for hjælp til alle forflytninger i seng.

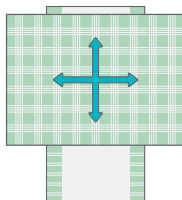

Immedia SatinSheet BaseSheet

DET NEDERSTE LAG: GLIDELAGEN.

Et SatinSheet BaseSheet er et bomulds-/polyesterglidelagen med et panel af friktionsnedsættende materiale (Satin) i midten, der tillader sideværts bevægelse/vending. Bomuldskanterne på hver side af satinstykket forhindrer brugeren i at glide ud af sengen, uanset om denne ligger ned eller sidder på kanten af sengen. Glidelagnet er monteret direkte på madrassen.

Den skridsikre underside hjælper med at fastholde lagnet til madrassen. Brugeren ligger direkte på satinstykket, der reducerer friktion mellem sengetøj og natbeklædning, og gør det lettere at flytte og vende sig.

VARIANTER AF BASESHEET

Eksempler på varianter af BaseSheet (Se alle varianter på næste side):



*SatinSheet
Maxi Corner BaseSheet.*



*SatinSheet
Maxi Fit BaseSheet.*

Immedia SatinSheet BaseSheet

VARIANTER OG BESTILLING


SATIN MÅL
B X L (CM)

TOTAL MÅL
B X L (CM)

HMI-NR.

VARENR.


Mini

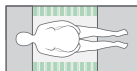

Immedia SatinSheet 2Direction – BaseSheet MINI

~ Mini 2D Small	60 x 105	195 x 105	84397	IM4133S
~ Mini 2D	70 x 105	195 x 105	36507	IM4108S
~ Mini 2D Wide	85 x 105	230 x 105	105032	IM4175S
~ Mini 2D Double	96 x 105	230 x 105	105033	IM4178S

Midi

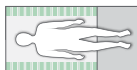

Immedia SatinSheet 2Direction – BaseSheet MIDI

~ Midi 2D Small	60 x 140	200 x 140	71081	IM4119S
~ Midi 2D	70 x 140	200 x 140	51082	IM4113S
~ Midi 2D Wide	85 x 140	230 x 140	105034	IM4176S
~ Midi 2D Double	96 x 140	230 x 140	105035	IM4179S
~ Midi 2D Corner ¹	65 x 140	85 x 200	124474	IM4157S
~ Midi 2D Corner ²	67 x 173	90 x 173	123762	IM4167S

NYHED!
MIDI 2D CORNER

Maxi



Immedia SatinSheet 2Direction – BaseSheet MAXI

~ Maxi 2D	70 x 200	200 x 200	51085	IM4114S
~ Maxi 2D Wide	85 x 200	230 x 200	105036	IM4177S
~ Maxi 2D Double	96 x 200	230 x 200	81149	IM4180S
~ Maxi 2D Corner ¹	65 x 200	85 x 200	49342	IM4107S
~ Maxi 2D Corner Wide ¹	80 x 200	105 x 200	103781	IM4147S
~ 2D Double Corner ¹	90 x 200	120 x 200	105029	IM4137S
~ Maxi 2D Fit ³	70 x 200	90 x 200	51083	IM4112S
~ Maxi 2D Fit Elastic ⁴	70 x 200	90 x 200	105037	IM4142S
~ 2D Double til dobbeltseng ⁵	60 x 200	280 x 200	71083	IM4122S

(1) Med elastiske hjørnebånd.


(2) Særligt velegnet til senge med ind- og udstigningsfunktion.

(3) Faconsyet lagen med låsebånd.

(4) Faconsyet lagen med elastik, samt huller til luftslanger.

(5) Satin placeret i siden, se illustration.

Double

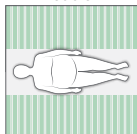

Immedia SatinSheet DrawSheet

DET ØVERSTE LAG: TRÆKLAGEN.

SatinSheet DrawSheet er designet til brug oven på SatinSheet BaseSheet. DrawSheet kan ikke benyttes alene. Brugeren ligger oven på DrawSheet, som kan trækkes i af plejeren på flere forskellige måder (Anvend altid korrekt forflytningsteknik). Dermed kan brugeren nemt drejes/forflyttes eller assisteres til dette.

VARIANTER AF DRAWSHEET

Der er to typer DrawSheet, som kan bruges afhængigt af brugerens funktionsniveau. (Se alle størrelsesvarianter på næste side).



*Mini BaseSheet
og 2Direction
Mini DrawSheet.*



*Midi BaseSheet
og 4Direction
Midi DrawSheet.*

SatinSheet 2Direction DrawSheet

For brugere der har brug for hjælp, kan et glidelagen kombineres med trækklaget: 2Direction DrawSheet. Dette bomuldslagen anvendes til sideværts bevægelse på sengen, men vil stoppe bevægelsen op og ned, så brugeren ikke glider ned i sengen. Vending lettes for plejeren og shear reduceres. SatinSheet 2Direction fås i 2 længder. Mini er 100 cm lang og Midi er 140 cm lang. Begge er 200 cm brede.

SatinSheet 4Direction DrawSheet

For brugere, der er afhængige af en hjælper, kan et glidelagen kombineres med trækklaget 4Direction DrawSheet. Dette er et bomuldslagen med en satin-underside, som placeres på glidelagnet og dermed tillader bevægelse op og ned - og sideværts. Det er nu muligt at positionere, dreje eller flytte en bruger op og ned i seng. Findes desuden i en inkontinens udgave (In2Sheet 4Direction), og i versioner med - og uden håndtag.

Immedia SatinSheet DrawSheet


VARIANTER OG BESTILLING

SATIN MÅL
B X L (CM)

TOTAL MÅL
B X L (CM)


HMI-NR.

VAREN.R.

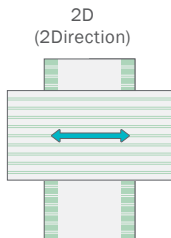

Immedia SatinSheet 2Direction – DrawSheet 2D

~ DrawSheet 2D Mini	200 x 100	51087	IM4116S
~ DrawSheet 2D Midi	200 x 140	51088	IM4118S

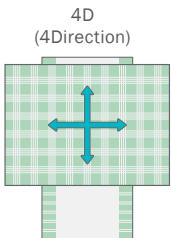

Immedia SatinSheet 4Direction – DrawSheet 4D (med satin)

~ DrawSheet 4D Midi	147 x 140	200 x 140	51086	IM4115S
~ DrawSheet 4D Midi med håndtag	147 x 140	200 x 140	103780	IM4115SH
~ DrawSheet 4D Maxi	147 x 200	200 x 200	71082	IM4121S
~ DrawSheet 4D Maxi med håndtag	147 x 200	200 x 200	105028	IM4121SH

Immedia SatinSheet In2Sheet 4Direction, Inkontinens DrawSheet 4D (med satin)

~ In2Sheet 4Direction med vinger - mini	85 x 90	71079	IM4110S
~ In2Sheet 4Direction med vinger og håndtag - Mini	85 x 90	103779	IM4110SH
~ In2Sheet 4Direction med vinger og håndtag - Midi	120 x 140	105027	IM4140SH

Immedia In2Sheet

INKONTINENSSTYKKE MED SATIN.

Immedia In2Sheet er et inkontinens glidestykke med lav friktion på undersiden. In2Sheet har håndtag langs siderne og kan anvendes med mobil- eller loftlift. Kombineres med alm. bomuldslagen i seng.



ANVENDELSESOMRÅDER:

- Inkontinensbrugere med nedsat funktionsniveau
- Vending i seng

BESKRIVELSE	SATIN B X L (CM)	TOTAL B X L (CM)	HMI-NR.	VARENR.
Immedia In2Sheet				
~ Inkontinensunderlag med håndtag	70 x 90	85 x 90	36573	IM4109
~ Inkontinensunderlag med håndtag	91 x 125	105 x125	105046	IM4128


Immedia 4WayGlide Mini & Midi

SYSTEM BLIVENDE I SENGEN - GLIDEMADRAS.

4WayGlide System består af 2 dele: et nylonlagen som fastgøres til sengemadrassen, samt en vendemadras der placeres over nylonlaget. Systemet benyttes til selvhjulpne brugere eller brugere med let nedsat funktionsniveau.



Immedia 4WayGlide Mini
komplet system (140 x 100 cm).

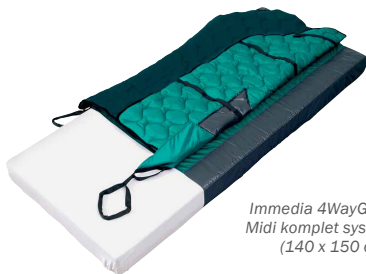

Immedia 4WayGlide
Midi komplet system
(140 x 150 cm).

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Blivende i sengen
- Vending
- Positionering
- Højere op i seng
- Kan anvendes med lift

BESKRIVELSE

B X L (CM)

HMI-NR. VARENR.

Immedia 4WayGlide Mini

~ Glidemadras

140 x 100

42394

IM140/100

~ Nylonlagen med NS-sider

160 x 100

42395

IM140/100NS

Immedia 4WayGlide Midi

~ Glidemadras

140 x 150

42391

IM140/150

~ Nylonlagen med NS-sider

160 x 150

42396

IM140/150NS

Immedia 4WayGlide LPL

SYSTEM BLIVENDE I SENGEN - GLIDEMADRAS.

*Immedia
4WayGlide LPL
inkl. nylonlagen
med 1 lås.*



*Immedia
4WayGlide LPL
inkl. nylonlagen
med 3 låse.*



ANVENDELSESOMRÅDER:

- Ved tunge brugere, smertebetingede eller brugere med tryksår
- Vending og positionering
- Forflytning højere op i seng
- Kan bruges sammen med lift



Scan koden for
instruktionsvideo



BESKRIVELSE

B X L (CM)

HMI-NR. VARENR.

Immedia 4WayGlide LPL

~ Glidemadras, bomuld/
polyester

140 x 210

46995

IM140/200LPL

Immedia 4WayGlide LPL Maxi

~ Glidemadras, bomuld/
polyester

180 x 210

45882

IM180/200LPL

Husk at bestille nylonlagner - se side 14-15

Immedia TwinSheet4Glide

SYSTEM BLIVENDE I SENGEN - INKONTINENS GLIDEMADRAS.

Komplet 2-delt
TwinSheet4Glide
system inkl.
nylonlagen.



TwinSheet4Glide
hel, inkl. nylonlagen.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Ved tunge brugere, smertebetingede eller brugere med tryksår
- Inkontinensoverflade
- Support i sideliggende stilling
- Personlig hygiejne og påklædning
- Vending og positionering
- Forflytning højere op i seng
- Kan bruges sammen med lift



Scan koden for
instruktionsvideo



BESKRIVELSE

B X L (CM)

HMI-NR.

VARENR.

Immedia TwinSheet4Glide

~ Glidemadras overdel	147 x 85	51203	IM150/75N
~ Glidemadras underdel	147 x 140	51204	IM150/140N
~ Glidemadras sæt bestående af: overdel (IM150/75N) og underdel (IM150/140N)	147 x 75/140	77559	IM4315
~ Hel glidemadras, Lang	147 x 200	83876	IM150/200N

Husk at bestille nylonlagner - se side 14-15

Immedia Nylonlagner til 4WayGlide LPL og TwinSheet4Glide



NYLONLAGEN

Standard nylonlagen uden låse-funktion og non-slip materiale.


Varenr. IM85/200 og IM120/200



NYLONLAGEN UDEN NS-LÅS MED NS-SIDER

Enkelt og nemt håndterbart nylonlagen, som anvendes hvis der ikke er behov for at låse under brugeren.


Varenr. IM85/200NS og IM90/200NS

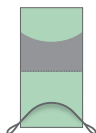

NYLONLAGEN MED NS-LÅS

Nylonlagen med én låse-funktion og uden non-slip kanten i siderne, således er liggende forflytning, f.eks. fra seng til seng, mulig. Dette lagen fungerer godt til store brugere.

Varenr. IM85/200LPL

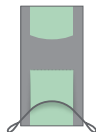

NYLONLAGEN MED NS-LÅS OG NS-SIDER


Standard nylonlagen med unik låse-funktion og non-slip materiale langs sengekanten.

Varenr. IM85/200LPLNS og IM110/200LPLNS



NYLONLAGEN-2XNS-LÅS OG NS-SIDER

Ved behov for at låse under skuldre og/eller ben, anvendes dette nylonlagen med to låsefelter. Varenr. IM85/2002LPL

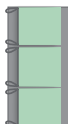

NYLONLAGEN-3XNS-LÅS OG NS-SIDER

For at højne fleksibiliteten, har dette nylonlagen 3 områder med låsefunktion, samt non-slip materiale langs sengekanten.

Varenr. IM85/2003LPL og IM120/2003LPL

BESKRIVELSE	B X L (CM)	HMI-NR.	VARENr.
Immedia Nylonagner			
~ Nylonagen	85 x 200	110831	IM85/200
~ Nylonagen uden NS-lås med NS-sider	85 x 200	39192	IM85/200NS
~ Nylonagen uden NS-lås med NS-sider	90 x 200	114948	IM90/200NS
~ Nylonagen med NS-lås	85 x 200	46996	IM85/200LPL
~ Nylonagen med NS-lås og NS-sider	85 x 200	46997	IM85/200LPLNS
~ Nylonagen - 2xNS-lås og NS-sider	85 x 200	105490	IM85/2002LPL
~ Nylonagen - 3xNS-lås og NS-sider	85 x 200	51036	IM85/2003LPL
~ Nylonagen Maxi med NS-lås og NS-sider	110 x 200	45883	IM110/200LPLNS
~ Nylonagen Maxi	120 x 200	121115	IM120/200
~ Nylonagen Maxi med 3xNS-lås og NS-sider	120 x 200	88432	IM120/2003LPL

Tilbehør til 4WayGlide LPL og TwinSheet4Glide



BESKRIVELSE	B X L X H (CM)	HMI-NR.	VARENr.
Immedia PU lagen (hvidt)			
~ 4WayGlide vandtæt lagen	140 x 220	38953	IM140/200PU
Immedia kile med non-slip betræk			
~ Positionering Wedge	30 x 20 x 53	34963	IM53NS
~ Positionering Wedge	30 x 20 x 80	36319	IM53/80NS

Immedia MultiGlide

GLIDESTYKKER I MANGE STØRRELSER.



Immedia
MultiGlide Glove i
vandtæt nylon.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Minimering af friktion under trykpunkter
- Vending
- Positionering
- Højere op i seng
- Fra seng til seng
- Kontrol af tryk ved brug af trykaflastende puder (Glove).

MultiGlide SpilerGlide er anvendelig til alle former for forflytninger, hvor man vil mindske friktionen under tyngdepunkterne. MultiGlide SG er glat på både yder- og indersiden.



Scan koden for
instruktionsvideo



BESKRIVELSE

B X L (CM)

HMI-NR.

VARENr.

Immedia MultiGlide SpilerGlide

~ Rørformet, sort strop	40 x 40	71062	IM0040
~ Rørformet, sort strop	60 x 60	49919	IM0066
~ Rørformet, sort strop	72 x 70	37508	IM0077
~ Rørformet, sort strop	72 x 100	37509	IM0080
~ Rørformet, sort strop	70 x 200	71063	IM0082
~ Rørformet, sort strop	200 x 70	84429	IM00200
~ Åben	150 x 70	51176	IM00150/70
~ Rulle (15m2)	150 x 1.000	38954	IM2245
~ Rulle (150m2)	150 x 10.000	71362	IM2249

Immedia MultiGlide Glove

~ MultiGlide Glove (1 par)	20 x 50	25457	IM35
----------------------------	---------	-------	------

Immedia MultiGlide Single Patient Use (SPU)

ENGANGS-GLIDESTYKKE.

Immedia MultiGlide Single Patient Use (SPU) er et engangsprodukt - et tyndt rørformet/åbent glide-stykke med meget lav friktion.



ANVENDELSESOMRÅDER:

- Minimering af friktion under trykpunkter
- Vending
- Positionering
- Højere op i seng
- Fra seng til seng

BESKRIVELSE

B X L (CM)

HMI-NR.

VARENr.

MultiGlide Single Patient Use - Rørformet (5 bokse á 10 stk)

~ SPU-Glide Large	73 x 190	84802	IM300
~ SPU-Glide Medium	73 x 145	84804	IM301

MultiGlide Single Patient Use - Åben (5 bokse á 20 stk)

~ SPU-Glide Open Large	200 x 85	84807	IM304
~ SPU-Glide Open Medium	145 x 100	84808	IM305
~ SPU-Glide Open Small*	100 x 100	110922	IM306

*5 bokse á 10 stk. 2 glidestykker i hver pose)

Dispenser

~ SPU-Dispenser, 1 stk	31 x 40		IM321/1
~ SPU-Dispenser, 10 stk	310 x 40		IM321

Immedia Drejepuder

ROTERING I SIDDENDE POSITION.

Immedia AutoTurn er en drejepude specielt velegnet til brug i bil. AutoTurn kan fastgøres til sæderyggen.



Immedia EasyTurn er en blød drejepude, der med fordel kan anvendes på arbejdspladser hvor personalet ofte skal ind/ud af bilen, eksempelvis hjemmeplejen.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Ind/ud af bil
- Ind/ud af seng

BESKRIVELSE	Ø (CM)	HMI-NR.	VARENR.
Immedia			
~ AutoTurn, drejepude til bil	45	51256	IM99999
~ EasyTurn, drejepude	40	32958	IM999405
~ EasyTurn, drejepude	45	30264	IM990454
~ EasyTurn, drejepude	50	34894	IM999505

Immedia OneWayGlide

KONTROLLERET OG NEM POSITIONERING.



*Immedia OneWayGlide
non-slip rørformet glidepude.*



*Immedia
OneWayGlide
glidepude.*



*Immedia OneWayGlide
velour rørformet
glidepude.*



*Immedia
OneWayGlide Long med
håndtag og bånd.*

ANVENDELSESOMRÅDER:


- Tilbage i kørestol/stol

BESKRIVELSE	B X L (CM)	HMI-NR.	VARENr.
Immedia OneWayGlide			
~ Rørformet non-slip	43 x 37	12693	IM39/8
~ Rørformet non-slip	45 x 45	14925	IM38/8
~ Rørformet velour	43 x 37	31756	IM45/8
~ Rørformet velour	50 x 42	51182	IM50/8
~ Enkeltlag, velour	43 x 37	31757	IM44/8
~ Long, velour, håndtag, bånd	40 x 130	71072	IM33/8
~ Long	40 x 130	36320	IM34/8
~ Long	45 x 130	87335	IM51/8

Immedia Glidebrætter

LØSNINGER TIL SIDDENDE FORFLYTNINGER.

*Butterfly med
Glidevinge.*

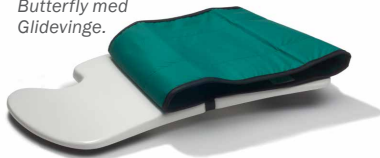

*Immedia
3B-Board's længde
tillader forflytning over
større afstande.*



Immedia E-Board.



ANVENDELSESOMRÅDER:

- Seng til kørestol/badestol etc.
- Ind/ud af bil
- Forflytning mellem kørestol, stol, toilet, badestol, badetaburet



Scan koden for
instruktionsvideo



BESKRIVELSE	B X L (CM)	HMI-NR.	VARENr.
Immedia Glidebrætter			
~ 3B-Board, buet, hvid	23 x 77	45118	IM403
~ E-Board Small, sort	20 x 45 x 0,6	51180	IM410
~ E-Board Medium, sort	25 x 60 x 0,6	51179	IM408
~ Butterfly	32 x 66	12725	IM401
~ Butterfly Glidevinge L	35 x 40	48919	IM4001
~ Butterfly Glidevinge XL	35 x 47.5	48920	IM4002

Immedia 2Move

KOMFORTABEL OG SIKKER FORFLYTNING MELLEM TO LIGGEFLADER.

*Immedia 2Move
forflytningsplade
uden betræk.*



*Immedia 2Move
forflytningsplade
med betræk.*



ANVENDELSESOMRÅDER:

- Forflytning mellem 2 lejer, -senge, badebåre, operationsleje, røntgen etc.

BESKRIVELSE

B X L (CM)

HMI-NR.

VARENr.

Immedia 2Move forflytningsplade og vandtæt betræk (sæt)

~ 2Move str. Small + vandtæt betræk	50 x 95	105494	IM4319
~ 2Move str. Large, foldbar + vandtæt betræk	50 x 190	105495	IM4318
~ 2Move str. Large, ikke foldbar + vandtæt betræk	50 x 190	105496	IM4320
~ 2Move str. X-large, bred foldbar + vandtæt betræk	70 x 190	105497	IM4321
~ Engangsbetræk str. Small (100 stk.)	60 x 100		IM4035
~ Engangsbetræk str. Large (40 stk.)	60 x 210		IM4034
~ Engangsbetræk str. X-large (40 stk.)	80 x 210		IM4036

Immedia Sling og OneManSling

MULTIFUNKTIONEL FORFLYTNINGSHJÆLP.

Immedia Sling er et fleksibelt hjælpemiddel der giver hjælperen mulighed for et ergonomisk greb. Indersiden er forsynet med non-slip.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Højere op i seng
- Seng til kørestol
- Op at stå/sidde ned
- Tilbage i stol/kørestol



Immedia OneManSling gør det muligt for én hjælper at forflytte brugeren højere op i sengen. Ved at fæstne OneManSling i sengerammen ved hovedgærdet kan hjælperen med minimal kraft forflytte brugeren højere op i sengen.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Højere op i seng
- Forflytte ben ind/ud af seng



BESKRIVELSE	B X L (CM)	HMI-NR.	VARENr.
Immedia Sling			
~ Lang, 2 x 4 håndtag	16 x 190	20655	IM428
~ Kort, 2 x 4 håndtag	16 x 120	71091	IM428K
Immedia OneManSling			
~ 6 håndtag	7,5 x 300	51606	IM460PU

Immedia BedString

SENGBÅND.



*Immedia BedString
sengebånd med
8 håndtag.*

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Selvhjulpenshed til den aktive bruger
- Højere op i seng
- Positionering i seng

BESKRIVELSE	B X L (CM)	HMI-NR.	VARENR.
Immedia BedString ~ BedString med håndtag	8,5 x 170	51188	IM429

Immedia NonSlip

ANTISKRIDMATERIALE.



NonSlip Square er en NonSlip måtte, som kan anvendes til forflytninger hvor høj friktion er ønsket. NonSlip Square kan placeres under fødderne for at øge friktionen og lette brugeren ved at skubbe fra med benene i forbindelse med forflytninger højere op i sengen.



NonSlip på rulle med bredde på 150 cm.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- NonSlip kan anvendes i alle situationer, hvor man ønsker at øge friktionen.
- Immedia NonSlip på rulle er et NonSlip materiale med bredde på 150 cm.

BESKRIVELSE

B X L X H (CM) HMI-NR. VARENR.

Immedia NonSlip

~ Square, NonSlip måtte	38 x 48 x 0,5	71071	IM2248
~ Rulle, metermål 5 m (7,5 m ²), grå	150 X 500	50726	IM2246
~ Rulle, metermål 30 m (45 m ²), grå	150 x 3000	50725	IM2247

Immedia Absorberende underlag

ABSORBERINGSEVNE: 2200 ML/M².



De absorberende underlag er udført i en 4-lags konstruktion, hvorved urin, blod, vand og andre væsker bliver transporteret væk fra kroppen og ned i det absorberende mellemlag. Alle 4 lag er lamineret sammen, dermed sikres en komfortabel og jævn liggeflade.

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Opsuger og transporterer væsker væk fra kroppen.

BESKRIVELSE

B X L (CM)

HMI-NR. VARENr.

Immedia Absorberende Underlag

~ Hvid/blå, bomuld på overside	110 x 160	47690	IM110160/B
~ Grøn/blå, mikrofiber på overside	110 x 160	47689	IM110160/M

Molift Raiser Pro NYHED!

FORFLYTNINGSPLATFORM TIL AKTIVE FORFLYTNINGER.



Forflytningsplatformen Molift Raiser Pro er udformet til at give brugeren en aktiv og sikker forflytning samt de bedst mulige forudsætninger for et ergonomisk arbejdsmiljø for hjælperen.



Ergonomisk håndtag med mange grebsmuligheder.



Underbenstøtten højdereguleres med kun én hånd.



Centralbremse låser med en tydelig klik-lyd.



Alu-fodplade med lav indstigningshøjde, kun 35 mm.

Tilbehør



Molift Soft Handles, bløde oprejsningshåndtag.



Molift Raiser Strap, oprejsningsstøtte (tryghedsbånd).



Molift Raiser Strap+ oprejsningsstøtte (tryghedsbånd) med glidemuffe.



Molift Raiser Belt Oprejsningsstøtte (tryghedsbånd).

ANVENDELSESOMRÅDER:

- Seng til stol
- Tilbage i stol
- Stol til stol
- Stå op/sidde ned eller lignende



Scan koden for at se præsentationsvideo



BESKRIVELSE

B X L X H (CM)

HMI-NR.

VARENR.

Molift

~ Raiser Pro 54x63x120 115155 16090204

Tilbehør –Molift

~ Oprejsningshåndtag Molift Soft Handles, 2 stk - 82511

~ Tryghedsbånd Molift Raiser Strap S/M 71253 82508

~ Tryghedsbånd Molift Raiser Strap L/XL 71254 82509

~ Glidemuffe 82537

~ Tryghedsbånd Molift Raiser Strap+ S/M 71255 82528
(Varenr. 82508 + 82537)

~ Tryghedsbånd Molift Raiser Strap+ L/XL 71256 82529
(Varenr. 82509 + 82537)

~ Tryghedsbånd Molift Raiser Belt S/M 105001 82964
(Varenr. 82508 + 82963)

~ Tryghedsbånd Molift Raiser Belt L/XL 105002 82965
(Varenr. 82509 + 82963)


Lück Rhombo-med® Lejringsrulle



Lejringsrullen kan bøjes, formes og tilpasses præcis efter brugerens behov.

Er meget velegnet til brugere, der er hjerneskadede eller demente, da den giver en god taktil stimulation.

ANVENDELSESOMRÅDER:

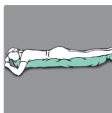

BESKRIVELSE

HMI-NR.

VARENR.

VARENR.

VARENR.

Puder

Ø 20 x L 220 cm

42985

3546200

Bomulds- betræk

3551201

Hygiejne- betræk*

3552201

Ø 20 x L 100 cm

61852

3546100

3551101

3559101

Ø 12 x L 140 cm

62378

3546500

3551501

3559501

* Flammehæmmende materiale

Lück Rhombo-med® Rygstøttepude med fane



Brugeren ligger i sideleje, på fanen, således at brugerens egen vægt holder puden på plads, og ryggen støttes præcist og stabilt.

Lück Rhombo-med® Rhombi Støttepude

Rhombi er en lille støttepude, som placeres hvor der opstår mindre hulrum mellem krop og madras, når en person lejes.



BESKRIVELSE

HMI-NR.

VAREN.R.

VAREN.R.

VAREN.R.

Rygstøttepude med fane

H 65 x B 90 cm

17931

3541937

Bomulds-
betræk

-

Hygiejne-
betræk*

-

Rhombi Støttepude

H 15 x B 30 cm

51491

3546900

3551901

3559901

* Flammehæmmende materiale

Lück Rhombo-med® Kanalsyet pude

Fleksibel pude, som beskytter, støtter og aflaster. Den kan f.eks. formes og placeres under læggene for at aflaste hælene.



Kilepude


Kilepuden kan bl.a. anvendes under bækken, brystkasse eller skulderåg.



BESKRIVELSE	HMI-NR.	VARENr.	VARENr.	VARENr.
Kanalsyet pude			Bomulds- betræk	Hygiejne- betræk*
H 75 x B 75 cm	42987	3543077	3551077	3559077
Kilepude				
25 x 20 x 10 cm	62367	3546400	3551401	3559401
* Flammehæmmende materiale				

Lück Rhombo-med® Lejringspude

Lejringspuderne kan blandt andet anvendes i rygliggende leje for at lette vejrtrækningen.

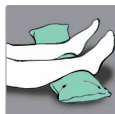

Lück Rhombo-fill® Nakkepude



Anvendes til at give et stabilt og aflastende leje, når en hovedpude ikke er hensigtsmæssig.



BESKRIVELSE

HMI-NR.

VAREN.R.

VAREN.R.

VAREN.R.

Lejringspude

H 20 x B 30

62379

3540202

Bomulds-
betræk

3551002

Hygiejne-
betræk*

-

H 25 x B 80

28149

3540205

3551005

3552005

H 30 x B 40

17863

3540206

3551006

3559006

Nakkepude

Ø 40 cm

12324

3532586

3551086

3559086

* Flammehæmmende materiale



Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og udstyr til forflytning og patienthåndtering. Vores hjerte banker for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, deres familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og opdateret produktinformation på www.etac.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac[®]
Creating Possibilities