



# Puder til kørestole

Luftpuder, komfortpuder  
og standardpuder

 **etac**<sup>®</sup>



# Etac Antidecubitus

Nogle gange tager det kun et par minutter at udvikle et tryksår, men det kan tage flere måneder at hele. Forebyggelse af tryksår er hverken kompliceret eller dyrt. Det er heling af tryksår, der giver samfundet enorme udgifter. Forskning viser, at over 95 % af alle tryksår kan forhindres.\*

## Deformering af vævet kan resultere i tryksår

Forskningen inden for tryksår har de seneste 10-15 år fokuseret på deformeringsprocesser i belastet væv. Disse processer opstår som en kombination af tryk og forskydning (shear), når vævet skubbes væk omkring knoglefremspring, når man forflyttes, sidder eller ligger ned.

Forskningen viser også, at omfanget af og hastigheden, hvormed vævet deformeres, i høj grad påvirkes af materialet der berører de kritiske områder, hvilket for kørestolsbrugere er lig med siddepuden.

(Loerakker 2010, Levy 2013)

## Nedsynkning og omslutning reducerer deformation af vævet

En siddende person bør synke ned i puden, og puden skal omslutte kropsvævet. Det vil reducere deformationen af vævet og fordele kropsvægten over et større område, hvilket igen reducerer deformationen af vævet.

(Sprigle 2005)



## Risikoanalyse

For at vurdere en persons risiko for at udvikle et tryksår bør man benytte risikoanalyse-skalaer som f.eks. Braden eller Nortons.

## Kategorier af tryksår

Tryksår kan opdeles i 4 kategorier:

### Tryksår kategori I:

Intakt hud med nogen rødme, intakt kapillærrespons.

### Tryksår kategori II:

Blære eller overfladisk sår med rød rosa sårbund.

### Tryksår kategori III:

Sår gennem hele hudens tykkelse og med synlig subkutant fedt.

### Tryksår kategori IV:

Sår gennem hele hudens tykkelse og med påvirket muskler og evt. knogle.

Bemærk, at et tryksår i kategori 1 bør behandles som et sår og ikke blot som hudrødme.

Læs mere på [www.EPUAP.org/puclas](http://www.EPUAP.org/puclas)

\* NPUAP sammenlignede omkostningerne ved PU-behandling med omkostningerne til forebyggende tiltag. Resultat: Forebyggelse er omkostningsbesparende (Barbara Braden 2012).

Jonas er 44 år gammel og har siddet i kørestol siden 2005, hvor han kom til skade ved kitesurfing. Han fik et knoglebrud ved TH 7/8. I dag lever han et aktivt liv med arbejde og familie.

Jonas er lige begyndt at bruge en Star Stabil Air-pude og er imponeret over komforten og stabiliteten.



## Luftpude StarLock s. 4

Patenteret låsning af luftceller giver individuelle positioneringsmuligheder med maksimal trykaflastning. Puden fås i 4 højder.



## Luftpude Star Galaxy s. 8

Pudens anatomiske form og individuelle justering af lufttrykket for og bag, optimerer positionering af brugeren.



## Luftpude Star Stabil Air s. 10

Kombination af luft og anatomisk formet skum, giver stabilitet og aflastning.



## Luftpude Star Standard Air s. 12

Enkel og let indstillelig luftpude. Brugeren opnår god komfort og omslutning af bækkenet. Puden fås i 2 højder.



## Etac Komfortpude s. 16

Anatomisk formet pude i viskoelastisk skum. Aftageligt indlæg for yderligere tilpasning. Velour- eller hygiejnebetræk



## Etac Standardpude s. 18

Anatomisk formet sædepude med velour- eller hygiejnebetræk.





# StarLock

StarLock-puden kombinerer god trykfordeling med næsten ubegrænsede positioneringsmuligheder og stabilitet.

## Teknologi til luftcellelåsning


Indenfor luftcellepuder har det altid været vanskeligt at opnå den bedste kombination af trykfordeling, positionering og stabilitet. Denne udfordring løser StarLock på elegant vis.

Takket være den patenterede Cell Locking-teknologi kan luftgennemstrømningen mellem luftcellerne i StarLock låses og dermed skræddersys til brugerens behov for positionering og stabilitet, samtidig med at puden beholder sine trykfordelende kvaliteter. Star-puder sikrer det højeste niveau af terapeutisk forebyggelse og behandling af tryksår for alle tryksårskategorier sammen med unikke positioneringsmuligheder og stabilitet. Starlock fås i 5, 7,5, 10 og 13 cm højde. Starlock-puden kan også nemt anvendes som en pude med ét kammer.




Star-puder leveres komplet med formsyet og strækbart betræk, håndpumpe, reparationskit og manual.

## Funktioner

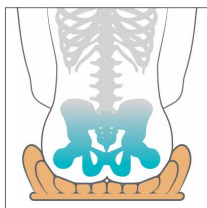


### Nedsynkning og omslutning

Brugeren kan synke ned i puden. StarLock med høje celler giver den bedste omslutning.

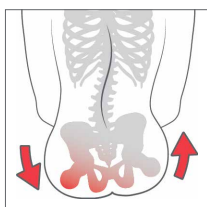

### Korrektion af asymmetri i bækkenet

Giver en stabil siddestilling. Cell lock-teknologien giver en individuel og præcis korrektion af bækkenasymmetrier.

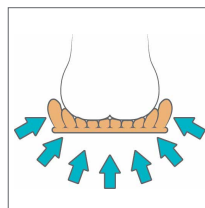


### Trykfordeling

Fremragende trykfordelingsegenskaber. For brugere med svære tryksår i sædemusklerne anbefaler vi en StarLock med en cellehøjde på 13 cm.



Foruden perfekt trykfordeling giver StarLock også optimale betingelser for at gå stolen frem.

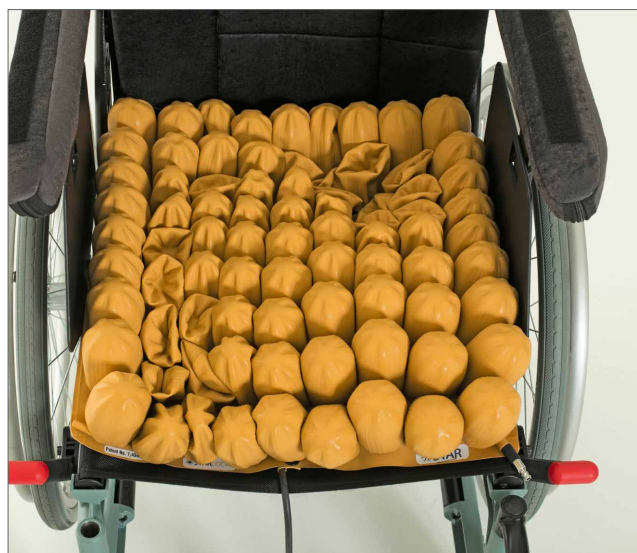

For at opnå optimale betingelser for at gå stolen frem (som vist på billedet til venstre), har luftpudens forkant et lavere lufttryk i højre side. Dermed kan højre fod nå gulvet - og venstre lår og bækken er fortsat godt understøttet.

Perfekt trykfordeling og en stabil position, der fremmer aktivitet.



## Bestilling StarLock

StarLock 5 cm			StarLock 7,5 cm			StarLock 10 cm			StarLock 13 cm		
Mål (B x D)	Varenr.	HMI-nr	Varenr.	HMI-nr	Varenr.	HMI-nr	Mål (B x D)	Varenr.	HMI-nr		
26 x 26 cm	ESSL20909-1	103469	ESSL30909-1	81678	ESSL40909-1	103365	26 x 26 cm	ESSL51010-1	80336		
26 x 30 cm	ESSL20911-1	103470	ESSL30911-1	81688	ESSL40911-1	103366	26 x 30 cm	ESSL51012-1	80352		
26 x 34 cm	ESSL20913-1	103471	ESSL30913-1	81689	ESSL40913-1	103367	26 x 36 cm	ESSL51014-1	80354		
30 x 26 cm	ESSL21109-1	103472	ESSL31109-1	81756	ESSL41109-1	103368	30 x 26 cm	ESSL51210-1	80355		
30 x 30 cm	ESSL21111-1	103473	ESSL31111-1	81757	ESSL41111-1	82076	30 x 30 cm	ESSL51212-1	80353		
30 x 34 cm	ESSL21113-1	103474	ESSL31113-1	81758	ESSL41113-1	82077	30 x 36 cm	ESSL51214-1	80356		
30 x 39 cm	ESSL21115-1	103475	ESSL31115-1	81759	ESSL41115-1	82620	30 x 41 cm	ESSL51216-1	80357		
34 x 26 cm	ESSL21309-1	103476	ESSL31309-1	81760	ESSL41309-1	103369	36 x 26 cm	ESSL51410-1	80358		
34 x 30 cm	ESSL21311-1	103477	ESSL31311-1	81761	ESSL41311-1	82078	36 x 30 cm	ESSL51412-1	80359		
34 x 34 cm	ESSL21313-1	103478	ESSL31313-1	81762	ESSL41313-1	82079	36 x 36 cm	ESSL51414-1	80360		
34 x 39 cm	ESSL21315-1	103479	ESSL31315-1	81763	ESSL41315-1	82080	36 x 41 cm	ESSL51416-1	80361		
34 x 44 cm	ESSL21317-1	103480	ESSL31317-1	81764	ESSL41317-1	82081	36 x 46 cm	ESSL51418-1	80363		
39 x 30 cm	ESSL21511-1	103481	ESSL31511-1	81765	ESSL41511-1	82082	41 x 30 cm	ESSL51612-1	80362		
39 x 34 cm	ESSL21513-1	103482	ESSL31513-1	81766	ESSL41513-1	82083	41 x 36 cm	ESSL51614-1	80364		
39 x 39 cm	ESSL21515-1	103483	ESSL31515-1	81767	ESSL41515-1	48426	41 x 41 cm	ESSL51616-1	80365		
39 x 44 cm	ESSL21517-1	103484	ESSL31517-1	81768	ESSL41517-1	48425	41 x 46 cm	ESSL51618-1	80366		
39 x 49 cm	ESSL21519-1	103485	ESSL31519-1	81769	ESSL41519-1	80277	41 x 51 cm	ESSL51620-1	80427		
39 x 53 cm	ESSL21521-1	103486	ESSL31521-1	103363	ESSL41521-1	80278	41 x 56 cm	ESSL51622-1	80369		
44 x 34 cm	ESSL21713-1	103487	ESSL31713-1	103364	ESSL41713-1	103370	46 x 36 cm	ESSL51814-1	80367		
44 x 39 cm	ESSL21715-1	103488	ESSL31715-1	82623	ESSL41715-1	48427	46 x 41 cm	ESSL51816-1	80368		
44 x 44 cm	ESSL21717-1	103489	ESSL31717-1	81770	ESSL41717-1	48428	46 x 46 cm	ESSL51818-1	80370		
44 x 49 cm	ESSL21719-1	103490	ESSL31719-1	81771	ESSL41719-1	48429	46 x 51 cm	ESSL51820-1	80371		
44 x 53 cm	ESSL21721-1	103491	ESSL31721-1	81772	ESSL41721-1	80279	46 x 56 cm	ESSL51822-1	80372		
49 x 39 cm	ESSL21915-1	103492	ESSL31915-1	81773	ESSL41915-1	80280	51 x 41 cm	ESSL52016-1	80373		
49 x 44 cm	ESSL21917-1	103493	ESSL31917-1	81774	ESSL41917-1	80281	51 x 46 cm	ESSL52018-1	80374		
49 x 49 cm	ESSL21919-1	103494	ESSL31919-1	81775	ESSL41919-1	80282	51 x 51 cm	ESSL52020-1	80375		
49 x 53 cm	ESSL21921-1	103495	ESSL31921-1	81776	ESSL41921-1	80283	51 x 56 cm	ESSL52022-1	80376		
53 x 39 cm	ESSL22115-1	103496	ESSL32115-1	82632	ESSL42115-1	80288	56 x 41 cm	ESSL52216-1	80377		
53 x 44 cm	ESSL22117-1	103497	ESSL32117-1	81778	ESSL42117-1	80284	56 x 46 cm	ESSL52218-1	80378		
53 x 49 cm	ESSL22119-1	103498	ESSL32119-1	81777	ESSL42119-1	80286	56 x 51 cm	ESSL52220-1	80379		
53 x 53 cm	ESSL22121-1	103499	ESSL32121-1	81779	ESSL42121-1	80287	56 x 56 cm	ESSL52222-1	80380		

## Tilbehør og reservedele



### Inkontinensbetræk

Formsyet og strækbart i 4 retninger. Materiale: Vandtæt og åndbart stof på top og sider. Antiskrid på undersiden.

Varenr. ESICCSL(+de første 5 tal i varenr. for puden)  
Eks. **ESICCSL20909**



### Star pumpe

(Reservedel)

Varenr. ESHP



### Standardbetræk

Formsyet og strækbart i 4 retninger. Materiale: lycra, antiskrid på undersiden.

(Reservedel)

Varenr. ESFCSL(+de første 5 tal i varenr. for puden)  
Eks. **ESFCSL20909**



### Reparationskit


(Reservedel)

Varenr. ESRK

## Sådan justeres StarLock lufttrykket




- Pump puden op
- Placer brugeren på puden
- Luk luft ud, samtidig med, at du tjekker luftmængden i puden.

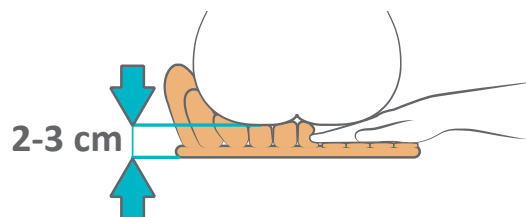

- Tjek med hånden; der skal være en afstand på 2-3 cm mellem pudens bund og brugerens bagdel.
- Når der er asymmetri, skal den laveste side altid tjekkes først.
- Hvis det er nødvendigt, kan der pumpes mere luft i, mens brugeren sidder på puden.
- Med højere celler vil brugeren synke dybere ned i puden, og trykfordelingen øges.

## Sådan justeres StarLock luftlås


StarLock pudens unikke låsesystem skaber stabilitet. Når låsesystemet aktiveres, lukkes alle forbindelserne mellem cellerne, således luftindholdet i hver enkelt celle forbliver stabilt.

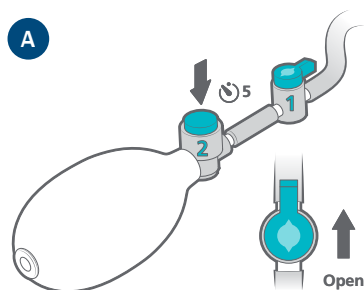


A. Kontrollér, at luftlåsen (1) "den lille hane" er drejet parallelt med slangen så håndtaget løber langs slangen (åben).

Tryk på knap (2) i 5 - 10 sekunder indtil låselommerne er tomme for luft.

Placér brugeren i den ønskede stilling, hold denne stilling i 10 sekunder.

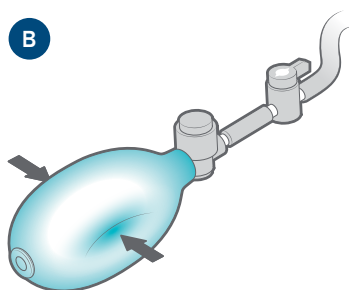

B. Klem den røde pumpebold sammen ca. 15 - 20 gange, indtil der er betydelig modstand i den.

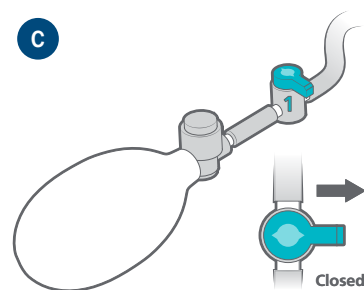

C. Drej håndtaget (1) for at låse indstillingen. Pudens låsesystem isolerer luften i cellerne individuelt, så indstillingen forbliver den samme. Der er nu opnået stabilitet i puden.

### Vedligehold

Se side 15 for info om rengøring og vedligehold.





# Star Galaxy

Galaxy puden med to separate kamre: et fortil og et bagtil, kombinerer flercellet luftteknologi med et patenteret, anatomisk formet design, som støtter specifikke områder og passer til den anatomiske form.

## Unikt formede celler

Galaxy puden har unikt anatomisk formede celler. Den anatomiske form giver også øjeblikkelig nedsenkning og omslutter brugerens kropsstruktur. Den har gode trykfordelingsegenskaber. Da Galaxy er delt i to kamre, kan lufttrykket indstilles separat for den følsomme region bagtil.




Ventil til kammer bagtil

Ventil til kammer fortil


Star-puder leveres komplet med formsyet og strækbart betræk, håndpumpe, reparationskit og manual.




## Funktioner

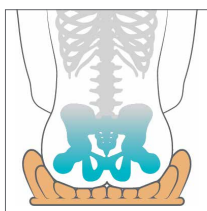

**Nedsynkning og omslutning**  
Forkonturerede puder for en symmetrisk position. Omslutter kroppens struktur på optimal vis.

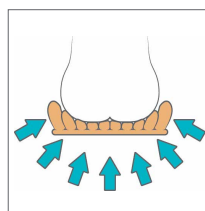

**Trykfordeling**  
Fremragende trykfordeling.

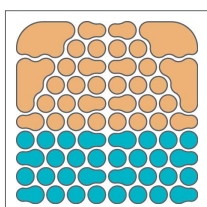

**Justerbar fra forside til bagside**  
Juster luften under siddekogleområdet, der er adskilt fra det forreste område, som understøtter lårene.

### Justering og vedligehold

Se side 14-15 for justeringsmuligheder af lufttryk, samt info om rengøring og vedligehold.

## Bestilling Star Galaxy

Galaxy 4-8 cm		
Mål (B x D)	Varenr.	HMI-nr.
36 x 36 cm	ESGXY1414-2F	103377
36 x 41 cm	ESGXY1416-2F	103378
41 x 36 cm	ESGXY1614-2F	103386
41 x 41 cm	ESGXY1616-2F	103379
41 x 46 cm	ESGXY1618-2F	103380
46 x 41 cm	ESGXY1816-2F	103381
46 x 46 cm	ESGXY1818-2F	103382
46 x 51 cm	ESGXY1820-2F	89567
51 x 41 cm	ESGXY2016-2F	103383
51 x 46 cm	ESGXY2018-2F	103384
51 x 51 cm	ESGXY2020-2F	103385



## Tilbehør og reservedele



### Inkontinensbetræk

Formsyet og strækbart i 4 retninger. Materiale: Vandtæt og åndbart stof på top og sider. Antiskrid på udersiden.

Varenr. ESICCGXY(+de første 4 tal i varenr. for puden)  
Eks. ESICCGXY**1414**



### Star pumpe

(Reservedel)

Varenr. ESHP



### Standardbetræk

Formsyet og strækbart i 4 retninger. Materiale: lycra, antiskrid på undersiden. (Reservedel)

Varenr. ESFCGXY(+de første 4 tal i varenr. for puden)  
Eks. ESFCGXY**1414**



### Reparationskit

(Reservedel)

Varenr. ESRK



# Star Stabil Air

Stabil Air-puden er den perfekte sammensætning af en luftcellepude og bløde skumrør indeni hver eneste luftcelle.

## Stabil Air - den nye generation af luftcellepuder

Skumrørene i Stabil Air-puden har forskellig højde. Rørene på ydersiden er højere, mens rørene under brugerens bagdel, haleben og ben er lavere. Det skaber et anatomisk formet ekstra lag, der giver yderligere beskyttelse af huden. Det øger stabiliteten og gør forflytning til og fra puden nemmere.


Stabil Air er en flercellet pude med ét kammer, som er let at anvende, og som giver stabilitet.



Star-puder leveres komplet med formsyet og strækbart betræk, håndpumpe, reparationskit og manual.




- Hver enkelt celle har et indbygget blødt skumrør i polyurethanskum
- Alle luftceller er 7,5 cm høje
- Skumrørene skaber et anatomisk formet design med højere rør på de laterale sider
- Stabil Air er den nye generation af luftcellepuder med ét kammer.

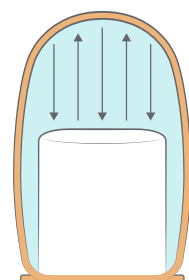


## Bestilling Star Stabil Air

Star Stabil Air 7,5 cm		
Mål (B x D)	Varenr.	HMI-nr.
26 x 26 cm	ESSA30909-1	103402
26 x 30 cm	ESSA30911-1	103403
26 x 34 cm	ESSA30913-1	103404
30 x 26 cm	ESSA31109-1	103405
30 x 30 cm	ESSA31111-1	103406
30 x 34 cm	ESSA31113-1	103407
30 x 39 cm	ESSA31115-1	103408
34 x 26 cm	ESSA31309-1	103409
34 x 30 cm	ESSA31311-1	103410
34 x 34 cm	ESSA31313-1	103411
34 x 39 cm	ESSA31315-1	103412
34 x 44 cm	ESSA31317-1	103413
39 x 30 cm	ESSA31511-1	103414
39 x 34 cm	ESSA31513-1	103415
39 x 39 cm	ESSA31515-1	103416
39 x 44 cm	ESSA31517-1	103417
39 x 49 cm	ESSA31519-1	103418
39 x 53 cm	ESSA31521-1	103419
44 x 34 cm	ESSA31713-1	103420
44 x 39 cm	ESSA31715-1	103421
44 x 44 cm	ESSA31717-1	103422
44 x 49 cm	ESSA31719-1	103423
44 x 53 cm	ESSA31721-1	103424
49 x 39 cm	ESSA31915-1	103425
49 x 44 cm	ESSA31917-1	103426
49 x 49 cm	ESSA31919-1	103427
49 x 53 cm	ESSA31921-1	103428
53 x 39 cm	ESSA32115-1	103429
53 x 44 cm	ESSA32117-1	103430
53 x 49 cm	ESSA32119-1	103431
53 x 53 cm	ESSA32121-1	103432


## Funktioner

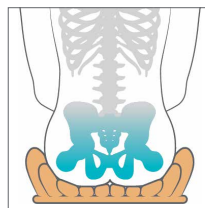

**Nedsynkning og omslutning**  
Tillader, at brugeren synker ned i puden.  
Omslutter kroppens struktur på optimal vis.

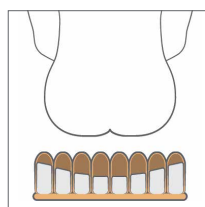

**Anatomisk formet skum**  
Den indbyggede skum øger stabiliteten og gør forflytning til og fra puden nemmere.  
Samtidig er brugeren stadig sikret, hvis puden skulle miste luft.

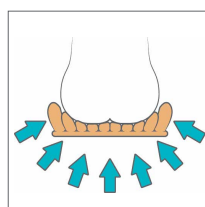

**Trykfordeling**  
Gode trykfordelingsegenskaber.

### Justering og vedligehold

Se side 15 for justeringsmuligheder af lufttryk, samt info om rengøring og vedligehold.

## Tilbehør og reservedele



### Inkontinensbetræk

Formsyet og strækbart i 4 retninger.  
Materiale: Vandtæt og åndbart stof på top og sider. Antiskrid på udersiden.

Varenr. for betræk til Stabil Air 7,5 cm:  
ESICC3(+de første 4 tal i varenr. for puden).  
Eks. **ESICC30909**



### Star pumpe

(Reservedel)

Varenr. ESHP



### Standardbetræk

Formsyet og strækbart i 4 retninger.  
Materiale: lycra, antiskrid på undersiden.  
(Reservedel)

Varenr. for betræk til Stabil Air 7,5 cm:  
ESFC3(+de første 4 tal i varenr. for puden).  
Eks. **ESFC30909**



### Reparationskit

(Reservedel)

Varenr. ESRK



# Star Standard Air

Luftcellepude med ét kammer med fremragende trykfordelingsegenskaber.

## Gode nedsynkningsegenskaber med glimrende omslutning


Trykfordelingen fås ikke bedre end med de omslutningsegenskaber, som Standard Air-pudserien med ét kammer har. Neoprencellernes fleksibilitet gør, at de former sig omkring bagdelen, så deformation af væv holdes på et meget lavt niveau.

Standard Air fås i to forskellige højder; 5 og 10 cm. Jo højere celler, jo bedre trykfordelingsegenskaber.




Star-puder leveres komplet med formsyet og strækbart betræk, håndpumpe, reparationskit og manual.

## Funktioner

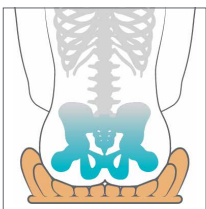

### Nedsynkning og omslutning

Brugeren kan synke ned i puden.  
Omslutter kroppens struktur på optimal vis.

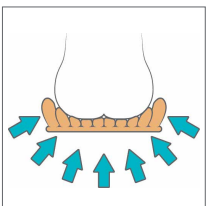

### Trykfordeling

Fremragende trykfordeling.

## Justering og vedligehold

Se side 15 for justeringsmuligheder af lufttryk,  
samt info om rengøring og vedligehold.



## Bestilling Star Standard Air

Mål (B x D)	Standard Air 5 cm		Standard Air 10 cm	
	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	HMI-nr.
26 x 26 cm	ESSCS0909-1	103433	ESSC0909-1	103371
26 x 30 cm	ESSCS0911-1	103434	ESSC0911-1	103372
26 x 34 cm	ESSCS0913-1	103435	ESSC0913-1	103373
30 x 26 cm	ESSCS1109-1	103436	ESSC1109-1	103374
30 x 30 cm	ESSCS1111-1	103437	ESSC1111-1	103375
30 x 34 cm	ESSCS1113-1	103438	ESSC1113-1	82126
30 x 39 cm	ESSCS1115-1	103439	ESSC1115-1	82138
34 x 26 cm	ESSCS1309-1	103440	ESSC1309-1	82139
34 x 30 cm	ESSCS1311-1	103441	ESSC1311-1	82140
34 x 34 cm	ESSCS1313-1	103442	ESSC1313-1	82141
34 x 39 cm	ESSCS1315-1	103443	ESSC1315-1	82142
34 x 44 cm	ESSCS1317-1	103444	ESSC1317-1	48462
39 x 30 cm	ESSCS1511-1	103445	ESSC1511-1	103376
39 x 34 cm	ESSCS1513-1	103446	ESSC1513-1	82144
39 x 39 cm	ESSCS1515-1	103447	ESSC1515-1	82145
39 x 44 cm	ESSCS1517-1	103448	ESSC1517-1	48463
39 x 49 cm	ESSCS1519-1	103449	ESSC1519-1	82147
39 x 53 cm	ESSCS1521-1	103450	ESSC1521-1	82148
44 x 34 cm	ESSCS1713-1	103451	ESSC1713-1	82149
44 x 39 cm	ESSCS1715-1	103452	ESSC1715-1	82150
44 x 44 cm	ESSCS1717-1	103453	ESSC1717-1	48466
44 x 49 cm	ESSCS1719-1	103454	ESSC1719-1	48467
44 x 53 cm	ESSCS1721-1	103455	ESSC1721-1	82129
49 x 39 cm	ESSCS1915-1	103456	ESSC1915-1	82132
49 x 44 cm	ESSCS1917-1	103457	ESSC1917-1	82131
49 x 49 cm	ESSCS1919-1	103458	ESSC1919-1	82130
49 x 53 cm	ESSCS1921-1	103459	ESSC1921-1	82133
53 x 39 cm	ESSCS2115-1	103460	ESSC2115-1	82134
53 x 44 cm	ESSCS2117-1	103461	ESSC2117-1	82135
53 x 49 cm	ESSCS2119-1	103462	ESSC2119-1	82136
53 x 53 cm	ESSCS2121-1	103463	ESSC2121-1	82137

## Tilbehør og reservedele



### Inkontinensbetræk

Formsyet og strækbart i 4 retninger.  
Materiale: Vandtæt og åndbart stof på top og sider. Antiskrid på undersiden.

Varenr. for betræk til Standard Air 5 cm:  
ESICC2(+de første 4 tal i varenr. for puden)  
Varenr. for betræk til Standard Air 10 cm:  
ESICC4(+de første 4 tal i varenr. for puden)



### Star pumpe

(Reservedel)

Varenr. ESHP



### Standardbetræk

Formsyet og strækbart i 4 retninger.  
Materiale: lycra, antiskrid på undersiden.  
(Reservedel)

Varenr. for betræk til Standard Air 5 cm:  
ESFC2(+de første 4 tal i varenr. for puden)  
Varenr. for betræk til Standard Air 10 cm:  
ESFC4(+de første 4 tal i varenr. for puden)



### Reparationskit

(Reservedel)

Varenr. ESRK



# Luftpude - Hvordan og hvorfor

## Hvorfor vælge en Star-luftcellepude?


- Star-puder sikrer det højeste niveau af forebyggelse og behandling af tryksår, for alle tryksårskategorier.
- Jo højere celler, jo bedre ydeevne.
- Star-puder er også berømte for deres stabiliserings- og positioneringsegenskaber.
- Star-puder forbedrer brugerens siddetolerance over tid.



## Valg af størrelse

**Bredde:** Hvis pudestørrelsen ikke passer præcis til kørestolens bredde, anbefaler vi en pude, der er en størrelse større frem for en, der er en størrelse mindre.


**Dybde:** På en kørestol med regulerbar stroppryg er det vigtigt at måle sædedybden korrekt.

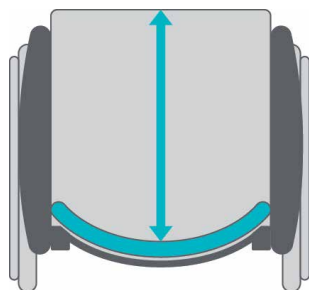

## Sådan justeres lufttrykket



- Pump puden op
- Placer brugeren på puden
- Luk luft ud, samtidig med, at du tjekker luftmængden i puden.

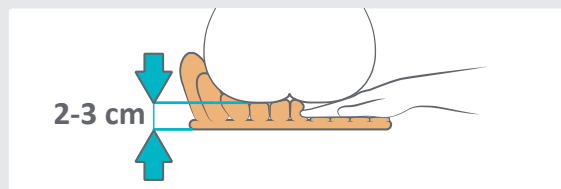

- Tjek med hånden; der skal være en afstand på 2-3 cm mellem pudens bund og brugerens bagdel (lavest placerede knoglefremspring).
- Når der er bækkenskævhed, skal den laveste side altid tjekkes først.
- Hvis det er nødvendigt, kan der pumpes mere luft i, mens brugeren sidder på puden.
- Med højere celler vil brugeren synke dybere ned i puden, og trykfordelingen øges.

## Sådan rengøres og vedligeholdes Star puder

### Brugervægt

Ingen begrænsninger, så længe puden har den korrekte størrelse i forhold til brugeren.

### Pudemateriale

Latexfrit neopren i høj kvalitet.  
Flammebestandig, elastisk.

### Standardbetræk

Overside og sider: 83% Ripstop-nylon (ikke-absorberende stof, der bidrager til fugtfordampning), 17% Lycra.  
Underside: Vævet polyesterstof med coating af polyvinylblanding. (Antimikrobiel behandling for at hæmme udvikling af lugt samt bakterier, mug og jordslåethed. Flammebestandig).

### Inkontinensbetræk:

Overside og sider: 78% nylon, 22% elastan, dækket af en polyuretanfilm.  
Underside: Vævet polyesterstof med coating af polyvinylblanding (se standardbetræk).

### Rengøring:

Betræk: Maskinvaskes ved max. 80°C, ingen blegemidler.  
Pude: Håndvaskes med sæbe, natron eller eddike. Kan også maskinvaskes. Find yderligere info og vejledning i særskilt dokument "Genbrugsanvisning".







# Etac Komfortpude

Anatomisk formet pude med justeringsmuligheder.

## Gode nedsynkningsegenskaber med glimrende omslutning


Etac Komfortpude yder stabilitet og omslutning for lår og bækken. Dette er en meget stor fordel for brugeren, der opnår en opret og afslappet siddestilling. Puden er anatomisk formet, med konturering til lårene fortil. For at mindske folder i betrækket, skabes konturen på pudens underside.

Puden er konstrueret med en fordybning bagtil og et blødt indlæg (memory-skum) for at aflaste sædebensknoglerne. Ønskes yderligere nedsynkning og omslutning, kan det indbyggede indlæg fjernes.

Betrækket er stræk- og vaskbart.




## Funktioner

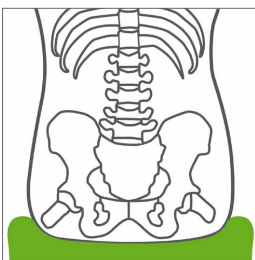

### Nedsynkning og omslutning

Brugeren kan synke ned i puden, som omslutter og støtter kroppens struktur på optimal vis.

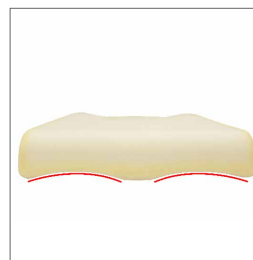

### Kontur til lårene

Konturen ved lårene skabes på pudens underside. Denne løsning holder betrækket udstrakt på oversiden og mindsker generende folder i stoffet.



### Tilpasningsmuligheder

Blød indsats af memory-skum kan fjernes for at opnå yderligere nedsynkning og omslutning.

### Vedligehold

Pudemateriale: Polyuretan (koldskum)

Betrækmateriale: Hygiejne/PU-belagt polyester og Anti slip

Vask betræk: 60°

Pudetykkelse: 8 cm fortil og 5 cm bagtil

Max. brugervægt: 135 kg.



## Bestilling Etac Komfortpude

Sædebredde	Ekstra kort (Sædedybde 42-46 cm)		Kort (Sædedybde 46-50 cm)		Lang (Sædedybde 52-56 cm)
	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.
37,5 cm hygiejnebetræk	28066-65SPC	111538	27755-65SPC	111545	-
40,0 cm hygiejnebetræk	28066-65	111589	27755-65	111593	27763-65
40,0 cm velourbetræk	-	-	27755-60	-	27763-60
42,5 cm hygiejnebetræk	28067-65SPC	111540	27756-65SPC	111546	-
45,0 cm hygiejnebetræk	28067-65	111591	27756-65	111594	27764-65
45,0 cm velourbetræk	-	-	27756-60	-	27764-60
47,5 cm hygiejnebetræk	28068-65SPC	111543	27757-65SPC	111547	-
50,0 cm hygiejnebetræk	28068-65	111592	27757-65	111595	27765-65
50,0 cm velourbetræk	-	-	27757-60	-	27765-60
52,5 cm hygiejnebetræk	-	-	-	-	-
55,0 cm hygiejnebetræk	28069-65	-	27758-65	-	27766-65
55,0 cm velourbetræk	-	-	27758-60	-	27766-60



*Prio med komfortpude og hygiejnebetræk.*



# Etac Standardpuder

Anatomisk formede sædepuder med velour- eller hygiejnebetræk.

## Velour

Behageligt mørkegråt velourbetræk.

Pudemateriale: Polyuretan (koldskum)

Betrækmateriale: Velour

Vask betræk: 60°

Pudetykkelse: 8 cm fortil og 6,5 cm bagtil

Pudelængde: 50 cm

**Mål på pude kun til Cross og Next (vist på foto):**

Pudetykkelse: 7 cm fortil og 4,5 cm bagtil

Pudelængde: 50 cm (kan nemt tilskæres for at mindske sædedybden).



## Hygiejne

Vandtæt mørkegråt hygiejnetekstil.

Pudemateriale: Polyuretan (koldskum)

Betrækmateriale: PU-belagt polyester

Vask betræk: 60°

Pudetykkelse: 8 cm fortil og 6,5 cm bagtil.

Pudelængde: Kort 50 cm (sædedybde 46-50 cm) og  
Lang 56 cm (sædedybde 52-56 cm).



## Tidy Hygiejne

Vandtæt mørkegråt hygiejnetekstil med svejsede sømme.  
Tidy Hygiejne er stærkere end "Hygiejne".

Pudemateriale: Polyuretan (koldskum)

Betrækmateriale: Dartex. Svejsede sømme og beskyttet lynlås

Vask betræk: 90°

Pudetykkelse: 8 cm fortil og 6,5 cm bagtil

Pudelængde: Kort 50 cm (sædedybde 46-50 cm) og  
Lang 56 cm (sædedybde 52-56 cm).

**Mål på pude kun til Cross og Next:**

Pudetykkelse: 7 cm fortil og 4,5 cm bagtil

Pudelængde: 34-54 cm



## Bestilling Etac Standardpuder

Sædebredde	Kort (Sædedybde 46-50 cm)			Lang (Sædedybde 52-56 cm)			Kun til Cross 5 og Next (Sædedybde 34-54 cm)	
	Velour	Hygiejne	Tidy Hygiejne	Velour	Hygiejne	Tidy Hygiejne	Velour	Tidy Hygiejne
35,0 cm	-	-	-	-	-	-	62230-60	63130-63
37,5 cm	-	-	-	-	-	-	62231-60	63131-63
40,0 cm	27751-60	27751-65	28055-65	27759-60	27759-65	28059-65	62232-60	63132-63
42,5 cm	-	-	-	-	-	-	62233-60	63133-63
45,0 cm	27752-60	27752-65	28056-65	27760-60	27760-65	28060-65	62234-60	63134-63
47,5 cm	-	-	-	-	-	-	62374-60	63135-63
50,0 cm	27753-60	27753-65	28057-65	27761-60	27761-65	28061-65	62266-60	63136-63
52,5 cm	-	-	-	-	-	-	62420-60	63137-63
55,0 cm	27754-60	27754-65	28058-65	27762-60	27762-65	8062-65	62421-60	63138-63
57,5-60 cm	-	-	-	-	-	-	62422-60	63139-63



*Fleksibel standardpude i velour til Cross 5 og Next: Åbn betrækket og tilskær puden i ønsket længde. Betrækket tilpasses den nye pudelængde, når det lukkes igen.*



Version 1 - 2020 · Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og udstyr til forflytning og patienthåndtering. Vores hjerte banker for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, deres familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og opdateret produktinformation på [www.etac.dk](http://www.etac.dk).

Etac A/S  
Egeskovvej 12, 8700 Horsens  
Tlf 79 68 58 33  
[info@etac.dk](mailto:info@etac.dk) - [www.etac.dk](http://www.etac.dk)

Etac showroom, Øst  
Handicaporganisationernes Hus  
Blekinge Boulevard 2  
2630 Taastrup

  
Creating Possibilities