

DEUTSCH

Wiederverwendung

Der Meerkat von R82 kann wiederverwendet werden. Bitte beachten Sie die Angaben zur Produktnutzungsdauer in der Gebrauchsanweisung. Die jeweils aktuelle Version der Gebrauchsanweisung finden Sie unter R82.org

Reinigung

Waschen

Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten.

Gestell mit pH-neutraler Mischung aus warmen Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel oder 70 prozentiger Desinfektionsmittellösung reinigen und anschließend trocknen lassen. Eine Liste geeigneter Reinigungsmittel finden Sie auf <http://www.r82.org/support/>

Der Bezug kann nach den Pflegehinweisen auf dem Waschetikett gewaschen werden.

Verwenden Sie für die Reinigung der Teile keinen Hochdruckreiniger.

Waschanleitung

Das Produkt kann bei 60 °C mit einem milden Reinigungsmittel in einer für medizinische Geräte geeigneten Teilwaschanlage gereinigt werden.

Vor der Reinigung alle Zubehörteile entfernen und separat trocknen.

Lösen Staub, Schmutz und Lebensmittelreste vor dem Waschen entfernen. Dabei besonders auf Räder und Bremsen achten.

Verwenden Sie die Trocknungsfunktion der Waschanlage, um das Produkt zu trocknen.

Die Teilwaschanlage sollte auf die folgenden Einstellungen eingestellt werden:

- Wassertemperatur: 60 ° C
- Waschkdauer: 5 Minuten
- Trockentemperatur: 50 ° C
- Trockendauer: 10 Minuten
- Das Produkt vor Wiedereinsatz bitte vollständig trocknen lassen

Überprüfung auf defekte oder verschlissene Komponenten

Verbogene, gerissene oder deformierte Teile müssen ersetzt werden. Verschlissene oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionierende Teile sollten ersetzt werden. Kleinere Beschädigungen an lackierten Oberflächen können mit einem Lackstift behoben werden.

Werden andere als Original-R82 Ersatzteile oder Anbauteile verwendet muss die CE-Kennzeichnung entfernt werden. Original-R82 Teile wurden zusammen mit dem Produkt für die bestimmungsgemäße Verwendung getestet und gesetzlichen Prüfverfahren unterzogen.

Kontrolle

Die folgenden Funktionen müssen gemäß Verwendungszweck kontrolliert und eingestellt werden.

Alle Kontrollen und Einstellungen müssen nach den Vorgaben in der Gebrauchsanweisung erfolgen:


- A. Vorrichtungen und Schnallen auf Verschleiss prüfen
- B. Die Rollen auf reibungslosen Lauf und dass alle Radsperr-/bremsen leicht aktiviert werden können.
- C. Dass Muttern und Schrauben am Produkt angezogen sind.
- D. Das Produkt auf Risse, verschlissene Teile oder defekte prüfen
- E. Stellen Sie sicher, dass Gebrauchsanweisung und alle Etiketten vorhanden und intakt sind

Beachten Sie, dass die Produktlebensdauer begrenzt ist, vor allem wenn das Produkt für die Nutzung über einen längeren Zeitraum verschrieben wird oder ein Nutzerwechsel stattfindet.

Entsorgung

Am Ende des Produktlebenszyklus sollte das Produkt nach den einzelnen Materialien getrennt ordnungsgemäß dem Recycling zugeführt oder entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich für eine genaue Beschreibung der einzelnen Materialien an Ihren Händler vor Ort. Für Informationen über die Möglichkeiten einer umweltfreundlichen Entsorgung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

DEUTSCH

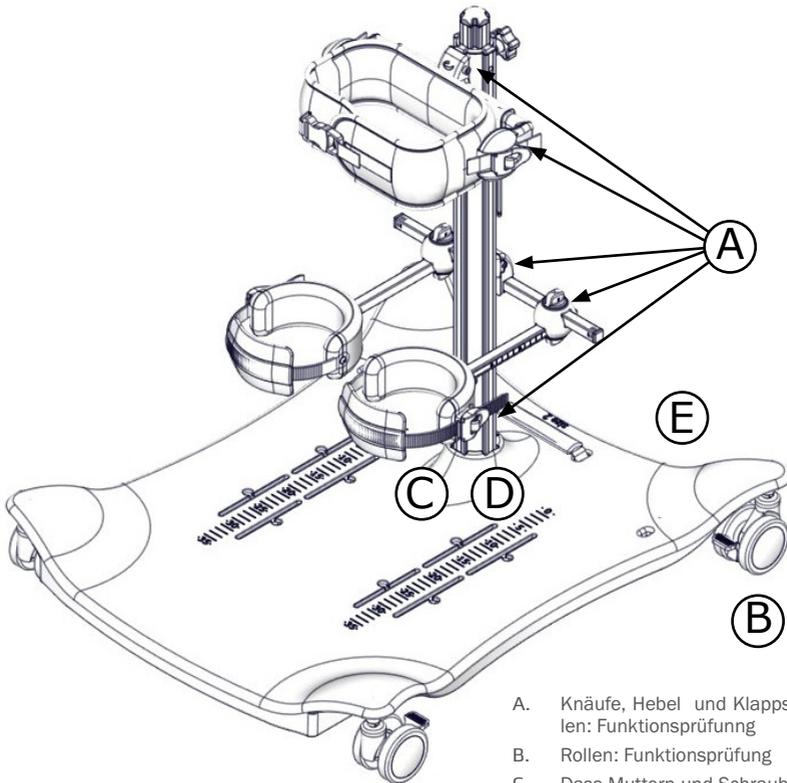

- A. Knäufe, Hebel und Klappschnallen: Funktionsprüfung
- B. Rollen: Funktionsprüfung
- C. Dass Muttern und Schrauben am Produkt angezogen : Festziehen
- D. Produkt: Risse, defekte oder verschlissene Teile: Sichtprüfung
- E. Gebrauchsanweisung und alle Etiketten vorhanden und intakt

nothing compares to a smile!



R82 A/S

Parallevej 3
8751 Gedved
Denmark
Tel +45 79 68 58 88
Fax +45 75 66 51 92
R82@R82.com
R82.org
facebook.com/R82global

Supplier for:
Rest of the world

R82 UK Ltd.

England
Tel. +44 (0)121 561 2222
Fax +44 (0)121 559 5437
R82uk@R82.com
R82.co.uk
facebook.com/R82UK

Supplier for:
United Kingdom, Ireland

R82 GmbH

Germany
Tel +49 (0)6132 710 70
Fax +49 (0)6132 710 710
R82de@R82.com
R82.de
facebook.com/R82.de

Supplier for:
Germany, Switzerland, Austria

R82 Nederland B.V.

The Netherlands
Tel +31 (0)513 68 16 86
Fax +31 (0)513 68 19 84
R82nl@R82.com
R82.nl
R82.be

Supplier for:
The Netherlands, Belgium

R82 Inc.

USA
Tel +1 800 336 7684
Fax +1 704 882 0751
us.info@R82.com
R82.com
facebook.com/R82Inc

Supplier for:
USA, Canada

R82 au Pty Limited

Australia
Tel +61 (02) 8213 6666
Fax +61 (02) 8213 6655
R82.com.au
facebook.com/R82Australia

Find your local dealer

R82.org

DISTRIBUTOR: